

Nome Técnico: Sistema de fixação rígida de placas especiais para osteossíntese

Nome Comercial: Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5

Registro ANVISA nº. 81118460016

Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como a relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

O **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** tem como indicação a fixação em ossos fraturados com o objetivo de proporcionar fixação dos ossos do pé. São compostos por placas e parafusos. As placas possuem orifícios para introdução dos parafusos. Este sistema admite simultaneamente parafusos de pequenos e mini fragmento conforme previsto no item 1.5, d6 da instrução normativa no- 1, de 2 de março de 2009.

A matéria-prima utilizada na fabricação dos modelos comerciais que compõe este sistema, estão especificados nas tabelas 1 e 2.

O acabamento superficial do produto médico é obtido através do processo de lixamento e polimento mecânico.



O tratamento superficial empregado é obtido através do processo de eletro coloração.

O **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** apresentam-se nos modelos e dimensões descritos abaixo, que permitem ao profissional escolher o modelo mais adequado a cada situação.

TABELA DE CÓDIGOS E DESCRIÇÕES


Tabela 1: Relação de Modelos Comerciais – Placas que compõe o **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5**

Instrução de Uso

Código	Descrição	Espessura	Material	Compatibilidade de parafusos	Indicação de uso	Imagem
TI003.5000.000	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM SEM PASSO	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5000.001	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM PASSO 01,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5000.002	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM PASSO 02,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5000.003	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM PASSO 03,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5000.004	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM PASSO 04,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5000.005	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM PASSO 05,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5000.006	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM PASSO 06,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5000.007	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM PASSO 07,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5000.008	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM PASSO 08,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5000.009	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM PASSO 09,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5000.010	PLACA LAPIDUS BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM PASSO 10,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.000	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL SEM PASSO	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.001	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 1,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.002	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 2,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.003	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 3,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.004	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 4,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.005	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 5,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.006	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL	1,5mm	Titânio liga	TI001.0035.0XX /	Consolidação de fraturas dos ossos	

Instrução de Uso

	PASSO 6,0MM		ASTM F136	TI002.0035.0XX	da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.007	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 7,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.008	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 8,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.009	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 9,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5100.010	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 10,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.000	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL SEM PASSO 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.001	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 1,0MM 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.002	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 2,0MM 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.003	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 3,0MM 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.004	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 4,0MM 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.005	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 5,0MM 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.006	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 6,0MM 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.007	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 7,0MM 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.008	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 8,0MM 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.009	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 9,0MM 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.5200.010	PLACA SIGMA LPD 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PASSO 10,0MM 3F	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.6000.001	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM ESPAÇADOR 1,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.6000.002	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM ESPAÇADOR 2,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	
TI003.6000.003	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM ESPAÇADOR 3,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé	

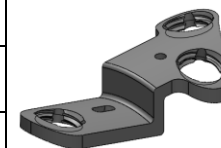

Instrução de Uso

TI003.6000.004	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM ESPAÇADOR 4,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6000.005	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM ESPAÇADOR 5,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6000.006	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM ESPAÇADOR 6,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6000.007	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM ESPAÇADOR 7,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6000.008	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM COM ESPAÇADOR 8,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6000.100	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM SEM ESPAÇADOR PEQUENA	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6000.200	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM SEM ESPAÇADOR MÉDIA	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6000.300	PLACA TIPO CUNHA BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM SEM ESPAÇADOR GRANDE	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6100.001	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL ESPAÇADOR 1,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6100.002	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL ESPAÇADOR 2,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6100.003	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL ESPAÇADOR 3,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6100.004	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL ESPAÇADOR 4,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6100.005	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL ESPAÇADOR 5,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6100.006	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL ESPAÇADOR 6,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6100.007	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL ESPAÇADOR 7,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6100.008	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL ESPAÇADOR 8,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6100.100	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL PEQUENA	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6100.200	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL MÉDIA	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé



Instrução de Uso

TI003.6100.300	PLACA SIGMA TCP 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL GRANDE	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé		
TI003.7000.001	PLACA DE RECONSTRUÇÃO BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM 06 FUROS X 37,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral		
TI003.7000.002	PLACA DE RECONSTRUÇÃO BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM 08 FUROS X 50,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral		
TI003.7000.003	PLACA DE RECONSTRUÇÃO BLOQUEADA AV SISTEMA 3,5MM 14 FUROS X 66,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral		
TI003.7100.001	PLACA SIGMA RCT 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL 06 F X 37,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral		
TI003.7100.002	PLACA SIGMA RCT 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL 08 F X 50,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral		
TI003.7100.003	PLACA SIGMA RCT 3,5 ÂNGULO VARIÁVEL 14 F X 66,0MM	1,5mm	Titânio liga ASTM F136	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral		
TI003.8000.158	PLACA PARA CALCÂNEO, PEQUENA, DIREITA, 58,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo		
TI003.8000.164	PLACA PARA CALCÂNEO, MÉDIA, DIREITA, 64,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo		
TI003.8000.170	PLACA PARA CALCÂNEO, GRANDE, DIREITA, 70,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo		
TI003.8000.258	PLACA PARA CALCÂNEO, PEQUENA, ESQUERDA, 58,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo		
TI003.8000.264	PLACA PARA CALCÂNEO, MÉDIA, ESQUERDA, 64,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo		
TI003.8000.270	PLACA PARA CALCÂNEO, GRANDE, ESQUERDA, 70,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo		
TI003.8010.140	PLACA PARA CALCÂNEO ANTERO LATERAL, CURTA, DIREITA, 40,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX /	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo		

Instrução de Uso

				TI002.1027.0XX		
TI003.8010.156	PLACA PARA CALCÂNEO ANTERO LATERAL, LONGA, DIREITA, 56,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.8010.240	PLACA PARA CALCÂNEO ANTERO LATERAL, CURTA, ESQUERDA, 40,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.8010.256	PLACA PARA CALCÂNEO ANTERO LATERAL, LONGA, ESQUERDA, 56,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.003	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 3,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.004	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 4,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.005	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 5,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.006	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 6,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.007	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 7,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.008	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 8,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.009	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 9,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.010	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA	1,6mm	Titânio puro	TI001.0035.0XX /	Consolidação de fraturas dos ossos	

Instrução de Uso

	DE CALCÂNEO COM PASSO 10,0MM		ASTM F67 grau 2	TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	do calcâneo	
TI003.9000.011	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 11,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.012	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 12,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.013	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 13,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.014	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 14,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.015	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 15,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.016	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 16,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.017	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 17,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9000.018	PLACA PARA FIXAÇÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 18,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9001.003	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 3,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9001.004	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 4,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	

Instrução de Uso

TI003.9001.005	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 5,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.9001.006	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 6,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.9001.007	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 7,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.9001.008	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 8,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.9001.009	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 9,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.9001.010	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 10,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.9001.011	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 11,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.9001.012	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 12,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.9001.013	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 13,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.9001.014	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 14,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.9001.015	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 15,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX /	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo


Instrução de Uso


				TI002.1027.0XX		
TI003.9001.016	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 16,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9001.017	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 17,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9001.018	PLACA PARA COMPRESSÃO DE OSTEOTOMIA DE CALCÂNEO COM PASSO 18,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo	
TI003.9020.320	PLACA DE COMPRESSÃO T, 03 FUROS, 20,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9020.325	PLACA DE COMPRESSÃO T, 03 FUROS, 25,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9020.330	PLACA DE COMPRESSÃO T, 03 FUROS, 30,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9020.420	PLACA DE COMPRESSÃO T, 04 FUROS, 20,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9020.425	PLACA DE COMPRESSÃO T, 04 FUROS, 25,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9020.430	PLACA DE COMPRESSÃO T, 04 FUROS, 30,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9020.520	PLACA DE COMPRESSÃO T, 05 FUROS, 20,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9020.525	PLACA DE COMPRESSÃO T, 05 FUROS,	1,6mm	Titânio puro	TI001.0035.0XX /	Consolidação de fraturas dos ossos	

Instrução de Uso


	25,0MM		ASTM F67 grau 2	TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	do Pé	
TI003.9020.530	PLACA DE COMPRESSÃO T, 05 FUROS, 30,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9030.415	PLACA DE COMPRESSÃO H, 04 FUROS, 15,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9030.420	PLACA DE COMPRESSÃO H, 04 FUROS, 20,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9030.425	PLACA DE COMPRESSÃO H, 04 FUROS, 25,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9030.430	PLACA DE COMPRESSÃO H, 04 FUROS, 30,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9040.416	PLACA DE COMPRESSÃO U, 04 FUROS, 16,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9040.419	PLACA DE COMPRESSÃO U, 04 FUROS, 19,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	
TI003.9040.422	PLACA DE COMPRESSÃO U, 04 FUROS, 22,0MM	1,6mm	Titânio puro ASTM F67 grau 2	TI001.0035.0XX / TI002.0035.0XX / TI001.1027.0XX / TI002.1027.0XX	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé	

Tabela 2: Relação de Modelos Comerciais – Parafusos que compõe o Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2.7 e 3,5

Código	Descrição	Características Técnicas	Material	Ilustração
TI001.0035.010	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 10,0mm	Diâmetro do Parafuso: 3,5 mm Diâmetro Interno: 2,4 mm Encaixe: T10 Broca: 2,4 mm	Titânio liga - ASTM F 136	
TI001.0035.011	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 11,0mm			
TI001.0035.012	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 12,0mm			
TI001.0035.013	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 13,0mm			
TI001.0035.014	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 14,0mm			
TI001.0035.015	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 15,0mm			
TI001.0035.016	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 16,0mm			
TI001.0035.017	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 17,0mm			
TI001.0035.018	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 18,0mm			
TI001.0035.019	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 19,0mm			
TI001.0035.020	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 20,0mm			
TI001.0035.021	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 21,0mm			
TI001.0035.022	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 22,0mm			
TI001.0035.023	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 23,0mm			
TI001.0035.024	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 24,0mm			
TI001.0035.025	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 25,0mm			
TI001.0035.026	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 26,0mm			
TI001.0035.027	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 27,0mm			
TI001.0035.028	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 28,0mm			
TI001.0035.029	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 29,0mm			
TI001.0035.030	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 30,0mm			
TI001.0035.031	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 31,0mm			
TI001.0035.032	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 32,0mm			
TI001.0035.033	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 33,0mm			
TI001.0035.034	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 34,0mm			
TI001.0035.035	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 35,0mm			
TI001.0035.036	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 36,0mm			
TI001.0035.037	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 37,0mm			
TI001.0035.038	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 38,0mm			
TI001.0035.039	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 39,0mm			
TI001.0035.040	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 40,0mm			
TI001.0035.041	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 41,0mm			
TI001.0035.042	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 42,0mm			
TI001.0035.043	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 43,0mm			
TI001.0035.044	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 44,0mm			
TI001.0035.045	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 45,0mm			


TI001.0035.046	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 46,0mm			
TI001.0035.047	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 47,0mm			
TI001.0035.048	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 48,0mm			
TI001.0035.049	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 49,0mm			
TI001.0035.050	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 50,0mm			
TI001.0035.051	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 51,0mm			
TI001.0035.052	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 52,0mm			
TI001.0035.053	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 53,0mm			
TI001.0035.054	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 54,0mm			
TI001.0035.055	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 55,0mm			
TI001.0035.056	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 56,0mm			
TI001.0035.057	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 57,0mm			
TI001.0035.058	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 58,0mm			
TI001.0035.059	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 59,0mm			
TI001.0035.060	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 60,0mm			
TI001.0035.061	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 61,0mm			
TI001.0035.062	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 62,0mm			
TI001.0035.063	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 63,0mm			
TI001.0035.064	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 64,0mm			
TI001.0035.065	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 65,0mm			
TI001.0035.066	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 66,0mm			
TI001.0035.067	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 67,0mm			
TI001.0035.068	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 68,0mm			
TI001.0035.069	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 69,0mm			
TI001.0035.070	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 70,0mm			
TI001.0035.071	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 71,0mm			
TI001.0035.072	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 72,0mm			
TI001.0035.073	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 73,0mm			
TI001.0035.074	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 74,0mm			
TI001.0035.075	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 75,0mm			
TI001.0035.076	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 76,0mm			
TI001.0035.077	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 77,0mm			
TI001.0035.078	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 78,0mm			
TI001.0035.079	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 79,0mm			
TI001.0035.080	Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm x 80,0mm			
TI002.0035.010	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 10,0mm	Diâmetro do Parafuso: 3,5 mm Diâmetro Interno: 2,4 mm Encaixe: T10 Broca: 2,4 mm	Titânio liga ASTM F 136	
TI002.0035.011	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 11,0mm			
TI002.0035.012	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 12,0mm			
TI002.0035.013	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 13,0mm			
TI002.0035.014	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 14,0mm			
TI002.0035.015	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 15,0mm			
TI002.0035.016	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 16,0mm			


TI002.0035.017	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 17,0mm			
TI002.0035.018	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 18,0mm			
TI002.0035.019	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 19,0mm			
TI002.0035.020	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 20,0mm			
TI002.0035.021	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 21,0mm			
TI002.0035.022	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 22,0mm			
TI002.0035.023	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 23,0mm			
TI002.0035.024	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 24,0mm			
TI002.0035.025	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 25,0mm			
TI002.0035.026	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 26,0mm			
TI002.0035.027	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 27,0mm			
TI002.0035.028	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 28,0mm			
TI002.0035.029	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 29,0mm			
TI002.0035.030	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 30,0mm			
TI002.0035.031	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 31,0mm			
TI002.0035.032	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 32,0mm			
TI002.0035.033	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 33,0mm			
TI002.0035.034	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 34,0mm			
TI002.0035.035	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 35,0mm			
TI002.0035.036	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 36,0mm			
TI002.0035.037	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 37,0mm			
TI002.0035.038	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 38,0mm			
TI002.0035.039	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 39,0mm			
TI002.0035.040	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 40,0mm			
TI002.0035.041	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 41,0mm			
TI002.0035.042	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 42,0mm			
TI002.0035.043	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 43,0mm			
TI002.0035.044	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 44,0mm			
TI002.0035.045	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 45,0mm			
TI002.0035.046	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 46,0mm			
TI002.0035.047	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 47,0mm			
TI002.0035.048	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 48,0mm			
TI002.0035.049	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 49,0mm			
TI002.0035.050	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 50,0mm			
TI002.0035.051	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 51,00mm			
TI002.0035.052	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 52,0mm			
TI002.0035.053	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 53,0mm			
TI002.0035.054	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 54,0mm			
TI002.0035.055	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 55,0mm			
TI002.0035.056	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 56,0mm			
TI002.0035.057	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 57,0mm			
TI002.0035.058	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 58,0mm			

TI002.0035.059	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 59,0mm			
TI002.0035.060	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 60,0mm			
TI002.0035.061	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 61,0mm			
TI002.0035.062	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 62,0mm			
TI002.0035.063	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 63,0mm			
TI002.0035.064	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 64,0mm			
TI002.0035.065	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 65,0mm			
TI002.0035.066	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 66,0mm			
TI002.0035.067	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 67,0mm			
TI002.0035.068	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 68,0mm			
TI002.0035.069	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 69,0mm			
TI002.0035.070	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 70,0mm			
TI002.0035.071	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 71,0mm			
TI002.0035.072	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 72,0mm			
TI002.0035.073	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 73,0mm			
TI002.0035.074	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 74,0mm			
TI002.0035.075	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 75,0mm			
TI002.0035.076	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 76,00mm			
TI002.0035.077	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 77,0mm			
TI002.0035.078	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 78,0mm			
TI002.0035.079	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 79,0mm			
TI002.0035.080	Parafuso Não Bloqueado Ø 3,5mm x 80,0mm			
TI001.1027.012	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 12,0mm			
TI001.1027.013	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 13,0mm			
TI001.1027.014	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 14,0mm			
TI001.1027.015	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 15,0mm			
TI001.1027.016	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 16,0mm			
TI001.1027.017	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 17,0mm			
TI001.1027.018	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 18,0mm			
TI001.1027.019	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 19,0mm			
TI001.1027.020	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 20,0mm			
TI001.1027.021	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 21,0mm			
TI001.1027.022	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 22,0mm			
TI001.1027.023	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 23,0mm			
TI001.1027.024	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 24,0mm			
TI001.1027.025	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 25,0mm			
TI001.1027.026	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 26,0mm			
TI001.1027.027	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 27,0mm			
TI001.1027.028	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 28,0mm			
TI001.1027.029	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 29,0mm			
TI001.1027.030	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 30,0mm			
TI001.1027.031	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 31,0mm			

Diâmetro do Parafuso: 2,7 mm
Diâmetro Interno: 1,9mm
Encaixe: T10
Broca: 2,00mm


Titânio liga ASTM F 136

TI001.1027.032	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 32,0mm			
TI001.1027.033	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 33,0mm			
TI001.1027.034	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 34,0mm			
TI001.1027.035	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 35,0mm			
TI001.1027.036	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 36,0mm			
TI001.1027.037	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 37,0mm			
TI001.1027.038	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 38,0mm			
TI001.1027.039	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 39,0mm			
TI001.1027.040	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 40,0mm			
TI001.1027.041	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 41,0mm			
TI001.1027.042	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 42,0mm			
TI001.1027.043	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 43,0mm			
TI001.1027.044	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 44,0mm			
TI001.1027.045	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 45,0mm			
TI001.1027.046	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 46,0mm			
TI001.1027.047	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 47,0mm			
TI001.1027.048	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 48,0mm			
TI001.1027.049	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 49,0mm			
TI001.1027.050	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 50,0mm			
TI001.1027.051	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 51,0mm			
TI001.1027.052	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 52,0mm			
TI001.1027.053	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 53,0mm			
TI001.1027.054	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 54,0mm			
TI001.1027.055	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 55,0mm			
TI001.1027.056	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 56,0mm			
TI001.1027.057	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 57,0mm			
TI001.1027.058	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 58,0mm			
TI001.1027.059	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 59,0mm			
TI001.1027.060	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm x 60,0mm			
TI002.1027.012	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 12,0 mm	Diâmetro do Parafuso: 2,7 mm Diâmetro Interno: 1,9mm Encaixe: T10 Broca: 2,00mm	Titânio liga ASTM F 136	
TI002.1027.013	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 13,0mm			
TI002.1027.014	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 14,0mm			
TI002.1027.015	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 15,0mm			
TI002.1027.016	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 16,0mm			
TI002.1027.017	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 17,0mm			
TI002.1027.018	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 18,0mm			
TI002.1027.019	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 19,0mm			
TI002.1027.020	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 20,0mm			
TI002.1027.021	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 21,0mm			
TI002.1027.022	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 22,0mm			
TI002.1027.023	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 23,0mm			
TI002.1027.024	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 24,0mm			

TI002.1027.025	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 25,0mm			
TI002.1027.026	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 26,0mm			
TI002.1027.027	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 27,0mm			
TI002.1027.028	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 28,0mm			
TI002.1027.029	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 29,0mm			
TI002.1027.030	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 30,0mm			
TI002.1027.031	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 31,0mm			
TI002.1027.032	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 32,0mm			
TI002.1027.033	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 33,0mm			
TI002.1027.034	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 34,0mm			
TI002.1027.035	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 35,0mm			
TI002.1027.036	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 36,0mm			
TI002.1027.037	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 37,0mm			
TI002.1027.038	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 38,0mm			
TI002.1027.039	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 39,0mm			
TI002.1027.040	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 40,0mm			
TI002.1027.041	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 41,0mm			
TI002.1027.042	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 42,0mm			
TI002.1027.043	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 43,0mm			
TI002.1027.044	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 44,0mm			
TI002.1027.045	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 45,0mm			
TI002.1027.046	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 46,0mm			
TI002.1027.047	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 47,0mm			
TI002.1027.048	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 48,0mm			
TI002.1027.049	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 49,0mm			
TI002.1027.050	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 50,0mm			
TI002.1027.051	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 51,0mm			
TI002.1027.052	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 52,0mm			
TI002.1027.053	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 53,0mm			
TI002.1027.054	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 54,0mm			
TI002.1027.055	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 55,0mm			
TI002.1027.056	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 56,0mm			
TI002.1027.057	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 57,0mm			
TI002.1027.058	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 58,0mm			
TI002.1027.059	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 59,0mm			
TI002.1027.060	Parafuso Não Bloqueado Ø 2,7mm x 60,0mm			
TI008.0035.010	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 10,0mm	Diâmetro do Parafuso: 3,5 mm Diâmetro Interno: 2,4 mm Encaixe: T10 Broca: 2,4 mm	Titânio liga ASTM F 136	
TI008.0035.011	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 11,0mm			
TI008.0035.012	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 12,0mm			
TI008.0035.013	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 13,0mm			
TI008.0035.014	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 14,0mm			
TI008.0035.015	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 15,0mm			

TI008.0035.016	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 16,0mm			
TI008.0035.017	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 17,0mm			
TI008.0035.018	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 18,0mm			
TI008.0035.019	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 19,0mm			
TI008.0035.020	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 20,0mm			
TI008.0035.021	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 21,0mm			
TI008.0035.022	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 22,0mm			
TI008.0035.023	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 23,0mm			
TI008.0035.024	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 24,0mm			
TI008.0035.025	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 25,0mm			
TI008.0035.026	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 26,0mm			
TI008.0035.027	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 27,0mm			
TI008.0035.028	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 28,0mm			
TI008.0035.029	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 29,0mm			
TI008.0035.030	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 30,0mm			
TI008.0035.031	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 31,0mm			
TI008.0035.032	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 32,0mm			
TI008.0035.033	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 33,0mm			
TI008.0035.034	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 34,0mm			
TI008.0035.035	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 35,0mm			
TI008.0035.036	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 36,0mm			
TI008.0035.037	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 37,0mm			
TI008.0035.038	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 38,0mm			
TI008.0035.039	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 39,0mm			
TI008.0035.040	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 40,0mm			
TI008.0035.041	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 41,0mm			
TI008.0035.042	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 42,0mm			
TI008.0035.043	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 43,0mm			
TI008.0035.044	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 44,0mm			
TI008.0035.045	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 45,0mm			
TI008.0035.046	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 46,0mm			
TI008.0035.047	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 47,0mm			
TI008.0035.048	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 48,0mm			
TI008.0035.049	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 49,0mm			
TI008.0035.050	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 50,0mm			
TI008.0035.051	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 51,0mm			
TI008.0035.052	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 52,0mm			
TI008.0035.053	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 53,0mm			
TI008.0035.054	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 54,0mm			
TI008.0035.055	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 55,0mm			
TI008.0035.056	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 56,0mm			
TI008.0035.057	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 57,0mm			

TI008.0035.058	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 58,0mm			
TI008.0035.059	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 59,0mm			
TI008.0035.060	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 60,0mm			
TI008.0035.061	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 61,0mm			
TI008.0035.062	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 62,0mm			
TI008.0035.063	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 63,0mm			
TI008.0035.064	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 64,0mm			
TI008.0035.065	Parafuso para Calcâneo o Ø 3,5mm x 65,0mm			
TI008.0035.066	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 66,0mm			
TI008.0035.067	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 67,0mm			
TI008.0035.068	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 68,0mm			
TI008.0035.069	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 69,0mm			
TI008.0035.070	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 70,0mm			
TI008.0035.071	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 71,0mm			
TI008.0035.072	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 72,0mm			
TI008.0035.073	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 73,0mm			
TI008.0035.074	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 74,0mm			
TI008.0035.075	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 75,0mm			
TI008.0035.076	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 76,0mm			
TI008.0035.077	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 77,0mm			
TI008.0035.078	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 78,0mm			
TI008.0035.079	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 79,0mm			
TI008.0035.080	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 80,0mm			
TI008.0035.081	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 81,0mm			
TI008.0035.082	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 82,0mm			
TI008.0035.083	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 83,0mm			
TI008.0035.084	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 84,0mm			
TI008.0035.085	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 85,0mm			
TI008.0035.086	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 86,0mm			
TI008.0035.087	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 87,0mm			
TI008.0035.088	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 88,0mm			
TI008.0035.089	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 89,0mm			
TI008.0035.090	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 90,0mm			
TI008.0035.091	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 91,0mm			
TI008.0035.092	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 92,0mm			
TI008.0035.093	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 93,0mm			
TI008.0035.094	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 94,0mm			
TI008.0035.095	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 95,0mm			
TI008.0035.096	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 96,0mm			
TI008.0035.097	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 97,0mm			
TI008.0035.098	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 98,0mm			
TI008.0035.099	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 99,0mm			

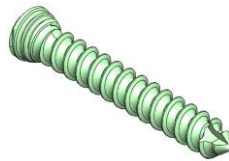TI008.0035.100	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 100,0mm			
TI008.0035.101	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 101,0mm			
TI008.0035.102	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 102,0mm			
TI008.0035.103	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 103,0mm			
TI008.0035.104	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 104,0mm			
TI008.0035.105	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 105,0mm			
TI008.0035.106	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 106,0mm			
TI008.0035.107	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 107,0mm			
TI008.0035.108	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 108,0mm			
TI008.0035.109	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 109,0mm			
TI008.0035.110	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 110,0mm			
TI008.0035.111	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 111,0mm			
TI008.0035.112	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 112,0mm			
TI008.0035.113	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 113,0mm			
TI008.0035.114	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 114,0mm			
TI008.0035.115	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 115,0mm			
TI008.0035.116	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 116,0mm			
TI008.0035.117	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 117,0mm			
TI008.0035.118	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 118,0mm			
TI008.0035.119	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 119,0mm			
TI008.0035.120	Parafuso para Calcâneo Ø 3,5mm x 120,0mm			
TI001.2035.010	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 10MM			
TI001.2035.011	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 11MM			
TI001.2035.012	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 12MM			
TI001.2035.013	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 13MM			
TI001.2035.014	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 14MM			
TI001.2035.015	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 15MM			
TI001.2035.016	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 16MM			
TI001.2035.017	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 17MM			
TI001.2035.018	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 18MM			
TI001.2035.019	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 19MM			
TI001.2035.020	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 20MM			
TI001.2035.021	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 21MM			
TI001.2035.022	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 22MM			
TI001.2035.023	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO			
		Diâmetro do Parafuso: 3,5 mm Diâmetro Interno: 2,0 mm Encaixe: T10 Broca: 2,0 mm	Titânio liga ASTM F 136	


	TX10 Ø3,5MM X 23MM			
TI001.2035.024	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 24MM			
TI001.2035.025	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 25MM			
TI001.2035.026	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 26MM			
TI001.2035.027	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 27MM			
TI001.2035.028	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 28MM			
TI001.2035.029	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 29MM			
TI001.2035.030	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 30MM			
TI001.2035.031	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 31MM			
TI001.2035.032	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 32MM			
TI001.2035.033	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 33MM			
TI001.2035.034	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 34MM			
TI001.2035.035	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 35MM			
TI001.2035.036	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 36MM			
TI001.2035.037	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 37MM			
TI001.2035.038	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 38MM			
TI001.2035.039	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 39MM			
TI001.2035.040	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 40MM			
TI001.2035.041	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 41MM			
TI001.2035.042	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 42MM			
TI001.2035.043	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 43MM			
TI001.2035.044	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 44MM			
TI001.2035.045	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 45MM			
TI001.2035.046	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 46MM			
TI001.2035.047	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 47MM			
TI001.2035.048	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 48MM			
TI001.2035.049	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 49MM			

TI001.2035.050	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 50MM			
TI001.2035.051	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 51MM			
TI001.2035.052	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 52MM			
TI001.2035.053	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 53MM			
TI001.2035.054	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 54MM			
TI001.2035.055	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 55MM			
TI001.2035.056	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 56MM			
TI001.2035.057	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 57MM			
TI001.2035.058	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 58MM			
TI001.2035.059	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 59MM			
TI001.2035.060	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 60MM			
TI001.2035.061	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 61MM			
TI001.2035.062	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 62MM			
TI001.2035.063	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 63MM			
TI001.2035.064	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 64MM			
TI001.2035.065	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 65MM			
TI001.2035.066	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 66MM			
TI001.2035.067	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 67MM			
TI001.2035.068	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 68MM			
TI001.2035.069	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 69MM			
TI001.2035.070	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 70MM			
TI001.2035.071	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 71MM			
TI001.2035.072	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 72MM			
TI001.2035.073	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 73MM			
TI001.2035.074	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 74MM			
TI001.2035.075	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 75MM			
TI001.2035.076	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO			

	TX10 Ø3,5MM X 76MM			
TI001.2035.077	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 77MM			
TI001.2035.078	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 78MM			
TI001.2035.079	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 79MM			
TI001.2035.080	PARAFUSO ESPONJOSO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 80MM			
TI002.2035.010	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 10MM			
TI002.2035.011	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 11MM			
TI002.2035.012	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 12MM			
TI002.2035.013	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 13MM			
TI002.2035.014	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 14MM			
TI002.2035.015	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 15MM			
TI002.2035.016	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 16MM			
TI002.2035.017	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 17MM			
TI002.2035.018	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 18MM			
TI002.2035.019	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 19MM			
TI002.2035.020	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 20MM			
TI002.2035.021	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 21MM			
TI002.2035.022	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 22MM			
TI002.2035.023	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 23MM			
TI002.2035.024	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 24MM			
TI002.2035.025	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 25MM			
TI002.2035.026	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 26MM			
TI002.2035.027	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 27MM			
TI002.2035.028	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 28MM			
TI002.2035.029	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 29MM			
TI002.2035.030	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 30MM			
TI002.2035.031	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 31MM			

Diâmetro do Parafuso: 3,5 mm
Diâmetro Interno: 2,0mm
Encaixe: T10
Broca: 2,0mm

Titânio liga ASTM F 136

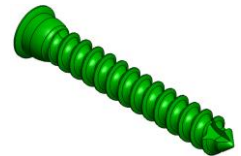

TI002.2035.032	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 32MM			
TI002.2035.033	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 33MM			
TI002.2035.034	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 34MM			
TI002.2035.035	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 35MM			
TI002.2035.036	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 36MM			
TI002.2035.037	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 37MM			
TI002.2035.038	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 38MM			
TI002.2035.039	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 39MM			
TI002.2035.040	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 40MM			
TI002.2035.041	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 41MM			
TI002.2035.042	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 42MM			
TI002.2035.043	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 43MM			
TI002.2035.044	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 44MM			
TI002.2035.045	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 45MM			
TI002.2035.046	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 46MM			
TI002.2035.047	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 47MM			
TI002.2035.048	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 48MM			
TI002.2035.049	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 49MM			
TI002.2035.050	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 50MM			
TI002.2035.051	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 51MM			
TI002.2035.052	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 52MM			
TI002.2035.053	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 53MM			
TI002.2035.054	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 54MM			
TI002.2035.055	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 55MM			
TI002.2035.056	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 56MM			
TI002.2035.057	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 57MM			
TI002.2035.058	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO			

	TX10 Ø3,5MM X 58MM			
TI002.2035.059	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 59MM			
TI002.2035.060	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 60MM			
TI002.2035.061	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 61MM			
TI002.2035.062	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 62MM			
TI002.2035.063	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 63MM			
TI002.2035.064	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 64MM			
TI002.2035.065	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 65MM			
TI002.2035.066	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 66MM			
TI002.2035.067	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 67MM			
TI002.2035.068	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 68MM			
TI002.2035.069	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 69MM			
TI002.2035.070	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 70MM			
TI002.2035.071	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 71MM			
TI002.2035.072	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 72MM			
TI002.2035.073	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 73MM			
TI002.2035.074	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 74MM			
TI002.2035.075	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 75MM			
TI002.2035.076	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 76MM			
TI002.2035.077	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 77MM			
TI002.2035.078	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 78MM			
TI002.2035.079	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 79MM			
TI002.2035.080	PARAFUSO ESPONJOSO NÃO BLOQUEADO TX10 Ø3,5MM X 80MM			

IMPORTANTE


Para o uso do **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** é necessário o uso de instrumentais específicos.

O Kit de Instrumental para o **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** está registrado na Anvisa sob o nº XXXXXXXXXXXX, **não fazendo parte deste processo de registro e não sendo parte integrante do produto.**

ACESSÓRIOS E COMPONENTES ANCILARES

O **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** não possui componentes ancilares.

O **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** possuem como acessório os produtos especificados abaixo:

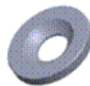Arruela			
Código	Diâmetro	Usado no	Foto
TI999.0035.010	Ø10,0mm (externo) e Ø 3,70 (diâmetro interno) - Titânio liga ASTM F-136.	Parafuso Bloqueado Ø 2,7mm e Parafuso Bloqueado Ø 3,5mm	

COMPOSIÇÃO

O **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** são manufaturadas em titânio puro conforme as especificações da norma ASTM F67 e titânio liga conforme a norma ASTM F136 conforme especificado nas tabelas 1 e 2. O titânio possui uma combinação de alta resistência mecânica, elevada resistência à corrosão eletroquímica e resposta biológica favorável, que fazem com que ele seja o metal mais utilizado como biomaterial. O titânio é um metal especial dentre os metais leves como alumínio e magnésio por sua elevada razão resistência/peso. Uma contribuição para a biocompatibilidade do titânio é a grande resistência à corrosão que é conferida por seu óxido, que forma uma película contínua e aderente. Uma outra contribuição é a sua alta constante dielétrica quando comparada com a de outros óxidos. O TiO_2 promove forças de Van der Waals maiores do que as de outros óxidos, apresentando, portanto, propriedades catalíticas em diversas reações químicas. Os implantes em titânio têm cerca de 45% menos densidade do que aqueles que contêm ferro e cobalto em suas composições, um importante fator relacionado ao conforto do paciente, principalmente em fraturas de ossos longos. O seu baixo módulo de elasticidade é outra vantagem, pois minimiza a proteção contrapressão, e isso é transferido ao osso. Essa importância relativa contra a pressão é aumentada à medida que o tamanho do implante aumenta. O titânio é extremamente insolúvel e atua como um material inerte que não interage com o organismo. Independente das ligas citadas é preciso que as combinações sejam de implantes da mesma marca, pois os mesmos foram projetados para tais combinações observando acabamento superficial e tratamento superficial e outros fatores exigidos em projetos que podem interferir nas combinações. Por isso implantes metálicos de diferentes fabricantes não são recomendados por motivos de incompatibilidade química, física, biológica e funcional.

COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

A compatibilidade dimensional do sistema está descrita na **tabela 1** deste documento.

Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico, segundo indicado pelo fabricante.

INDICAÇÕES DE USO

O Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5 tem como indicação a fixação em ossos fraturados com o objetivo de proporcionar fixação de fraturas do pé. Especificamente, cada placa possui a seguinte indicação:

Código	Descrição	Indicação
TI003.5000.000	Placa Lapidus Sistema 3,5mm sem passo	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.5000.001	Placa Lapidus Sistema 3,5mm com passo 1,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.5000.002	Placa Lapidus Sistema 3,5mm com passo 2,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.5000.003	Placa Lapidus Sistema 3,5mm com passo 3,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.5000.004	Placa Lapidus Sistema 3,5mm com passo 4,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.5000.005	Placa Lapidus Sistema 3,5mm com passo 5,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.5000.006	Placa Lapidus Sistema 3,5mm com passo 6,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.5000.007	Placa Lapidus Sistema 3,5mm com passo 7,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.5000.008	Placa Lapidus Sistema 3,5mm com passo 8,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.5000.009	Placa Lapidus Sistema 3,5mm com passo 9,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.5000.010	Placa Lapidus Sistema 3,5mm com passo 10,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do Lapidus e médio pé
TI003.6000.100	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm sem Espaçador Pequena	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.6000.200	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm sem Espaçador Média	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.6000.300	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm sem Espaçador Grande	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.6000.001	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm com Espaçador 1,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral

Instrução de Uso

TI003.6000.002	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm com Espaçador 2,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.6000.003	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm com Espaçador 3,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.6000.004	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm com Espaçador 4,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.6000.005	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm com Espaçador 5,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.6000.006	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm com Espaçador 6,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.6000.007	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm com Espaçador 7,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.6000.008	Placa Tipo Cunha Sistema 3,5mm com Espaçador 8,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.7000.001	Placa de Reconstrução Sistema 3,5mm 06 furos x 37,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.7000.002	Placa de Reconstrução Sistema 3,5mm 08 furos x 50,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.7000.003	Placa de Reconstrução Sistema 3,5mm 14 furos x 66,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos da região do retropé e coluna lateral
TI003.8000.258	Placa para Calcâneo, Pequena, Esquerda, 58,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.8000.164	Placa para Calcâneo, Média, Direita, 64,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.8000.264	Placa para Calcâneo, Média, Esquerda, 64,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.8000.170	Placa para Calcâneo, Grande, Direita, 70,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.8000.270	Placa para Calcâneo, Grande, Esquerda, 70,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.8010.140	Placa para Calcâneo Antero Lateral, Curta, Direita, 40,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.8010.240	Placa para Calcâneo Antero Lateral, Curta, Esquerda, 40,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.8010.156	Placa para Calcâneo Antero Lateral, Longa, Direita, 56,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do calcâneo
TI003.8010.256	Placa para Calcâneo Antero Lateral, Longa,	Consolidação de fraturas dos ossos do

	Esquerda, 56,0mm	calcâneo
TI003.9020.320	Placa de Compressão T, 03 Furos, 20,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9020.325	Placa de Compressão T, 03 Furos, 25,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9020.330	Placa de Compressão T, 03 Furos, 30,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9020.420	Placa de Compressão T, 04 Furos, 20,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9020.425	Placa de Compressão T, 04 Furos, 25,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9020.430	Placa de Compressão T, 04 Furos, 30,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9020.520	Placa de Compressão T, 05 Furos, 20,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9020.525	Placa de Compressão T, 05 Furos, 25,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9020.530	Placa de Compressão T, 05 Furos, 30,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9030.415	Placa de Compressão H, 04 Furos, 15,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9030.420	Placa de Compressão H, 04 Furos, 20,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9030.425	Placa de Compressão H, 04 Furos, 25,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9030.430	Placa de Compressão H, 04 Furos, 30,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9040.416	Placa de Compressão U, 04 Furos, 16,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9040.419	Placa de Compressão U, 04 Furos, 19,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé
TI003.9040.422	Placa de Compressão U, 04 Furos, 22,0mm	Consolidação de fraturas dos ossos do Pé

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim com seu armazenamento e transporte.

INSTRUÇÕES DE USO

- Atenção: implante fornecido **NÃO - ESTÉRIL – ESTERILIZAR** de acordo com as instruções recomendadas nessa instrução.
- As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.
- Manipular o **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** exclusivamente em ambientes adequados, com os devidos cuidados e somente por profissionais capacitados.
- O **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** deverá ser implantado de acordo com as exigências das técnicas cirúrgicas.

CONTRA INDICAÇÕES

As contra-indicações incluem, mas não estão limitadas à:

- Gravidez, a menos que uma fixação interna seja indicada para tratamento de uma fratura instável.

- Doenças mentais profundas ou pacientes não obedecem às instruções pós-operatórias.
- Infecção localizada na zona operatória ou infecção sistêmica que possa comprometer o sucesso do procedimento.
- Todos os pacientes que tenham uma cobertura tissular pobre na zona operada.
- Febre.
- Fenômenos Inflamatórios locais importantes.
- Alergia ou intolerância suspeita ou conhecida aos metais que compõem o sistema.
- Todas as outras condições médicas ou cirúrgicas que comprometam o processo de uma cirurgia de implante (presença de tumores malignos, metástase ou presença de anomalias congênitas graves).

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

**PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS EXPLANTADO. NÃO REUTILIZAR O PRODUTO.
PROIBIDO REPROCESSAR**

Os modelos que compõem o **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** não são indicados para uso isoladamente.

Nenhum implante pode resistir a um nível de atividade ou peso de um osso normal saudável se não for suportado por uma união óssea sólida. Se a cicatrização é demorada ou não ocorre, o implante pode eventualmente curvar e/ou quebrar devido a fadiga do material.

O respeito aos procedimentos pré-operatórios e pós-operatórios, o entendimento adequado da técnica cirúrgica, a seleção correta e posicionamento do implante são críticos para o sucesso da cirurgia.

A seleção correta do paciente e o seu acompanhamento são fatores que influenciam os resultados em particular: Fumo, obesidade (patológica ou não), alcoolismo, baixa qualidade do osso, deficiência muscular e/ou paralisia, tem sido fatores para aumentar significativamente a incidência da não união. Esta situação e as possíveis conseqüências devem ser explicadas a estes pacientes. A correta seleção do implante é extremamente importante. O tipo apropriado, forma e tamanho devem ser de acordo com o paciente. Estes dados são obtidos a partir do planejamento pré-operatório, visto que o tamanho e formato dos ossos humanos também colocam limitações no tamanho e resistência dos implantes. Todos os implantes metálicos são sujeitos a repetir o stress durante o uso, por isso o critério apropriado para seleção do paciente deve ser seguido; o posicionamento correto do implante e os cuidados apropriados no pós-operatório são essenciais para minimizar o stress do peso do implante.

- Cuidados devem ser tomados para evitar a colocação de um peso excessivo no implante, uma vez que isto pode aumentar os riscos de encurvamento, rachaduras e/ou fraturas do implante devido à fadiga do metal que eventualmente levará ao afrouxamento antes da união ser atingida. Isto por sua vez pode causar danos ou necessidade de uma remoção prematura do implante.

- **PRODUTO NÃO ESTÉRIL**

- Condições especiais de armazenamento: Conservar em local arejado, seco e ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada

Observação: Não devem ser utilizados componentes de implantes de fabricantes diferentes, **portanto recomendamos que os produtos tenham a mesma procedência.**

Data de fabricação, prazo de validade e lote do produto: VIDE RÓTULO.

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Recomendações de utilização gerais

- Todos os implantes devem ser utilizados com o formato original, exceto se o contrário for especificamente mencionado.
- Os implantes devem ser manipulados com cuidado, pois a ocorrência de riscos é suscetível de provocar micro trincas alterando a resistência mecânica e à corrosão.
- Os planejamentos pré-operatórios permitem determinar a dimensão correta dos implantes.
- Apenas a utilização de material de instrumentação específico para este implante garante a sua colocação de forma satisfatória.
- Caso seja necessária uma explantação, as condições de descontaminação e esterilização do instrumental deverão ser respeitadas.
- Os detritos resultantes da intervenção (embalagens, explantes...) deverão ser tratados como quaisquer outros detritos de origem médica pelo estabelecimento de cuidados da saúde.

Recomendações de utilização relacionadas com a técnica

- Os procedimentos cirúrgicos para preparação do leito ósseo devem ser adaptados às dimensões e às qualidades mecânicas do osso.

Efeitos secundários indesejáveis relacionados com a técnica de colocação

- Fraturas ósseas e falsos trajetos,
- Dores,
- Infecção no local da cirurgia,
- Hematomas,
- Lesões vasculares nervosas.

Efeitos secundários indesejáveis relacionados com a utilização do implante

- Infecção
- Deslocamento que pode provocar uma migração,
- Reações ósseas ao contato com o implante.

Planificação e precauções PRÉ-OPERATÓRIAS

- A correta seleção dos instrumentais é crítica para o sucesso da operação.
- Siga estritamente os protocolos cirúrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio dos implantes e / ou instrumentos para evitar ferimentos no paciente e ou no pessoal do centro cirúrgico.
- Alguns problemas podem surgir enquanto implantes e instrumentos são manuseados. Cheque cuidadosamente a integridade do implante: a superfície dos componentes não deve estar manchada, arranhada ou defeituosa.
- O critério usado para a seleção de paciente deve ser aquele descrito na seção “**INDICAÇÕES**”.
- Pacientes em condições e/ ou predisposições, tais como os listados na seção “**CONTRA INDICAÇÕES**”, devem ser evitados;
- O cirurgião deve estar perfeitamente familiarizado com os implantes e técnicas cirúrgicas e com a montagem dos componentes.

Precauções OPERATÓRIAS

- A correta seleção dos instrumentais é crítica para o sucesso da operação.
- Siga estritamente os protocolos cirúrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio dos implantes e / ou instrumentos para evitar ferimentos no paciente e ou no pessoal do centro cirúrgico.
- Alguns problemas podem surgir enquanto implantes e instrumentos são manuseados. Cheque cuidadosamente a integridade do implante: a superfície dos componentes não deve estar manchada, arranhada ou defeituosa.

Informações que devem ser dadas aos pacientes pelo cirurgião no PÓS-OPERATÓRIO

- O critério usado para a seleção de paciente deve ser aquele descrito na seção acima “**INDICAÇÕES**”
- Pacientes em condições e/ ou predisposições, tais como os listados na seção “**CONTRA-INDICAÇÕES**” acima, devem ser evitados;
- O cirurgião deve aconselhar os pacientes portadores de um implante a observarem certas regras de condução de uma vida saudável, e a salvaguardarem-se de quaisquer esforços abusivos. Os fatores susceptíveis de comprometerem o sucesso da implantação são:
 - Ausência de prevenção das infecções locais e genéricas,
 - Toxicomania e/ou tendência para o abuso de drogas e medicamentos,
 - Atividades físicas intensas ou movimentos repetitivos que exponham a prótese a cargas excessivas (trabalho físico penoso, etc).

- Incapacidade intelectual do paciente para compreender e cumprir as instruções do médico,
- O cirurgião deve estar perfeitamente familiarizado com os implantes e técnicas cirúrgicas e com a montagem dos componentes.

Orientações pós-operatórias e advertências aos pacientes pelos médicos e a colaboração do paciente para seguir as instruções são extremamente importantes:

- O paciente deve ser instruído sobre as suas limitações e ser orientado para dirigir suas atividades de acordo.
- O paciente deve estar ciente que o excesso de peso durante o período de reabilitação pós-operatória pode resultar em encurvamento, afrouxamento ou fratura.
- Uma ausência de consolidação óssea persistente resultará em uma carga excessiva que repetidamente se aplicará ao implante, eventualmente conduzindo ao encurvamento, afrouxamento ou até mesmo fratura do dispositivo. No caso de uma ausência de consolidação persistente, ou se os componentes começarem a afrouxar, encurvar, e/ou quebrarem, o dispositivo deve ser revisado e/ou removido sem demora, antes que sérios danos ocorram.
- Todo material de síntese, seja ele uma placa, parafuso ou mesmo fios e hastes são implantados para dar uma fixação temporária na fratura. A finalidade dos implantes é manter a fratura estável por um período de tempo em que a consolidação óssea se forma.
- Esta consolidação óssea demora em média de 3 a 6 meses dependendo da fratura, do local e do membro fraturado. Portanto, é fundamental que o paciente siga as orientações do médico tomando os devidos cuidados com a carga suportada na região durante os primeiros meses. Os médicos também devem acompanhar a região fraturada através de RX e exames clínicos para avaliar a formação de calo ósseo. Caso esse não tenha se formado durante o período de 6 a 7 meses, o médico deve intervir na região, colocando outro implante ou mesmo enxerto ósseo, porque nenhum material de implante suporta muito tempo micro movimentos. Se o médico não proceder dessa forma, pode ocorrer uma quebra por fadiga do implante.

Cirurgias de Revisão e Remoção

O paciente deve ser informado sobre a necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de soltura dos componentes.

Os instrumentais cirúrgicos (ou ferramentas) necessários para a implantação ou remoção dos modelos de placas e parafusos estão identificados por nome e código. E devem ser, necessariamente, da marca TECHIMPORT, de modo a evitar possíveis incompatibilidades dimensionais de projeto.

LIMITES DE MOLDAGEM DO IMPLANTE.

Destacamos que é de extrema importância o manuseio correto dos implantes.

Durante o manuseio dos implantes deve ser evitado arranhões ou entalhes nos implantes, moldagem inversa pois esses defeitos são concentradores de tensão e podem ser sítios de nucleação de trincas e diminuir a resistência à corrosão, podendo resultar em fratura do implante ou fadiga.

Carga Suportada

Os implantes utilizados em cirurgia servem como tutor e ajudam a promover um processo normal de consolidação. Esses não têm função de substituir estruturas ósseas ou de sustentar indefinidamente as tensões provocadas nas regiões com fraturas não consolidadas.

Dessa forma, o cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o suporte físico adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante.

Características do Suporte Ósseo Adequado para Implantação

As características do suporte ósseo adequado estão relacionadas à experiência do profissional que ao optar pela utilização do Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2.7 e 3,5 deverá realizar a análise clínica do paciente, observando as restrições impostas no item Contraindicações constante nestas Instruções de Uso.

TÉCNICA CIRÚRGICA

Instruções de Uso

- Acesso

Após mobilizar os ossos sesamóides laterais, é feita uma incisão na base da falange proximal (figura 1). A seguir, é feita uma incisão na cápsula articular da pseudoexostose.

Inicialmente, não há operação distal ao osso.

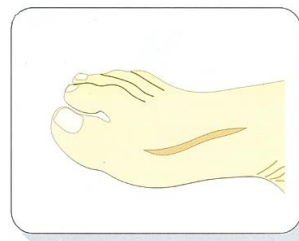


Fig. 1

- Osteotomia

Isto é seguido por uma osteotomia aproximadamente 10 mm distalmente à articulação tarsometatarsal. A cortical lateral não é cortada neste processo (figura 2).

Nota: A cortical lateral determina a direção da correção.

Lateral exato → correção horizontal.

Lateral plantar → plantarização simultânea.

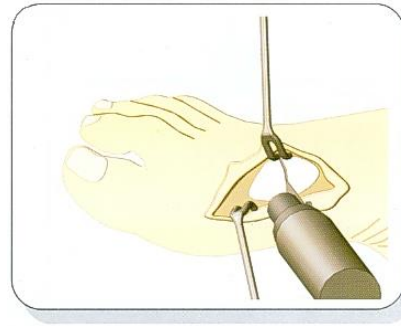


Fig. 2

Se o 1º metatarso for longo demais, uma osteotomia de fechamento pode ser realizada alternativamente.

Para isso, o 1º metatarso pode ser completamente cortado perto da base e uma cunha basal lateral removida do corte da serra. O reposicionamento é seguido de osteossíntese com a Placa tipo cunha com e sem espaçador. Ela é colocada na posição plantar média. A vantagem disso é que a dorsalização do 1º metatarso pode ser evitada de maneira confiável.

Ao contrário de uma placa dorsolateral, o posicionamento plantar médio comprime a osteotomia quando é colocado peso no pé.

- Abrindo a Osteotomia

A seguir, a osteotomia é cuidadosa e completamente aberta com pequenos cinzéis (figura 3).


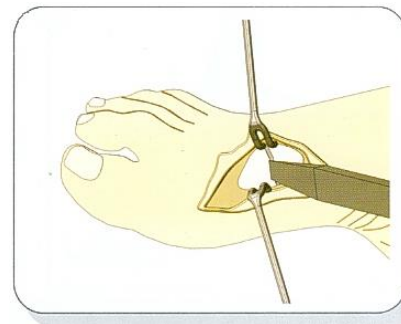


Fig. 3

Inserção da Placa

- Inserção da Placa

Agora a placa é inserida com a base correspondente (figura 4). Como regra, a placa é estabilizada sem qualquer fixação adicional. Se necessário, a placa pode ser apertada temporariamente com um fio guia (figura 4).

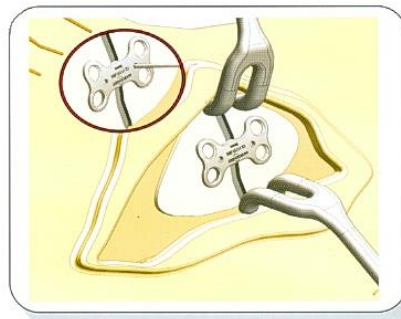

Nota: Os orifícios para os parafusos devem estar alinhados, de modo que a placa fique plana no osso.

- Perfurando para o primeiro parafuso angular estável

A seguir, o guia (TI004.0027.004) é aparafusado na placa (figura 5). Então é feito um teste da colocação exata da placa com a escopia.

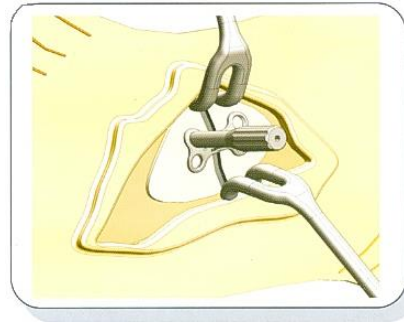


Fig. 5

A seguir, a broca de perfuração de $\varnothing 2,0$ mm (TI004.0027.008) é usada para perfurar o osso bicorticalmente através do guia (guia (TI004.0027.004) (figura 6).

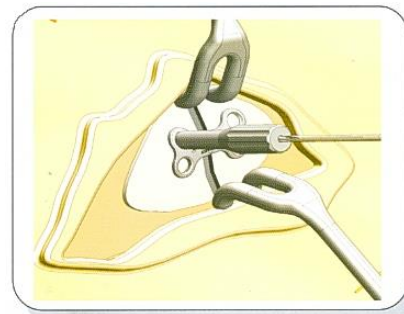


Fig. 6

- Determinação do Comprimento do Parafuso

O comprimento do parafuso é medido usando a ferramenta de medição de comprimento de parafusos. Neste processo, o dispositivo de medição é colocado diretamente na placa (figura 7).

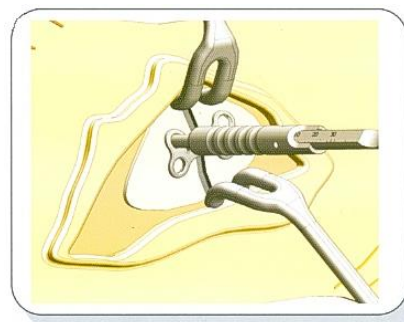


Fig. 6

- Inserindo o Primeiro Parafuso Bloqueado
Agora o primeiro Parafuso Bloqueado é inserido, usando a chave de parafusos (TI004.0027.007) e o pegador (figura 8).

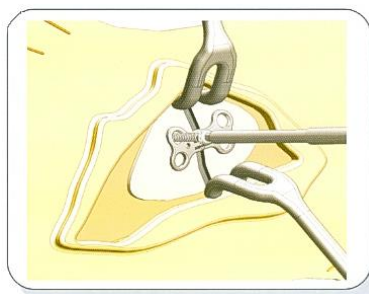


Fig. 8

Inserindo o Segundo Parafuso Bloqueado
Antes que o segundo parafuso bloqueado possa ser inserido, os itens anteriores devem ser repetidos para o segundo orifício de perfuração. A seguir, o segundo Parafuso Bloqueado é aparafusado (figura 9).

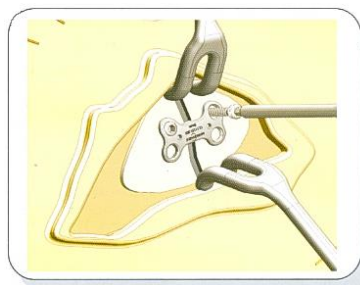


Fig. 9

Inserção da Placa

- Inserindo os Parafusos Restantes
Os parafusos restantes são inseridos na placa (figura 10).
A seguir, a pseudoexostose é ressectada.

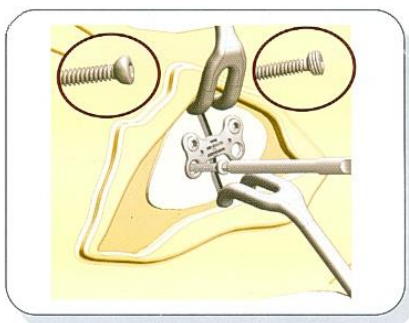


Fig. 10

- Preenchendo com Esponjoso
Quando todos os parafusos estiverem apertados, o espaço da osteotomia é preenchido com lascas esponjosas (figura 11) obtidas da pseudoexostose. O uso de materiais de substituição esponjosa ou enxertos autólogos é possível, mas a experiência demonstrou que não é necessário.



Fig. 11

Se necessário, procedimentos distais podem

ser realizados no tecido mole e no osso nesta ocasião, para assegurar uma junta centralizada.

- Fim da Operação e Tratamento Pós-Operatório

Finalmente é realizada uma capsuloplastia medial. Um curativo com bandagem é feito na lesão ao ajustar-se a compressão (figura 12).

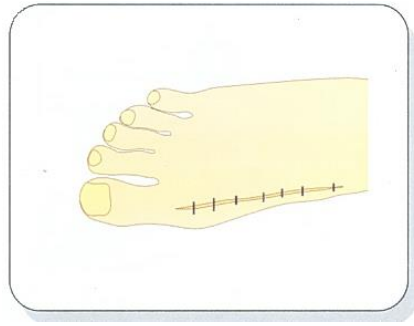


Fig. 12

Cuidados Subsequentes:

- Até que o osso esteja consolidado, um sapato com alívio para a planta deve ser usado por 6 – 8 semanas.
- Mobilização da articulação principal do hálux com uma bandagem Kramer.
- Enfaixar os dedos por 6 semanas.
- Usar uma tala noturna de hálux por 3 meses.

Condições que podem comprometer o sucesso da cirurgia

- Osteoporose severa
- Deformidade severa
- Tumor ósseo local
- Doenças sistêmicas ou distúrbios metabólicos
- História de doenças infecciosas
- Dependência e / ou abuso a drogas
- Obesidade
- Atividade física excessiva ou atividades durante as quais o implante é repetidamente submetido a um stress excessivo (p.e.: trabalho manual pesado; corridas de maratona, etc.)
- Risco potencial de incompatibilidade com outro dispositivo implantado
- Condições mentais que impeçam o paciente de seguir as instruções.
- Alergias e outras reações ao material do implante devem ser consideradas testadas (se apropriado) e controlados durante o pré-operatório.

EFETOS ADVERSOS

Afrouxamento mecânico pode ser o resultado de fixação defeituosa, reconstrução instável do osso fraturado ou infecção oculta. Reações de sensibilidade ao metal em pacientes raramente foram informadas.

Implantação de material estranho em tecidos resulta em reações histológicas que envolvem vários tamanhos de macrófagos e fibroblastos. A importância química deste efeito é incerta, como também mudanças semelhantes podem ocorrer como um precursor, ou durante o processo curativo.

CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

Durante o manuseio do dispositivo, sempre existe o risco de que materiais estranhos e particulados, incluindo talco de luvas, fiapos de materiais e outros contaminantes da superfície, possam entrar em contato com o dispositivo. Todos os esforços devem ser feitos para limitar o manuseio dos implantes. Um implante nunca deverá ser reutilizado, e os dispositivos explantados não devem ser implantados novamente. O estresse pode levar ao desenvolvimento de imperfeições microscópicas, e, mesmo que o implante pareça intacto, pode ocasionar a falência do mesmo. Se o paciente estiver envolvido em alguma atividade ou ocupação que possa causar estresse no implante (caminhadas substanciais, corrida, levantamento de peso ou tensão muscular), estas forças podem causar falhas no dispositivo. A durabilidade desses dispositivos é afetada por numerosos fatores biológicos, biomecânicos e extrínsecos, que limitam a sua vida útil. Isto posto, a obediência estrita às indicações, contraindicações e precauções para este produto são essenciais para maximizar a sua vida útil.

INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS AO PACIENTE

O cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o suporte físico adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante. Diante de uma fratura perfeitamente estabilizada, a carga pode ser liberada. Se a fratura não estiver estabilizada nenhuma carga pode ser dada ao sistema implantado.

ESTERILIZAÇÃO

Todos os modelos do **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** são comercializadas não estéreis, portanto a instituição que realizará a cirurgia será responsável pela sua esterilização, devendo utilizar métodos regularmente validados.

O produto é fornecido em sua embalagem original previamente limpo. Antes do uso, a embalagem deve ser inspecionada a fim de verificar se não há rupturas ou danos. O produto só deve ser desembulhado antes da esterilização com o intuito de preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração, manuseando-o o mínimo possível.

Vapor em Autoclave: Este produto é fornecido não estéril. Antes da utilização deve ser esterilizado. Recomendamos a esterilização a vapor em Autoclave no hospital (*ISO 17665-1: 2006 Sterilization of health care products – Moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices*). A autoclave é equipamento para esterilização através de vapor

saturado sob pressão. É recomendável que sejam aplicados os seguintes parâmetros de esterilização física em autoclaves (vapor saturado):

Tabela 3 – Parâmetros de esterilização física em autoclaves

Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição
Convencional (1 atm de pressão)	134°C (273°F)	4 minutos

Obs.: O tempo deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

PARA MELHOR ESCLARECIMENTO CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES QUE ACOMPANHA CADA AUTOCLAVE.

NOTA

Ficam sob responsabilidade da instituição hospitalar, o método de esterilização, os equipamentos, os controles, e as instruções de esterilização utilizada.

Cuidados com os artigos Esterilizados.

Condições de estocagem dos artigos esterilizados:

- Quanto ao ambiente: deve ser limpo; arejado; seco; deve ser restrito à equipe do setor.
- Quanto ao artigo: após o processo de esterilização, não colocá-lo em superfície fria (pedra ou aço inoxidável), utilizar cestos ou recipientes vazados até que esfriem;
- Invólucro (tecido de algodão cru, tecido não tecido, papel grau cirúrgico, papel crepado, papel com filme, tyvec ou caixas metálicas perfuradas) deve permanecer íntegro e ser pouco manuseado para evitar que os pacotes rasguem ou solte o lacre;
- Ser estocado em armários fechados com prateleiras;
- Prateleiras identificadas de modo a facilitar a retirada do material;
- Material deve ser estocado de acordo com a data de vencimento da esterilização para facilitar a distribuição e não ficar material vencido no estoque;
- Estocar separadamente dos não estéreis para reduzir o nível de contaminantes externos.

CUIDADOS COM O MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO

Embalagem:

- O **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** são fornecidas não estéreis e são embaladas individualmente em sacos de polietileno (PEBD) transparente fechados por termosselagem. O PEBD tem uma combinação única de propriedades: tenacidade, alta resistência ao impacto, alta flexibilidade, boa processabilidade, estabilidade e propriedades elétricas notáveis. O PEBD pode ser processado por extrusão, moldagem por sopro e moldagem por injeção. Assim sendo, é aplicado como

filmes para embalagens industriais e agrícolas, filmes destinados a embalagens de alimentos líquidos e sólidos, filmes laminados e plastificados para alimentos, embalagens para produtos farmacêuticos e hospitalares, brinquedos e utilidades domésticas, revestimento de fios e cabos, tubos e mangueiras (OPP (2000)).

- Os implantes embalados só devem ser aceitos se recebidos com a embalagem de fábrica e os rótulos intactos.
- O rótulo e a embalagem devem ser totalmente removidos antes dos componentes serem autoclavados a vapor.

Armazenagem e transporte:

- Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura ambiente (Máx. 35°C) e umidade relativa de 30% e ao abrigo da luz solar direta.
- Os implantes devem ser armazenados na embalagem original, em local fresco e seco e protegidos da poeira e da luz solar direta.
- Proteger os implantes de arranhões e amassamentos
- Tenha extremo cuidado no manuseio e armazenagem dos implantes.
- Não permita o contato com metal e outros objetos que possam comprometer o uso apropriado final.
- Implantes e instrumentos devem ser protegidos durante a armazenagem de ambientes corrosivos tais como: ar salgado, umidade etc.

Precauções quanto ao manuseio:

- Uma vez removido do paciente, o implante não deve ser reusado. Descarte todos os implantes danificados. A TECHIMPORT não aceita devolução deste tipo de material.
- O implante deve ser usado somente em suas condições originais. Qualquer mudança feita pelo usuário pode levar à falha do implante.
- Tenha extremo cuidado ao manusear os implantes. Riscos na superfície dos componentes podem causar rachaduras que podem significativamente reduzir as características de uso do implante e particularmente resistência à corrosão.
- No caso de ocorrer algum dano no implante antes de ser utilizado (seja por quedas ou riscos), este deve ser devolvido a TECHIMPORT, que estabeleceu um procedimento específico para o recebimento de devolução deste material.
- É essencial para a durabilidade do implante que as superfícies dos ossos estejam perfeitamente limpas e não estejam danificadas.
- Advertimos para que não sejam utilizados implantes de outras marcas com os implantes TECHIMPORT.
- Siga as regras específicas de compatibilidade dos componentes definidas na literatura e técnicas cirúrgicas.

- O planejamento pré-operatório usando radiografias permite a determinação dos tamanhos dos componentes.

Manuseio de implantes não utilizados e fora da embalagem original:

O **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2.7 e 3,5** são fornecidos em sua embalagem original previamente limpo e pronto para a esterilização. A embalagem do produto não é própria para esterilização, no entanto o produto é fornecido pronto para ser esterilizado. Os mesmos durante a esterilização devem ser manuseados de tal forma que não comprometam sua rastreabilidade. As etiquetas de rastreabilidade devem seguir o produto em todas as fases cirúrgicas. Os envelopes plásticos de PEBD protegem e conservam os implantes até seu uso. O produto só deve ser desembulhado imediatamente antes da esterilização com o intuito de preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração, manuseando-o o mínimo possível, assim recomendado na norma NBR ISO 8828.

Caso o produto não tenha sido utilizado durante a cirurgia e estando fora de sua embalagem, é necessário que o mesmo seja guardado em embalagem própria do hospital identificado com o número de lote do produto e sua etiqueta de rastreabilidade. Ao ser utilizado em uma próxima cirurgia o implante deve passar por um processo de limpeza antes de ser esterilizado. A limpeza pode ser desenvolvida através de métodos manuais ou mecânicos.

Equipamentos para limpeza:

- Lavadora ultrassônica
- Lavadora – esterilizadora
- Lavadora – desinfetadora

Limpeza manual: é o procedimento o qual a sujidade é removida por meio da ação física com auxílio de detergente, água e artefatos como esponja e escova. A limpeza manual é mais recomendada por agredir menos os implantes e instrumentais cirúrgicos. Na limpeza manual deve ser usada água em temperatura ambiente, usar escovas de nylon, nunca de aço ou abrasiva, pois pode prejudicar a camada protetora do material.

Na descontaminação devem ser utilizadas uma solução bactericida e antifúngica de largo espectro, evitando agentes de limpeza agressivos, escovas de metal para que a qualidade dos implantes metálicos não seja prejudicada.

Em caso de máquinas de limpeza os implantes e instrumentais cirúrgicos devem ficar posicionados em gavetas de forma que não haja choque entre eles evitando danos no material.

Os responsáveis pela limpeza dos implantes e instrumentais cirúrgicos devem estar atentos quanto ao tipo de produto de limpeza utilizado respeitando as concentrações indicadas pelo fabricante. Os implantes e instrumentais cirúrgicos devem ser cuidadosamente enxaguados até que todo resíduo saia e que sejam secos imediatamente após a limpeza.

✓ Tipos de limpadores

Limpadores enzimáticos: são compostos basicamente por enzimas, surfactantes e solubilizantes. A combinação balanceada desses elementos faz com que produto possa remover a matéria orgânica do material em curto período de tempo.

Soluções enzimáticas: apresentam excelente ação de limpeza, mas não possuem atividade bactericida e bacteriostática.

Enzimas: são substâncias produzidas por células vivas e que governam as reações químicas do processo. Uma vez produzidas pelas células, uma enzima pode ser isolada e irá manter suas propriedades catalíticas, se determinadas condições forem mantidas na sua fabricação. As enzimas são classificadas em três maiores grupos funcionais dependendo do tipo de substrato que irão afetar: proteases, lipases e amilases que atuam em substratos protéicos, gorduras e carboidratos, os quais tendem a solubilizar-se e desprender-se dos artigos. Atualmente recomenda-se a limpeza de artigos de configuração complexa para garantir a limpeza.

✓ Desinfecção:

É um processo que destrói microrganismos, patogênicos ou não, dos artigos, com exceção de esporos bacterianos, por meios físicos ou químicos.

✓ Níveis de desinfecção:

Alto nível: destrói todos os microrganismos com exceção a alto número de esporos => Glutaraldeído 2% - 20 – 30 minutos.

Indicação: área hospitalar preferencialmente.

Médio nível: eliminam bactérias vegetativas, a maioria dos vírus, fungos e microbactérias =>Hipoclorito de sódio 1% - 30 minutos.

Indicação: para UBS, creche, asilos, casa de repouso.

Baixo nível: elimina a maioria das bactérias, alguns vírus e fungos, mas não elimina microbactérias =>Hipoclorito de sódio 0,025%


Indicação: nutrição.

Formas de apresentação do produto médico

O implante é embalado unitariamente em embalagens plásticas transparente fabricadas em polietileno (figura 13). Em todas as embalagens são inseridas as instruções de uso do produto. Cada placa e parafuso são embalados individualmente e rotulados. Junto com cada implante são fornecidos 2 rótulos internos que é a etiqueta de rastreabilidade. O modelo do rotulo bem como as informações contidas nelas estão definidas na figura 14.



Figura 13 – Modelo da embalagem utilizada na embalagem das placas e parafusos

1		TECHIMPORT Tecnologia em Implantes Ortopédicos Ltda. Rod. Washington Luiz, km 172 – Rua 6 Lote B8 Jardim Anhanguera – Rio Claro – SP CNPJ: 15.524.734/0001-47 – IE: 587.162.261.113 Fone: (19) 3522-9500 Site: www.techimportimplantes.com.br SAC: (19) 3522-9500 Resp. Técnico: Eduardo Henrique Silva Wolf - CREA: 5070056408	2
18	Nome	Sistema de fixação rígida de placas especiais para	
	Técnico:	osteossíntese	14
3	Nome	Sistema de Fixação de Placa Especial para Antepé –	4
	Comercial:	TechFoot 2.7	
16	Modelo comercial:	Placa Sigma Fusão MTF Grande	12
15	Registro ANVISA	XXXXXXXXXX	6
	Qtde.:	01	
	Proibido		

Instrução de Uso - Revisão 05 - 01/12/2022 - Página 42











n.º	un.	Reprocessar
Matéria-prima:	Titânio liga – ASTM F136	
Ref: TIXXX.XXXX.XXX	Espaço para código de barras (código do produto)	
Lote: AAXXX	Espaço para código de barras (Lote)	  (Data de validade) (Data de fabricação)
       		

Figura 2 – Modelo de rotulo (etiqueta de rastreabilidade)


Descrição dos campos do rótulo:

- 01: Logotipo da empresa;
- 02: Dados do fabricante;
- 03: Código;
- 04: Válido até;
- 05: Quantidade;
- 06: Limites de temperatura
- 07: Manter ao abrigo do sol;
- 08: Manter seco;
- 09: Frágil, manusear com cuidado;
- 10: Produto de uso único;
- 11: Não estéril;
- 12: Data de fabricação;
- 13: Não utilizar se a embalagem estiver danificada;
- 14: Área (retângulo tracejado) destinada ao código de barras e RFID;
- 15: Consultar instruções de operação;
- 16: Código de lote;
- 17: Número do registro na ANVISA;
- 18: Descrição do produto (nome técnico, nome comercial, modelo comercial e matéria-prima)
- 19: Proibido reprocessar

Instrução de Uso

RASTREABILIDADE: Para garantir a rastreabilidade do produto é recomendado que o cirurgião responsável pelo implante notifique ao distribuidor informações como nome da Unidade Hospitalar, nome do cirurgião, data da cirurgia, nome do paciente que recebeu o implante, código do produto, número do lote do produto e o número do registro do produto na Anvisa. Em cada embalagem são fornecidas 2 etiquetas do Paciente.

MARCAÇÃO: A identificação do produto é feita através de gravação laser. O **Sistema de Placas Especiais para Pé e Calcâneo TechFoot 2,7 e 3,5** contêm as seguintes informações gravadas a laser para permitir a rastreabilidade e acompanhamento do paciente no pós-operatório:
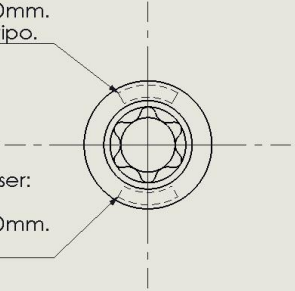
<p>Marcação a laser: - Fonte: Arial. - Tamanho: 0,60mm. - Marcar: Logotipo.</p>  <p>Marcação a laser: - Fonte: Arial. - Tamanho: 0,60mm. - Marcar: Lote.</p>	<p><i>Logo-Lote-sigla do material-código do produto-dimensão</i> <i>“maiores detalhes ver desenho do produto”</i></p>
<p>Parafusos</p> <p>Nos parafusos a gravação é feita sobre a cabeça do parafuso. Devido a limitação de espaço, nos parafusos não são gravados o código do produto.</p>	<p>Placas</p> <p>Nas placas a gravação é feita na parte superior e entre os furos</p>

DESCARTE DO DISPOSITIVO: Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11/08/06, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados. Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com dispositivos explantados. Estes dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização.

DISPOSITIVOS EXPLANTADOS SÃO CONSIDERADOS LIXO HOSPITALAR

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar este evento

adverso ao órgão sanitário competente e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail gerencia@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500. Em casos de dúvidas o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sítio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

Fabricado por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP

Telefone: +55 19 3522-9500

Site: www.techimportimplantes.com.br

Luiz Fernando Santo
Responsável Legal

Eduardo Henrique Silva Wolf
Responsável Técnico
CREA-SP: 5070056408