

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas Recobertas com DLC Estéreis - Techimport



Nome Técnico: Brocas Cirúrgicas

Nome Comercial: Brocas e Fresas Cirurgicas Recobertas com DLC Estéreis - Techimport

Registro ANVISA: 81118460051

Fabricante:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500

**PRODUTO ESTÉRIL
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Brocas Cirurgicas

Nome Comercial: Brocas e Fresas Cirurgicas Recobertas com DLC Estéreis - Techimport

Composto por: Instrumentais

Registro ANVISA: 81118460051

Modelos comerciais: Ver Tabela 1

Metodo de Esterilização: ETO

Validade: 3 anos apartir da data de Esterilização

DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

Os instrumentais pertencentes a esse registro são utilizados para auxiliar a cirurgia durante os procedimentos cirurgicos.

Tabela 1 – Modelos Comerciais	
Código	Descrição
T1134.0010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm
T1134.1010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm ES
T1134.2010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm NPR2
T1134.3010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm CTES
T1134.0010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm
T1134.1010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm ES

T1134.2010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm CTES
T1134.0010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm
T1134.1010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm ES
T1134.2010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm CTES
T1134.0010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm
T1134.1010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm ES
T1134.2010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm CTES
T1134.0010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm
T1134.1010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm ES

T1134.2010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm CTES
T1134.0010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm
T1134.1010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm ES
T1134.2010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm CTES
T1134.0010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm
T1134.1010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm ES
T1134.2010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm NPR2
T1134.3010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm CTES
T1134.0010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm
T1134.1010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm ES

T1134.2010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm NPR2
T1134.3010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm CTES
T1134.0015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm
T1134.1015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm ES
T1134.2015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm NPR2
T1134.3015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm CTES
T1134.0015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm
T1134.1015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm ES
T1134.2015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm NPR2
T1134.3015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm CTES
T1134.0015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm
T1134.1015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm ES

T1134.2015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm NPR2
T1134.3015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm CTES
T1134.0015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm
T1134.1015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm ES
T1134.2015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm NPR2
T1134.3015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm CTES
T1134.0015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm
T1134.1015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm ES
T1134.2015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm NPR2
T1134.3015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm CTES
T1134.0015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm
T1134.1015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm

	ES
T1134.2015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm NPR2
T1134.3015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm CTES
T1134.0015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm
T1134.1015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm ES
T1134.2015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm NPR2
T1134.3015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm CTES
T1134.0015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm
T1134.1015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm ES
T1134.2015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm NPR2
T1134.3015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm CTES
T1134.0020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm

T1134.1020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm ES
T1134.2020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm NPR2
T1134.3020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm CTES
T1134.0020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm
T1134.1020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm ES
T1134.2020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm CTES
T1134.0020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm
T1134.1020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm ES
T1134.2020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm CTES
T1134.0020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm

T1134.1020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm ES
T1134.2020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm CTES
T1134.0020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm
T1134.1020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm ES
T1134.2020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm CTES
T1134.0020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm
T1134.1020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm ES
T1134.2020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm CTES

T1134.0020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm
T1134.1020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm ES
T1134.2020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm NPR2
T1134.3020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm CTES
T1134.0020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm
T1134.1020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm ES
T1134.2020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm NPR2
T1134.3020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm CTES
T1134.0025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm
T1134.1025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm ES
T1134.2025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm NPR2
T1134.3025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm CTES

T1134.0025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm
T1134.1025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm ES
T1134.2025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm NPR2
T1134.3025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm CTES
T1134.0025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm
T1134.1025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm ES
T1134.2025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm NPR2
T1134.3025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm CTES
T1134.0025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm
T1134.1025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm ES
T1134.2025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm NPR2
T1134.3025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm CTES

T1134.0025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm
T1134.1025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm ES
T1134.2025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm NPR2
T1134.3025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm CTES
T1134.0025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm
T1134.1025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm ES
T1134.2025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm NPR2
T1134.3025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm CTES
T1134.0025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm
T1134.3030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm CTES
T1134.0030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm
T1134.1030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm ES

T1134.2030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm CTES
T1134.0030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm
T1134.1030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm ES
T1134.2030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm CTES
T1134.0030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm
T1134.1030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm ES
T1134.2030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm CTES
T1134.0030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm
T1134.1030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm

	ES
T1134.2030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm CTES
T1134.0030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm
T1134.1030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm ES
T1134.2030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm NPR2
T1134.3030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm CTES
T1134.0030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm
T1134.1030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm ES
T1134.2030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm NPR2
T1134.3030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm CTES
T1134.0035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm

T1134.1035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm ES
T1134.2035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm NPR2
T1134.3035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm CTES
T1134.0035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm
T1134.1035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm ES
T1134.2035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm NPR2
T1134.3035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm CTES
T1134.0035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm
T1134.1035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm ES
T1134.2035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm NPR2
T1134.3035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm CTES
T1134.0035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm

T1134.1035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm ES
T1134.2035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm NPR2
T1134.3035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm CTES
T1134.0035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm
T1134.1035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm ES
T1134.2035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm NPR2
T1134.3035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm CTES
T1134.0035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm
T1134.1035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm ES
T1134.2035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm NPR2
T1134.3035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm CTES

T1134.0035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm
T1134.1035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm ES
T1134.2035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm NPR2
T1134.3035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm CTES
T1134.0035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm
T1134.1035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm ES
T1134.2035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm NPR2
T1134.3035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm CTES
T1134.0040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm
T1134.1040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm ES
T1134.2040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm NPR2
T1134.3040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm CTES

T1134.0040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm
T1134.1040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm ES
T1134.2040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm CTES
T1134.0040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm
T1134.1040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm ES
T1134.2040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm CTES
T1134.0040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm
T1134.1040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm ES
T1134.2040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm CTES

T1134.0040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm
T1134.1040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm ES
T1134.2040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm CTES
T1134.0040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm
T1134.1040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm ES
T1134.2040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm CTES
T1134.0040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm
T1134.1040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm ES
T1134.2040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm NPR2

T1134.3040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm CTES
T1134.0040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm
T1134.1040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm ES
T1134.2040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm NPR2
T1134.3040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm CTES
T1134.0045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm
T1134.1045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm ES
T1134.2045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm NPR2
T1134.3045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm CTES
T1134.0045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm
T1134.1045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm ES
T1134.2045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm NPR2

T1134.3045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm CTES
T1134.0045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm
T1134.1045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm ES
T1134.2045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm NPR2
T1134.3045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm CTES
T1134.0045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm
T1134.1045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm ES
T1134.2045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm NPR2
T1134.3045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm CTES
T1134.0045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm
T1134.1045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm ES
T1134.2045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm NPR2

T1134.3045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm CTES
T1134.0045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm
T1134.1045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm ES
T1134.2045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm NPR2
T1134.3045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm CTES
T1134.0045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm
T1134.1045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm ES
T1134.2045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm NPR2
T1134.3045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm CTES
T1134.0045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm
T1134.1045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm ES
T1134.2045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm NPR2

T1134.3045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm CTES
T1134.0050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm
T1134.1050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm ES
T1134.2050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm NPR2
T1134.3050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm CTES
T1134.0050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm
T1134.1050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm ES
T1134.2050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm CTES
T1134.0050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm
T1134.1050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm ES
T1134.2050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm NPR2

T1134.3050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm CTES
T1134.0050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm
T1134.1050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm ES
T1134.2050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm CTES
T1134.0050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm
T1134.1050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm ES
T1134.2050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm CTES
T1134.0050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm
T1134.1050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm ES
T1134.2050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm

	NPR2
T1134.3050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm CTES
T1134.0050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm
T1134.1050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm ES
T1134.2050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm NPR2
T1134.3050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm CTES
T1134.0050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm
T1134.1050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm ES
T1134.2050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm NPR2
T1134.3050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm CTES
T1134.0055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm
T1134.1055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm ES

T1134.2055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm NPR2
T1134.3055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm CTES
T1134.0055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm
T1134.1055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm ES
T1134.2055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm NPR2
T1134.3055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm CTES
T1134.0055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm
T1134.1055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm ES
T1134.2055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm NPR2
T1134.3055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm CTES
T1134.0055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm
T1134.1055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm ES

T1134.2055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm NPR2
T1134.3055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm CTES
T1134.0055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm
T1134.1055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm ES
T1134.2055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm NPR2
T1134.3055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm CTES
T1134.0055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm
T1134.1055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm ES
T1134.2055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm NPR2
T1134.3055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm CTES
T1134.0055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm
T1134.1055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm ES

T1134.2055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm NPR2
T1134.3055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm CTES
T1134.0055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm
T1134.1055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm ES
T1134.2055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm NPR2
T1134.3055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm CTES
T1134.0060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm
T1134.1060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm ES
T1134.2060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm NPR2
T1134.3060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm CTES
T1134.0060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm

T1134.1060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm ES
T1134.2060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm CTES
T1134.0060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm
T1134.1060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm ES
T1134.2060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm CTES
T1134.0060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm
T1134.1060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm ES
T1134.2060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm CTES
T1134.0060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm

T1134.1060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm ES
T1134.2060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm CTES
T1134.0060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm
T1134.1060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm ES
T1134.2060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm CTES
T1134.0060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm
T1134.1060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm ES
T1134.2060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm NPR2
T1134.3060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm CTES
T1134.0060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm

T1134.1060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm ES
T1134.2060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm NPR2
T1134.3060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm CTES
T1134.0065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm
T1134.1065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm ES
T1134.2065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm NPR2
T1134.3065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm CTES
T1134.0065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm
T1134.1065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm ES
T1134.2065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm NPR2
T1134.3065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm CTES

T1134.0065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm
T1134.1065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm ES
T1134.2065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm NPR2
T1134.3065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm CTES
T1134.0065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm
T1134.1065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm ES
T1134.2065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm NPR2
T1134.3065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm CTES
T1134.0065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm
T1134.1065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm ES
T1134.2065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm NPR2
T1134.3065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm CTES

T1134.0065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm
T1134.1065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm ES
T1134.2065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm NPR2
T1134.3065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm CTES
T1134.0065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm
T1134.1065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm ES
T1134.2065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm NPR2
T1134.3065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm CTES
T1134.0065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm
T1134.1065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm ES
T1134.2065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm NPR2
T1134.3065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm CTES

T1134.0070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm
T1134.1070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm ES
T1134.2070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm NPR2
T1134.1070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm ES
T1134.2070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm CTES
T1134.0070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm
T1134.1070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm ES
T1134.2070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm CTES
T1134.0070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm
T1134.1070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm

	ES
T1134.2070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm NPR2
T1134.3070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm CTES
T1134.0070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm
T1134.1070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm ES
T1134.2070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm NPR2
T1134.3070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm CTES
T1134.0250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm
T1134.1250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm ES
T1134.2250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm NPR2
T1134.3250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm CTES
T1134.0250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm

T1134.1250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm ES
T1134.2250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm CTES
T1134.0250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm
T1134.1250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm ES
T1134.2250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm CTES
T1134.0250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm
T1134.1250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm ES
T1134.2250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm CTES

T1134.0250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm
T1134.1250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm ES
T1134.2250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm CTES
T1134.0250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm
T1134.1250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm ES
T1134.2250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm CTES
T1134.0250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm
T1134.1250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm ES
T1134.2250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm NPR2
T1134.3250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm

	CTES
T1134.0250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm
T1134.1250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm ES
T1134.2250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm NPR2
T1134.3250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm CTES
T1134.0250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm
T1134.1250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm ES
T1134.2250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm NPR2
T1134.3250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm CTES
T1134.0270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm
T1134.1270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm ES
T1134.2270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm NPR2

T1134.3270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm CTES
T1134.0270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm
T1134.1270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm ES
T1134.2270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm CTES
T1134.0270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm
T1134.1270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm ES
T1134.2270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm CTES
T1134.0270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm
T1134.1270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm ES

T1134.2270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm CTES
T1134.0270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm
T1134.1270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm ES
T1134.2270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm CTES
T1134.0270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm
T1134.1270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm ES
T1134.2270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm CTES
T1134.0270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm
T1134.1270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm ES

T1134.2270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm NPR2
T1134.3270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm CTES
T1134.0270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm
T1134.1270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm ES
T1134.2270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm NPR2
T1134.3270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm CTES
T1134.0270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm
T1134.1270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm ES
T1134.2270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm NPR2
T1134.3270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm CTES
T1134.0340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm

T1134.1340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm ES
T1134.2340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm NPR2
T1134.3340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm CTES
T1134.0340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm
T1134.1340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm ES
T1134.2340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm CTES
T1134.0340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm
T1134.1340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm ES
T1134.2340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm CTES
T1134.0340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm

T1134.1340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm ES
T1134.2340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm CTES
T1134.0340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm
T1134.1340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm ES
T1134.2340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm CTES
T1134.0340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm
T1134.1340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm ES
T1134.2340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm CTES

T1134.0340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm
T1134.1340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm ES
T1134.2340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm NPR2
T1134.3340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm CTES
T1134.0340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm
T1134.1340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm ES
T1134.2340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm NPR2
T1134.3340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm CTES
T1134.0340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm
T1134.1340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm ES
T1134.2340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm NPR2
T1134.3340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm

	CTES
T1134.0350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm
T1134.1350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm ES
T1134.2350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm NPR2
T1134.3350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm CTES
T1134.0350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm
T1134.1350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm ES
T1134.2350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm CTES
T1134.0350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm
T1134.1350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm ES
T1134.2350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm NPR2

T1134.3350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm CTES
T1134.0350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm
T1134.1350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm ES
T1134.2350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm CTES
T1134.0350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm
T1134.1350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm ES
T1134.2350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm CTES
T1134.0350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm
T1134.1350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm ES

T1134.2350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm CTES
T1134.0350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm
T1134.1350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm ES
T1134.2350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm NPR2
T1134.3350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm CTES
T1134.0350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm
T1134.1350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm ES
T1134.2350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm NPR2
T1134.3350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm CTES
T1134.0350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm
T1134.1350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm ES

T1134.2350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm NPR2
T1134.3350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm CTES
T1134.0414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm
T1134.1414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm ES
T1134.2414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm NPR2
T1134.3414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm CTES
T1134.0414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm
T1134.1414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm ES
T1134.2414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm NPR2
T1134.3414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm CTES
T1134.0414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm

T1134.1414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm ES
T1134.2414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm NPR2
T1134.3414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm CTES
T1134.0414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm
T1134.1414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm ES
T1134.2414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm NPR2
T1134.3414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm CTES
T1134.0414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm
T1134.1414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm ES
T1134.2414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm NPR2
T1134.3414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm CTES

T1134.0414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm
T1134.1414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm ES
T1134.2414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm NPR2
T1134.3414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm CTES
T1134.0414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm
T1134.1414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm ES
T1134.2414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm NPR2
T1134.3414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm CTES
T1134.0414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm
T1134.1414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm ES
T1134.2414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm NPR2

T1134.3414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm CTES
T1134.0414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm
T1134.1414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm ES
T1134.2414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm NPR2
T1134.3414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm CTES
T1134.0422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm
T1134.1422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm ES
T1134.2422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm NPR2
T1134.3422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm CTES
T1134.0422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm
T1134.1422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm ES

T1134.2422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm NPR2
T1134.3422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm CTES
T1134.0422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm
T1134.1422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm ES
T1134.2422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm NPR2
T1134.3422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm CTES
T1134.0422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm
T1134.1422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm ES
T1134.2422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm NPR2
T1134.3422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm CTES
T1134.0422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm

T1134.1422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm ES
T1134.2422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm NPR2
T1134.3422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm CTES
T1134.0422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm
T1134.1422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm ES
T1134.2422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm NPR2
T1134.3422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm CTES
T1134.0422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm
T1134.1422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm ES
T1134.2422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm NPR2
T1134.3422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm CTES

T1134.0422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm
T1134.1422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm ES
T1134.2422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm NPR2
T1134.3422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm CTES
T1134.0422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm
T1134.1422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm ES
T1134.2422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm NPR2
T1134.3422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm CTES
T1134.0510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm
T1134.1510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm ES
T1134.2510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm NPR2

T1134.3510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm CTES
T1134.0510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm
T1134.1510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm ES
T1134.2510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm CTES
T1134.0510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm
T1134.1510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm ES
T1134.2510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm CTES
T1134.0510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm
T1134.1510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm ES
T1134.2510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm NPR2

T1134.3510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm CTES
T1134.0510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm
T1134.1510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm ES
T1134.2510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm CTES
T1134.0510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm
T1134.1510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm ES
T1134.2510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm NPR2
T1134.3510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm CTES
T1134.0510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm
T1134.1510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm ES
T1134.2510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm NPR2

T1134.3510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm CTES
T1134.0510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm
T1134.1510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm ES
T1134.2510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm NPR2
T1134.3510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm CTES
T1134.0510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm
T1134.1510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm ES
T1134.2510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm NPR2
T1134.3510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm CTES
T1134.0512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm
T1134.1512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm ES

T1134.2512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm NPR2
T1134.3512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm CTES
T1134.0512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm
T1134.1512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm ES
T1134.2512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm NPR2
T1134.3512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm CTES
T1134.0512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm
T1134.1512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm ES
T1134.2512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm NPR2
T1134.3512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm CTES
T1134.0512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm
T1134.1512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm ES

T1134.2512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm NPR2
T1134.3512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm CTES
T1134.0512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm
T1134.1512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm ES
T1134.2512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm NPR2
T1134.3512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm CTES
T1134.0512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm
T1134.1512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm ES
T1134.2512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm NPR2
T1134.3512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm CTES
T1134.0512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm
T1134.1512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm ES

TI134.2512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm NPR2
TI134.3512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm CTES
TI134.0512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm
TI134.1512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm ES
TI134.2512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm NPR2
TI134.3512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm CTES
TI134.0512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm
TI134.1512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm ES
TI134.2512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm NPR2
TI134.3512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm CTES
TI134.0516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm
TI134.1516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm ES

T1134.2516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm NPR2
T1134.3516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm CTES
T1134.0516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm
T1134.1516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm ES
T1134.2516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm NPR2
T1134.3516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm CTES
T1134.0516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm
T1134.1516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm ES
T1134.2516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm NPR2
T1134.3516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm CTES
T1134.0516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm
T1134.1516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm ES

T1134.2516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm NPR2
T1134.3516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm CTES
T1134.0516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm
T1134.1516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm ES
T1134.2516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm NPR2
T1134.3516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm CTES
T1134.0516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm
T1134.1516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm ES
T1134.2516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm NPR2
T1134.3516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm CTES
T1134.0516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm

TI134.1516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm ES
TI134.2516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm NPR2
TI134.3516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm CTES
TI134.0516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm
TI134.1516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm ES
TI134.2516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm NPR2
TI134.3516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm CTES
TI134.0516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm
TI134.1516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm ES
TI134.2516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm NPR2
TI134.3516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm CTES
TI134.0521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm

T1134.1521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm ES
T1134.2521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm NPR2
T1134.3521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm CTES
T1134.0521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm
T1134.1521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm ES
T1134.2521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm NPR2
T1134.3521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm CTES
T1134.0521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm
T1134.1521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm ES
T1134.2521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm NPR2
T1134.3521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm CTES
T1134.0521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm

T1134.1521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm ES
T1134.2521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm NPR2
T1134.3521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm CTES
T1134.0521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm
T1134.1521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm ES
T1134.2521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm NPR2
T1134.3521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm CTES
T1134.0521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm
T1134.1521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm ES
T1134.2521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm NPR2
T1134.3521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm CTES

TI134.0521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm
TI134.1521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm ES
TI134.2521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm NPR2
TI134.3521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm CTES
TI134.0521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm
TI134.1521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm ES
TI134.2521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm NPR2
TI134.3521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm CTES
TI134.0521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm
TI134.1521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm ES
TI134.2521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm NPR2
TI134.3521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm CTES

T1134.0525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm
T1134.1525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm ES
T1134.2525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm NPR2
T1134.3525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm CTES
T1134.0525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm
T1134.1525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm ES
T1134.2525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm NPR2
T1134.3525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm CTES
T1134.0525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm
T1134.1525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm ES
T1134.2525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm NPR2
T1134.3525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm CTES

T1134.0525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm
T1134.1525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm ES
T1134.2525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm NPR2
T1134.3525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm CTES
T1134.0525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm
T1134.1525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm ES
T1134.2525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm NPR2
T1134.3525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm CTES
T1134.0525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm
T1134.1525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm ES
T1134.2525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm NPR2
T1134.3525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm

	CTES
T1134.0525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm
T1134.1525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm ES
T1134.2525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm NPR2
T1134.3525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm CTES
T1134.0525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm
T1134.1525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm ES
T1134.2525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm NPR2
T1134.3525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm CTES
T1134.0525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm
T1134.1525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm ES
T1134.2525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm NPR2

T1134.3525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm CTES
T1134.0618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm
T1134.1618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES
T1134.2618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2
T1134.3618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES
T1134.0618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm
T1134.1618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES
T1134.2618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2
T1134.3618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES
T1134.0618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm
T1134.1618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES

T1134.2618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2
T1134.3618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES
T1134.0618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm
T1134.1618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES
T1134.2618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2
T1134.3618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES
T1134.0618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm
T1134.1618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES
T1134.2618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2
T1134.3618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES
T1134.0618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm

T1134.1618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES
T1134.2618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2
T1134.3618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES
T1134.0618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm
T1134.1618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES
T1134.2618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2
T1134.3618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES
T1134.0618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm
T1134.1618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES
T1134.2618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2
T1134.3618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES

T1134.0618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm
T1134.1618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES
T1134.2618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2
T1134.3618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES
T1134.0621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm
T1134.1621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES
T1134.2621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2
T1134.3621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES
T1134.0621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm
T1134.1621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES
T1134.2621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2

T1134.3621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES
T1134.0621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm
T1134.1621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES
T1134.2621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2
T1134.3621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES
T1134.0621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm
T1134.1621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES
T1134.2621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2
T1134.3621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES
T1134.0621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm
T1134.1621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES

T1134.2621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2
T1134.3621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES
T1134.0621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm
T1134.1621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES
T1134.2621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2
T1134.3621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES
T1134.0621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm
T1134.1621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES
T1134.2621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2
T1134.3621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES
T1134.0621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm

T1134.1621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES
T1134.2621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2
T1134.3621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES
T1134.0621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm
T1134.1621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES
T1134.2621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2
T1134.3621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES
T1134.0632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm
T1134.1632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES
T1134.2632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2
T1134.3632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES

T1134.0632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm
T1134.1632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES
T1134.2632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2
T1134.3632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES
T1134.0632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm
T1134.1632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES
T1134.2632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2
T1134.3632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES
T1134.0632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm
T1134.1632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES
T1134.2632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2

T1134.3632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES
T1134.0632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm
T1134.1632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES
T1134.2632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2
T1134.3632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES
T1134.0632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm
T1134.1632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES
T1134.2632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2
T1134.3632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES
T1134.0632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm
T1134.1632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES

T1134.2632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2
T1134.3632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES
T1134.0632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm
T1134.1632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES
T1134.2632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2
T1134.3632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES
T1134.0632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm
T1134.1632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES
T1134.2632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2
T1134.3632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES
T1134.0718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm

T1134.1718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES
T1134.2718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2
T1134.3718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES
T1134.0718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm
T1134.1718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES
T1134.2718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2
T1134.3718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES
T1134.0718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm
T1134.1718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES
T1134.2718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2
T1134.3718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES

T1134.0718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm
T1134.1718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES
T1134.2718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2
T1134.3718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES
T1134.0718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm
T1134.1718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES
T1134.2718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2
T1134.3718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES
T1134.0718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm
T1134.1718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES
T1134.2718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2

T1134.3718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES
T1134.0718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm
T1134.1718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES
T1134.2718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2
T1134.3718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES
T1134.0718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm
T1134.1718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES
T1134.2718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2
T1134.3718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES
T1134.0718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm
T1134.1718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES

T1134.2718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2
T1134.3718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES
T1134.0721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm
T1134.1721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES
T1134.2721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2
T1134.3721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES
T1134.0721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm
T1134.1721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES
T1134.2721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2
T1134.3721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES
T1134.0721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm

T1134.1721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES
T1134.2721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2
T1134.3721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES
T1134.0721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm
T1134.1721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES
T1134.2721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2
T1134.3721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES
T1134.0721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm
T1134.1721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES
T1134.2721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2
T1134.3721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES

T1134.0721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm
T1134.1721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES
T1134.2721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2
T1134.3721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES
T1134.0721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm
T1134.1721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES
T1134.2721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2
T1134.3721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES
T1134.0721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm
T1134.1721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES
T1134.2721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2

T1134.3721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES
T1134.0721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm
T1134.1721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES
T1134.2721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2
T1134.3721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES
T1134.0732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm
T1134.1732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES
T1134.2732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2
T1134.3732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES
T1134.0732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm
T1134.1732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES

T1134.2732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2
T1134.3732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES
T1134.0732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm
T1134.1732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES
T1134.2732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2
T1134.3732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES
T1134.0732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm
T1134.1732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES
T1134.2732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2
T1134.3732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES
T1134.0732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm

T1134.1732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES
T1134.2732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2
T1134.3732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES
T1134.0732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm
T1134.1732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES
T1134.2732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2
T1134.3732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES
T1134.0732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm
T1134.1732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES
T1134.2732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2
T1134.3732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES

T1134.0732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm
T1134.1732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES
T1134.2732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2
T1134.3732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES
T1134.0732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm
T1134.1732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES
T1134.2732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2
T1134.3732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES
T1134.0750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm
T1134.1750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm ES
T1134.2750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm NPR2

T1134.3750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm CTES
T1134.0750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm
T1134.1750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm ES
T1134.2750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm NPR2
T1134.3750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm CTES
T1134.0750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm
T1134.1750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm ES
T1134.2750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm NPR2
T1134.3750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm CTES
T1134.0809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm
T1134.1809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm ES

T1134.2809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm NPR2
T1134.3809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm CTES
T1134.0809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm
T1134.1809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm ES
T1134.2809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm NPR2
T1134.3809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm CTES
T1134.0809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm
T1134.1809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm ES
T1134.2809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm NPR2
T1134.3809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm CTES
T1134.0809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm
T1134.1809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm ES
T1134.2809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm NPR2

T1134.3809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm CTES
T1134.0809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm
T1134.1809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm ES
T1134.2809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm NPR2
T1134.3809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm CTES
T1134.0809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm
T1134.1809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm ES
T1134.2809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm NPR2
T1134.3809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm CTES
T1134.0809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm
T1134.1809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm ES
T1134.2809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm NPR2
T1134.3809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm CTES

T1134.0809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm
T1134.1809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm ES
T1134.2809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm NPR2
T1134.3809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm CTES
T1134.0809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm
T1134.1809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm ES
T1134.2809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm NPR2
T1134.3809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm CTES
T1134.0809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm
T1134.1809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm ES
T1134.2809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm NPR2
T1134.3809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm CTES
T1134.0809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm
T1134.1809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm ES

T1134.2809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm NPR2
T1134.3809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm CTES
T1134.0810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm
T1134.1810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm ES
T1134.2810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm NPR2
T1134.3810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm CTES
T1134.0810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm
T1134.1810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm ES
T1134.2810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm CTES
T1134.0810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm
T1134.1810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm ES
T1134.2810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm CTES

T1134.0810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm
T1134.1810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm ES
T1134.2810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm CTES
T1134.0810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm
T1134.1810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm ES
T1134.2810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm NPR2
T1134.3810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm CTES
T1134.0810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm
T1134.1810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm ES
T1134.2810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm NPR2
T1134.3810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm CTES
T1134.0810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm
T1134.1810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm ES

T1134.2810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm NPR2
T1134.3810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm CTES
T1134.0810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm
T1134.1810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm ES
T1134.2810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm NPR2
T1134.3810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm CTES
T1134.0810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm
T1134.1810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm ES
T1134.2810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm NPR2
T1134.3810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm CTES
T1134.0810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm
T1134.1810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm ES
T1134.2810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm NPR2
T1134.3810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm CTES

T1134.0810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm
T1134.1810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm ES
T1134.2810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm NPR2
T1134.3810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm CTES
T1134.0811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm
T1134.1811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm ES
T1134.2811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm NPR2
T1134.3811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm CTES
T1134.0811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm
T1134.1811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm ES
T1134.2811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm NPR2
T1134.3811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm CTES
T1134.0811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm
T1134.1811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm ES

T1134.2811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm NPR2
T1134.3811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm CTES
T1134.0811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm
T1134.1811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm ES
T1134.2811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm NPR2
T1134.3811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm CTES
T1134.0811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm
T1134.1811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm ES
T1134.2811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm NPR2
T1134.3811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm CTES
T1134.0811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm
T1134.1811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm ES
T1134.2811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm NPR2
T1134.3811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm CTES

T1134.0811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm
T1134.1811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm ES
T1134.2811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm NPR2
T1134.3811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm CTES
T1134.0811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm
T1134.1811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm ES
T1134.2811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm NPR2
T1134.3811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm CTES
T1134.0811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm
T1134.1811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm ES
T1134.2811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm NPR2
T1134.3811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm CTES
T1134.0811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm
T1134.1811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm ES

T1134.2811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm NPR2
T1134.3811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm CTES
T1134.0811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm
T1134.1811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm ES
T1134.2811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm NPR2
T1134.3811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm CTES
T1134.0812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm
T1134.1812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm ES
T1134.2812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm NPR2
T1134.3812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm CTES
T1134.0812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm
T1134.1812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm ES
T1134.2812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm NPR2
T1134.3812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm CTES

T1134.0812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm
T1134.1812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm ES
T1134.2812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm NPR2
T1134.3812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm CTES
T1134.0812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm
T1134.1812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm ES
T1134.2812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm NPR2
T1134.3812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm CTES
T1134.0812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm
T1134.1812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm ES
T1134.2812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm NPR2
T1134.3812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm CTES
T1134.0812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm
T1134.1812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm ES

T1134.2812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm NPR2
T1134.3812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm CTES
T1134.0812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm
T1134.1812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm ES
T1134.2812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm NPR2
T1134.3812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm CTES
T1134.0812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm
T1134.1812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm ES
T1134.2812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm NPR2
T1134.3812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm CTES
T1134.0812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm
T1134.1812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm ES
T1134.2812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm NPR2
T1134.3812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm CTES

T1134.0812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm
T1134.1812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm ES
T1134.2812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm NPR2
T1134.3812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm CTES
T1134.0812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm
T1134.1812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm ES
T1134.2812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm NPR2
T1134.3812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm CTES
T1134.0813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm
T1134.1813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm ES
T1134.2813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm NPR2
T1134.3813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm CTES
T1134.3813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm CTES
T1134.0813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm

T1134.1813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm ES
T1134.2813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm NPR2
T1134.3813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm CTES
T1134.0813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm
T1134.1813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm ES
T1134.2813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm NPR2
T1134.3813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm CTES
T1134.0813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm
T1134.1813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm ES
T1134.2813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm NPR2
T1134.3813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm CTES
T1134.0813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm
T1134.1813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm ES
T1134.2813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm NPR2

T1134.3813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm CTES
T1134.0813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm
T1134.1813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm ES
T1134.2813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm NPR2
T1134.3813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm CTES
T1134.0813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm
T1134.1813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm ES
T1134.2813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm NPR2
T1134.3813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm CTES
T1134.0813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm
T1134.1813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm ES
T1134.2813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm NPR2
T1134.3813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm CTES
T1134.0813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm

T1134.1813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm ES
T1134.2813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm NPR2
T1134.3813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm CTES
T1134.0814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm
T1134.1814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm ES
T1134.2814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm NPR2
T1134.3814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm CTES
T1134.0814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm
T1134.1814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm ES
T1134.2814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm NPR2
T1134.3814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm CTES
T1134.0814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm
T1134.1814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm ES
T1134.2814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm NPR2

T1134.3814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm CTES
T1134.0814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm
T1134.1814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm ES
T1134.2814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm NPR2
T1134.3814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm CTES
T1134.0814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm
T1134.1814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm ES
T1134.2814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm NPR2
T1134.3814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm CTES
T1134.0814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm
T1134.1814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm ES
T1134.2814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm NPR2
T1134.3814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm CTES
T1134.0814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm

TI134.1814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm ES
TI134.2814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm NPR2
TI134.3814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm CTES
TI134.0814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm
TI134.1814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm ES
TI134.2814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm NPR2
TI134.3814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm CTES
TI134.0814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm
TI134.1814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm ES
TI134.2814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm NPR2
TI134.3814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm CTES
TI134.1814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm ES
TI134.2814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm NPR2
TI134.3814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm CTES

T1134.0814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm
T1134.1814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm ES
T1134.2814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm NPR2
T1134.3814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm CTES
T1134.0815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm
T1134.1815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm ES
T1134.2815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm NPR2
T1134.3815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm CTES
T1134.0815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm
T1134.1815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm ES
T1134.2815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm NPR2
T1134.3815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm CTES
T1134.0815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm
T1134.1815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm ES

T1134.2815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm NPR2
T1134.3815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm CTES
T1134.0815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm
T1134.1815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm ES
T1134.2815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm NPR2
T1134.3815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm CTES
T1134.0815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm
T1134.1815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm ES
T1134.2815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm NPR2
T1134.3815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm CTES
T1134.0815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm
T1134.1815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm ES
T1134.2815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm NPR2
T1134.3815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm CTES

T1134.0815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm
T1134.1815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm ES
T1134.2815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm NPR2
T1134.3815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm CTES
T1134.0815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm
T1134.1815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm ES
T1134.2815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm NPR2
T1134.3815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm CTES
T1134.0815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm
T1134.1815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm ES
T1134.2815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm NPR2
T1134.3815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm CTES
T1134.0815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm
T1134.1815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm ES

T1134.2815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm NPR2
T1134.3815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm CTES
T1134.0815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm
T1134.1815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm ES
T1134.2815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm NPR2
T1134.3815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm CTES
T1134.0816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm
T1134.1816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm ES
T1134.2816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm NPR2
T1134.3816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm CTES
T1134.0816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm
T1134.1816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm ES
T1134.2816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm NPR2
T1134.3816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm CTES

T1134.0816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm
T1134.1816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm ES
T1134.2816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm NPR2
T1134.3816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm CTES
T1134.0816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm
T1134.1816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm ES
T1134.2816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm NPR2
T1134.3816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm CTES
T1134.0816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm
T1134.1816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm ES
T1134.2816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm NPR2
T1134.3816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm CTES
T1134.0816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm
T1134.1816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm ES

T1134.2816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm NPR2
T1134.3816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm CTES
T1134.0816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm
T1134.1816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm ES
T1134.2816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm NPR2
T1134.3816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm CTES
T1134.0816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm
T1134.1816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm ES
T1134.2816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm NPR2
T1134.3816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm CTES
T1134.0816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm
T1134.1816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm ES
T1134.2816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm NPR2
T1134.3816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm CTES

T1134.0816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm
T1134.1816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm ES
T1134.2816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm NPR2
T1134.3816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm CTES
T1134.0816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm
T1134.1816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm ES
T1134.2816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm NPR2
T1134.3816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm CTES
T1134.0817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm
T1134.1817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm ES
T1134.2817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm NPR2
T1134.3817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm CTES
T1134.0817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm
T1134.1817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm ES

T1134.2817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm NPR2
T1134.3817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm CTES
T1134.0817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm
T1134.1817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm ES
T1134.2817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm NPR2
T1134.3817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm CTES
T1134.0817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm
T1134.1817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm ES
T1134.2817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm NPR2
T1134.3817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm CTES
T1134.0817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm
T1134.1817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm ES
T1134.2817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm NPR2
T1134.3817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm CTES

T1134.0817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm
T1134.1817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm ES
T1134.2817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm NPR2
T1134.3817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm CTES
T1134.0817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm
T1134.1817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm ES
T1134.2817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm NPR2
T1134.3817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm CTES
T1134.0817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm
T1134.1817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm ES
T1134.2817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm NPR2
T1134.3817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm CTES
T1134.0817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm
T1134.1817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm ES

T1134.2817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm NPR2
T1134.3817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm CTES
T1134.0817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm
T1134.1817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm ES
T1134.2817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm NPR2
T1134.3817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm CTES
T1134.0817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm
T1134.1817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm ES
T1134.2817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm NPR2
T1134.3817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm CTES
T1134.0818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm
T1134.1818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm ES
T1134.2818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm NPR2
T1134.3818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm CTES

T1134.0818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm
T1134.1818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm ES
T1134.2818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm NPR2
T1134.3818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm CTES
T1134.0818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm
T1134.1818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm ES
T1134.2818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm NPR2
T1134.3818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm CTES
T1134.0818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm
T1134.1818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm ES
T1134.2818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm NPR2
T1134.3818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm CTES
T1134.0818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm
T1134.1818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm ES

TI134.2818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm NPR2
TI134.3818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm CTES
TI134.0818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm
TI134.1818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm ES
TI134.2818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm NPR2
TI134.3818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm CTES
TI134.0818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm
TI134.1818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm ES
TI134.2818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm NPR2
TI134.3818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm CTES
TI134.0818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm
TI134.1818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm ES
TI134.2818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm NPR2
TI134.3818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm CTES

T1134.0818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm
T1134.1818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm ES
T1134.2818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm NPR2
T1134.3818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm CTES
T1134.0818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm
T1134.1818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm ES
T1134.2818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm NPR2
T1134.3818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm CTES
T1134.0818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm
T1134.1818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm ES
T1134.2818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm NPR2
T1134.3818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm CTES
T1134.0819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm
T1134.1819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm ES

T1134.2819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm NPR2
T1134.3819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm CTES
T1134.0819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm
T1134.1819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm ES
T1134.2819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm NPR2
T1134.3819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm CTES
T1134.0819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm
T1134.1819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm ES
T1134.2819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm NPR2
T1134.3819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm CTES
T1134.0819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm
T1134.1819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm ES
T1134.2819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm NPR2
T1134.3819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm CTES

T1134.0819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm
T1134.1819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm ES
T1134.2819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm NPR2
T1134.3819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm CTES
T1134.0819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm
T1134.1819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm ES
T1134.2819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm NPR2
T1134.3819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm CTES
T1134.0819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm
T1134.1819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm ES
T1134.2819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm NPR2
T1134.3819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm CTES
T1134.0819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm
T1134.1819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm ES

T1134.2819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm NPR2
T1134.3819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm CTES
T1134.0820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm
T1134.1820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm ES
T1134.2820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm NPR2
T1134.3820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm CTES
T1134.0820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm
T1134.1820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm ES
T1134.2820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm NPR2
T1134.3820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm CTES
T1134.0820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm
T1134.1820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm ES
T1134.2820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm NPR2
T1134.3820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm CTES

T1134.0820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm
T1134.1820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm ES
T1134.2820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm NPR2
T1134.3820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm CTES
T1134.0820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm
T1134.1820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm ES
T1134.2820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm NPR2
T1134.3820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm CTES
T1134.0820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm
T1134.1820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm ES
T1134.2820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm NPR2
T1134.3820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm CTES
T1134.0820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm
T1134.1820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm ES

T1134.2820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm NPR2
T1134.3820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm CTES
T1134.0820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm
T1134.1820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm ES
T1134.2820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm NPR2
T1134.3820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm CTES
T1134.0820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm
T1134.1820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm ES
T1134.2820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm NPR2
T1134.3820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm CTES
T1134.0820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm
T1134.1820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm ES
T1134.2820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm NPR2
T1134.3820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm CTES

T1134.0820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm
T1134.1820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm ES
T1134.2820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm NPR2
T1134.3820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm CTES
T1134.0821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm
T1134.1821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm ES
T1134.2821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm NPR2
T1134.3821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm CTES
T1134.0821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm
T1134.1821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm ES
T1134.2821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm NPR2
T1134.3821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm CTES
T1134.0821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm
T1134.1821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm ES

T1134.2821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm NPR2
T1134.3821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm CTES
T1134.0821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm
T1134.1821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm ES
T1134.2821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm NPR2
T1134.3821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm CTES
T1134.0821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm
T1134.1821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm ES
T1134.2821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm NPR2
T1134.3821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm CTES
T1134.0821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm
T1134.1821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm ES
T1134.2821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm NPR2
T1134.3821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm CTES

T1134.0821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm
T1134.1821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm ES
T1134.2821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm NPR2
T1134.3821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm CTES
T1134.0821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm
T1134.1821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm ES
T1134.2821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm NPR2
T1134.3821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm CTES
T1134.0821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm
T1134.1821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm ES
T1134.2821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm NPR2
T1134.3821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm CTES
T1134.0821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm
T1134.1821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm ES

T1134.2821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm NPR2
T1134.3821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm CTES
T1134.0821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm
T1134.1821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm ES
T1134.2821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm NPR2
T1134.3821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm CTES
T1134.0822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm
T1134.1822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm ES
T1134.2822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm NPR2
T1134.3822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm CTES
T1134.0822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm
T1134.1822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm ES
T1134.2822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm NPR2
T1134.3822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm CTES

T1134.0822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm
T1134.1822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm ES
T1134.2822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm NPR2
T1134.3822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm CTES
T1134.0822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm
T1134.1822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm ES
T1134.2822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm NPR2
T1134.3822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm CTES
T1134.0822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm
T1134.1822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm ES
T1134.2822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm NPR2
T1134.3822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm CTES
T1134.0822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm
T1134.1822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm ES

T1134.2822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm NPR2
T1134.3822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm CTES
T1134.0822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm
T1134.1822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm ES
T1134.2822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm NPR2
T1134.3822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm CTES
T1134.0822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm
T1134.1822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm ES
T1134.2822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm NPR2
T1134.3822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm CTES
T1134.0822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm
T1134.1822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm ES
T1134.2822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm NPR2
T1134.3822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm CTES

T1134.0822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm
T1134.1822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm ES
T1134.2822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm NPR2
T1134.3822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm CTES
T1134.0822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm
T1134.1822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm ES
T1134.2822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm NPR2
T1134.3822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm CTES
T1134.0823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm
T1134.1823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm ES
T1134.2823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm NPR2
T1134.3823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm CTES
T1134.0823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm
T1134.1823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm ES

T1134.2823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm NPR2
T1134.3823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm CTES
T1134.0823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm
T1134.1823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm ES
T1134.2823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm NPR2
T1134.3823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm CTES
T1134.0823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm
T1134.1823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm ES
T1134.2823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm NPR2
T1134.3823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm CTES
T1134.0823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm
T1134.1823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm ES
T1134.2823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm NPR2
T1134.3823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm CTES

T1134.0823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm
T1134.1823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm ES
T1134.2823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm NPR2
T1134.3823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm CTES
T1134.0823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm
T1134.1823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm ES
T1134.2823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm NPR2
T1134.3823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm CTES
T1134.0823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm
T1134.1823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm ES
T1134.2823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm NPR2
T1134.3823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm CTES
T1134.0823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm
T1134.1823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm ES

T1134.2823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm NPR2
T1134.3823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm CTES
T1134.0823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm
T1134.1823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm ES
T1134.2823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm NPR2
T1134.3823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm CTES
T1134.0823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm
T1134.1823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm ES
T1134.2823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm NPR2
T1134.3823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm CTES
T1134.0827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm
T1134.1827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm ES
T1134.2827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm NPR2
T1134.3827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm CTES

T1134.0827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm
T1134.1827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm ES
T1134.2827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm NPR2
T1134.3827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm CTES
T1134.0827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm
T1134.1827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm ES
T1134.2827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm NPR2
T1134.3827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm CTES
T1134.0827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm
T1134.1827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm ES
T1134.2827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm NPR2
T1134.3827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm CTES
T1134.0827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm
T1134.1827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm ES

T1134.2827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm NPR2
T1134.3827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm CTES
T1134.0827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm
T1134.1827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm ES
T1134.2827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm NPR2
T1134.3827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm CTES
T1134.0827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm
T1134.1827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm ES
T1134.2827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm NPR2
T1134.3827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm CTES
T1134.0827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm
T1134.1827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm ES
T1134.2827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm NPR2
T1134.3827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm CTES

T1134.0827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm
T1134.1827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm ES
T1134.2827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm NPR2
T1134.3827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm CTES
T1134.0827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm
T1134.1827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm ES
T1134.2827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm NPR2
T1134.3827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm CTES
T1134.0827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm
T1134.1827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm ES
T1134.2827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm NPR2
T1134.3827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm CTES
T1134.0832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm
T1134.1832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm ES

T1134.2832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm NPR2
T1134.3832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm CTES
T1134.0832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm
T1134.1832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm ES
T1134.2832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm NPR2
T1134.3832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm CTES
T1134.0832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm
T1134.1832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm ES
T1134.2832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm NPR2
T1134.3832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm CTES
T1134.0832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm
T1134.1832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm ES
T1134.2832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm NPR2
T1134.3832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm CTES

T1134.0832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm
T1134.1832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm ES
T1134.2832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm NPR2
T1134.3832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm CTES
T1134.0832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm
T1134.1832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm ES
T1134.2832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm NPR2
T1134.3832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm CTES
T1134.0832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm
T1134.1832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm ES
T1134.2832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm NPR2
T1134.3832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm CTES
T1134.0832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm
T1134.1832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm ES

T1134.2832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm NPR2
T1134.3832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm CTES
T1134.0832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm
T1134.1832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm ES
T1134.2832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm NPR2
T1134.3832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm CTES
T1134.0832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm
T1134.1832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm ES
T1134.2832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm NPR2
T1134.3832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm CTES
T1134.0832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm
T1134.1832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm ES
T1134.2832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm NPR2
T1134.3832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm CTES

T1134.0835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm
T1134.1835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm ES
T1134.2835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm NPR2
T1134.3835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm CTES
T1134.0835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm
T1134.1835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm ES
T1134.2835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm NPR2
T1134.3835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm CTES
T1134.0835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm
T1134.1835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm ES
T1134.2835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm NPR2
T1134.3835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm CTES
T1134.0835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm
T1134.1835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm ES

T1134.2835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm NPR2
T1134.3835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm CTES
T1134.0835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm
T1134.1835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm ES
T1134.2835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm NPR2
T1134.3835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm CTES
T1134.0835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm
T1134.1835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm ES
T1134.2835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm NPR2
T1134.3835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm CTES
T1134.0835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm
T1134.1835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm ES
T1134.2835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm NPR2
T1134.3835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm CTES

T1134.0835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm
T1134.1835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm ES
T1134.2835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm NPR2
T1134.3835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm CTES
T1134.0835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm
T1134.1835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm ES
T1134.2835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm NPR2
T1134.3835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm CTES
T1134.0835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm
T1134.1835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm ES
T1134.2835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm NPR2
T1134.3835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm CTES
T1134.0835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm
T1134.1835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm ES

TI134.2835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm NPR2
TI134.3835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm CTES
TI134.0010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM
TI134.1010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM ES
TI134.2010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM CTES
TI134.0010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM
TI134.1010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM ES
TI134.2010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM CTES
TI134.0015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM
TI134.1015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM ES
TI134.2015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM NPR2
TI134.3015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM CTES
TI134.0015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM
TI134.1015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM ES
TI134.2015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM NPR2
TI134.3015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM CTES
TI134.0020.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 25,0MM
TI134.1020.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 25,0MM ES
TI134.2020.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3020.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 25,0MM CTES
TI134.0020.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 35,0MM
TI134.1020.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 35,0MM ES
TI134.2020.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3020.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 35,0MM CTES
TI134.0025.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 25,0MM
TI134.1025.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 25,0MM ES
TI134.2025.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 25,0MM NPR2
TI134.3025.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 25,0MM CTES
TI134.0025.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 35,0MM
TI134.1025.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 35,0MM ES
TI134.2025.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 35,0MM NPR2
TI134.3025.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 35,0MM CTES
TI134.0030.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 25,0MM

TI134.1030.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 25,0MM ES
TI134.2030.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3030.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 25,0MM CTES
TI134.0030.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 35,0MM
TI134.1030.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 35,0MM ES
TI134.2030.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3030.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 35,0MM CTES
TI134.0035.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 25,0MM
TI134.1035.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 25,0MM ES
TI134.2035.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 25,0MM NPR2
TI134.3035.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 25,0MM CTES
TI134.0035.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 35,0MM
TI134.1035.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 35,0MM ES
TI134.2035.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 35,0MM NPR2
TI134.3035.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 35,0MM CTES
TI134.0040.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 25,0MM
TI134.1040.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 25,0MM ES
TI134.2040.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3040.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 25,0MM CTES
TI134.0040.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 35,0MM
TI134.1040.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 35,0MM ES
TI134.2040.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3040.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 35,0MM CTES
TI134.0045.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 25,0MM
TI134.1045.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 25,0MM ES
TI134.2045.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 25,0MM NPR2
TI134.3045.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 25,0MM CTES
TI134.0045.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 35,0MM
TI134.1045.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 35,0MM ES
TI134.2045.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 35,0MM NPR2
TI134.3045.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 35,0MM CTES
TI134.0050.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 25,0MM
TI134.1050.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 25,0MM ES
TI134.2050.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3050.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 25,0MM CTES
TI134.0050.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 35,0MM

TI134.1050.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 35,0MM ES
TI134.2050.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3050.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 35,0MM CTES
TI134.0055.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 25,0MM
TI134.1055.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 25,0MM ES
TI134.2055.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 25,0MM NPR2
TI134.3055.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 25,0MM CTES
TI134.0055.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 35,0MM
TI134.1055.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 35,0MM ES
TI134.2055.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 35,0MM NPR2
TI134.3055.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 35,0MM CTES
TI134.0060.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 25,0MM
TI134.1060.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 25,0MM ES
TI134.2060.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3060.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 25,0MM CTES
TI134.0060.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 35,0MM
TI134.1060.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 35,0MM ES
TI134.2060.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3060.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 35,0MM CTES
TI134.0065.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 25,0MM
TI134.1065.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 25,0MM ES
TI134.2065.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 25,0MM NPR2
TI134.3065.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 25,0MM CTES
TI134.0065.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 35,0MM
TI134.1065.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 35,0MM ES
TI134.2065.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 35,0MM NPR2
TI134.3065.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 35,0MM CTES
TI134.0070.025	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 25,0MM
TI134.1070.025	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 25,0MM ES
TI134.2070.025	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3070.025	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 25,0MM CTES
TI134.0070.035	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 35,0MM
TI134.1070.035	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 35,0MM ES
TI134.2070.035	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3070.035	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 35,0MM CTES
TI134.0218.025	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 25,0MM

TI134.1218.025	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 25,0MM ES
TI134.2218.025	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 25,0MM NPR2
TI134.3218.025	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 25,0MM CTES
TI134.0218.035	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 35,0MM
TI134.1218.035	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 35,0MM ES
TI134.2218.035	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 35,0MM NPR2
TI134.3218.035	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 35,0MM CTES
TI134.0218.045	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 45,0MM
TI134.1218.045	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 45,0MM ES
TI134.2218.045	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 45,0MM NPR2
TI134.3218.045	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 45,0MM CTES
TI134.0218.055	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 55,0MM
TI134.1218.055	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 55,0MM ES
TI134.2218.055	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 55,0MM NPR2
TI134.3218.055	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 55,0MM CTES
TI134.0218.070	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 70,0MM
TI134.1218.070	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 70,0MM ES
TI134.2218.070	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 70,0MM NPR2
TI134.3218.070	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 70,0MM CTES
TI134.0218.080	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 80,0MM
TI134.1218.080	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 80,0MM ES
TI134.2218.080	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 80,0MM NPR2
TI134.3218.080	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 80,0MM CTES
TI134.0218.095	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 95,0MM
TI134.1218.095	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 95,0MM ES
TI134.2218.095	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 95,0MM NPR2
TI134.3218.095	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 95,0MM CTES
TI134.0218.100	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 100,0MM
TI134.1218.100	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 100,0MM ES
TI134.2218.100	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 100,0MM NPR2
TI134.3218.100	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 100,0MM CTES
TI134.0218.125	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 125,0MM
TI134.1218.125	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 125,0MM ES
TI134.2218.125	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 125,0MM NPR2
TI134.3218.125	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 125,0MM CTES
TI134.0218.150	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 150,0MM

TI134.1218.150	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 150,0MM ES
TI134.2218.150	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 150,0MM NPR2
TI134.3218.150	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 150,0MM CTES
TI134.0218.180	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 180,0MM
TI134.1218.180	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 180,0MM ES
TI134.2218.180	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 180,0MM NPR2
TI134.3218.180	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 180,0MM CTES
TI134.0222.025	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 25,0MM
TI134.1222.025	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 25,0MM ES
TI134.2222.025	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 25,0MM NPR2
TI134.3222.025	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 25,0MM CTES
TI134.0222.035	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 35,0MM
TI134.1222.035	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 35,0MM ES
TI134.2222.035	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 35,0MM NPR2
TI134.3222.035	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 35,0MM CTES
TI134.0222.045	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 45,0MM
TI134.1222.045	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 45,0MM ES
TI134.2222.045	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 45,0MM NPR2
TI134.3222.045	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 45,0MM CTES
TI134.0222.055	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 55,0MM
TI134.1222.055	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 55,0MM ES
TI134.2222.055	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 55,0MM NPR2
TI134.3222.055	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 55,0MM CTES
TI134.0222.070	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 70,0MM
TI134.1222.070	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 70,0MM ES
TI134.2222.070	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 70,0MM NPR2
TI134.3222.070	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 70,0MM CTES
TI134.0222.080	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 80,0MM
TI134.1222.080	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 80,0MM ES
TI134.2222.080	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 80,0MM NPR2
TI134.3222.080	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 80,0MM CTES
TI134.0222.095	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 95,0MM
TI134.1222.095	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 95,0MM ES
TI134.2222.095	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 95,0MM NPR2
TI134.3222.095	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 95,0MM CTES
TI134.0222.100	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 100,0MM

TI134.1222.100	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 100,0MM ES
TI134.2222.100	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 100,0MM NPR2
TI134.3222.100	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 100,0MM CTES
TI134.0222.125	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 125,0MM
TI134.1222.125	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 125,0MM ES
TI134.2222.125	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 125,0MM NPR2
TI134.3222.125	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 125,0MM CTES
TI134.0222.150	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 150,0MM
TI134.1222.150	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 150,0MM ES
TI134.2222.150	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 150,0MM NPR2
TI134.3222.150	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 150,0MM CTES
TI134.0222.180	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 180,0MM
TI134.1222.180	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 180,0MM ES
TI134.2222.180	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 180,0MM NPR2
TI134.3222.180	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 180,0MM CTES
TI134.0250.025	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 25,0MM
TI134.1250.025	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 25,0MM ES
TI134.2250.025	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3250.025	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 25,0MM CTES
TI134.0250.035	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 35,0MM
TI134.1250.035	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 35,0MM ES
TI134.2250.035	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3250.035	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 35,0MM CTES
TI134.0270.025	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 25,0MM
TI134.1270.025	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 25,0MM ES
TI134.2270.025	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3270.025	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 25,0MM CTES
TI134.0270.035	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 35,0MM
TI134.1270.035	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 35,0MM ES
TI134.2270.035	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3270.035	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 35,0MM CTES
TI134.0318.025	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 25,0MM
TI134.1318.025	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 25,0MM ES
TI134.2318.025	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 25,0MM NPR2
TI134.3318.025	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 25,0MM CTES
TI134.0318.035	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 35,0MM

TI134.1318.035	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 35,0MM ES
TI134.2318.035	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 35,0MM NPR2
TI134.3318.035	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 35,0MM CTES
TI134.0318.045	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 45,0MM
TI134.1318.045	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 45,0MM ES
TI134.2318.045	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 45,0MM NPR2
TI134.3318.045	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 45,0MM CTES
TI134.0318.055	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 55,0MM
TI134.1318.055	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 55,0MM ES
TI134.2318.055	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 55,0MM NPR2
TI134.3318.055	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 55,0MM CTES
TI134.0318.070	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 70,0MM
TI134.1318.070	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 70,0MM ES
TI134.2318.070	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 70,0MM NPR2
TI134.3318.070	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 70,0MM CTES
TI134.0318.080	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 80,0MM
TI134.1318.080	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 80,0MM ES
TI134.2318.080	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 80,0MM NPR2
TI134.3318.080	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 80,0MM CTES
TI134.0318.095	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 95,0MM
TI134.1318.095	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 95,0MM ES
TI134.2318.095	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 95,0MM NPR2
TI134.3318.095	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 95,0MM CTES
TI134.0318.100	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 100,0MM
TI134.1318.100	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 100,0MM ES
TI134.2318.100	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 100,0MM NPR2
TI134.3318.100	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 100,0MM CTES
TI134.0318.115	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 115,0MM
TI134.1318.115	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 115,0MM ES
TI134.2318.115	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 115,0MM NPR2
TI134.3318.115	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 115,0MM CTES
TI134.0318.130	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 130,0MM
TI134.1318.130	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 130,0MM ES
TI134.2318.130	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 130,0MM NPR2
TI134.3318.130	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 130,0MM CTES
TI134.0318.150	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 150,0MM

TI134.1318.150	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 150,0MM ES
TI134.2318.150	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 150,0MM NPR2
TI134.3318.150	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 150,0MM CTES
TI134.0322.025	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 25,0MM
TI134.1322.025	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 25,0MM ES
TI134.2322.025	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 25,0MM NPR2
TI134.3322.025	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 25,0MM CTES
TI134.0322.035	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 35,0MM
TI134.1322.035	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 35,0MM ES
TI134.2322.035	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 35,0MM NPR2
TI134.3322.035	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 35,0MM CTES
TI134.0322.045	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 45,0MM
TI134.1322.045	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 45,0MM ES
TI134.2322.045	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 45,0MM NPR2
TI134.3322.045	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 45,0MM CTES
TI134.0322.055	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 55,0MM
TI134.1322.055	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 55,0MM ES
TI134.2322.055	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 55,0MM NPR2
TI134.3322.055	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 55,0MM CTES
TI134.0322.070	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 70,0MM
TI134.1322.070	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 70,0MM ES
TI134.2322.070	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 70,0MM NPR2
TI134.3322.070	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 70,0MM CTES
TI134.0322.080	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 80,0MM
TI134.1322.080	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 80,0MM ES
TI134.2322.080	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 80,0MM NPR2
TI134.3322.080	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 80,0MM CTES
TI134.0322.095	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 95,0MM
TI134.1322.095	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 95,0MM ES
TI134.2322.095	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 95,0MM NPR2
TI134.3322.095	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 95,0MM CTES
TI134.0322.100	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 100,0MM
TI134.1322.100	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 100,0MM ES
TI134.2322.100	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 100,0MM NPR2
TI134.3322.100	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 100,0MM CTES
TI134.0322.115	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 115,0MM

TI134.1322.115	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 115,0MM ES
TI134.2322.115	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 115,0MM NPR2
TI134.3322.115	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 115,0MM CTES
TI134.0322.130	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 130,0MM
TI134.1322.130	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 130,0MM ES
TI134.2322.130	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 130,0MM NPR2
TI134.3322.130	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 130,0MM CTES
TI134.0322.150	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 150,0MM
TI134.1322.150	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 150,0MM ES
TI134.2322.150	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 150,0MM NPR2
TI134.3322.150	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 150,0MM CTES
TI134.0340.025	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 25,0MM
TI134.1340.025	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 25,0MM ES
TI134.2340.025	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3340.025	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 25,0MM CTES
TI134.0340.035	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 35,0MM
TI134.1340.035	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 35,0MM ES
TI134.2340.035	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3340.035	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 35,0MM CTES
TI134.0350.025	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 25,0MM
TI134.1350.025	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 25,0MM ES
TI134.2350.025	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3350.025	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 25,0MM CTES
TI134.0350.035	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 35,0MM
TI134.1350.035	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 35,0MM ES
TI134.2350.035	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3350.035	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 35,0MM CTES
TI134.0414.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 25,0MM
TI134.1414.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 25,0MM ES
TI134.2414.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 25,0MM NPR2
TI134.3414.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 25,0MM CTES
TI134.0414.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 35,0MM
TI134.1414.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 35,0MM ES
TI134.2414.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 35,0MM NPR2
TI134.3414.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 35,0MM CTES
TI134.0422.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 25,0MM

TI134.1422.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 25,0MM ES
TI134.2422.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 25,0MM NPR2
TI134.3422.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 25,0MM CTES
TI134.0422.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 35,0MM
TI134.1422.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 35,0MM ES
TI134.2422.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 35,0MM NPR2
TI134.3422.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 35,0MM CTES
TI134.0510.025	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 25,0MM
TI134.1510.025	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 25,0MM ES
TI134.2510.025	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 25,0MM NPR2
TI134.3510.025	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 25,0MM CTES
TI134.0510.035	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 35,0MM
TI134.1510.035	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 35,0MM ES
TI134.2510.035	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 35,0MM NPR2
TI134.3510.035	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 35,0MM CTES
TI134.0512.025	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 25,0MM
TI134.1512.025	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 25,0MM ES
TI134.2512.025	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 25,0MM NPR2
TI134.3512.025	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 25,0MM CTES
TI134.0512.035	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 35,0MM
TI134.1512.035	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 35,0MM ES
TI134.2512.035	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 35,0MM NPR2
TI134.3512.035	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 35,0MM CTES
TI134.0516.025	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 25,0MM
TI134.1516.025	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 25,0MM ES
TI134.2516.025	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 25,0MM NPR2
TI134.3516.025	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 25,0MM CTES
TI134.0516.035	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 35,0MM
TI134.1516.035	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 35,0MM ES
TI134.2516.035	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 35,0MM NPR2
TI134.3516.035	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 35,0MM CTES
TI134.0521.025	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 25,0MM
TI134.1521.025	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 25,0MM ES
TI134.2521.025	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 25,0MM NPR2
TI134.3521.025	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 25,0MM CTES
TI134.0521.035	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 35,0MM

TI134.1521.035	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 35,0MM ES
TI134.2521.035	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 35,0MM NPR2
TI134.3521.035	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 35,0MM CTES
TI134.0525.025	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 25,0MM
TI134.1525.025	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 25,0MM ES
TI134.2525.025	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 25,0MM NPR2
TI134.3525.025	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 25,0MM CTES
TI134.0535.035	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 35,0MM
TI134.1535.035	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 35,0MM ES
TI134.2525.035	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 35,0MM NPR2
TI134.3525.035	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 35,0MM CTES
TI134.0618.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM
TI134.1618.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM ES
TI134.2618.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM NPR2
TI134.3618.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM CTES
TI134.0618.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM
TI134.1618.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM ES
TI134.2618.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM NPR2
TI134.3618.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM CTES
TI134.0621.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM
TI134.1621.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM ES
TI134.2621.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM NPR2
TI134.3621.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM CTES
TI134.0621.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM
TI134.1621.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM ES
TI134.2621.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM NPR2
TI134.3621.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM CTES
TI134.0632.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM
TI134.1632.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM ES
TI134.2632.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM NPR2
TI134.3632.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM CTES
TI134.0632.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM
TI134.1632.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM ES
TI134.2632.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM NPR2
TI134.3632.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM CTES
TI134.0718.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM

TI134.1718.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM ES
TI134.2718.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM NPR2
TI134.3718.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM CTES
TI134.0718.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM
TI134.1718.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM ES
TI134.2718.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM NPR2
TI134.3718.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM CTES
TI134.0721.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM
TI134.1721.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM ES
TI134.2721.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM NPR2
TI134.3721.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM CTES
TI134.0721.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM
TI134.1721.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM ES
TI134.2721.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM NPR2
TI134.3721.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM CTES
TI134.0732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM
TI134.1732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM ES
TI134.2732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM NPR2
TI134.3732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM CTES
TI134.0732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM
TI134.1732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM ES
TI134.2732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM NPR2
TI134.3732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM CTES

COMPOSIÇÃO

O materiais selecionados para composição se encontram listados abaixo:

Código	Descrição do Instrumental (Especificação)	Matéria Prima
	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico

TI134.0010.045		ASTM F899
TI134.1010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm	
TI134.1010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico

TI134.0010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm	ASTM F899
TI134.1010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm CTES	
TI134.0020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm CTES	
TI134.0020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

	NPR2	
TI134.3025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm	
TI134.1030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

	CTES	
TI134.0035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm CTES	
TI134.0035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

	NPR2	
TI134.3040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico

TI134.2045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm NPR2	ASTM F899
TI134.3045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico

TI134.2045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm NPR2	ASTM F899
TI134.3045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm ES	
TI134.2050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm ES	
TI134.2050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm	
TI134.1055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

	CTES	
TI134.0060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico

TI134.3065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm CTES	ASTM F899
TI134.0065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico

TI134.3065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm CTES	ASTM F899
TI134.0065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm	
TI134.1070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm CTES	
TI134.0250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm NPR2	
TI134.3250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm ES	
TI134.2270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico

TI134.0340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm	ASTM F899
TI134.1340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

	CTES	
TI134.0340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm NPR2	
TI134.3350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm ES	
TI134.2350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm	
TI134.1414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm CTES	
TI134.0414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm NPR2	
TI134.3414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm ES	
TI134.2422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm	
TI134.1422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm CTES	
TI134.0422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm NPR2	
TI134.3422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm NPR2	
TI134.3510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm NPR2	
TI134.3510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

	ES	
TI134.2512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm	
TI134.1516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

	CTES	
TI134.0521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm CTES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm ES	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm NPR2	
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

	NPR2	
TI134.3525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm NPR2	
TI134.3525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm ES	
TI134.2809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm NPR2	
TI134.3809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm CTES	
TI134.0809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico

TI134.1810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm ES	ASTM F899
TI134.2810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico

TI134.3810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm CTES	ASTM F899
TI134.0810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico

TI134.1810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm ES	ASTM F899
TI134.2810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico

TI134.3811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm CTES	ASTM F899
TI134.0811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm ES	
TI134.2811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm CTES	
TI134.0811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm ES	
TI134.2812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm CTES	
TI134.0812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm ES	
TI134.2812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm CTES	
TI134.0813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm	
TI134.1813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm NPR2	
TI134.3813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm	
TI134.1814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm NPR2	
TI134.3814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm	
TI134.1814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm CTES	
TI134.0815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm ES	
TI134.2815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm CTES	
TI134.0815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm ES	
TI134.2816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm CTES	
TI134.0816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm ES	
TI134.2816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm CTES	
TI134.0817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm ES	
TI134.2817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm CTES	
TI134.0817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm ES	
TI134.2817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm CTES	
TI134.0818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm ES	
TI134.2818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm CTES	
TI134.0818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm ES	
TI134.2819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm CTES	
TI134.0819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm ES	
TI134.2820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm CTES	
TI134.0820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm ES	
TI134.2820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm CTES	
TI134.0821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm ES	
TI134.2821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm CTES	
TI134.0821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm ES	
TI134.2822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm CTES	
TI134.0822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm ES	
TI134.2822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm CTES	
TI134.0823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm ES	
TI134.2823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm CTES	
TI134.0823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm ES	
TI134.2823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm CTES	
TI134.0827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm ES	
TI134.2827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm CTES	
TI134.0827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm ES	
TI134.2832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm CTES	
TI134.0832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm ES	
TI134.2832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm CTES	
TI134.0835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm ES	
TI134.2835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
		Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm CTES	
TI134.0835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico

		ASTM F899
TI134.2015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0020.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1020.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2020.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3020.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0020.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1020.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2020.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3020.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0025.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1025.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2025.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3025.025	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0025.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1025.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2025.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3025.035	FRESA ESFÉRICA Ø2,5 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0030.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1030.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2030.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3030.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0030.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1030.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2030.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3030.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0035.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1035.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2035.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3035.025	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0035.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1035.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2035.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3035.035	FRESA ESFÉRICA Ø3,5 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0040.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1040.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2040.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3040.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0040.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1040.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2040.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3040.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0045.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1045.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2045.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 25,0MM	Aço Inoxidável

	NPR2	Martensítico ASTM F899
TI134.3045.025	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0045.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1045.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2045.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3045.035	FRESA ESFÉRICA Ø4,5 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0050.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1050.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2050.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3050.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0050.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1050.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2050.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3050.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0055.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1055.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2055.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3055.025	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0055.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1055.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2055.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3055.035	FRESA ESFÉRICA Ø5,5 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0060.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1060.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2060.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico

		ASTM F899
TI134.3060.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0060.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1060.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2060.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3060.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0065.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1065.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2065.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3065.025	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0065.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1065.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2065.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3065.035	FRESA ESFÉRICA Ø6,5 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0070.025	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1070.025	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2070.025	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3070.025	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0070.035	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1070.035	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2070.035	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3070.035	FRESA ESFÉRICA Ø7,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0218.025	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.025	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.025	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3218.025	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0218.035	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.035	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.035	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3218.035	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0218.045	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 45,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.045	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 45,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.045	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 45,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3218.045	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 45,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0218.055	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 55,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.055	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 55,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.055	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 55,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3218.055	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 55,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0218.070	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 70,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.070	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 70,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.070	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 70,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3218.070	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 70,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0218.080	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 80,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.080	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 80,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.080	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 80,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3218.080	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 80,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0218.095	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 95,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.095	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 95,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.095	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 95,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3218.095	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 95,0MM	Aço Inoxidável

	CTES	Martensítico ASTM F899
TI134.0218.100	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 100,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.100	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 100,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.100	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 100,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3218.100	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 100,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0218.125	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 125,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.125	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 125,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.125	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 125,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3218.125	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 125,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0218.150	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 150,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.150	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 150,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.150	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 150,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3218.150	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 150,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0218.180	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 180,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1218.180	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 180,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2218.180	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 180,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3218.180	FRESA TIPO PERA Ø1,8 X 180,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0222.025	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.025	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.025	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.025	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0222.035	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.035	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.035	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.035	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico

		ASTM F899
TI134.0222.045	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 45,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.045	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 45,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.045	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 45,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.045	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 45,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0222.055	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 55,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.055	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 55,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.055	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 55,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.055	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 55,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0222.070	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 70,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.070	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 70,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.070	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 70,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.070	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 70,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0222.080	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 80,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.080	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 80,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.080	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 80,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.080	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 80,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0222.095	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 95,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.095	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 95,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.095	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 95,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.095	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 95,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0222.100	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 100,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.100	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 100,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.100	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 100,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.100	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 100,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.0222.125	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 125,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.125	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 125,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.125	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 125,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.125	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 125,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0222.150	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 150,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.150	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 150,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.150	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 150,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.150	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 150,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0222.180	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 180,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1222.180	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 180,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2222.180	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 180,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3222.180	FRESA TIPO PERA Ø2,2 X 180,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0250.025	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.025	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2250.025	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3250.025	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0250.035	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1250.035	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2250.035	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3250.035	FRESA TIPO PERA Ø5,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.025	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1270.025	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2270.025	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.025	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0270.035	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável

		Martensítico ASTM F899
TI134.1270.035	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2270.035	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3270.035	FRESA TIPO PERA Ø7,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.025	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1318.025	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.025	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.025	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.035	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1318.035	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.035	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.035	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.045	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 45,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1318.045	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 45,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.045	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 45,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.045	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 45,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.055	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 55,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1318.055	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 55,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.055	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 55,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.055	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 55,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.070	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 70,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1318.070	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 70,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.070	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 70,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.070	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 70,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.080	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 80,0MM	Aço Inoxidável Martensítico

		ASTM F899
TI134.1318.080	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 80,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.080	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 80,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.080	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 80,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.095	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 95,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1318.095	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 95,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.095	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 95,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.095	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 95,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.100	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 100,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1318.100	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 100,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.100	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 100,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.100	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 100,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.115	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 115,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1318.115	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 115,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.115	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 115,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.115	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 115,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.130	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 130,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1318.130	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 130,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.130	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 130,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.130	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 130,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0318.150	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 150,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1318.150	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 150,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2318.150	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 150,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3318.150	FRESA TIPO EGG Ø1,8 X 150,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.025	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.1322.025	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2322.025	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.025	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.035	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1322.035	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2322.035	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.035	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.045	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 45,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1322.045	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 45,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2322.045	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 45,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.045	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 45,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.055	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 55,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1322.055	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 55,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2322.055	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 55,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.055	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 55,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.070	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 70,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1322.070	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 70,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2322.070	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 70,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.070	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 70,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.080	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 80,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1322.080	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 80,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2322.080	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 80,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.080	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 80,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.095	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 95,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1322.095	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 95,0MM	Aço Inoxidável

	ES	Martensítico ASTM F899
TI134.2322.095	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 95,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.095	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 95,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.100	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 100,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1322.100	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 100,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2322.100	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 100,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.100	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 100,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.115	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 115,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1322.115	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 115,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2322.115	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 115,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.115	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 115,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.130	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 130,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1322.130	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 130,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2322.130	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 130,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.130	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 130,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0322.150	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 150,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1322.150	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 150,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2322.150	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 150,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3322.150	FRESA TIPO EGG Ø2,2 X 150,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0340.025	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1340.025	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2340.025	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3340.025	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0340.035	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1340.035	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico

		ASTM F899
TI134.2340.035	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3340.035	FRESA TIPO EGG Ø4,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.025	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1350.025	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2350.025	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3350.025	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0350.035	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1350.035	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2350.035	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3350.035	FRESA TIPO EGG Ø5,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0414.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1414.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2414.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3414.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0414.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1414.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2414.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3414.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø1,4 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0422.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1422.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2422.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3422.025	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0422.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1422.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.2422.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3422.035	FRESA OSTEOTOMIA DE LINDEMANN Ø2,2 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.025	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.025	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2510.025	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3510.025	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0510.035	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1510.035	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2510.035	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3510.035	FRESA CÔNICA Ø1,0 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.025	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1512.025	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2512.025	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.025	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0512.035	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1512.035	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2512.035	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3512.035	FRESA CÔNICA Ø1,2 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0516.025	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1516.025	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.025	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3516.025	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0516.035	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1516.035	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2516.035	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 35,0MM	Aço Inoxidável

	NPR2	Martensítico ASTM F899
TI134.3516.035	FRESA CÔNICA Ø1,6 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0521.025	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.025	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.025	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3521.025	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0521.035	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1521.035	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2521.035	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3521.035	FRESA CÔNICA Ø2,1 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0525.025	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1525.025	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2525.025	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3525.025	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0535.035	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1535.035	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2525.035	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3525.035	FRESA CÔNICA Ø2,5 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0618.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1618.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3618.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0618.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1618.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2618.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico

		ASTM F899
TI134.3618.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0621.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1621.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2621.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3621.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0621.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1621.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2621.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3621.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0632.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1632.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2632.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.025	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0632.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1632.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2632.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3632.035	FRESA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1718.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2718.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3718.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0718.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1718.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2718.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

TI134.3718.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø1,8 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0721.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2721.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3721.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0721.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1721.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2721.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3721.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø2,1 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.0732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.1732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.2732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM NPR2	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899
TI134.3732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM CTES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899

INDICAÇÃO E FINALIDADE

Os modelos comerciais que integram o **Brocas e Fresas Cirúrgicas Recoberta com DLC Estéreis** possuem a função de auxiliar os procedimentos cirurgicos.

Código	Descrição do Instrumental (Especificação)	Indicação de uso
TI134.0010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Ti134.1010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Ti134.1010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Ti134.1010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm ES	
Ti134.2010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.1015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.1015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Ti134.0015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm	
Ti134.1015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Ti134.0020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Ti134.0020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

	CTES	
T1134.0025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas Recobertas com DLC Estéreis - Techimport

T1134.3025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.3025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.1030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm ES	
T1134.2030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.1030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Ti134.0035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.0035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm	
TI134.1035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.0040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

	CTES	
Ti134.0040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Ti134.3045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm CTES	
Ti134.0045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Ti134.3045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm CTES	
Ti134.0045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.3045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

	NPR2	
T1134.3050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm NPR2	
T1134.3050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.2050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

	ES	
TI134.2055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.1060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.1060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.0060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm	
TI134.1060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.0065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.3065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Ti134.1070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm ES	
Ti134.2070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.1070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.2070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.3070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Ti134.0250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.1250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm	
T1134.1250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

	CTES	
T1134.0250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.3250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.2270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm NPR2	
TI134.3270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.1270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm ES	
TI134.2270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.1340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.0340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm	
TI134.1340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

	CTES	
TI134.0340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.3350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.2350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.2350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.1414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.0414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.3414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.1422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.0422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.3422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas Recobertas com DLC Estéreis - Techimport

TI134.3510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

	NPR2	
TI134.3510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.2510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas Recobertas com DLC Estéreis - Techimport

TI134.2512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

	ES	
TI134.2512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.1512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.0516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.0516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm	
TI134.1516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.0516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

	CTES	
T1134.0521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas Recobertas com DLC Estéreis - Techimport

TI134.3521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.3521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

	NPR2	
T1134.3525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.2525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm NPR2	
TI134.3525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.2525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

T1134.1618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

T1134.0618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.3618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

T1134.2621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

T1134.1621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.0621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

T1134.3621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

T1134.2632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

T1134.1632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

T1134.0632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.1718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.3718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.2718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.1718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.0721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.3721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.2721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.1732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.0732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.3732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

TI134.2732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.1750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.2750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.3750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
TI134.0750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.

T1134.1750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.2750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.3750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para craniotomia.
T1134.0809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.1809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.2809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.3809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.1810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.3810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.1810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.3811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm NPR2	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm CTES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm ES	
		Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.2811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.0811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.0812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.2812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.1813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.3813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.1814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

TI134.3814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.1814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.2814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.3814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
TI134.0814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.1814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

Tl134.0816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.2816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.3816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.0816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
Tl134.1816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.2835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar

T1134.0835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.1835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.2835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.3835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades buco maxilar
T1134.0010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.1010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.2010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.3010.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 25,0MM CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.0010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.1010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.2010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.3010.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,0 X 35,0MM CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.0015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.1015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.2015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.3015.025	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 25,0MM CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.0015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.1015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
T1134.2015.035	FRESA ESFÉRICA Ø1,5 X 35,0MM NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

	CTES	
TI134.0732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.1732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.2732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.3732.025	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 25,0MM CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.0732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.1732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM ES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.2732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM NPR2	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.3732.035	FRESA CÔNICA PARA CRANIOTOMIA Ø3,18 X 35,0MM CTES	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

CONTRAINDICAÇÃO

Não se Aplica.

ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

Os instrumentais aqui descritos devem ser utilizados apenas com produtos Techimport.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido na condição Estéril, em Óxido de Etileno.

MARCAÇÃO

A identificação do produto é feita através de gravação a laser que deve ser gravado conforme orientação de gravação contida no desenho técnico do produto.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura Máx. de 25°C e umidade relativa de 75% e ao abrigo da luz solar direta.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-

PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO

Prazo de validade é de 3 anos a partir da data de esterilização, após aberto o mesmo deve ser descartado caso não seja utilizado imediatamente.

DESCARTE DO DISPOSITIVO

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no site da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no site da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

FORMA DE APRESENTAÇÃO

O **Brocas e Fresas Cirúrgicas Recobertas com DLC Estéreis - Techimport** é fornecido na condição esteril, comercializado em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. As embalagens são identificadas com uma etiqueta RFID conforme indicação abaixo:

Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP
 R:OD WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) - LOTE B-8 - JD ANHANQUERA - RIO CLARO - SP
 CNPJ:16524734000147 - Fone: +55 (19)3622-9600 - SAC: +55 (19)3622-9600
 E.T.: Eduarico Henrique Silva Wolf - CREA 6070058408 - Instrução de Uso pelo Site <http://www.techimportimplantes.com.br>

STERILE EO


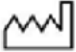

Nome Técnico:

Nome Comercial:

Modelo Comercial:

Registro ANVISA n. _____ Qtde.: un. Proibido Reprocessar / Uso Único










Material:

Ref:   










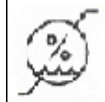


Lote: SN: _____

Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instruções de Uso - Revisão - Consulte pelo Site

PRODUTO ESTERIL - GAS OXIDO DE ETILENO

Legenda da Simbologia

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas Recobertas com DLC Estéreis - Techimport

Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para: **qualidade@techimportimplantes.com.br** ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:

www.techimportimplantes.com.br

Revisão: 01
Emissão: 2022

EFEITOS ADVERSOS

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500