

Nome Técnico: Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados
Nome Comercial: Sistema de Placas Osteottech-Ped

Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como a relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

O Sistema de Placas Osteottech-Ped é um sistema de fixação rígida de placas especiais para grandes e pequenos fragmentos, com indicação para osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal e de Tíbia Distal e Proximal de crianças e jovens, correção gradual de deformidades angulares no fêmur de crianças em crescimento e osteotomias.

São compostos por placas e parafusos. As placas possuem orifícios para introdução dos parafusos. A matéria-prima utilizada na fabricação dos modelos comerciais que compõe este sistema, estão especificados nas tabelas 1 e 2.



O acabamento superficial do produto médico é obtido através do processo de lixamento e polimento mecânico.


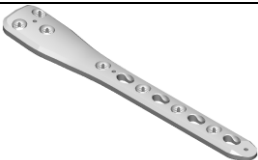

O tratamento superficial empregado é obtido através do processo de eletrocoloração.


O **Sistema de Placas Osteottech-Ped** apresentam-se nos modelos e dimensões descritos abaixo, que permitem ao profissional escolher o modelo mais adequado a cada situação.



TABELA DE CÓDIGOS E DESCRIÇÕES

Tabela 1: Relação de Modelos Comerciais – Placas que compõe o **Sistema de Placas Osteottech-Ped**

Código	Descrição	Matéria-prima	Imagem	Compatibilidade dimensional (usar com parafuso:
TI029.0903.000	Placa Pediátrica Femoral Proximal GAMA G 90° 11 Furos Sem Passo	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI029.2000.014	Placa quad-block de epifisiodese 14mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.6945.XXX TI002.2945.XXX TI002.6945.XXX TI001.0051.XXX
TI029.2000.016	Placa quad-block de epifisiodese 16mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.2000.018	Placa quad-block de epifisiodese 18mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.2000.020	Placa quad-block de epifisiodese 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.2000.022	Placa quad-block de epifisiodese 22mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.2000.024	Placa quad-block de epifisiodese 24mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.2000.026	Placa quad-block de epifisiodese 26mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.2000.028	Placa quad-block de epifisiodese 28mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.2000.030	Placa quad-block de epifisiodese 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.2000.032	Placa quad-block de epifisiodese 32mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.2000.034	Placa quad-block de epifisiodese 34mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.2000.036	Placa quad-block de epifisiodese 36mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI029.3000.012	Placa duo-block de epifisiodese 12mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.6945.XXX TI002.2945.XXX TI002.6945.XXX TI001.0051.XXX
TI029.3000.014	Placa duo-block de epifisiodese 14mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.3000.016	Placa duo-block de epifisiodese 16mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.3000.018	Placa duo-block de epifisiodese 18mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.3000.020	Placa duo-block de epifisiodese 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.3000.022	Placa duo-block de epifisiodese 22mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.3000.024	Placa duo-block de epifisiodese 24mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.3000.026	Placa duo-block de epifisiodese 26mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.4090.000	Placa Pediátrica Femoral Distal GAMA M 90° / 5° Abertura 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX
TI030.0002.080	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 02 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX
TI030.0003.080	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 03 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0004.080	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 04 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0005.080	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 05 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0006.080	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 06 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0007.080	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 07 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0008.080	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 08 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0009.080	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 09 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0010.080	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 10 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0002.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 02 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0003.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 03 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0004.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 04 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0005.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 05 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		


TI030.0006.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 06 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0007.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 07 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0008.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 08 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0009.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 09 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0010.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 10 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0002.120	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI030.0003.120	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0004.120	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0005.120	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0006.120	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0007.120	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0008.120	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0009.120	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0010.120	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0002.130	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0003.130	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0004.130	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0005.130	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0006.130	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0007.130	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0008.130	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0009.130	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0010.130	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		



TI030.0002.140	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI030.0003.140	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0004.140	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0005.140	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0006.140	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0007.140	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0008.140	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0009.140	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0010.140	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0002.150	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0003.150	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0004.150	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0005.150	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0006.150	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0007.150	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0008.150	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0009.150	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0010.150	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0402.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 02 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX
TI030.0403.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 03 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0404.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 04 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0405.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 05 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0406.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 06 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		



TI030.0407.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 07 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI030.1835.XXX
TI030.0408.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 08 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0409.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 09 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0410.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 10 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0602.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 02 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0602.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0602.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0603.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 03 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0603.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0603.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0604.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 04 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0604.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0604.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0605.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 05 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0605.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0605.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0606.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 06 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0606.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0606.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0607.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 07 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0607.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0607.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0608.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 08 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0608.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0608.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		


TI030.0609.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 09 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0609.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0609.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0610.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 10 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0610.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0610.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0802.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 02 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0802.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0802.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0803.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 03 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0803.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0803.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0804.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 04 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0804.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0804.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0805.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 05 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0805.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0805.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0806.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 06 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0806.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0806.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0807.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 07 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0807.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0807.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX



TI030.0808.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 08 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI030.0808.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0808.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0809.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 09 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0809.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0809.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0810.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 10 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0810.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0810.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1002.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 02 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1002.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1002.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1003.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 03 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1003.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1003.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1004.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 04 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1004.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1004.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1005.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 05 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1005.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1005.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 06 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		


TI030.1007.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 07 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1007.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1007.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1008.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 08 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1008.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1008.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1009.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 09 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1009.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1009.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal 10 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1202.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI030.1202.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 02 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1203.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1203.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 03 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1204.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1204.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 04 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1205.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1205.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 05 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1206.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1206.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 06 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1207.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		


TI030.1207.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 07 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1208.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1208.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 08 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1209.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1209.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 09 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1210.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1210.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal 10 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0002.080	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 02 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX
TI031.0003.080	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 03 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0004.080	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 04 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0005.080	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 05 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0006.080	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 06 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0007.080	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 07 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0008.080	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 08 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0009.080	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 09 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0010.080	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 10 Furos Sem Passo 80 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0002.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 02 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX
TI031.0003.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 03 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0004.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 04 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0005.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 05 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0006.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 06 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0007.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 07 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0008.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 08 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0009.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 09 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0010.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 10 Furos Sem Passo 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0002.120	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI031.0003.120	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0004.120	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0005.120	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0006.120	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0007.120	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0008.120	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0009.120	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0010.120	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0002.130	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0003.130	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0004.130	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0005.130	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0006.130	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0007.130	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX
TI031.0008.130	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0009.130	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0010.130	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0002.140	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX
TI031.0003.140	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0004.140	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0005.140	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0006.140	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI031.0007.140	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0008.140	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0009.140	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0010.140	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 140 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0002.150	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX
TI031.0003.150	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0004.150	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0005.150	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0006.150	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0007.150	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0008.150	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0009.150	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0010.150	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0002.121	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0003.121	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0004.121	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0005.121	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0006.121	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0007.121	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0008.121	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0009.121	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0010.121	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 120 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
				TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI001.6373.XXX TI002.0150.XXX

TI031.0002.131	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI002.6252.XXX TI002.6373.XXX
TI031.0003.131	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0004.131	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0005.131	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0006.131	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0007.131	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0008.131	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0009.131	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0010.131	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 130 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0002.151	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0003.151	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0004.151	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0005.151	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0006.151	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0007.151	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0008.151	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0009.151	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0010.151	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Sem Passo 150 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0402.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 02 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX
TI031.0403.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 03 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0404.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 04 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0405.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 05 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0406.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 06 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		


TI031.0407.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 07 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0408.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 08 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0409.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 09 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0410.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 10 Furos Passo 04mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0602.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 02 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX
TI031.0602.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0602.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0603.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 03 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0603.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0603.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0604.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 04 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0604.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0604.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0605.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 05 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0605.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0605.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0606.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 06 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0606.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0606.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0607.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 07 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0607.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0607.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0608.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 08 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0608.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0608.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		


TI031.0609.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 09 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0609.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0609.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0610.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 10 Furos Passo 06mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0610.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0610.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0802.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 02 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0802.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0802.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0803.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 03 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0803.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0803.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0804.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 04 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0804.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0804.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0805.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 05 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX
TI031.0805.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0805.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0806.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 06 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0806.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0806.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0807.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 07 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0807.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0807.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI031.0808.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 08 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0808.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0808.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0809.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 09 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0809.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0809.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0810.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 10 Furos Passo 08mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0810.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0810.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1002.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 02 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1002.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1002.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1003.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 03 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1003.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1003.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1004.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 04 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1004.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1004.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1005.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 05 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1005.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1005.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1006.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 06 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1006.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1006.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		



TI001.0150.XXX
TI001.6252.XXX
TI002.0150.XXX
TI002.6252.XXX

TI031.1007.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 07 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1007.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1007.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1008.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 08 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1008.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1008.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1009.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 09 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1009.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1009.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1010.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal 10 Furos Passo 10mm 90 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1010.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1010.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1202.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1202.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 02 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1203.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1203.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 03 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1204.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1204.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 04 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1205.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX
TI031.1205.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 05 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1206.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1206.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 06 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1207.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI031.1207.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 07 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1208.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1208.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 08 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1209.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1209.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 09 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1210.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1210.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal 10 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0602.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0150.XXX TI001.6252.XXX TI001.6373.XXX TI002.0150.XXX TI002.6252.XXX TI002.6373.XXX
TI031.0602.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0603.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0603.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0604.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0604.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0605.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0605.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0606.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0606.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0607.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0607.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0608.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0608.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0609.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI031.0609.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0610.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Passo 06mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0610.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Passo 06mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0802.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0802.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0803.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0803.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0804.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0804.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0805.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0805.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0806.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0806.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0807.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0807.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0808.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0808.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0809.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0809.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0810.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Passo 08mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0810.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Passo 08mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1002.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		





TI001.0150.XXX
TI001.6252.XXX
TI001.6373.XXX
TI002.0150.XXX
TI002.6252.XXX
TI002.6373.XXX



TI031.1003.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1004.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1005.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1006.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1007.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1008.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1009.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1010.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1010.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Passo 10mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1012.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1013.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1014.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1015.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1016.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1017.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1018.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1019.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Passo 10mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1202.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1202.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 02 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1203.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1203.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 03 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1204.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		



TI001.0150.XXX
TI001.6252.XXX
TI001.6373.XXX
TI002.0150.XXX
TI002.6252.XXX
TI002.6373.XXX

TI031.1204.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 04 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1205.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1205.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 05 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1206.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1206.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 06 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1207.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1207.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 07 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1208.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1208.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 08 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1209.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1209.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 09 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1210.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Passo 12mm 100 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1210.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal 10 Furos Passo 12mm 110 Graus	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.0905.220	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos 05mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI029.0905.225	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos 05mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.0905.230	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos 05mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.0905.235	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos 05mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.0905.240	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos 05mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.0905.320	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos 05mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.0905.325	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos 05mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.0905.330	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos 05mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.0905.335	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos 05mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		


TI029.0905.340	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos 05mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.220	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos sem passo 130 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.225	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos sem passo 130 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.230	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos sem passo 130 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.235	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos sem passo 130 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.240	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos sem passo 130 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.245	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos sem passo 130 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.250	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos sem passo 130 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.255	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos sem passo 130 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.260	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 2 furos sem passo 130 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.320	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI029.1300.325	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.330	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.335	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.340	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.345	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.350	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.355	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.360	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.420	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.425	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.430	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI029.1300.435	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI029.1300.440	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.445	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.450	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.455	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI029.1300.460	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.220	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI030.0906.225	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.230	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.235	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.240	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.245	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.250	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.255	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.260	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.220	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.225	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.230	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.235	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.240	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.245	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.250	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		


TI030.0908.255	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.260	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.220	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.225	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.230	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.235	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.240	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.245	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.250	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.255	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.260	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 2 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.320	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.325	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.330	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.335	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.340	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.345	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.350	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.355	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.360	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.320	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.325	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		






TI001.0135.XXX
TI001.6138.XXX
TI002.0135.XXX
TI002.6138.XXX
TI030.0635.XXX
TI030.1035.XXX
TI030.1435.XXX
TI030.1835.XXX

TI030.0908.330	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.335	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.340	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.345	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.350	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.355	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.360	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.320	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.325	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.330	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.335	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.340	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.345	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.350	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.355	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.360	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.420	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI030.0906.425	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.430	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.435	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.440	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.445	Placa Pediátrica 3,5 Proximal	4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		



TI030.0906.450	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.455	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0906.460	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.420	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.425	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.430	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.435	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.440	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.445	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.450	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.455	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0908.460	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 08mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.420	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.425	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.430	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.435	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.440	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.445	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.450	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.455	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.0910.460	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.320	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		

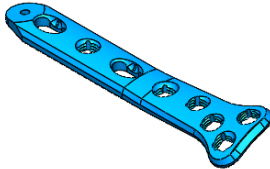
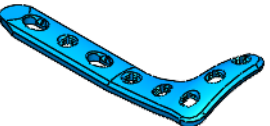
TI030.1006.325	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI030.1006.330	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.335	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.340	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.345	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.350	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.355	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.360	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.320	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.325	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.330	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.335	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.340	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.345	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.350	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.355	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1010.360	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.420	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.425	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.430	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.435	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1006.440	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		

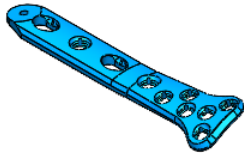
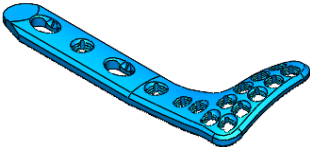
TI030.1006.445	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1006.450	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1006.455	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1006.460	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 06mm passo 100 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1010.420	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1010.425	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1010.430	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1010.435	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX		
TI030.1010.440	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1010.445	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1010.450	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1010.455	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1010.460	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos 10mm passo 100 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1300.330	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX TI030.0635.XXX TI030.1035.XXX TI030.1435.XXX TI030.1835.XXX
TI030.1300.335	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1300.340	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1300.345	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1300.350	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1300.355	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1300.360	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 3 furos sem passo 130 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1300.430	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				
TI030.1300.435	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136				

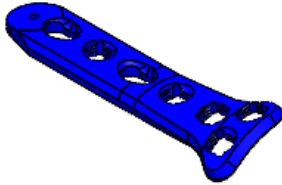
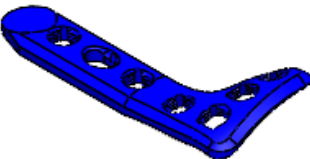
TI030.1300.440	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1300.445	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1300.450	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1300.455	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.1300.460	Placa Pediátrica 3,5 Proximal 4 furos sem passo 130 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.340	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX
TI031.0906.345	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.350	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.355	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.360	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.365	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.370	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.340	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.345	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.350	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.355	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.360	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.365	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.370	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.340	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.345	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.350	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		

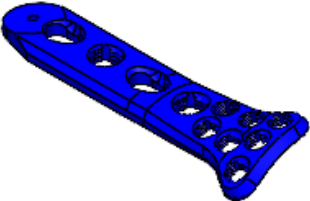
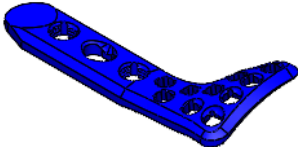
TI031.0914.355	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.360	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.365	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.370	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 3 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.440	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.445	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.450	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.455	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.460	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.465	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0906.470	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 06mm passo 90 Graus lâmina 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.440	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.445	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.450	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.455	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.460	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.465	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0910.470	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 10mm passo 90 Graus lâmina 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.440	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.445	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.450	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.455	Placa Pediátrica 5,0 Proximal 4 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX

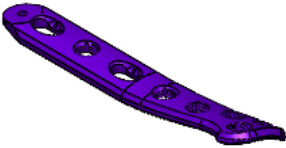

TI031.0914.460	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX
TI031.0914.465	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.0914.470	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos 14mm passo 90 Graus lâmina 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.340	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	3 furos sem passo 130 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI001.6138.XXX TI002.0135.XXX TI002.6138.XXX
TI031.1300.345	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	3 furos sem passo 130 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.350	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	3 furos sem passo 130 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.355	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	3 furos sem passo 130 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.360	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	3 furos sem passo 130 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.365	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	3 furos sem passo 130 Graus lâmina 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.370	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	3 furos sem passo 130 Graus lâmina 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.375	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	3 furos sem passo 130 Graus lâmina 75mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.380	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	3 furos sem passo 130 Graus lâmina 80mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.440	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos sem passo 130 Graus lâmina 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.445	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos sem passo 130 Graus lâmina 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.450	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos sem passo 130 Graus lâmina 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.455	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos sem passo 130 Graus lâmina 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.460	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos sem passo 130 Graus lâmina 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.465	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos sem passo 130 Graus lâmina 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.470	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos sem passo 130 Graus lâmina 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.475	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos sem passo 130 Graus lâmina 75mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.1300.480	Placa Pediátrica 5,0 Proximal	4 furos sem passo 130 Graus lâmina 80mm	Ti-6Al-4V ASTM F136		

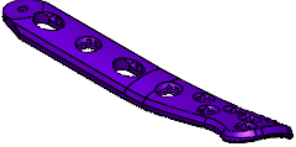

TI030.2000.102	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX
TI030.2000.103	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.104	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.105	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.106	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.107	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.108	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.109	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.110	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.102	Placa Pediátrica Tibial Distal Larga Média Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.103	Placa Pediátrica Tibial Distal Larga Média Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.104	Placa Pediátrica Tibial Distal Larga Média Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.105	Placa Pediátrica Tibial Distal Larga Média Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.106	Placa Pediátrica Tibial Distal Larga Média Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.107	Placa Pediátrica Tibial Distal Larga Média Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.108	Placa Pediátrica Tibial Distal Larga Média Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.109	Placa Pediátrica Tibial Distal Larga Média Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.110	Placa Pediátrica Tibial Distal Larga Média Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.102	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX
TI030.2100.103	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.104	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.105	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.106	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.107	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.108	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.109	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.110	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		

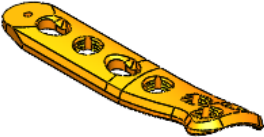
TI030.2200.102	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX TI001.0127.XXX TI002.0127.XXX
TI030.2200.103	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.104	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.105	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.106	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.107	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.108	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.109	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.110	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.102	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.103	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.104	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.105	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.106	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.107	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.108	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.109	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.110	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.102	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX TI001.0127.XXX TI002.0127.XXX
TI030.2300.103	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.104	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.105	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.106	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.107	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.108	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.109	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.110	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		

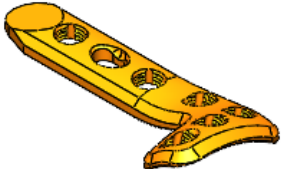
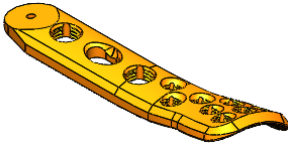
TI031.2000.102	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0145.XXX TI001.0150.XXX TI002.0145.XXX TI002.0150.XXX
TI031.2000.103	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.104	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.105	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.106	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.107	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.108	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.109	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.110	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.102	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.103	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.104	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.105	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.106	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.107	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.108	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.109	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.110	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.102	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0145.XXX TI001.0150.XXX TI002.0145.XXX TI002.0150.XXX
TI031.2100.103	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.104	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.105	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.106	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.107	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.108	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.109	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI031.2100.110	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.102	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0145.XXX TI001.0150.XXX TI002.0145.XXX TI002.0150.XXX TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX
TI031.2200.103	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.104	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.105	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.106	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.107	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.108	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.109	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.110	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.102	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.103	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.104	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.105	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.106	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.107	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.108	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.109	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.110	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.102	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Direita 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0145.XXX TI001.0150.XXX TI002.0145.XXX TI002.0150.XXX TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX
TI031.2300.103	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Direita 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.104	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Direita 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.105	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Direita 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.106	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Direita 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.107	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Direita 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.108	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Direita 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.109	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Direita 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI031.2300.110	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Direita 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.202	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX
TI030.2000.203	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.204	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.205	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.206	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.207	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.208	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.209	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2000.210	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.202	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Larga Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.203	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Larga Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.204	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Larga Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.205	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Larga Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.206	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Larga Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.207	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Larga Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.208	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Larga Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.209	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Larga Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2001.210	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Larga Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.202	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX
TI030.2100.203	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.204	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.205	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.206	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.207	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.208	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI030.2100.209	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2100.210	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.202	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX TI001.0127.XXX TI002.0127.XXX
TI030.2200.203	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.204	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.205	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.206	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.207	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.208	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.209	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2200.210	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.202	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.203	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.204	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.205	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.206	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.207	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.208	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.209	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2201.210	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.202	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX TI001.0127.XXX TI002.0127.XXX
TI030.2300.203	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.204	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.205	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.206	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.207	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.208	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI030.2300.209	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI030.2300.210	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.202	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0145.XXX TI001.0150.XXX TI002.0145.XXX TI002.0150.XXX
TI031.2000.203	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.204	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.205	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.206	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.207	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.208	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.209	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2000.210	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.202	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.203	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.204	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.205	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.206	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.207	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.208	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.209	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2001.210	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		

TI031.2100.202	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0145.XXX TI001.0150.XXX TI002.0145.XXX TI002.0150.XXX
TI031.2100.203	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.204	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.205	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.206	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.207	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.208	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.209	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2100.210	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.202	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.203	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.204	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.205	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.206	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.207	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.208	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.209	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2200.210	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.202	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0145.XXX TI001.0150.XXX TI002.0145.XXX TI002.0150.XXX TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX
TI031.2201.203	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.204	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.205	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.206	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.207	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.208	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2201.209	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		






TI031.2201.210	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.202	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Esquerda 02 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		TI001.0145.XXX TI001.0150.XXX TI002.0145.XXX TI002.0150.XXX TI001.0135.XXX TI002.0135.XXX
TI031.2300.203	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Esquerda 03 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.204	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Esquerda 04 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.205	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Esquerda 05 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.206	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Esquerda 06 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.207	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Esquerda 07 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.208	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Esquerda 08 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.209	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Esquerda 09 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		
TI031.2300.210	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Esquerda 10 Furos	Ti-6Al-4V ASTM F136		

Tabela 2: Relação de Modelos Comerciais – Parafusos que compõe o **Sistema de Placas Osteotech-Ped**

Código	Descrição	Matéria-prima	Imagem
TI001.0135.010	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.011	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.012	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.013	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.014	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.015	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.016	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.017	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.018	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.019	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.020	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.021	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.022	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.023	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.024	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.025	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.026	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.027	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.028	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.029	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.030	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.031	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.032	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.033	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.034	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.035	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.036	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.037	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.038	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.039	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

TI001.0135.040	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.041	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.042	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.043	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.044	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.045	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.046	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.047	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.048	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.049	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.050	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.051	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.052	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.053	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.054	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.055	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.056	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.057	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.058	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.059	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.060	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.061	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.062	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.063	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.064	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.065	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.066	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.067	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.068	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.069	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.070	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.071	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

TI001.0135.072	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.073	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.074	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.075	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.076	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.077	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.078	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.079	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.080	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.085	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.090	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.095	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.100	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.105	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.110	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.115	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.120	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.125	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0135.130	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.010	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.011	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.012	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.013	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.014	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.015	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.016	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.017	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.018	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.019	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.020	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.021	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0150.022	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

TI001.0150.023	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.024	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.025	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.026	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.027	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.028	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.029	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.030	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.031	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.032	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.033	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.034	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.035	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.036	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.037	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.038	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.039	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.040	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.041	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.042	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.043	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.044	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.045	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.046	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.047	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.048	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.049	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.050	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.051	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.052	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.053	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.054	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136





TI001.0150.055	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.056	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.057	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.058	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.059	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.060	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.061	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.062	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.063	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.064	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.065	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.066	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.067	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.068	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.069	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.070	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.071	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.072	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.073	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.074	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.075	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.076	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.077	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.078	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.079	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.080	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.085	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.090	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.095	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.100	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.105	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.110	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI001.0150.115	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.120	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.125	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0150.130	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.010	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.011	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.012	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.013	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.014	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.015	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.016	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.017	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.018	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.019	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.020	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.021	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.022	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.023	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.024	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.025	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.026	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.027	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.028	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.029	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.030	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.031	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.032	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.033	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.034	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.035	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136



TI001.6138.036	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.037	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.038	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.039	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.040	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.041	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.042	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.043	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.044	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.045	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.046	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.047	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.048	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.049	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.050	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.051	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.052	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.053	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.054	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.055	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.056	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.057	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.058	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.059	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.060	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.061	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.062	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.063	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.064	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.065	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.066	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6138.067	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136





TI001.6138.068	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.069	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.070	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.071	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.072	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.073	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.074	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.075	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.076	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.077	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.078	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.079	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.080	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.085	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.090	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.095	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.100	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.105	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.110	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.115	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.120	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.125	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6138.130	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.010	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.011	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.012	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.013	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.014	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.015	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.016	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.017	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.018	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

TI001.6252.019	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.020	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.021	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.022	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.023	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.024	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.025	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.026	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.027	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.028	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.029	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.030	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.031	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.032	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.033	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.034	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.035	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.036	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.037	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.038	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.039	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.040	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.041	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.042	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.043	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.044	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.045	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.046	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.047	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.048	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.049	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.050	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136





TI001.6252.051	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.052	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.053	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.054	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.055	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.056	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.057	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.058	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.059	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.060	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.061	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.062	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.063	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.064	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.065	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.066	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.067	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.068	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.069	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.070	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.071	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.072	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.073	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.074	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.075	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.076	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.077	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.078	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.079	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.080	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.085	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6252.090	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

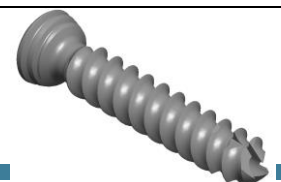
TI001.6252.095	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.100	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.105	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.110	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.115	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.120	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.125	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6252.130	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.010	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.011	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.012	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.013	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.014	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.015	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.016	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.017	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.018	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.019	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.020	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.021	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.022	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.023	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.024	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.025	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.026	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.027	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.028	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.029	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.030	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.031	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.032	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.033	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

TI001.6373.034	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.035	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.036	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.037	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.038	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.039	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.040	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.041	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.042	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.043	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.044	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.045	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.046	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.047	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.048	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.049	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.050	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.051	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.052	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.053	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.054	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.055	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.056	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.057	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.058	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.059	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.060	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.061	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.062	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.063	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.064	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6373.065	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136


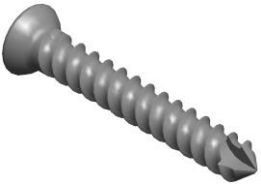


TI001.6373.066	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.067	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.068	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.069	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.070	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.071	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.072	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.073	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.074	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.075	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.076	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.077	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.078	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.079	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.080	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.085	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.090	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.095	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.100	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.105	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.110	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.115	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.120	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.125	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6373.130	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.010	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.011	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.012	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.013	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.014	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.015	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.016	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

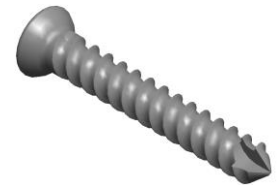
TI001.6945.017	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.018	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.019	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.020	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.021	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.022	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.023	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.024	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.025	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.026	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.027	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.028	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.029	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.030	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.031	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.032	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.033	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.034	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.035	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.036	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.037	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.038	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.039	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.040	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.041	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.042	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.043	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.044	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.045	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.046	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.047	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.048	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

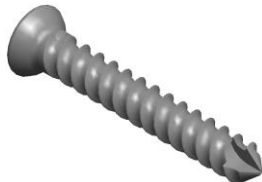



TI001.6945.049	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.050	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.051	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.052	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.053	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.054	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.055	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.056	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.057	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.058	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.059	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.060	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.061	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.062	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.063	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.064	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.065	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.066	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.067	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.068	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.069	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.070	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.071	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.072	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.073	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.074	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.075	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.076	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.077	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.078	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.079	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.6945.080	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

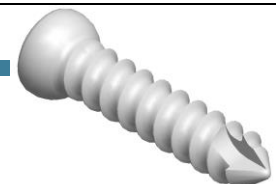
TI001.6945.085	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.090	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.095	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.100	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.105	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.110	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.115	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.120	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.125	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.6945.130	PARAFUSO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP LP Ø4,5 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

TI002.0135.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.041	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.042	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.043	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.044	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.045	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.046	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.047	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.048	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.049	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.050	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.051	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.052	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.053	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.054	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.055	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.056	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.057	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.058	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.059	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.060	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.061	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.062	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0135.063	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

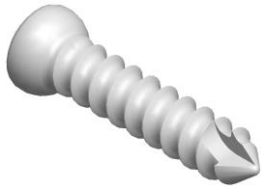
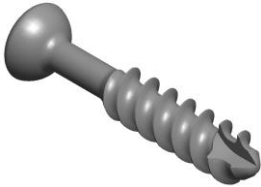


TI002.0135.064	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.065	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.066	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.067	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.068	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.069	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.070	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.071	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.072	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.073	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.074	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.075	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.076	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.077	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.078	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.079	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.080	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.085	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.090	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.095	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.100	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.105	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.110	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.115	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.120	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.125	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0135.130	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø3,5 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

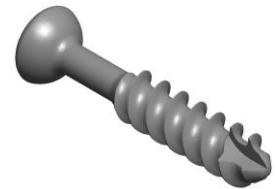
TI002.0150.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.041	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.042	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.043	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.044	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.045	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.046	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

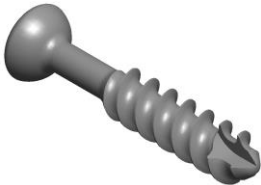
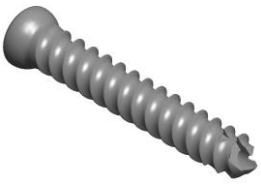


TI002.0150.047	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.048	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.049	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.050	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.051	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.052	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.053	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.054	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.055	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.056	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.057	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.058	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.059	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.060	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.061	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.062	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.063	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.064	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.065	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.066	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.067	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.068	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.069	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.070	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.071	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.072	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.073	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.074	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.075	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.076	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.077	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0150.078	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI002.0150.079	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.080	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.085	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.090	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.095	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.100	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.105	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.110	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.115	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.120	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.125	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.0150.130	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.020	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 20mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.021	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 21mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.022	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 22mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.023	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 23mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.024	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 24mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.025	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 25mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.026	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 26mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.027	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 27mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.028	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 28mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.029	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 29mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.030	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 30mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.031	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 31mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.032	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 32mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.033	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 33mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.034	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 34mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.035	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 35mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.036	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 36mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.037	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 37mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.038	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 38mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.039	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 39mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	

TI002.2945.040	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 40mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.041	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 41mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.042	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 42mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.043	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 43mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.044	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 44mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.045	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 45mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.046	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 46mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.047	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 47mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.048	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 48mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.049	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 49mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.050	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 50mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.051	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 51mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.052	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 52mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.053	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 53mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.054	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 54mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.055	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 55mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.056	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 56mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.057	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 57mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.058	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 58mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.059	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 59mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.060	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 60mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.061	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 61mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.062	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 62mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.063	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 63mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.064	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 64mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.065	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 65mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.066	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 66mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.067	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 67mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.068	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 68mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.069	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 69mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.070	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 70mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.2945.071	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp ø4,5 x 71mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136

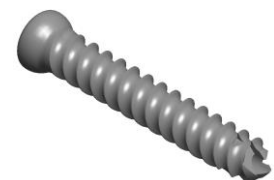


TI002.2945.072	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 72mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.073	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 73mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.074	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 74mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.075	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 75mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.076	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 76mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.077	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 77mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.078	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 78mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.079	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 79mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.080	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 80mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.085	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 85mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.090	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 90mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.095	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 95mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.100	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 100mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.105	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 105mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.110	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 110mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.115	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 115mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.120	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 120mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.125	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 125mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.2945.130	Parafuso não bloqueado esponjoso dual-step lp \varnothing 4,5 x 130mm - rp 16,0mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP \varnothing 3,8 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

TI002.6138.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.041	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.042	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.043	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.044	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.045	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.046	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.047	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.048	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.049	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.050	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.051	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.052	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.053	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.054	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136



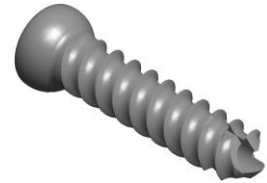
TI002.6138.055	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.056	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.057	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.058	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.059	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.060	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.061	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.062	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.063	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.064	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.065	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.066	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.067	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.068	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.069	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.070	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.071	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.072	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.073	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.074	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.075	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.076	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.077	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.078	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.079	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.080	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.085	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.090	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.095	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.100	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.105	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6138.110	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

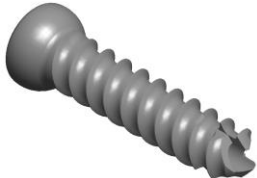
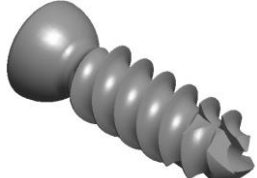


TI002.6138.115	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.120	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.125	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6138.130	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø3,8 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

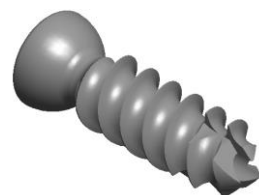


TI002.6252.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.041	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.042	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.043	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.044	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.045	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.046	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.047	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.048	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.049	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.050	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.051	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.052	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.053	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.054	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.055	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.056	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.057	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.058	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.059	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.060	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.061	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.062	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.063	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.064	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.065	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.066	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.067	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.068	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6252.069	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136



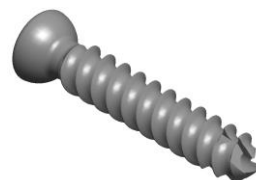
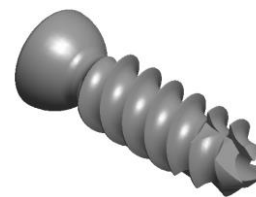
TI002.6252.070	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.071	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.072	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.073	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.074	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.075	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.076	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.077	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.078	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.079	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.080	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.085	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.090	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.095	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.100	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.105	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.110	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.115	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.120	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.125	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6252.130	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø5,2 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.010	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.011	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 11MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.012	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 12MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.013	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 13MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.014	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.015	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 15MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.016	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 16MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.017	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 17MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.018	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.019	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 19MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6373.020	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 20MM	Ti-6Al-4V ASTM F136	

TI002.6373.021	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 21MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.022	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 22MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.023	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 23MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.024	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 24MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.025	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 25MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.026	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 26MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.027	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 27MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.028	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 28MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.029	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 29MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.030	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 30MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.031	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 31MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.032	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 32MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.033	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 33MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.034	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 34MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.035	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 35MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.036	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 36MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.037	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 37MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.038	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 38MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.039	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 39MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.040	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 40MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.041	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 41MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.042	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 42MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.043	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 43MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.044	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 44MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.045	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 45MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.046	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 46MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.047	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 47MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.048	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 48MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.049	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 49MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.050	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 50MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.051	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 51MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.052	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 52MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

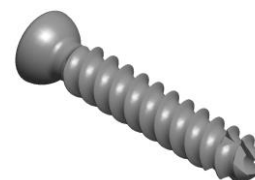


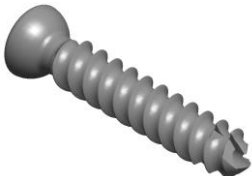

TI002.6373.053	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 53MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.054	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 54MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.055	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 55MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.056	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 56MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.057	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 57MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.058	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 58MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.059	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 59MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.060	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 60MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.061	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 61MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.062	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 62MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.063	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 63MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.064	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 64MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.065	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 65MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.066	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 66MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.067	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 67MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.068	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 68MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.069	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 69MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.070	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 70MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.071	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 71MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.072	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 72MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.073	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 73MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.074	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 74MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.075	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 75MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.076	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 76MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.077	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 77MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.078	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 78MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.079	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 79MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.080	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 80MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.085	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 85MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.090	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 90MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.095	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 95MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.100	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 100MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI002.6373.105	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 105MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.110	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 110MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.115	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 115MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.120	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 120MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.125	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 125MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6373.130	PARAFUSO NÃO BLOQUEADO CANULADO DUAL-STEP Ø7,3 X 130MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.010	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 10mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.011	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 11mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.012	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 12mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.013	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 13mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.014	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 14mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.015	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 15mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.016	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 16mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.017	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 17mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.018	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 18mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.019	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 19mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.020	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.021	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 21mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.022	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 22mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.023	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 23mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.024	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 24mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.025	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.026	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 26mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.027	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 27mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.028	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 28mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.029	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 29mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.030	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.031	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 31mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.032	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 32mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.033	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 33mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.034	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 34mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.035	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136



TI002.6945.036	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 36mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.037	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 37mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.038	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 38mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.039	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 39mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.040	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.041	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 41mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.042	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 42mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.043	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 43mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.044	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 44mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.045	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.046	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 46mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.047	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 47mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.048	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 48mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.049	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 49mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.050	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.051	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 51mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.052	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 52mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.053	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 53mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.054	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 54mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.055	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.056	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 56mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.057	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 57mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.058	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 58mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.059	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 59mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.060	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.061	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 61mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.062	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 62mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.063	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 63mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.064	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 64mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.065	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.066	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 66mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.6945.067	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 67mm	Ti-6Al-4V ASTM F136

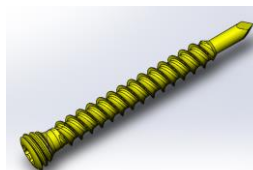


TI002.6945.068	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 68mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.069	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 69mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.070	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.071	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 71mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.072	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 72mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.073	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 73mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.074	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 74mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.075	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 75mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.076	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 76mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.077	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 77mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.078	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 78mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.079	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 79mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.080	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 80mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.085	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 85mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.090	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 90mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.095	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 95mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.100	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 100mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.105	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 105mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.110	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 110mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.115	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 115mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.120	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 120mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.125	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 125mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI002.6945.130	Parafuso não bloqueado canulado dual-step lp ø4,5 x 130mm	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0051.010	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 10MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0051.011	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 11MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0051.012	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 12MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0051.013	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 13MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0051.014	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 14MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0051.015	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 15MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0051.016	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 16MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0051.017	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 17MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136	
TI001.0051.018	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 18MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136	

TI001.0051.019	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 19MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.020	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 20MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.021	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 21MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.022	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 22MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.023	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 23MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.024	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 24MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.025	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 25MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.026	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 26MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.027	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 27MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.028	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 28MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.029	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 29MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.030	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 30MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.031	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 31MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.032	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 32MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.033	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 33MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.034	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 34MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.035	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 35MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.036	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 36MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.037	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 37MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.038	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 38MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.039	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 39MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.040	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 40MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.041	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 41MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.042	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 42MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.043	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 43MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.044	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 44MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.045	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 45MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.046	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 46MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.047	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 47MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.048	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 48MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.049	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 49MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.050	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 50MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI001.0051.051	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 51MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.052	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 52MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.053	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 53MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.054	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 54MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.055	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 55MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.056	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 56MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.057	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 57MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.058	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 58MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.059	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 59MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.060	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 60MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.061	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 61MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.062	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 62MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.063	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 63MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.064	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 64MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.065	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 65MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.066	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 66MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.067	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 67MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.068	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 68MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.069	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 69MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.070	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 70MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.071	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 71MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.072	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 72MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.073	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 73MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.074	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 74MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.075	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 75MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.076	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 76MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.077	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 77MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.078	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 78MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.079	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 79MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.080	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 80MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.085	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 85MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.090	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 90MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI001.0051.095	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 95MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.100	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 100MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.105	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 105MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.110	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 110MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.115	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 115MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.120	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 120MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.125	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 125MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0051.130	PARAFUSO BLOQUEADO DUAL-STEP Ø5,0 X 130MM - M6	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.030	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 30MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.031	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 31MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.032	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 32MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.033	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 33MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.034	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 34MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.035	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 35MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.036	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 36MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.037	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 37MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.038	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 38MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.039	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 39MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.040	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 40MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.041	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 41MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.042	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 42MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.043	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 43MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.044	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 44MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.045	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 45MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.046	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 46MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.047	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 47MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.048	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 48MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136



TI030.0635.049	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 49MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.050	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 50MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.051	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 51MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.052	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 52MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.053	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 53MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.054	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 54MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.055	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 55MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.056	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 56MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.057	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 57MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.058	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 58MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.059	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 59MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.060	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 60MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.061	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 61MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.062	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 62MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.063	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 63MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.064	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 64MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.065	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 65MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.066	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 66MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.067	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 67MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.068	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 68MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.069	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 69MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.070	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 70MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.071	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 71MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.072	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 72MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.073	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 73MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.074	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO	Ti-6Al-4V ASTM

	DUAL-STEP Ø3,5 X 74MM - PONTA LISA 6MM	F136
TI030.0635.075	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 75MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.076	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 76MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.077	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 77MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.078	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 78MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.079	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 79MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.080	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 80MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.081	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 81MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.082	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 82MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.083	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 83MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.084	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 84MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.085	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 85MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.086	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 86MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.087	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 87MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.088	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 88MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.089	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 89MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.090	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 90MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.091	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 91MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.092	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 92MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.093	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 93MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.094	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 94MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.095	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 95MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.096	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 96MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.097	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 97MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.098	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 98MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.099	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 99MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI030.0635.100	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 100MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.101	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 101MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.102	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 102MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.103	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 103MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.104	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 104MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.105	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 105MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.106	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 106MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.107	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 107MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.108	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 108MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.109	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 109MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.110	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 110MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.111	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 111MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.112	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 112MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.113	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 113MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.114	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 114MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.115	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 115MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.116	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 116MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.117	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 117MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.118	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 118MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.119	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 119MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.120	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 120MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.121	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 121MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.122	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 122MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.123	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 123MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.124	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 124MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.125	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO	Ti-6Al-4V ASTM

	DUAL-STEP Ø3,5 X 125MM - PONTA LISA 6MM	F136
TI030.0635.126	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 126MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.127	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 127MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.128	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 128MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.129	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 129MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.0635.130	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 130MM - PONTA LISA 6MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.030	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 30MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.031	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 31MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.032	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 32MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.033	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 33MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.034	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 34MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.035	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 35MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.036	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 36MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.037	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 37MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.038	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 38MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.039	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 39MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.040	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 40MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.041	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 41MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.042	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 42MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.043	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 43MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.044	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 44MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.045	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 45MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.046	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 46MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.047	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 47MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.048	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 48MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.049	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 49MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI030.1035.050	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 50MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.051	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 51MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.052	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 52MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.053	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 53MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.054	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 54MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.055	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 55MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.056	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 56MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.057	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 57MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.058	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 58MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.059	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 59MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.060	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 60MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.061	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 61MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.062	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 62MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.063	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 63MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.064	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 64MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.065	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 65MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.066	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 66MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.067	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 67MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.068	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 68MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.069	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 69MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.070	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 70MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.071	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 71MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.072	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 72MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.073	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 73MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.074	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 74MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.075	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO	Ti-6Al-4V ASTM

	DUAL-STEP Ø3,5 X 75MM - PONTA LISA 10MM	F136
TI030.1035.076	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 76MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.077	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 77MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.078	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 78MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.079	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 79MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.080	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 80MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.081	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 81MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.082	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 82MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.083	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 83MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.084	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 84MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.085	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 85MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.086	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 86MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.087	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 87MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.088	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 88MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.089	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 89MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.090	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 90MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.091	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 91MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.092	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 92MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.093	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 93MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.094	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 94MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.095	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 95MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.096	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 96MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.097	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 97MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.098	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 98MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.099	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 99MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.100	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 100MM - PONTA LISA	Ti-6Al-4V ASTM F136

	10MM	
TI030.1035.101	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 101MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.102	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 102MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.103	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 103MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.104	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 104MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.105	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 105MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.106	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 106MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.107	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 107MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.108	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 108MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.109	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 109MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.110	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 110MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.111	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 111MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.112	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 112MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.113	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 113MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.114	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 114MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.115	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 115MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.116	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 116MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.117	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 117MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

	10MM	
TI030.1035.118	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 118MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.119	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 119MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.120	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 120MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.121	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 121MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.122	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 122MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.123	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 123MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.124	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 124MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.125	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 125MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.126	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 126MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.127	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 127MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.128	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 128MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.129	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 129MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1035.130	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 130MM - PONTA LISA 10MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.030	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 30MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.031	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 31MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.032	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 32MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.033	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 33MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.034	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 34MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.035	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO	Ti-6Al-4V ASTM F136

	DUAL-STEP Ø3,5 X 35MM - PONTA LISA 14MM	
TI030.1435.036	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 36MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.037	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 37MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.038	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 38MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.039	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 39MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.040	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 40MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.041	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 41MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.042	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 42MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.043	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 43MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.044	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 44MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.045	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 45MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.046	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 46MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.047	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 47MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.048	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 48MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.049	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 49MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.050	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 50MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.051	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 51MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.052	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 52MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.053	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 53MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.054	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 54MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.055	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 55MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.056	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 56MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.057	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 57MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.058	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 58MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.059	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 59MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.060	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 60MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI030.1435.061	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 61MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.062	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 62MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.063	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 63MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.064	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 64MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.065	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 65MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.066	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 66MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.067	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 67MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.068	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 68MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.069	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 69MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.070	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 70MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.071	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 71MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.072	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 72MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.073	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 73MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.074	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 74MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.075	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 75MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.076	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 76MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.077	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 77MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.078	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 78MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.079	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 79MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.080	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 80MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.081	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 81MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.082	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 82MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.083	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 83MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.084	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 84MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.085	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 85MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.086	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO	Ti-6Al-4V ASTM

	DUAL-STEP Ø3,5 X 86MM - PONTA LISA 14MM	F136
TI030.1435.087	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 87MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.088	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 88MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.089	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 89MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.090	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 90MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.091	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 91MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.092	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 92MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.093	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 93MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.094	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 94MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.095	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 95MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.096	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 96MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.097	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 97MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.098	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 98MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.099	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 99MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.100	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 100MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.101	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 101MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.102	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 102MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.103	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 103MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.104	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 104MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.105	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 105MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.106	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 106MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.107	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 107MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI030.1435.108	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 108MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.109	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 109MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.110	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 110MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.111	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 111MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.112	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 112MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.113	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 113MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.114	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 114MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.115	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 115MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.116	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 116MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.117	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 117MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.118	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 118MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.119	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 119MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.120	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 120MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.121	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 121MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.122	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 122MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.123	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 123MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.124	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 124MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI030.1435.125	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 125MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.126	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 126MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.127	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 127MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.128	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 128MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.129	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 129MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1435.130	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 130MM - PONTA LISA 14MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.030	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 30MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.031	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 31MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.032	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 32MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.033	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 33MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.034	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 34MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.035	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 35MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.036	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 36MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.037	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 37MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.038	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 38MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.039	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 39MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.040	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 40MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.041	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 41MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.042	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 42MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.043	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 43MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.044	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 44MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.045	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 45MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.046	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO	Ti-6Al-4V ASTM F136

	DUAL-STEP Ø3,5 X 46MM - PONTA LISA 18MM	
TI030.1835.047	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 47MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.048	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 48MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.049	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 49MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.050	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 50MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.051	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 51MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.052	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 52MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.053	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 53MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.054	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 54MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.055	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 55MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.056	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 56MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.057	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 57MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.058	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 58MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.059	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 59MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.060	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 60MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.061	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 61MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.062	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 62MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.063	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 63MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.064	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 64MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.065	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 65MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.066	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 66MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.067	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 67MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.068	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 68MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.069	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 69MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.070	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 70MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.071	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 71MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI030.1835.072	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 72MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.073	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 73MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.074	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 74MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.075	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 75MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.076	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 76MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.077	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 77MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.078	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 78MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.079	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 79MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.080	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 80MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.081	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 81MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.082	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 82MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.083	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 83MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.084	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 84MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.085	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 85MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.086	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 86MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.087	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 87MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.088	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 88MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.089	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 89MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.090	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 90MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.091	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 91MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.092	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 92MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.093	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 93MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.094	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 94MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.095	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 95MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.096	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 96MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.097	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO	Ti-6Al-4V ASTM

	DUAL-STEP Ø3,5 X 97MM - PONTA LISA 18MM	F136
TI030.1835.098	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 98MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.099	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 99MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.100	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 100MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.101	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 101MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.102	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 102MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.103	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 103MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.104	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 104MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.105	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 105MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.106	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 106MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.107	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 107MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.108	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 108MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.109	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 109MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.110	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 110MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.111	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 111MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.112	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 112MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.113	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 113MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.114	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 114MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.115	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO	Ti-6Al-4V ASTM F136

	DUAL-STEP Ø3,5 X 115MM - PONTA LISA 18MM	
TI030.1835.116	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 116MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.117	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 117MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.118	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 118MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.119	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 119MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.120	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 120MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.121	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 121MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.122	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 122MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.123	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 123MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.124	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 124MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.125	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 125MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.126	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 126MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.127	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 127MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.128	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 128MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.129	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 129MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI030.1835.130	PARAFUSO BLOQUEADO TRANSFISÁRIO DUAL-STEP Ø3,5 X 130MM - PONTA LISA 18MM	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI001.0127.008	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 08mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.009	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 09mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.010	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 10mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.011	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 11mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.012	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 12mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.013	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 13mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.014	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 14mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.015	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 15mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.016	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 16mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.017	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 17mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.018	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 18mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.019	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 19mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.020	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.021	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 21mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.022	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 22mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.023	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 23mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.024	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 24mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.025	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.026	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 26mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.027	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 27mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.028	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 28mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.029	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 29mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.030	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.031	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 31mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.032	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 32mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.033	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 33mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.034	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 34mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.035	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.036	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 36mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.037	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 37mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.038	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 38mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.039	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 39mm	Ti-6Al-4V ASTM F136



TI001.0127.040	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.041	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 41mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.042	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 42mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.043	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 43mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.044	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 44mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.045	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.046	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 46mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.047	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 47mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.048	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 48mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.049	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 49mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.050	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.051	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 51mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.052	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 52mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.053	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 53mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.054	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 54mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.055	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.056	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 56mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.057	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 57mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.058	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 58mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.059	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 59mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.060	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.061	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 61mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.062	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 62mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.063	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 63mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.064	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 64mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.065	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.066	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 66mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.067	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 67mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.068	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 68mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.069	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 69mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.070	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.071	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 71mm	Ti-6Al-4V ASTM F136

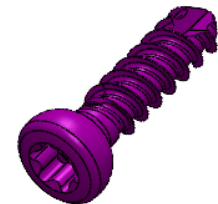
TI001.0127.072	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 72mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.073	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 73mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.074	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 74mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.075	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 75mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.076	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 76mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.077	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 77mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.078	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 78mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.079	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 79mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.080	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 80mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.085	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 85mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.090	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 90mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.095	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 95mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.100	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 100mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.105	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 105mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.110	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 110mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.115	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 115mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.120	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 120mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.125	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 125mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0127.130	Parafuso Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 130mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.010	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 10 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.011	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 11 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.012	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 12 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.013	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 13 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.014	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 14 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.015	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 15 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.016	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 16 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.017	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 17 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.018	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 18 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.019	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 19 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.020	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 20 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.021	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 21 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.022	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 22 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136



TI001.0145.023	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 23 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.024	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 24 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.025	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 25 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.026	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 26 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.027	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 27 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.028	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 28 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.029	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 29 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.030	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 30 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.031	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 31 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.032	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 32 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.033	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 33 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.034	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 34 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.035	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 35 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.036	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 36 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.037	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 37 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.038	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 38 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.039	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 39 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.040	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 40 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.041	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 41 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.042	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 42 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.043	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 43 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.044	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 44 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.045	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 45 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.046	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 46 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.047	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 47 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.048	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 48 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.049	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 49 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.050	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 50 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.051	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 51 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.052	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 52 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.053	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 53 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.054	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 54 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI001.0145.055	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 55 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.056	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 56 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.057	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 57 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.058	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 58 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.059	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 59 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.060	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 60 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.061	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 61 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.062	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 62 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.063	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 63 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.064	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 64 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.065	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 65 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.066	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 66 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.067	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 67 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.068	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 68 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.069	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 69 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.070	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 70 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.071	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 71 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.072	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 72 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.073	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 73 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.074	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 74 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.075	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 75 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.076	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 76 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.077	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 77 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.078	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 78 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.079	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 79 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.080	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 80 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.085	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 85 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.090	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 90 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.095	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 95 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.100	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 100 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.105	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 105 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.110	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 110 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI001.0145.115	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 115 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.120	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 120 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.125	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 125 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI001.0145.130	Parafuso Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 130 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.010	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 10 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.011	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 11 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.012	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 12 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.013	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 13 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.014	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 14 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.015	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 15 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.016	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 16 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.017	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 17 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.018	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 18 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.019	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 19 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.020	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 20 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.021	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 21 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.022	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 22 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.023	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 23 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.024	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 24 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.025	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 25 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.026	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 26 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.027	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 27 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.028	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 28 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.029	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 29 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.030	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 30 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.031	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 31 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.032	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 32 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.033	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 33 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.034	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 34 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.035	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 35 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.036	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 36 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.037	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 37 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136



TI002.0145.038	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 38 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.039	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 39 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.040	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 40 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.041	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 41 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.042	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 42 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.043	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 43 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.044	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 44 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.045	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 45 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.046	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 46 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.047	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 47 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.048	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 48 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.049	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 49 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.050	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 50 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.051	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 51 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.052	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 52 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.053	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 53 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.054	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 54 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.055	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 55 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.056	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 56 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.057	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 57 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.058	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 58 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.059	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 59 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.060	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 60 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.061	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 61 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.062	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 62 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.063	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 63 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.064	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 64 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.065	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 65 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.066	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 66 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.067	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 67 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.068	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 68 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.069	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 69 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI002.0145.070	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 70 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.071	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 71 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.072	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 72 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.073	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 73 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.074	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 74 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.075	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 75 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.076	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 76 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.077	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 77 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.078	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 78 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.079	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 79 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.080	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 80 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.085	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 85 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.090	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 90 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.095	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 95 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.100	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 100 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.105	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 105 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.110	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 110 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.115	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 115 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.120	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 120 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.125	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 125 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0145.130	Parafuso Não Bloqueado M7 Dual-Step Ø4,5 X 130 mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.008	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 08mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.009	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 09mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.010	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 10mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.011	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 11mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.012	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 12mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.013	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 13mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.014	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 14mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.015	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 15mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.016	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 16mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.017	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 17mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.018	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 18mm	Ti-6Al-4V ASTM F136



TI002.0127.019	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 19mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.020	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 20mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.021	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 21mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.022	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 22mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.023	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 23mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.024	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 24mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.025	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 25mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.026	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 26mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.027	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 27mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.028	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 28mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.029	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 29mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.030	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 30mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.031	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 31mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.032	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 32mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.033	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 33mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.034	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 34mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.035	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 35mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.036	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 36mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.037	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 37mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.038	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 38mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.039	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 39mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.040	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 40mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.041	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 41mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.042	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 42mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.043	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 43mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.044	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 44mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.045	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 45mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.046	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 46mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.047	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 47mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.048	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 48mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.049	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 49mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.050	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 50mm	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI002.0127.051	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 51mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.052	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 52mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.053	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 53mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.054	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 54mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.055	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 55mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.056	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 56mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.057	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 57mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.058	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 58mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.059	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 59mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.060	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 60mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.061	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 61mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.062	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 62mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.063	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 63mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.064	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 64mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.065	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 65mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.066	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 66mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.067	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 67mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.068	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 68mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.069	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 69mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.070	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 70mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.071	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 71mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.072	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 72mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.073	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 73mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.074	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 74mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.075	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 75mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.076	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 76mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.077	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 77mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.078	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 78mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.079	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 79mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.080	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 80mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.085	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 85mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.090	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 90mm	Ti-6Al-4V ASTM F136

TI002.0127.095	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 95mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.100	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 100mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.105	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 105mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.110	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 110mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.115	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 115mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.120	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 120mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.125	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 125mm	Ti-6Al-4V ASTM F136
TI002.0127.130	Parafuso não Bloqueado Dual Step Ø2,7 x 130mm	Ti-6Al-4V ASTM F136

IMPORTANTE

Para o uso do Sistema de Placas Osteottech-Ped é necessário o uso de instrumentais específicos.

O Kit de Instrumental para o Sistema de Placas Osteottech-Ped está registrado na Anvisa sob o nº XXXXXXXXXXXX, **não fazendo parte deste processo de registro e não sendo parte integrante do produto.**

ACESSÓRIOS E COMPONENTES ANCILARES

O Sistema de Placas Osteottech-Ped não possui acessórios.

COMPOSIÇÃO: O Sistema de Placas Osteottech-Ped são manufaturadas em titânio liga conforme as especificações da norma ASTM F136 conforme a norma ASTM F136 conforme especificado nas tabelas 1 e 2. O titânio possui uma combinação de alta resistência mecânica, elevada resistência à corrosão eletroquímica e resposta biológica favorável, que fazem com que ele seja o metal mais utilizado como biomaterial. O titânio é um metal especial dentre os metais leves como alumínio e magnésio por sua elevada razão resistência/peso. Uma contribuição para a biocompatibilidade do titânio é a grande resistência à corrosão que é conferida por seu óxido, que forma uma película contínua e aderente. Uma outra contribuição é a sua alta constante dielétrica quando comparada com a de outros óxidos. O TiO₂ promove forças de Van der Waals maiores do que as de outros óxidos, apresentando, portanto, propriedades catalíticas em diversas reações químicas. Os implantes em titânio têm cerca de 45% menos densidade do que aqueles que contêm ferro e cobalto em suas composições, um importante fator relacionado ao conforto do paciente, principalmente em fraturas de ossos longos. O seu baixo módulo de elasticidade é outra vantagem, pois minimiza a proteção contra pressão, e isso é transferido ao osso. Essa importância relativa contra a pressão é aumentada à medida que o tamanho do implante aumenta. O titânio é extremamente insolúvel e atua como um material inerte que não interage com o organismo. Independente das ligas citadas é preciso que as combinações sejam de implantes da mesma marca, pois os mesmos foram projetados para tais combinações observando acabamento superficial e

tratamento superficial e outros fatores exigidos em projetos que podem interferir nas combinações. Por isso implantes metálicos de diferentes fabricantes não são recomendados por motivos de incompatibilidade química, física, biológica e funcional.

COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

A compatibilidade dimensional do sistema está descrito na **tabela 1** deste documento.

INDICAÇÕES DE USO

O Sistema de Placas Osteotech-Ped tem as seguintes indicações:

- Osteotomias / Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
- Correção gradual de deformidades angulares no fêmur de crianças em crescimento
- Osteotomias / Fraturas do fêmur de crianças e jovens

Os pacientes indicados para o tratamento com estes produtos são crianças e jovens com idades entre 3 a 16 anos.

Especificamente cada placa possui a seguinte indicação de uso:

Tabela 3 – Indicação de uso Especifica

Código	Descrição	Indicação de uso
TI029.0903.X00	Placa Pediátrica Femoral Proximal GAMA G 90° sem Passo	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI029.0905.XXX	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal 05mm passo 90 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI029.1300.XXX	Placa Pediátrica 3,5 Especial Proximal sem passo 130 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI029.2000.0XX	Placa quad-block de epifisiodesese	Correção gradual de deformidades angulares no fêmur de crianças em crescimento
TI029.3000.0XX	Placa duo-block de epifisiodesese	Correção gradual de deformidades angulares no fêmur de crianças em crescimento
TI029.4090.00X	Placa Pediátrica Femoral Distal GAMA M 90° / 5° Abertura	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção distal de crianças e jovens
TI030.09XX.XXX	Placa Pediátrica 3,5 Proximal com passo 90 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI030.10XX.XXX	Placa Pediátrica 3,5 Proximal com passo 100 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI030.1300.XXX	Placa Pediátrica 3,5 Proximal sem passo 130 Graus	Osteotomias / Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI030.00XX.080	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal Sem Passo 80 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI030.00XX.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal Sem Passo 90 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens

TI030.00XX.120	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal Sem Passo 120 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI030.00XX.130	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal Sem Passo 130 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI030.00XX.140	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal Sem Passo 140 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI030.00XX.150	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal Sem Passo 150 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI030.XXXX.090	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Distal Passo XXmm 90 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI030.XXXX.100	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal Passo XXmm 100 Graus	Osteotomias / Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI030.XXXX.110	Placa Pediátrica 3,5 Femoral Proximal Passo XXmm 110 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur de crianças e jovens
TI031.09XX.XXX	Placa Pediátrica 5,0 Proximal com passo 90 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.1300.XXX	Placa Pediátrica 5,0 Proximal sem passo 130 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.00XX.080	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal Sem Passo 80 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção distal de crianças e jovens
TI031.00XX.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal Sem Passo 90 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção distal de crianças e jovens
TI031.00XX.120	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal Sem Passo 120 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.00XX.121	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal Sem Passo 120 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.00XX.130	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal Sem Passo 130 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.00XX.131	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal Sem Passo 130 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.00XX.140	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal Sem Passo 140 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.00XX.150	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal Sem Passo 150 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.00XX.151	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal Sem Passo 150 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.XXXX.090	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Distal Passo XXmm 90 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção distal de crianças e jovens
TI031.XXXX.100	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal Passo XXmm 100 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.XXXX.101	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal Passo XXmm 100 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.XXXX.110	Placa Pediátrica 5,0 Femoral Proximal Passo XXmm 110 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI031.XXXX.111	Placa Pediátrica 5,0 Especial Femoral Proximal Passo XXmm 110 Graus	Osteotomias / Fixação de Fraturas do fêmur na porção proximal de crianças e jovens
TI030.2000.2XX	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Estreita Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Distal de crianças e jovens

TI030.2001.2XX	Placa Pediátrica Tibial Distal Média Larga Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Distal de crianças e jovens
TI030.2100.2XX	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Proximal de crianças e jovens
TI030.2200.2XX	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Estreita Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Distal de crianças e jovens
TI030.2201.2XX	Placa Pediátrica Tibial Distal Média H Larga Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Distal de crianças e jovens
TI030.2300.2XX	Placa Pediátrica Tibial Proximal Média H Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Proximal de crianças e jovens
TI031.2000.2XX	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Estreita Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Distal de crianças e jovens
TI031.2001.2XX	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande Larga Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Distal de crianças e jovens
TI031.2100.2XX	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Proximal de crianças e jovens
TI031.2200.2XX	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Estreita Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Distal de crianças e jovens
TI031.2201.2XX	Placa Pediátrica Tibial Distal Grande H Larga Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Distal de crianças e jovens
TI031.2300.2XX	Placa Pediátrica Tibial Proximal Grande H Esquerda XX Furos	Osteotomias / Fixação de Fraturas da Tíbia Proximal de crianças e jovens

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim com seu armazenamento e transporte.

INSTRUÇÕES DE USO

- Atenção: implante fornecido **NÃO - ESTÉRIL – ESTERILIZAR** de acordo com as instruções recomendadas nessa instrução.
- As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.
- Manipular o Sistema de Placas Osteotech-Ped exclusivamente em ambientes adequados, com os devidos cuidados e somente por profissionais capacitados.
- O Sistema de Placas Osteotech-Ped deverá ser implantado de acordo com as exigências das técnicas cirúrgicas.
- A Techimport disponibiliza as instruções de uso em seu sítio eletrônico. A versão atualizada da instrução de uso disponíveis no sítio eletrônico da Techimport está identificada no rótulo e nas etiquetas de rastreabilidade do produto. A versão da instrução de uso, deve ser a mesma indicada no rótulo e etiquetas de rastreabilidade. Caso seja necessário, a Techimport envia sem custos adicionais (inclusive o envio), as instruções de uso do produto no formato impresso.

CONTRA INDICAÇÕES

Os pacientes que apresentarem algum dos quadros clínicos descritos abaixo, não devem ser submetidos ao procedimento com o uso do produto:

- Pacientes com maturidade esquelética completa;
- Histórico de infecção recente;
- Deformidades fisiológicas;
- Doenças mentais;
- Febre;
- Pacientes acima dos 17 anos de idade;
- Pacientes de 0 a 2 anos de idade;
- Infecção óssea ou de partes moles locais;
- Doenças osteometabólicas que causem destruição óssea;
- Alergia e/ou sensibilidade a metais e,
- Pacientes sem condições de seguir as recomendações pós-operatórias.
- O uso da Ressonância Magnética em ambiente 7.0-T é contra indicado.
- O uso da Ressonância Magnética em pacientes anestesiados, com rebaixamento do nível de consciência, ou conscientes com perda de sensibilidade no local da prótese é uma contra indicação absoluta.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS EXPLANTADO. NÃO REUTILIZAR O PRODUTO. PROIBIDO REPROCESSAR

Nenhum implante pode resistir a um nível de atividade ou peso de um osso normal saudável se não for suportado por uma união óssea sólida. Se a cicatrização é demorada ou não ocorre, o implante pode eventualmente curvar e/ou quebrar devido a fadiga do material.

O respeito aos procedimentos pré-operatórios e pós-operatórios, o entendimento adequado da técnica cirúrgica, a seleção correta e posicionamento do implante são críticos para o sucesso da cirurgia.

A correta seleção do implante é extremamente importante. O tipo apropriado, forma e tamanho devem ser de acordo com o paciente. Estes dados são obtidos a partir do planejamento pré-operatório, visto que o tamanho e formato dos ossos humanos também colocam limitações no tamanho e resistência dos implantes. Todos os implantes metálicos são sujeitos a repetir o stress durante o uso, por isso o critério apropriado para seleção do paciente deve ser seguido; o posicionamento correto do implante e os cuidados apropriados no pós-operatório são essenciais para minimizar o stress do peso do implante.

- Cuidados devem ser tomados para evitar a colocação de um peso excessivo no implante, uma vez que isto pode aumentar os riscos de encurvamento, rachaduras e/ou fraturas do implante devido à fadiga do metal que eventualmente levará ao afrouxamento antes da união ser atingida. Isto por sua vez pode causar danos ou necessidade de uma remoção prematura do implante.
- **PRODUTO NÃO ESTÉRIL**
- Condições especiais de armazenamento: Conservar em local arejado, seco e ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada
- **Imagem por Ressonância Magnética (MRI):** Geralmente, pode-se esperar uma boa compatibilidade. No entanto, certas configurações de parâmetros durante o exame radiológico, que estão fora de controle do fabricante, podem afetar adversamente essa compatibilidade. Durante todo o processo de geração de imagens, a progressão da temperatura do implante deve ser observada cuidadosamente. Em caso de dúvida, consulte o fabricante do dispositivo de imagem com antecedência. Esses produtos são fabricados em titânio liga, conforme as normas ASTM F136, que apesar de serem metais não magnéticos, são condutores de calor e, dependendo da construção utilizada pelo paciente, sua forma e tamanho, podem aquecer e entrar em ressonância com o equipamento, gerando pequenos deslocamentos dos seus componentes.

Observação: Não devem ser utilizados componentes de implantes de fabricantes diferentes, **portanto recomendamos que os produtos tenham a mesma procedência.**

Data de fabricação, prazo de validade e lote do produto: VIDE ROTULO.

PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Recomendações de utilização gerais

- Todos os implantes devem ser utilizados com o formato original.
- Os implantes devem ser manipulados com cuidado, pois a ocorrência de riscos é suscetível de provocar micro trincas alterando a resistência mecânica e à corrosão.
- O planejamento pré-operatório permitem determinar a dimensão correta dos implantes.
- Apenas a utilização de material de instrumentação específico para este implante garante a sua colocação de forma satisfatória.
- Caso seja necessária uma explantação, as condições de descontaminação e esterilização do instrumental deverão ser respeitadas.
- Os detritos resultantes da intervenção (embalagens, explantes...) deverão ser tratados como quaisquer outros detritos de origem médica pelo estabelecimento de cuidados da saúde.

Recomendações de utilização relacionadas com a técnica

- Os procedimentos cirúrgicos para preparação do leito ósseo devem ser adaptados às dimensões e às qualidades mecânicas do osso.

Efeitos secundários indesejáveis relacionados com a técnica de colocação

- Fraturas ósseas e falsos trajetos,
- Dores,
- Infecção no local da cirurgia,
- Hematomas,
- Lesões vasculares nervosas.

Efeitos secundários indesejáveis relacionados com a utilização do implante

- Infecção
- Deslocamento que pode provocar uma migração,
- Reações ósseas ao contato com o implante.

Planificação e precauções PRÉ-OPERATÓRIAS

- A correta seleção dos instrumentais é crítica para o sucesso da operação.
- Siga estritamente os protocolos cirúrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio dos implantes e / ou instrumentos para evitar ferimentos no paciente e ou no pessoal do centro cirúrgico.
- Alguns problemas podem surgir enquanto implantes e instrumentos são manuseados. Cheque cuidadosamente a integridade do implante: a superfície dos componentes não deve estar manchada, arranhada ou defeituosa.
- O critério usado para a seleção de paciente deve ser aquele descrito na seção “**INDICAÇÕES**”.
- Pacientes em condições e/ ou predisposições, tais como os listados na seção “**CONTRA INDICAÇÕES**”, devem ser evitados;
- O cirurgião deve estar perfeitamente familiarizado com os implantes e técnicas cirúrgicas e com a montagem dos componentes.

Precauções OPERATÓRIAS

- A correta seleção dos instrumentais é crítica para o sucesso da operação.
- Siga estritamente os protocolos cirúrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio dos implantes e / ou instrumentos para evitar ferimentos no paciente e ou no pessoal do centro cirúrgico.

- Alguns problemas podem surgir enquanto implantes e instrumentos são manuseados. Cheque cuidadosamente a integridade do implante: a superfície dos componentes não deve estar manchada, arranhada ou defeituosa.

Informações que devem ser dadas aos pacientes pelo cirurgião no PÓS-OPERATÓRIO

- O critério usado para a seleção de paciente deve ser aquele descrito na seção acima “INDICAÇÕES”
- Pacientes em condições e/ ou predisposições, tais como os listados na seção “CONTRA-INDICAÇÕES” acima, devem ser evitados;
- O cirurgião deve aconselhar os pacientes portadores de um implante a observarem certas regras de condução de uma vida saudável, e a salvaguardarem-se de quaisquer esforços abusivos. Os fatores susceptíveis de comprometerem o sucesso da implantação são:
 - Ausência de prevenção das infecções locais e genéricas,
 - Toxicomania e/ou tendência para o abuso de drogas e medicamentos,
 - Atividades físicas intensas ou movimentos repetitivos que exponham a prótese a cargas excessivas (trabalho físico penoso, etc).
 - Incapacidade intelectual do paciente para compreender e cumprir as instruções do médico,
- O cirurgião deve estar perfeitamente familiarizado com os implantes e técnicas cirúrgicas e com a montagem dos componentes.

Orientações pós-operatórias e advertências aos pacientes pelos médicos e a colaboração do paciente para seguir as instruções são extremamente importantes:

- O paciente deve ser instruído sobre as suas limitações e ser orientado para dirigir suas atividades de acordo.
- O paciente deve estar ciente que o excesso de peso durante o período de reabilitação pós-operatória pode resultar em encurvamento, afrouxamento ou fratura.
- Uma ausência de consolidação óssea persistente resultará em uma carga excessiva que repetidamente se aplicará ao implante, eventualmente conduzindo ao encurvamento, afrouxamento ou até mesmo fratura do dispositivo. No caso de uma ausência de consolidação persistente, ou se os componentes começarem a afrouxar, encurvar, e/ou quebrarem, o dispositivo deve ser revisado e/ou removido sem demora, antes que sérios danos ocorram.
- Todo material de síntese, seja ele uma placa, parafuso ou mesmo fios e hastes são implantados para dar uma fixação temporária na fratura. A finalidade dos implantes é manter a fratura estável por um período de tempo em que a consolidação óssea se forma.
- Esta consolidação óssea demora em média de 3 a 6 meses dependendo da fratura, do local e do membro fraturado. Portanto, é fundamental que o paciente siga as orientações do médico tomando os devidos

cuidados com a carga suportada na região durante os primeiros meses. Os médicos também devem acompanhar a região fraturada através de RX e exames clínicos para avaliar a formação de calo ósseo. Caso esse não tenha se formado durante o período de 6 a 7 meses, o médico deve intervir na região, colocando outro implante ou mesmo enxerto ósseo, porque nenhum material de implante suporta muito tempo micro movimentos. Se o médico não proceder dessa forma, pode ocorrer uma quebra por fadiga do implante.

Cirurgias de Revisão e Remoção

O paciente deve ser informado sobre a necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de soltura dos componentes.

Os instrumentais cirúrgicos (ou ferramentas) necessários para a implantação ou remoção dos modelos de placas e parafusos estão identificados por nome e código. E devem ser, necessariamente, da marca TECHIMPORT, de modo a evitar possíveis incompatibilidades dimensionais de projeto.

LIMITES DE MOLDAGEM DO IMPLANTE.

Destacamos que é de extrema importância o manuseio correto dos implantes.

Durante o manuseio dos implantes deve ser evitados arranhões ou entalhes nos implantes e moldagem pois esses defeitos são concentradores de tensão e podem ser sítios de nucleação de trincas e diminuir a resistência à corrosão, podendo resultar em fratura do implante ou fadiga.

Carga Suportada

Os implantes utilizados em cirurgia servem como tutor e ajudam a promover um processo normal de consolidação. Esses não têm função de substituir estruturas ósseas ou de sustentar indefinidamente as tensões provocadas nas regiões com fraturas não consolidadas.

Dessa forma, o cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o suporte físico adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante.

Características do Suporte Ósseo Adequado para Implantação

As características do suporte ósseo adequado estão relacionadas à experiência do profissional que ao optar pela utilização do Sistema de Placas Osteotech-Ped deverá realizar a análise clínica do paciente, observando as restrições impostas no item Contra Indicações constante nestas Instruções de Uso.

Condições que podem comprometer o sucesso da cirurgia

- Osteoporose severa

- Deformidade severa
- Tumor ósseo local
- Doenças sistêmicas ou distúrbios metabólicos
- História de doenças infecciosas
- Dependência e / ou abuso à drogas
- Obesidade
- Atividade física excessiva ou atividades durante as quais o implante é repetidamente submetido a um stress excessivo (p.e.: trabalho manual pesado; corridas de maratona, etc.)
- Risco potencial de incompatibilidade com outro dispositivo implantado
- Condições mentais que impeçam o paciente de seguir as instruções.
- Alergias e outras reações ao material do implante devem ser consideradas testadas (se apropriado) e controlados durante o pré-operatório.

EFEITOS ADVERSOS

Afrouxamento mecânico pode ser o resultado de fixação defeituosa, reconstrução instável do osso fraturado ou infecção oculta. Reações de sensibilidade ao metal em pacientes raramente foram informadas.

Implantação de material estranho em tecidos resulta em reações histológicas que envolvem vários tamanhos de macrófagos e fibroblastos. A importância química deste efeito é incerta, como também mudanças semelhantes podem ocorrer como um precursor, ou durante o processo curativo.

CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

Durante o manuseio do dispositivo, sempre existe o risco de que materiais estranhos e particulados, incluindo talco de luvas, fiapos de materiais e outros contaminantes da superfície, possam entrar em contato com o dispositivo. Todos os esforços devem ser feitos para limitar o manuseio dos implantes. Um implante nunca deverá ser reutilizado, e os dispositivos explantados não devem ser implantados novamente. O estresse pode levar ao desenvolvimento de imperfeições microscópicas, e, mesmo que o implante pareça intacto, pode ocasionar a falência do mesmo. Se o paciente estiver envolvido em alguma atividade ou ocupação que possa causar estresse no implante (caminhadas substanciais, corrida, levantamento de peso ou tensão muscular), estas forças podem causar falhas no dispositivo. A durabilidade desses dispositivos é afetada por numerosos fatores biológicos, biomecânicos e extrínsecos, que limitam a sua vida útil. Isto posto, a obediência estrita às indicações, contra-indicações e precauções para este produto são essenciais para maximizar a sua vida útil.

INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS AO PACIENTE

O cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o suporte físico adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante. Diante de uma fratura perfeitamente estabilizada, a carga pode ser liberada. Se a fratura não estiver estabilizada nenhuma carga pode ser dada ao sistema implantado.

ESTERILIZAÇÃO

Todos os modelos do Sistema de Placas Osteottech-Ped são comercializadas não estéreis, portanto a instituição que realizará a cirurgia será responsável pela sua esterilização, devendo utilizar métodos regularmente validados.

O produto é fornecido em sua embalagem original previamente limpo. Antes do uso, a embalagem deve ser inspecionada a fim de verificar se não há rupturas ou danos. O produto só deve ser desembulhado antes da esterilização com o intuito de preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração, manuseando-o o mínimo possível.

Métodos recomendados para esterilização desse produto

Vapor em Autoclave: Este produto é fornecido não estéril. Antes da utilização deve ser esterilizado. Recomendamos a esterilização a vapor em Autoclave no hospital (*ISO 17665-1: 2006 Sterilization of health care products – Moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices*). A autoclave é equipamento para esterilização através de vapor saturado sob pressão. É recomendável que sejam aplicados os parâmetros de esterilização física em autoclaves (vapor saturado) indicados na tabela 4.

Tabela 4 – Parâmetros de esterilização física em autoclaves

Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição
Convencional (1 atm de pressão)	134°C (273°F)	4 minutos

Obs.: O tempo deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

PARA MELHOR ESCLARECIMENTO CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES QUE ACOMPANHA CADA AUTOCLAVE.

NOTA

Ficam sob responsabilidade da instituição hospitalar, o método de esterilização, os equipamentos, os controles, e as instruções de esterilização utilizada.

Cuidados com os artigos Esterilizados.

Condições de estocagem dos artigos esterilizados:

- Quanto ao ambiente: deve ser limpo; arejado; seco; deve ser restrito à equipe do setor.

- Quanto ao artigo: após o processo de esterilização, não colocá-lo em superfície fria (pedra ou aço inoxidável), utilizar cestos ou recipientes vazados até que esfriem;
- invólucro (tecido de algodão cru, tecido não tecido, papel grau cirúrgico, papel crepado, papel com filme, tyvec ou caixas metálicas perfuradas) deve permanecer íntegro e ser pouco manuseado para evitar que os pacotes rasguem ou solte o lacre;
- ser estocado em armários fechados com prateleiras;
- prateleiras identificadas de modo a facilitar a retirada do material;
- material deve ser estocado de acordo com a data de vencimento da esterilização para facilitar a distribuição e não ficar material vencido no estoque;
- estocar separadamente dos não estéreis para reduzir o nível de contaminantes externos.

CUIDADOS COM O MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO

Embalagem:

- O Sistema de Placas Osteottech-Ped são fornecidas não estéreis e são embaladas individualmente em sacos de polietileno (PEBD) transparente fechados por termoselagem.
O PEBD tem uma combinação única de propriedades: tenacidade, alta resistência ao impacto, alta flexibilidade, boa processabilidade, estabilidade e propriedades elétricas notáveis. O PEBD pode ser processado por extrusão, moldagem por sopro e moldagem por injeção. Assim sendo, é aplicado como filmes para embalagens industriais e agrícolas, filmes destinados a embalagens de alimentos líquidos e sólidos, filmes laminados e plastificados para alimentos, embalagens para produtos farmacêuticos e hospitalares, brinquedos e utilidades domésticas, revestimento de fios e cabos, tubos e mangueiras.
- Os implantes embalados só devem ser aceitos se recebidos com a embalagem de fábrica e os rótulos intactos.
- O rótulo e a embalagem devem ser totalmente removidos antes dos componentes serem autoclavados a vapor.

Armazenagem e transporte:

- Armazenar e transportar em temperatura ambiente em local seco e fresco, sem exposição a incidência de luz, umidade ou a substâncias contaminantes.
- Os implantes devem ser armazenados na embalagem original, em local fresco e seco e protegidos da poeira e da luz solar direta.
- Proteger os implantes de arranhões e amassamentos
- Tenha extremo cuidado no manuseio e armazenagem dos implantes.
- Não permita o contato com metal e outros objetos que possam comprometer o uso apropriado final.

- Implantes e instrumentos devem ser protegidos durante a armazenagem de ambientes corrosivos tais como: ar salgado, umidade etc.

Precauções quanto ao manuseio:

- Uma vez removido do paciente, o implante não deve ser reusado. Descarte todos os implantes danificados. A TECHIMPORT não aceita devolução deste tipo de material.
- O implante deve ser usado somente em suas condições originais. Qualquer mudança feita pelo usuário pode levar à falha do implante.
- Tenha extremo cuidado ao manusear os implantes. Riscos na superfície dos componentes podem causar rachaduras que podem significativamente reduzir as características de uso do implante e particularmente resistência à corrosão.
- No caso de ocorrer algum dano no implante antes de ser utilizado (seja por quedas ou riscos), este deve ser devolvido a TECHIMPORT, que estabeleceu um procedimento específico para o recebimento de devolução deste material.
- É essencial para a durabilidade do implante que as superfícies dos ossos estejam perfeitamente limpas e não estejam danificadas.
- Advertimos para que não sejam utilizados implantes de outras marcas com os implantes TECHIMPORT.
- Siga as regras específicas de compatibilidade dos componentes definidas na literatura e técnicas cirúrgicas.
- O planejamento pré-operatório usando radiografias permite a determinação dos tamanhos dos componentes.

Manuseio de implantes não utilizados e fora da embalagem original:

O **Sistema de Placas Osteottech-Ped** são fornecidos em sua embalagem original previamente limpo e pronto para a esterilização. A embalagem do produto não é própria para esterilização, no entanto o produto é fornecido pronto para ser esterilizado. Os mesmos durante a esterilização devem ser manuseados de tal forma que não comprometam sua rastreabilidade. As etiquetas de rastreabilidade devem seguir o produto em todas as fases cirúrgicas. Os envelopes plásticos de PEBD protegem e conservam os implantes até seu uso. O produto só deve ser desembalhado imediatamente antes da esterilização com o intuito de preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração, manuseando-o o mínimo possível, assim recomendado na norma NBR ISO 8828.

Caso o produto não tenha sido utilizado durante a cirurgia e estando fora de sua embalagem o mesmo dever ser descartado, considerado impróprio para uso. O reprocessamento deste produto é proibido conforme legislação brasileira. Ver item **“DESCARTE DO DISPOSITIVO”**.

Formas de apresentação do produto médico

O implante é embalado unitariamente em embalagens plásticas transparente fabricadas em polietileno (figura 01). Em todas as embalagens são inseridas as instruções de uso do produto. Cada placa e parafuso são embalados individualmente e rotulados. Junto com cada implante são fornecidas 6 etiquetas de rastreabilidade. O modelo do rotulo bem como as informações contidas nelas estão definidas na figura 02.



Figura 01 – Modelo da embalagem utilizada na embalagem das placas e parafusos

Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP			
ROD WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) - LOTE B-B - JD ANHANGUERA - RIO CLARO - SP			
CNPJ:15524794000147 - Fone: +55 (19)3522-9500 - SAC: +55 (19)3522-9500			
R.T.: Eduardo Henrique Silva Wolf - CREA 5070056408 - Instrução de Uso pelo Site http://www.techimportimplantes.com.br			
Nome Técnico:			
Nome Comercial:			
Modelo Comercial:			
Registro ANVISA n. Material:	Qtd.: un.	Proibido Reprocessar / Uso Único	
Ref:			
Lote:	Indeterminado		
SN:			
Armazenar e transportar em temperatura ambiente em local seco e fresco, sem exposição a incidência de luz, umidade ou substâncias contaminantes			
Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instrução de Uso - Revisão - Consulta pelo Site			
PRODUTO NÃO ESTÉRIL - ESTERELIZAR ANTES DO USO			
			
			


Figura 02 – Modelo de rotulo (etiqueta de rastreabilidade)

Legenda da Simbologia

	Data de Fabricação		Consultar Instruções de Uso
	Data de Validade		Frágil, manusear com cuidado
	Manter Seco		Manter ao abrigo do sol
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único
	Não Estéril		

RASTREABILIDADE: Junto da embalagem do componente implantável seguem 6 (seis) etiquetas de rastreabilidade contendo os dados do implante utilizado. Essa etiqueta é a mesma etiqueta contida na rotulagem externa do produto. Uma etiqueta deve ser obrigatoriamente colada no prontuário clínico do paciente, outra no laudo entregue para o paciente, outra na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar, outra disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição – RHD, outra disponibilizada para o controle do cirurgião responsável (principal) e a última para convênio médico caso exista. Informamos que obrigatoriamente o prontuário do paciente deve ter registrado informações que permitam rastrear o produto implantado. A colagem dessa etiqueta no prontuário permite a rastreabilidade do produto utilizado.

MARCAÇÃO: A identificação do produto é feito através de gravação laser. O **Sistema de Placas Osteotech-Ped** contém as seguintes informações gravadas a laser para permitir a rastreabilidade e acompanhamento do paciente no pós operatório:

<p>Marcação a Laser: - Marcar: Logotipo.</p>  <p>Marcação a Laser: - Marcar: Lote.</p>	<p>Logo-Lote-sigla do material-código do produto-dimensão "maiores detalhes ver desenho do produto"</p>
<p>Parafusos</p> <p>Nos parafusos a gravação é feita sobre a cabeça do parafuso. Devido a limitação de espaço, nos parafusos não são gravados o código do produto.</p>	<p>Placas</p> <p>Nas placas a gravação é feita na parte superior e entre os furos</p>

DESCARTE DO DISPOSITIVO: Conforme a RDC 222 de 2018, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados. Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com dispositivos explantados. Estes dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. **DISPOSITIVOS EXPLANTADOS SÃO CONSIDERADOS LIXO HOSPITALAR**

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso e/ou queixa técnica que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao órgão sanitário competente através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sítio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail gerencia@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500.

Fabricado por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 172, RUA 06, CONDOMINIO CONPARK, CAIXA POSTAL 223 - RIO CLARO-SP-BRASIL CEP: 13.501-600

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE SILVA WOLF CREA-SP: 5070056408

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



TECHIMPORT
TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para:
qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:
www.techimportimplantes.com.br

Revisão: 01
Emissão: 2022