

## Instrução de Uso

**Nome Técnico:** Âncora

**Nome Comercial:** Âncoras Flexíveis Knottech Techimport

**Registro ANVISA n.** 81118460081

**Responsável técnico:** Eduardo Henrique Silva Wolf - CREA-SP: 5070056408

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

As Âncoras Flexíveis Knottech Techimport tem como finalidade a reconexão de tecidos moles aos ossos nos membros superiores (Ombro, Cotovelo, Punho e Mãos) e inferiores (Tornozelo e Pé) atuando de maneira a suportar cargas de tração através da compressão entre a âncora e a cortical óssea quando implantados. Os implantes são disponibilizados pré-carregados em um cabo aplicador descartável, composto por uma haste metálica e um cabo polimérico. O implante e o cabo aplicador descartável constituem produto único e não podem ser vendidos separadamente.

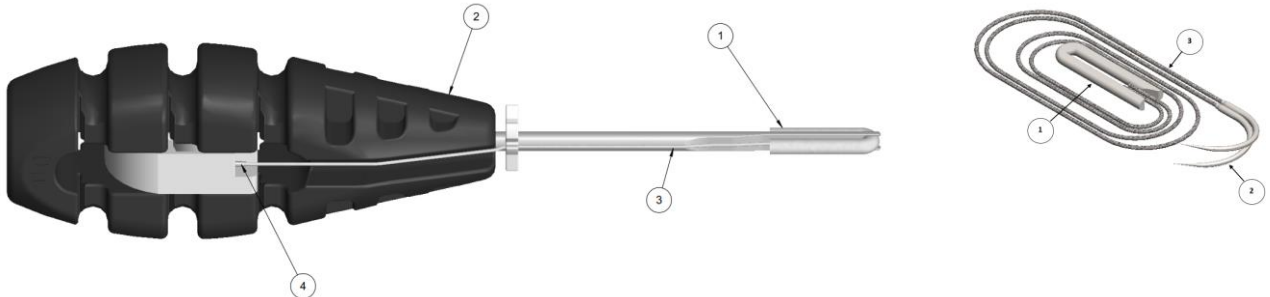
A família de Âncoras Flexíveis Knottech Techimport estão disponíveis nos seguintes diâmetros de âncoras flexíveis: Ø0,9 / Ø1,3 / Ø1,5 / Ø2,1 / Ø2,4 / Ø2,9mm. A **figura 1** mostra a Âncora Flexíveis Knottech Techimport:



Figura 1 - Âncora Flexíveis Knottech Techimport

As Âncoras Flexíveis Knottech Techimport são compostos por âncoras e os fios de suturas fabricados em Polietileno entrançado de elevado peso molecular -UHMWPE - NBR 13904 e cabo aplicador fabricado em Resina fotopolimerizável, Aço inox Austenítico (ASTM F899), Polipropileno (ASTM D4101), PL400 Transparente e Borracha nitrílica 70 Shore (**ver tabela 2**). As Âncoras Flexíveis Knottech Techimport são fornecidos na condição estéril, sendo que o método de esterilização empregado é dado através da submissão do produto à presença de óxido de etileno (E.T.O.). As características das Âncoras Flexíveis Knottech Techimport estão descritos na **tabela 2**. A **tabela 1** ilustra a composição das Âncoras Flexíveis Knottech Techimport:

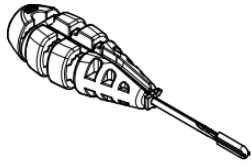
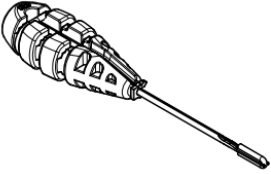
Tabela 1 – Composição das Âncoras Flexíveis Knottech Techimport

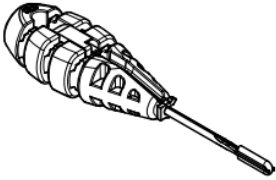
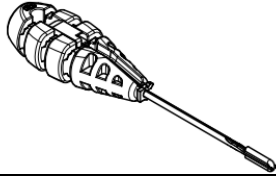
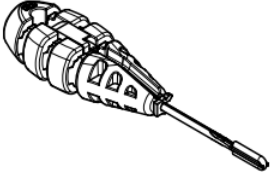
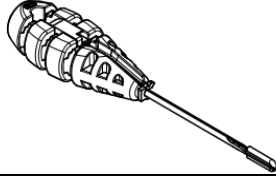
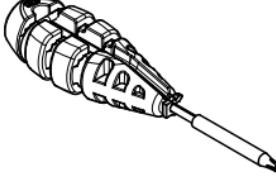
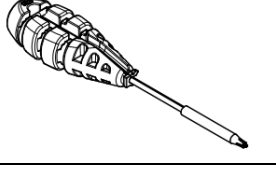
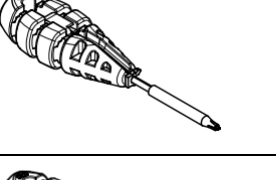
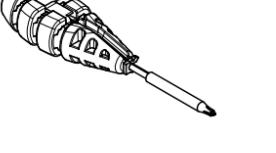


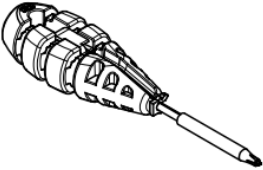
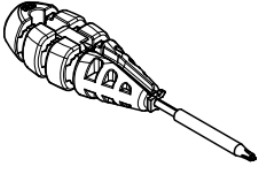
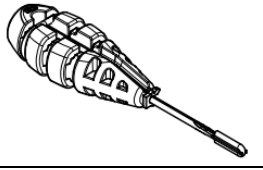
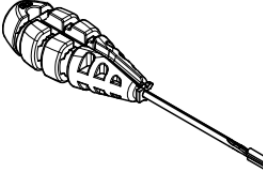
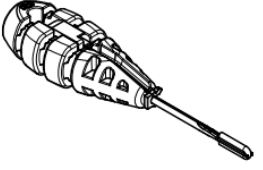
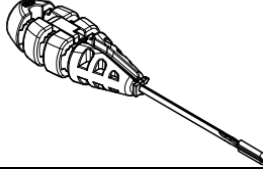
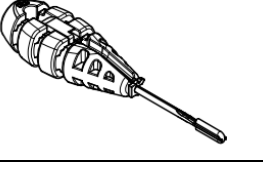
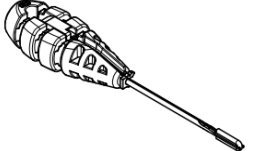
N.	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TIPO	
1	Âncora Flexível KNOTTECH	Ø0,9mm	Poliétileno entrançado de elevado peso molecular - UHMWPE - NBR 13904	Implantável
		Ø1,3mm		
		Ø1,5mm		
		Ø2,1mm		
		Ø2,4mm		
2	Cabo aplicador	Mini	<b>Cabo:</b> Polipropileno (ASTM D4101) <b>Haste:</b> Aço inox Austenítico (ASTM F899) <b>Demais componentes do cabo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anel O-ring: Borracha nitrílica 70 Shore</li> <li>Trava do fio: Resina fotopolimerizável</li> </ul>	Descartável
		Curto		
		Longo		
		Cabo STD		
		Mini com Capa		
Curto com Capa				
3	Fio de sutura	USP 2-0	Poliétileno entrançado de elevado peso molecular - UHMWPE - NBR 13904	Implantável
		USP 3-0		
		USP 2		
4	Agulha	½ círculo cilíndrica	Aço inox martensítico (ASTM F899)	Descartável

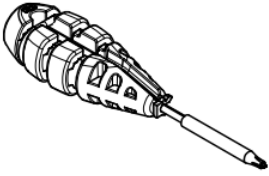
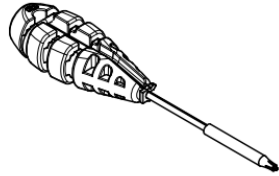
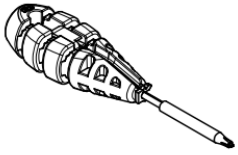
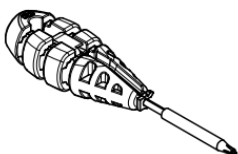
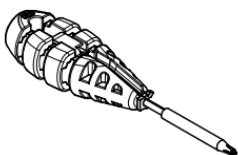
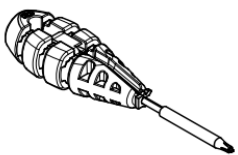
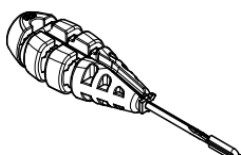
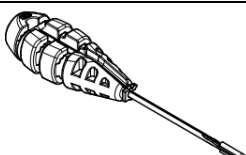
## TABELA DE CÓDIGOS E DESCRIÇÕES

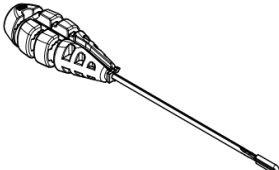
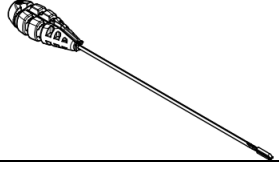
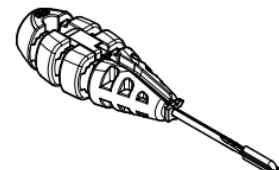
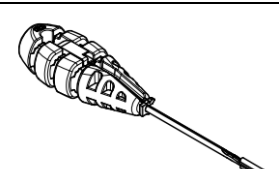
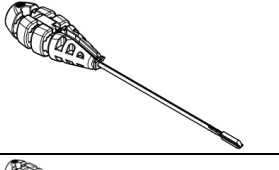
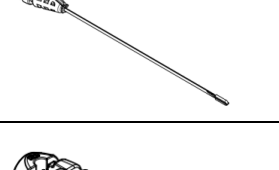
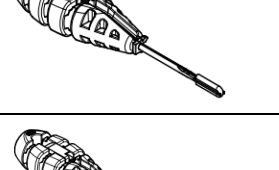
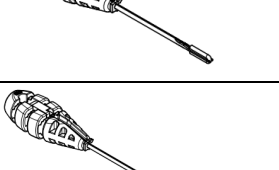
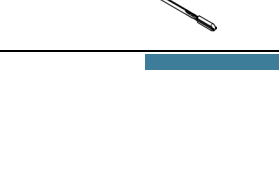
Tabela 2: Relação de Modelos Comerciais – Âncoras Flexíveis Knottech Techimport

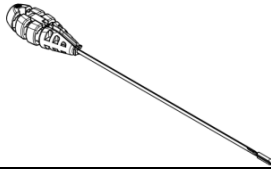
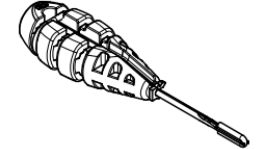
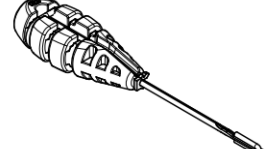
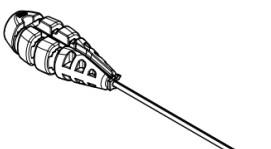
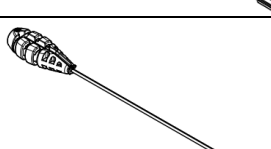
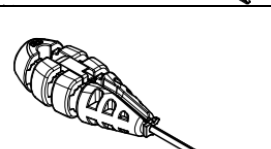
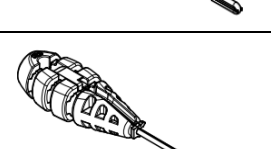
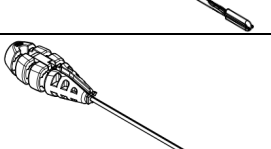
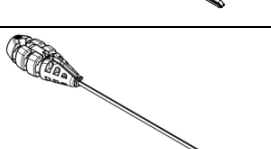
Imagem	Código	Descrição	Qt/Subcomponentes	Cor do fio
	TI034.0920.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 cabo mini	---
	TI034.0920.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 cabo curto	---

	TI034.0920.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 cabo mini	---
	TI034.0920.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 cabo curto	---
	TI034.0920.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 cabo mini	---
	TI034.0920.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 cabo curto	---
	TI034.0920.140	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0920.150	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo curto com Capa	---
	TI034.0920.141	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0920.151	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo curto com Capa	---

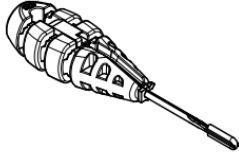
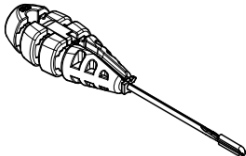
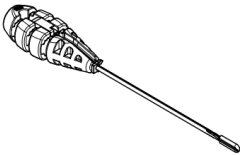

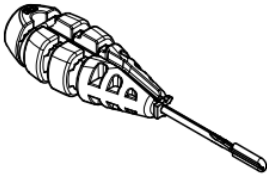
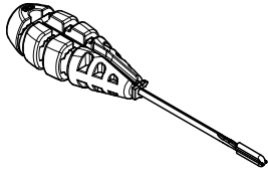
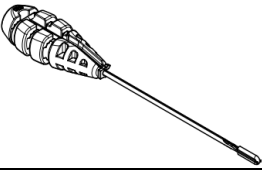
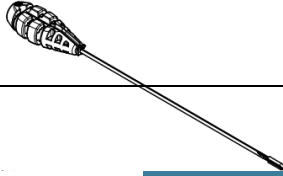
	TI034.0920.142	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0920.152	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto com Capa	---
	TI034.0930.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.0930.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.0930.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo mini	---
	TI034.0930.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 cabo curto	---
	TI034.0930.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo mini	---
	TI034.0930.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo curto	---

	TI034.0930.140	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 sem Agulha - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0930.150	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 sem Agulha - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo curto com Capa	---
	TI034.0930.141	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 1 Agulha - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0930.151	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 1 Agulha - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto com Capa	---
	TI034.0930.142	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0930.152	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto com Capa	---
	TI034.1320.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1320.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---

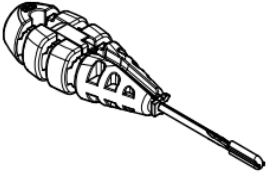
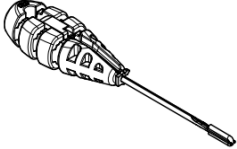
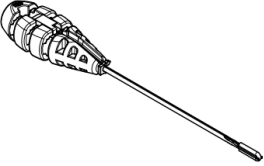
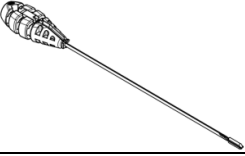
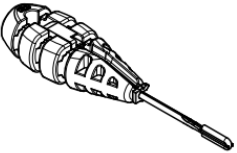
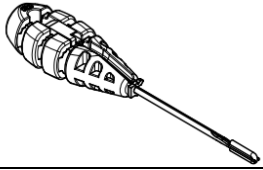
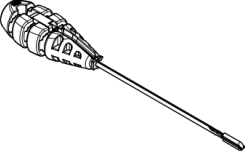

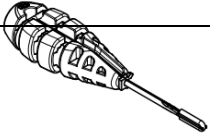
	TI034.1320.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1320.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1320.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1320.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1320.121	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1320.131	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1320.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1320.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1320.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---

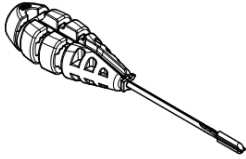
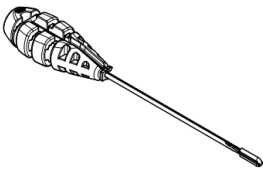

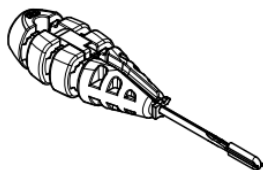
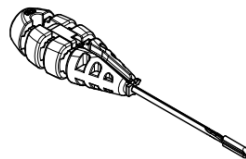
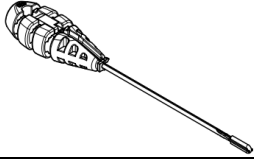
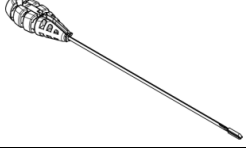
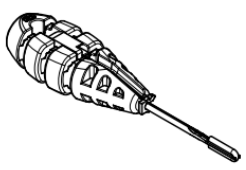

	TI034.1320.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1320.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1320.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1320.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1320.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1320.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1320.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1320.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1320.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

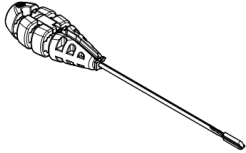
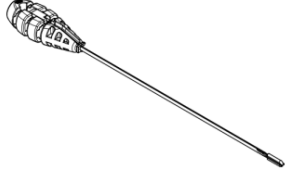
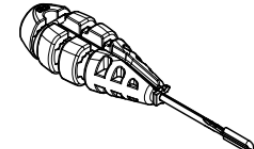
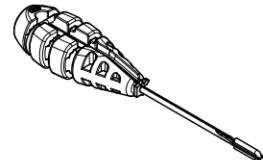
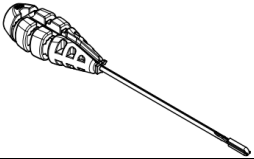

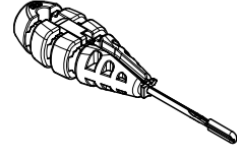
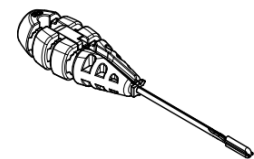
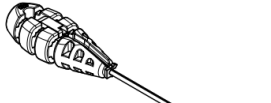


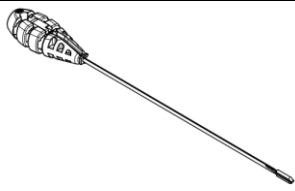
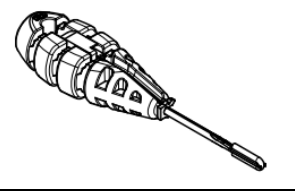
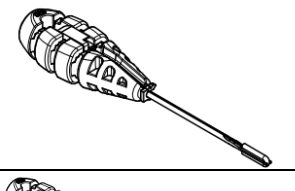
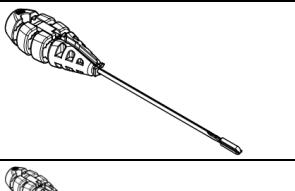
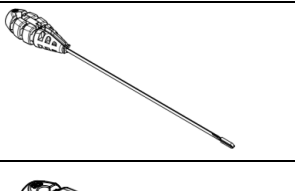
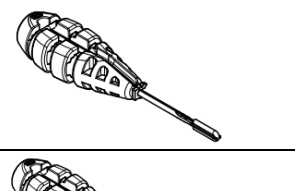
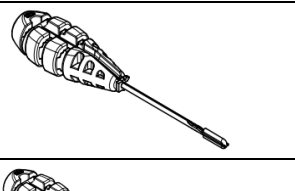
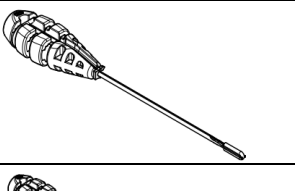
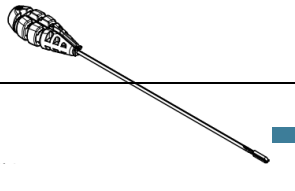
			1 Cabo longo	---
	TI034.1320.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1320.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1320.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1320.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1302.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco

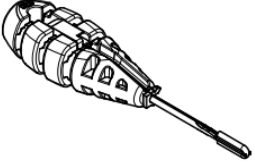
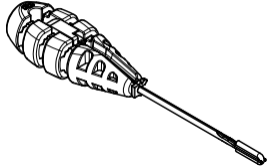
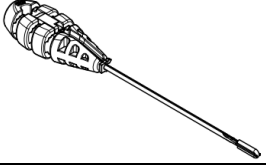

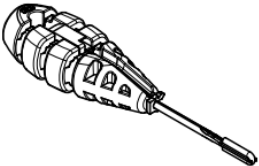
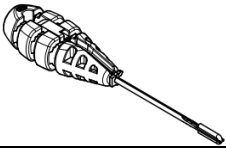
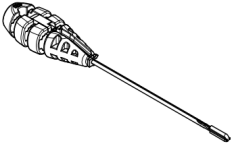

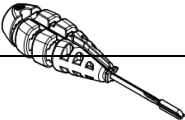


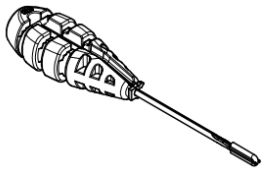
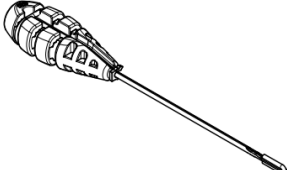

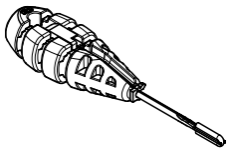
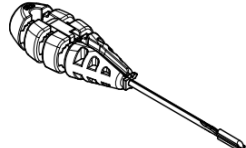
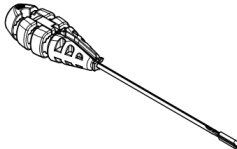
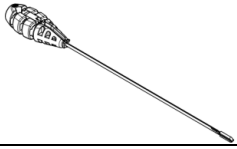
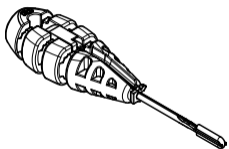
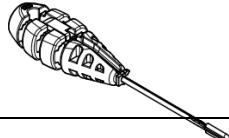
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.121	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.131	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1302.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1302.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco

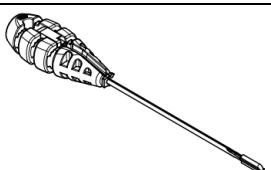
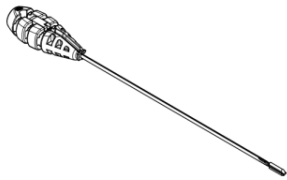
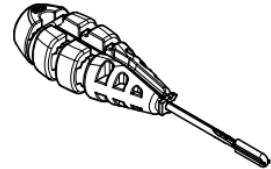
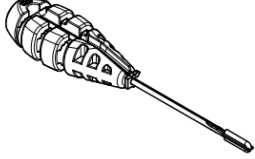
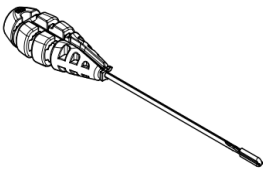
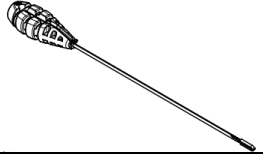
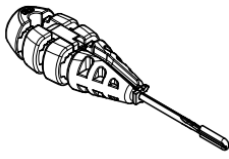
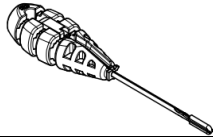
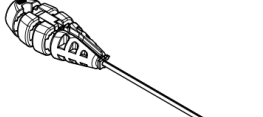
		sem Agulha - Cabo Mini	1 fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1302.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1302.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.121	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---

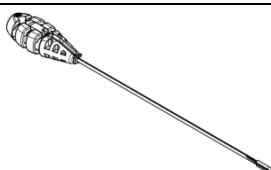
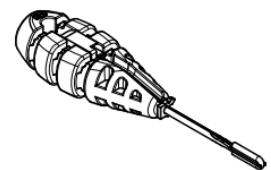
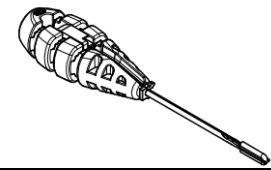
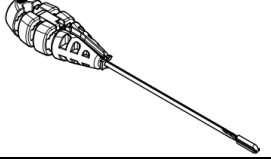

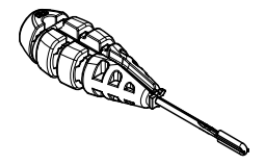
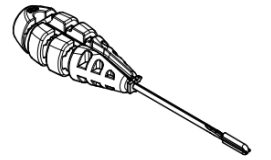
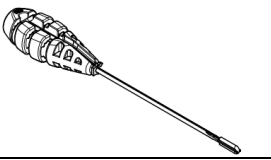
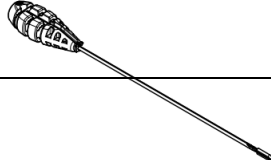
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.131	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco

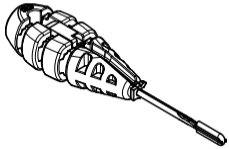
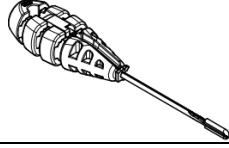
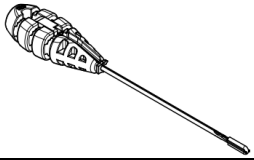
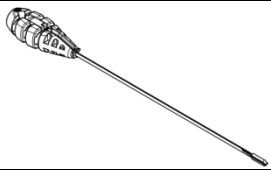
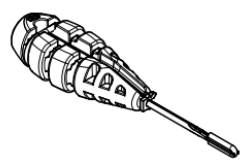
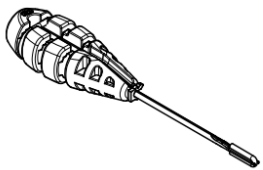
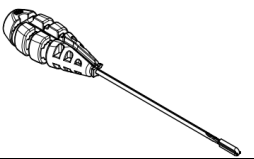
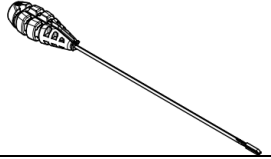

			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1502.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco

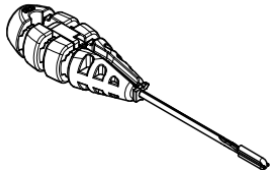
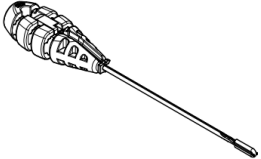
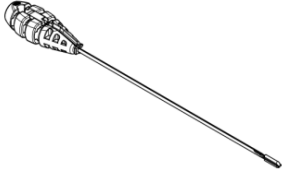
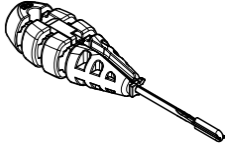
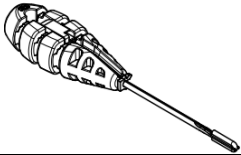
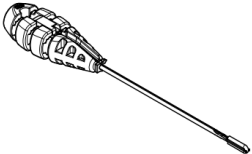

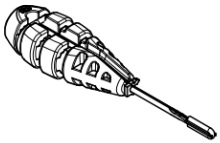
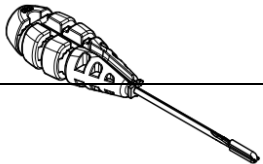
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1502.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1502.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1502.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1502.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1502.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1502.121	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1502.131	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1502.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1502.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas -	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

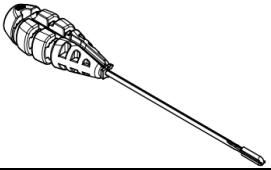
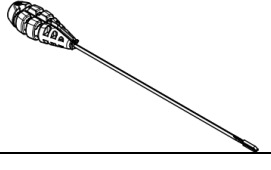
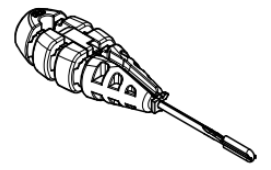
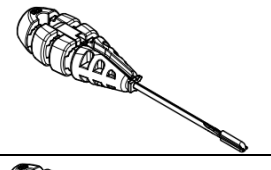
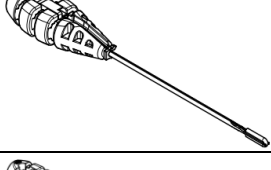
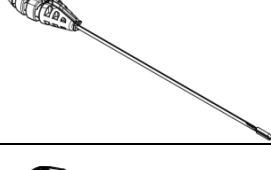
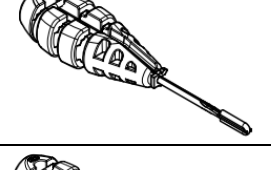
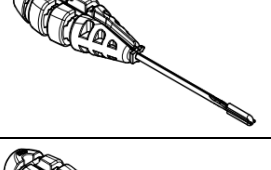
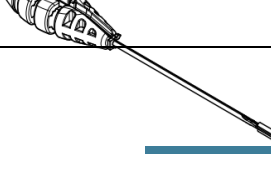
	TI034.1502.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 Cabo Curto	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.1502.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1502.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1502.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1502.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1502.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1502.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1502.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1502.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

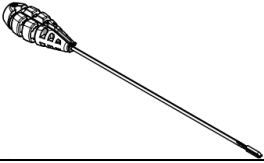
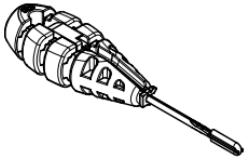
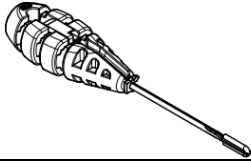
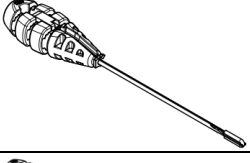
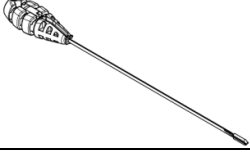
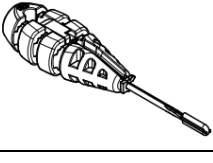
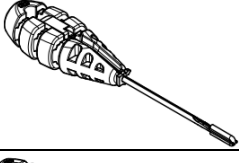
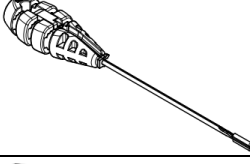
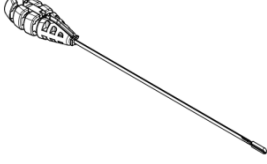
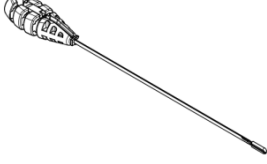
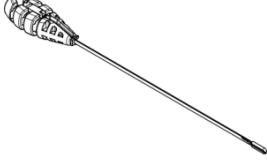
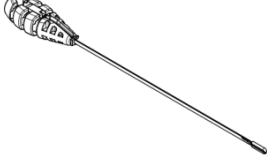


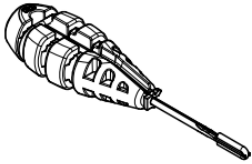
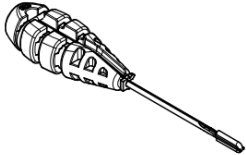
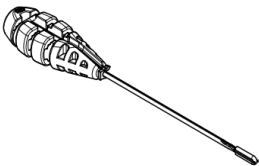

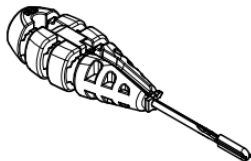
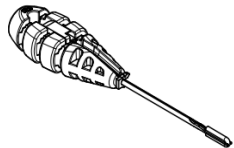
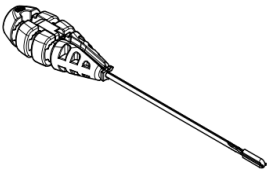


	TI034.1502.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.1502.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 Cabo Longo	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.1502.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 Cabo Mini	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.1502.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 Cabo Curto	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.1502.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.2102.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 Cabo Longo	---
			1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2102.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 Cabo Curto	---
			1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2102.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2102.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco

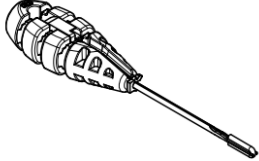
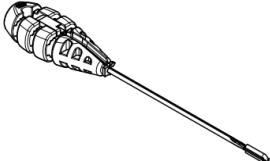

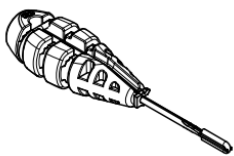
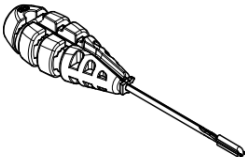
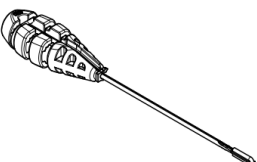
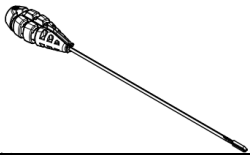
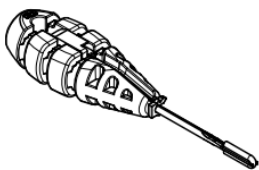

	TI034.2102.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 Cabo Longo	---
			1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.2102.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2102.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2102.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2102.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2102.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2102.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2102.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2102.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

			1 Cabo Mini	---
	TI034.2102.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2102.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2102.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2102.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2102.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2102.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2102.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco

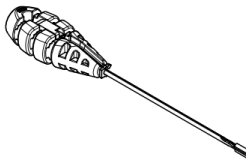
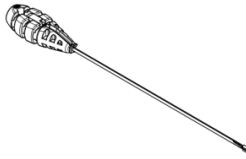
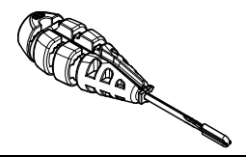
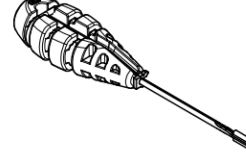
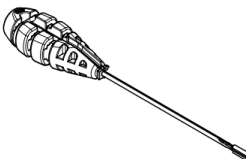
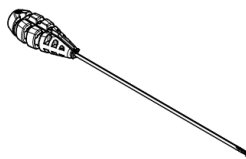
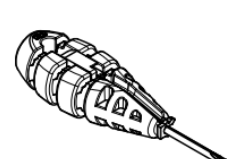
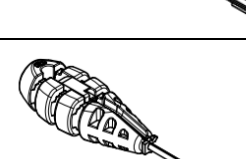
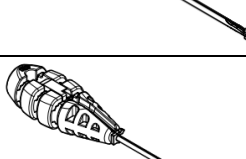
	TI034.2402.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 Cabo Curto	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	---
			1 Fio USP 2	Branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2402.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco

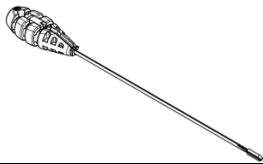
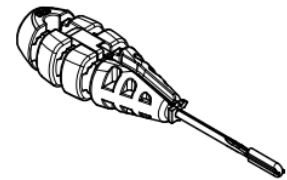
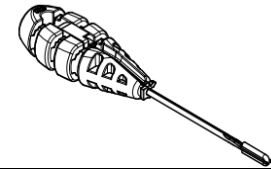
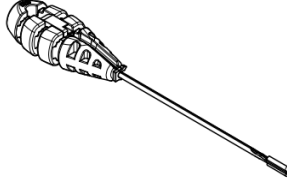
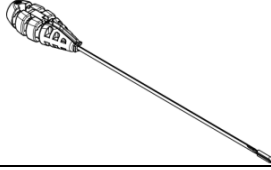
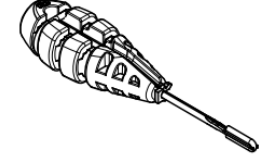
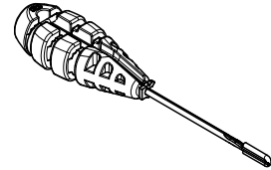
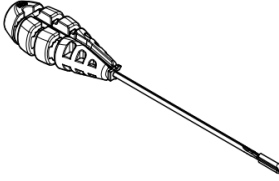
	TI034.2402.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 Cabo Longo	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 Cabo Curto	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 Cabo Longo	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Curto	4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 Cabo Curto	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 Cabo Longo	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco


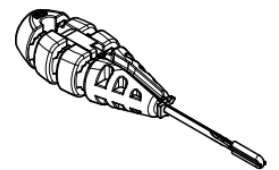
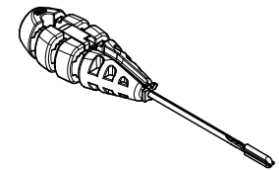
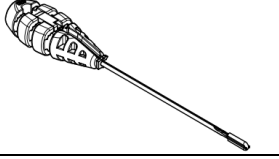
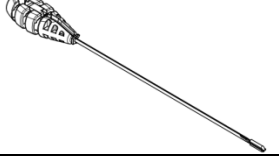
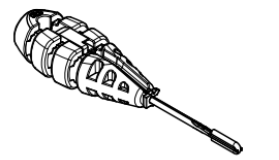
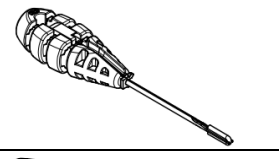
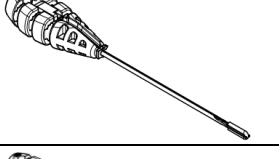

	TI034.2402.300	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.310	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.320	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2402.330	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.303	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.313	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.323	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2402.333	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.306	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.316	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.326	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2402.336	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2902.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---



			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2902.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2902.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

	TI034.2902.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2902.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.300	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.310	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.320	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---

	TI034.2902.330	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.303	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.313	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.323	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.2902.333	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.2902.306	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.316	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.326	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.2902.336	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---

## ACESSÓRIOS E COMPONENTES ANCILARES

As **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** não possui acessórios e componentes ancilares.

## COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

A família de **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** é fornecido pronto para uso, conforme mostra a tabela 1 e 2. Não requer montagem.

## INDICAÇÕES DE USO

A Família de **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** são indicados para serem usadas nas indicações listadas na tabela 3.

Tabela 3 – Indicações de uso das Âncoras Flexíveis Knottech Techimport

Modelo	Indicação
Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm	Mãos e punho, nas seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconstrução de ligamento triangular;</li> <li>• Reparos tendinosos (dedo em martelo);</li> <li>• Instabilidade metacarpofalangiana;</li> <li>• Reparo da instabilidade interfalangeana;</li> <li>• Reconstrução capsular;</li> <li>• Transferências tendíneas</li> </ul>
Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm	
Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm	
Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm	Ombro, nas seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconstrução do ligamento acromioclavicular</li> <li>• Reinserção capsulolabral</li> <li>• Reparo de lesão de Bankart inferior, posterior e superior</li> <li>• Tratamento da instabilidade anterior, posterior e multidirecional</li> <li>• Reparação do lábio anterior, inferior, posterior e superior</li> </ul> Cotovelo, nas seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinserção do tendão distal do bíceps/tríceps;</li> </ul> Tornozelo e pé, nas seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconstrução do ligamento lateral</li> <li>• Reparos de tendão</li> <li>• Reconstrução capsular</li> </ul>
Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm	
Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm	

## FINALIDADE DO PRODUTO MÉDICO

As **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** tem como finalidade a reconexão de tecidos moles aos ossos nos membros superiores (Ombro, Cotovelo, Punho e Mãos) e inferiores (Tornozelo e Pé).

## FUNDAMENTOS DE FUNCIONAMENTO DO PRODUTO MÉDICO

As **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** são elementos de fixação por suspensão, cuja a combinação entre a âncora de sutura flexível e as suturas permitem a estabilização, o reparo, e a reconstrução de tecidos moles, atuando como polo de fixação ou distribuição de cargas de tração. As âncoras de sutura flexível, devido a sua composição, são macias. Após serem completamente inseridas no pré-furo, o conjunto é tracionado

através das suturas, ocasionando uma expansão da âncora, e conseqüente aumento de seu diâmetro, dentro do pré-furo, resultando em ancoragem contra a cortical óssea.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS, ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COM SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

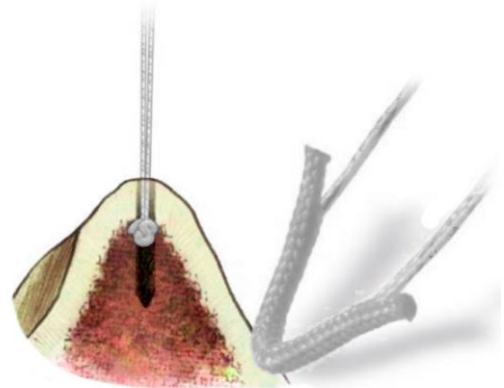
**INSTRUÇÕES DE USO**

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo ao cirurgião a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

- Manipular as **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** exclusivamente em ambientes adequados (ambulatórios ou salas cirúrgicas) com os devidos cuidados (somente deverão ser manipuladas com luvas esterilizadas). Somente profissionais capacitados devem manipular e implantar a **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport**.

- A **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** deverão ser aplicadas e adaptadas de acordo com as exigências e técnicas cirúrgicas adequadas. Abaixo é apresentada a seqüência da técnica cirúrgica:

1. Selecionar o modelo da âncora.
2. Preparar a superfície óssea que irá receber a sutura.
3. Realizar o pré-furo utilizando broca adequada conforme dimensão da respectiva âncora.
4. Posicionar a âncora e impactar utilizando o cabo aplicador de maneira que toda âncora seja inserida no tecido ósseo esponjoso.
5. Realizar tração do conjunto de forma manual, objetivando a expansão inicial da âncora de sutura flexível no pré-furo.
6. Remover o cabo aplicador deixando as suturas tracionadas.
7. Realizar a tração de maneira a atingir a expansão total da âncora flexível até sua completa fixação.
8. Realizar o procedimento de sutura.  
Obs: O corte dos fios deve ser realizado a uma distância mínima de segurança acima do nó.
9. Descartar o cabo.



• A Techimport disponibiliza as instruções de uso em seu sítio eletrônico. A versão atualizada da instrução de uso disponíveis no sítio eletrônico da Techimport está identificada no rótulo e nas etiquetas de rastreabilidade do produto. A versão da instrução de uso, deve ser a mesma indicada no rótulo e etiquetas de rastreabilidade. Caso seja necessário obter a instrução de uso em formato impresso, favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio), essa instrução de uso. Solicitar para: [qualidade@techimportimplantes.com.br](mailto:qualidade@techimportimplantes.com.br) ou pelo telefone (19) 3522-9500.

## **CONTRA INDICAÇÕES**

Os pacientes que apresentarem algum dos quadros clínicos descritos abaixo, não devem ser submetidos ao procedimento com o uso do produto:

- ✓ Procedimentos cirúrgicos diferentes dos indicados na lista apresentada na seção INDICAÇÕES.
- ✓ Uso da ancora na tuberosidade maior do úmero.
- ✓ Qualidade ou quantidade Óssea insuficiente que possa comprometer uma fixação segura da âncora.
- ✓ Patologias do osso que possam comprometer uma fixação segura da âncora.
- ✓ Patologias do tecido mole a ser fixado que possam prejudicar a fixação segura pela sutura.
- ✓ Limitações do aporte sanguíneo e infecções anteriores que possam retardar o processo de cicatrização.
- ✓ Sensibilidade a corpos estranhos. Se se suspeitar de sensibilidade ao material, deverão ser realizados testes apropriados e excluída a sensibilidade antes da implantação.
- ✓ Qualquer infecção ativa.
- ✓ Condições que limitem a capacidade ou vontade do paciente para restringir atividades ou cumprir instruções durante o período de cicatrização.
- ✓ Fixação de ligamentos artificiais ou outros implante.
- ✓ A utilização deste dispositivo pode não ser adequada em pacientes com insuficiência óssea ou estrutura óssea imatura. O médico deve avaliar cuidadosamente a qualidade óssea antes de efetuar cirurgia ortopédica em pacientes que sejam esqueleticamente imaturos. A utilização deste dispositivo e a colocação de equipamento ou implantes não devem unir, perturbar ou afetar a placa de crescimento.
- ✓ Hipersensibilidade conhecida ao material do implante. Quando se suspeitar de sensibilidade ao material, é necessário efetuar os testes adequados antes do implante, a fim de se eliminar a possibilidade de sensibilidade.
- ✓ Problemas físicos que eliminem ou tendam a eliminar o suporte adequado pelo dispositivo ou que comprometem a cicatrização.

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

**Este produto é de uso único.**

**Não reutilizar o produto.**

**Esse produto não pode ser reprocessado. Proibido reprocessar.**

O respeito aos procedimentos pré-operatórios e pós-operatórios, o entendimento adequado da técnica cirúrgica, a seleção correta e posicionamento do implante são críticos para o sucesso da cirurgia.

A correta seleção do implante é extremamente importante. O tipo apropriado, forma e tamanho devem ser de acordo com o paciente. Estes dados são obtidos a partir do planejamento pré-operatório.

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada

Observação: Não devem ser utilizados componentes de implantes de fabricantes diferentes, **portanto recomendamos que os produtos tenham a mesma procedência.**

Data de fabricação, prazo de validade e lote do produto: VIDE ROTULO.

#### **VALIDADE**

Este produto tem validade de 3 anos, contados à partir da data de esterilização.

#### **PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

#### **RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO GERAIS**

- Todos os implantes devem ser utilizados com o formato original.
- O planejamento pré-operatório permitem determinar a dimensão correta dos implantes.
- Apenas a utilização de material de instrumentação específico para este implante garante a sua colocação de forma satisfatória.
- Os detritos resultantes da intervenção (embalagens, explantes, cabo descartável...) deverão ser tratados como quaisquer outros detritos de origem médica pelo estabelecimento de cuidados da saúde.

#### **PRECAUÇÕES PRÉ OPERATÓRIAS E OPERATÓRIAS**

- A correta seleção dos instrumentais é crítica para o sucesso da operação.
- Siga estritamente os protocolos cirúrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio dos implantes e / ou instrumentos para evitar ferimentos no paciente e ou no pessoal do centro cirúrgico.
- O critério usado para a seleção de paciente deve ser aquele descrito na seção “**INDICAÇÕES**”.
- Pacientes em condições e/ ou predisposições, tais como os listados na seção “**CONTRA INDICAÇÕES**”, devem ser evitados;
- O cirurgião deve estar perfeitamente familiarizado com os implantes e técnicas cirúrgicas e com a montagem dos componentes.



### **TRATAMENTO PÓS OPERATÓRIO E INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER DADAS AOS PACIENTES**

A mobilização física deve ser iniciada imediatamente no pós-operatório, incluindo exercícios de movimentação. Restrições podem ser apropriadas em casos especiais, a critério do cirurgião.

O nível de atividade de um paciente e a observação das restrições pós-operatórias são fatores importantes na vida funcional de qualquer dispositivo de fixação interna. Os pacientes devem ser avisados das consequências da não observação das instruções pós-operatórias. O cirurgião deve enfatizar que a não colaboração do paciente pode resultar na falha do implante, com a possibilidade de ser necessária uma cirurgia corretiva.

Os cuidados pós-operatórios incluem, mas não se limitam aos seguintes aspectos:

- Restrição do nível de atividade até se atingir a cura total do osso;
- Evitar atividades que possam ocasionar torções, quedas, choques, que poderiam ocasionar falhas no dispositivo;
- Cuidados com a cicatrização.

### **CIRURGIAS DE REVISÃO E REMOÇÃO**

O paciente deve ser informado sobre a necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de soltura dos componentes.

Os instrumentais cirúrgicos necessários para a implantação ou remoção dos modelos deste produto estão identificados por nome e código. E devem ser, necessariamente, da marca TECHIMPORT, de modo a evitar possíveis incompatibilidades dimensionais de projeto.

### **LIMITES DE MOLDAGEM DO IMPLANTE.**

O produto não pode ser moldado.

### **LIMITES DE CARGA DO IMPLANTE**

Embora os ensaios comprovem que a resistência mecânica dos produtos testados seja superior às cargas resultantes de atividades normais diárias, os implantes utilizados em cirurgia servem apenas para auxiliar e promover um processo normal de consolidação ligamentar. Esses não têm a função de substituir estruturas ligamentares ou tendinosas ou de sustentar indefinidamente as tensões provocadas nas regiões com lesões não consolidadas ou fixadas. Dessa forma, o cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o tipo de suporte físico, adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante.

As Âncoras Flexíveis KNOTTECH Ø0,9mm, Ø1,3mm Ø1,5mm indicadas para serem usadas nas Mãos e punhos, precisam suportar forças fisiológicas de tração de >52,4N. Conforme ensaios realizados, essas âncoras suportaram cargas de tração superiores a 60N.

As Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm, Ø2,4mm e Ø2,9mm indicadas para serem usadas no ombro, Cotovelo, Tornozelo e pé, precisam suportar forças fisiológicas de tração de >52N. Conforme ensaios realizados, essas âncoras suportaram cargas de tração superiores a 120N.

### **EFEITOS ADVERSOS**

- ✓ Infecção, tanto profunda como superficial.
- ✓ Alergias e outras reações aos materiais do dispositivo.
- ✓ Pode ocorrer quebra da sutura ou da Âncora.
- ✓ Não consolidação ou consolidação tardia, o que pode levar à quebra do implante.
- ✓ Afrouxamento ou migração do implante.
- ✓ Dor, desconforto ou sensação anormal em decorrência da presença do dispositivo.
- ✓ Lesões nervosas decorrentes de trauma cirúrgico.
- ✓ Necrose óssea ou tecidual.
- ✓ Cicatrização inadequada.
- ✓ Fratura óssea intraoperatória, pós-operatória e/ou dor pós-operatória.
- ✓ complicações com anestesia.
- ✓ problemas de embolia ou coágulo sanguíneo (p. ex., embolia pulmonar, trombose de veia profunda, etc.).
- ✓ falha do tratamento ou do implante.
- ✓ Intervenção cirúrgica secundária para tratar complicações associadas à cirurgia ou ao tratamento[37].
- ✓ Ligeira reação inflamatória.

### **CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO**

Durante o manuseio do dispositivo, sempre existe o risco de que materiais estranhos e particulados, incluindo talco de luvas, fiapos de materiais e outros contaminantes da superfície, possam entrar em contato com o dispositivo. Todos os esforços devem ser feitos para limitar o manuseio dos implantes. Um implante nunca deverá ser reutilizado, e os dispositivos explantados não devem ser implantados novamente. O estresse pode levar ao desenvolvimento de imperfeições microscópicas, e, mesmo que o implante pareça intacto, pode ocasionar a falência do mesmo. Se o paciente estiver envolvido em alguma atividade ou ocupação que possa causar estresse no implante (caminhadas substanciais, corrida, levantamento de peso ou tensão muscular), estas forças podem causar falhas no dispositivo. A durabilidade desses dispositivos é afetada por numerosos fatores biológicos, biomecânicos e extrínsecos, que limitam a sua vida útil. Isto posto, a obediência estrita às indicações, contra-indicações e precauções para este produto são essenciais para maximizar a sua vida útil.

## **ESTERILIZAÇÃO**

Todos os modelos de **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** são comercializadas esterilizados por gás óxido de etileno de acordo com as normas ABNT NBR ISO 11135:2018 - Esterilização de produtos de atenção à saúde - Óxido de etileno - Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde e Portaria Interministerial Nº 482, de 16 de abril de 1999. Antes do uso, a embalagem deve ser inspecionada a fim de verificar se não há rupturas ou danos.

## **CUIDADOS COM O MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO**

### **Armazenagem e transporte:**

- Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura máxima de 25°C e umidade relativa de 30–75% e ao abrigo da luz solar direta.
- Proteger os implantes de quedas e amassamentos
- Tenha extremo cuidado no manuseio e armazenagem dos implantes.
- Implantes e instrumentos devem ser protegidos durante a armazenagem de ambientes corrosivos tais como: ar salgado, umidade etc.

### **Precauções quanto ao manuseio:**

- O implante deve ser usado somente em suas condições originais. Qualquer mudança feita pelo usuário pode levar à falha do implante.
- No caso de ocorrer algum dano no implante antes de ser utilizado (seja por quedas ou riscos), este deve ser devolvido a TECHIMPORT, que estabeleceu um procedimento específico para o recebimento de devolução deste material.
- É essencial para a durabilidade do implante que as superfícies dos ossos estejam perfeitamente limpas e não estejam danificadas.
- Advertimos para que não sejam utilizados implantes de outras marcas com os implantes TECHIMPORT.
- Siga as regras específicas de compatibilidade dos componentes definidas na literatura e técnicas cirúrgicas.
- O planejamento pré-operatório usando radiografias permite a determinação dos tamanhos dos componentes.

## **Formas de apresentação do produto médico**

As **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** são embalados individualmente em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por

barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. Junto com cada implante são fornecidas 6 etiquetas de rastreabilidade. O modelo do rótulo bem como as informações contidas nelas.

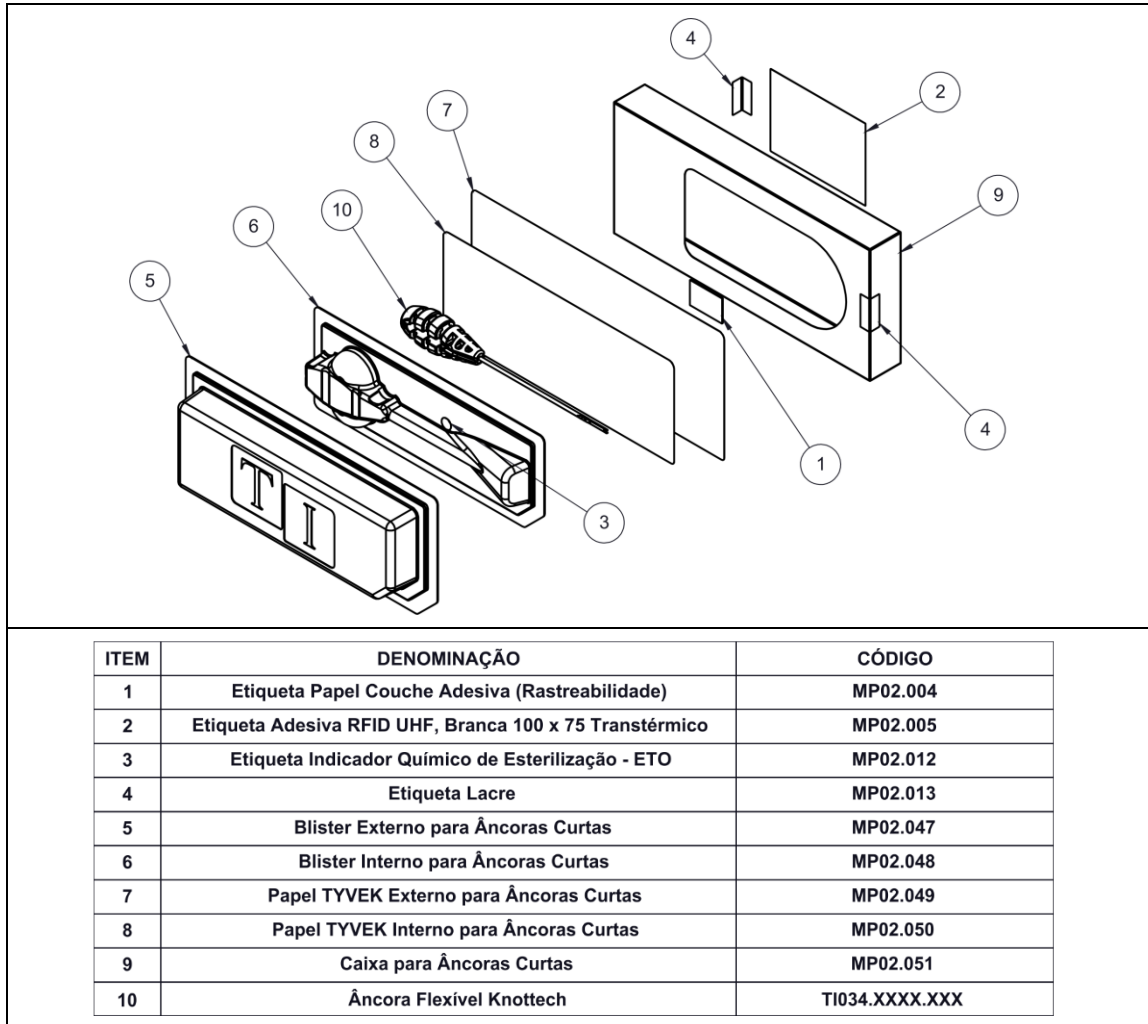
O sistema de embalagem é compatível com os requerimentos dos padrões **ISO 11607-1:2019- Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems** e **ISO 11607-2:2019-Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes**.

Este produto tem validade de 3 anos, contados à partir da data de fabricação.

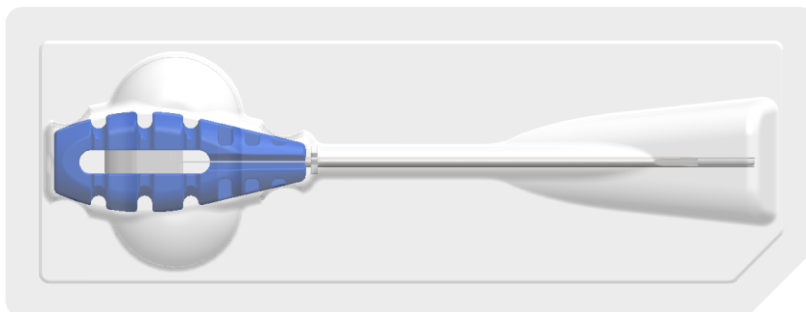
Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP ROD WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) - LOTE B-B - JD ANHANGUEIRA - RIO CLARO - SP CNPJ: 16524734000147 - Fone: +55 (19)3522-9600 - SAC: +55 (19)3522-9600 R.T.: Eduardo Henrique Silva Wolf - CREA 5070066408 - Instrução de Uso pelo Site <a href="http://www.techimportimplantes.com.br">http://www.techimportimplantes.com.br</a>			
Nome Técnico:			
Nome Comercial:			
Modelo Comercial:			
Registro ANVISA n. Material:	Qtde.: un.	Proibido Reprocessar / Uso Único	
Ref:			
Lote:	SN:		
Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instrução de Uso - Revisão xx - Consulte pelo Site PRODUTO ESTERILIZADO POR GAS OXIDO DE ETILENO			
        			

Figura 02 – Modelo de rótulo

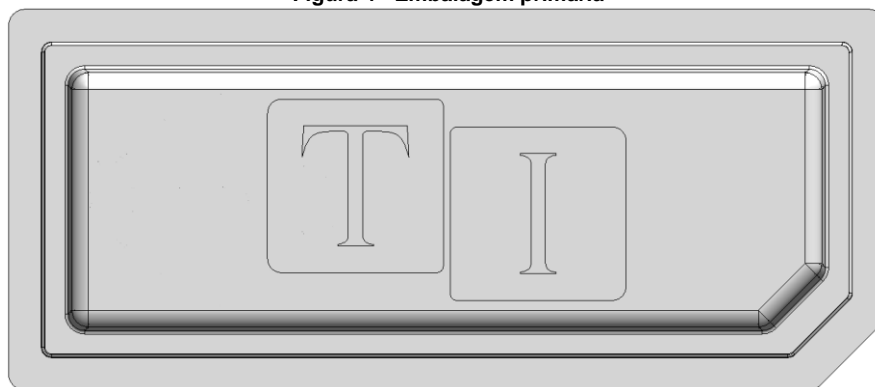
Abaixo o detalhamento da forma de apresentação do produto.



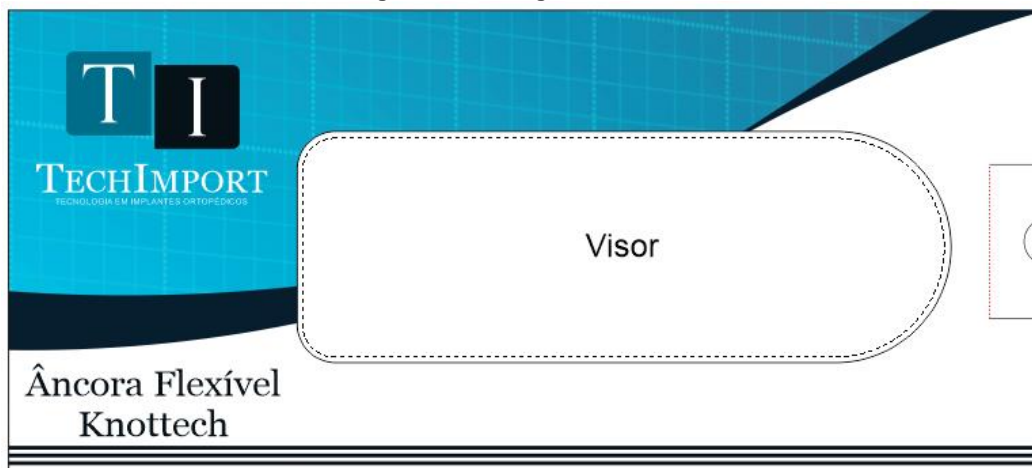
**Figura 3– Montagem da embalagem das Âncoras Flexíveis Knottech Techimport**




**Figura 4 - Embalagem primária**



**Figura 5 - Embalagem secundária**





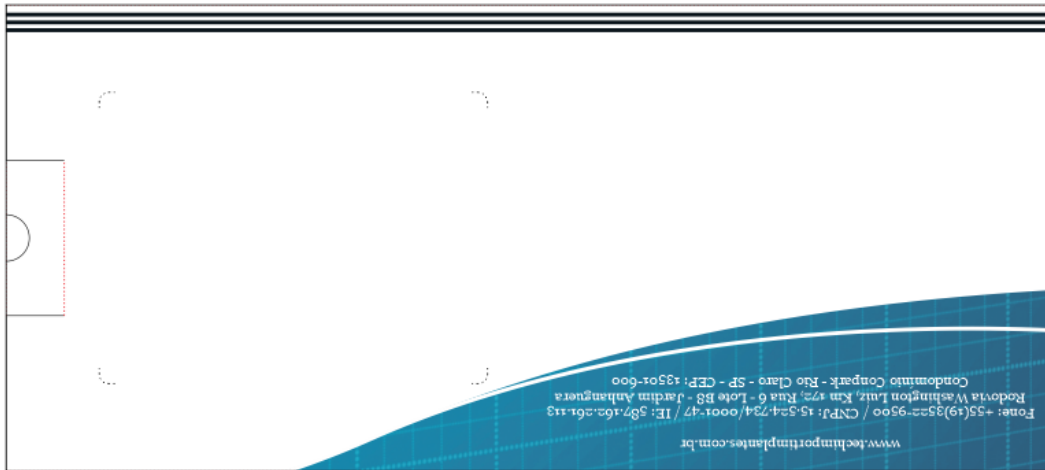








**Figura 6- Embalagem terciária**

Tabela 4 - Simbologia do modelo de rotulagem

						
Produto estéril por Óxido de Etileno	Atenção - consultar instrução de uso para informações adicionais	Não use se a embalagem estiver danificada	Não reesterilizar	Não reutilizar produto único	Manter seco	Manter ao abrigo do sol

### RASTREABILIDADE

Junto da embalagem do componente implantável seguem 6 (seis) etiquetas de rastreabilidade. (As informações que constam nessa etiqueta de rastreabilidade estão relacionadas na “**Figura 03 – Etiqueta de rastreabilidade**”). Uma etiqueta deve ser obrigatoriamente colada no prontuário clínico do paciente, outra no laudo entregue para o paciente, outra na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar, outra disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição – RHD, outra disponibilizada para o controle do cirurgião responsável (principal) e a última para convênio médico caso exista. Informamos que obrigatoriamente o prontuário do paciente deve ter registrado informações que permitam rastrear o produto implantado. A colagem dessa etiqueta no prontuário permite a rastreabilidade do produto utilizado.

### MARCAÇÃO

Por se tratar de material de sutura (Polietileno entrançado de elevado peso molecular -UHMWPE - NBR 13904) não é realizada nenhuma marcação no produto.

### **DESCARTE DO DISPOSITIVO**

Conforme a RDC 222 de 2018, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados. Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com dispositivos explantados. Estes dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. **DISPOSITIVOS EXPLANTADOS SÃO CONSIDERADOS LIXO HOSPITALAR**

### **RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE**

*Reclamações relacionadas a algum efeito adverso e/ou queixa técnica que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao órgão sanitário competente através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail [qualidade@techimportimplantes.com.br](mailto:qualidade@techimportimplantes.com.br) ou pelo telefone (19) 3522-9500.*

### **FABRICADO POR:**

**TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP**

**RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 172, RUA 06, CONDOMINIO CONPARK, CAIXA POSTAL 223 - RIO CLARO-SP-BRASIL CEP: 13.501-600**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE SILVA WOLF CREA-SP: 5070056408**

## ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



**ALERTA INSTRUÇÃO DE USO**

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para:  
**qualidade@techimportimplantes.com.br** ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:  
**[www.techimportimplantes.com.br](http://www.techimportimplantes.com.br)**

Revisão: 01  
Emissão: 2022

**Revisão/Versão: 01**

**Data: 03/01/2023**