



Nome técnico: Pino e fio Rígidos não absorvíveis

Nome Comercial: Fixador Ósseo Stability – Tech

Registro Anvisa: 81118460082

Fabricante:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 - 9500

**PRODUTO ESTÉRIL
PRODUTO USO ÚNICO
PROIBIDO REPROCESSAR**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome técnico: Pino e fio Rígidos não absorvíveis

Nome Comercial: Fixador Ósseo Stability – Tech

Modelos Comerciais:

- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 100 a 450 mm - Estriado
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 100 a 450 mm - Estriado
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 100 a 450 mm - Estriado
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 100 a 450 mm - Estriado
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 100 a 450 mm - Estriado
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 100 a 450 mm - Estriado
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 100 a 450 mm - Estriado
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 100 a 450 mm - Estriado
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 100 a 450 mm - Estriado
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 100 a 450 mm - Estriado
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 100 a 450 mm - Estriado

- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 100 a 450 mm - Liso
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 100 a 450 mm - Liso
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 100 a 450 mm - Liso
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 100 a 450 mm - Liso
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 100 a 450 mm - Liso
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 100 a 450 mm - Liso
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 100 a 450 mm - Liso
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 100 a 450 mm - Liso
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 100 a 450 mm - Liso
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 100 a 450 mm - Liso
- Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 100 a 450 mm - Liso

Matéria-prima:

Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech: Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)

Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech: Poliacetal

Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech: Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304


Produtos Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 3 anos (a partir da data de esterilização)


Descrição

Os modelos comerciais que integram o Fixador Ósseo Stability – Tech são implantes indicados para procedimentos que objetivam a correção de fraturas e de deformidades pediátricas nas extremidades superiores e inferiores. Em adultos tem como finalidade agir como estabilizador em fraturas na falange e metacarpo (mão), metatarso, tarso e falange (pé). Os fios são utilizados para estabilização da fixação óssea, e as esferas juntamente com o parafuso servem para proteger as extremidades no caso de batidas ou contato humano, visando também em grande parte a migração interna ou o desaparecimento não planejado das extremidades dos fios.

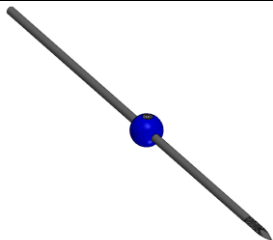Tabela 1 – Modelos Comerciais		
Código	Descrição	Imagem Ilustrativa
TI040.0010.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 100 mm - Estriado	
TI040.0010.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 125 mm - Estriado	
TI040.0010.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 150 mm - Estriado	
TI040.0010.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 175 mm - Estriado	
TI040.0010.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 200 mm - Estriado	
TI040.0010.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 225 mm - Estriado	
TI040.0010.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 250 mm - Estriado	
TI040.0010.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 275 mm - Estriado	
TI040.0010.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 300 mm - Estriado	
TI040.0010.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 325 mm - Estriado	
TI040.0010.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 350 mm - Estriado	
TI040.0010.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 375 mm - Estriado	
TI040.0010.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 400 mm - Estriado	
TI040.0010.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 425 mm - Estriado	
TI040.0010.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 450 mm - Estriado	



Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0012.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 100 mm - Estriado
TI040.0012.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 125 mm - Estriado
TI040.0012.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 150 mm - Estriado
TI040.0012.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 175 mm - Estriado
TI040.0012.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 200 mm - Estriado
TI040.0012.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 225 mm - Estriado
TI040.0012.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 250 mm - Estriado
TI040.0012.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 275 mm - Estriado
TI040.0012.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 300 mm - Estriado
TI040.0012.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 325 mm - Estriado
TI040.0012.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 350 mm - Estriado
TI040.0012.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 375 mm - Estriado
TI040.0012.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 400 mm - Estriado
TI040.0012.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 425 mm - Estriado
TI040.0012.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 450 mm - Estriado
TI040.0015.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 100 mm - Estriado
TI040.0015.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 125 mm - Estriado
TI040.0015.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 150 mm - Estriado
TI040.0015.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 175 mm - Estriado
TI040.0015.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 200 mm - Estriado
TI040.0015.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 225 mm - Estriado
TI040.0015.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 250 mm - Estriado
TI040.0015.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 275 mm - Estriado
TI040.0015.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 300 mm - Estriado
TI040.0015.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 325 mm - Estriado
TI040.0015.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 350 mm - Estriado
TI040.0015.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 375 mm - Estriado
TI040.0015.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 400 mm - Estriado
TI040.0015.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 425 mm - Estriado
TI040.0015.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 450 mm - Estriado

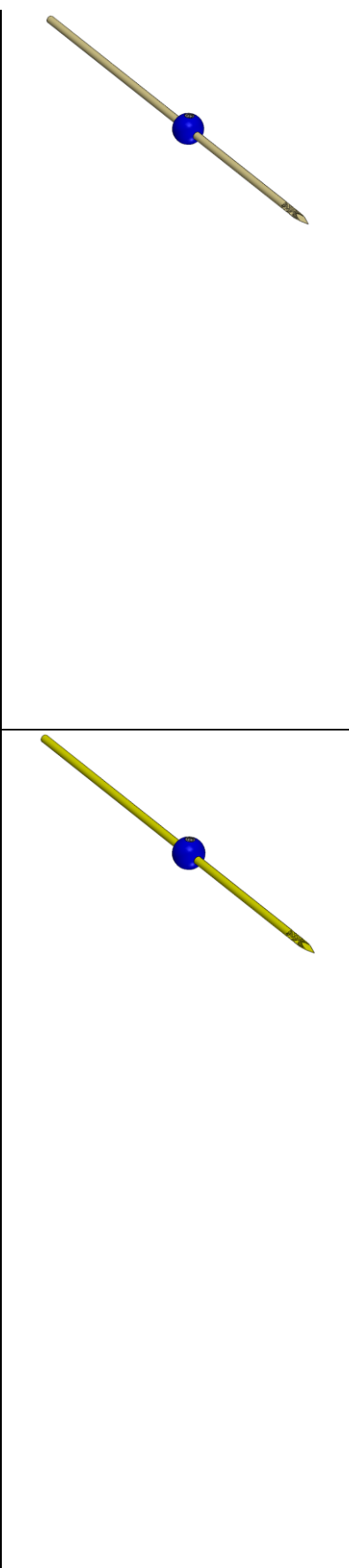



Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0018.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 100 mm - Estriado
TI040.0018.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 125 mm - Estriado
TI040.0018.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 150 mm - Estriado
TI040.0018.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 175 mm - Estriado
TI040.0018.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 200 mm - Estriado
TI040.0018.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 225 mm - Estriado
TI040.0018.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 250 mm - Estriado
TI040.0018.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 275 mm - Estriado
TI040.0018.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 300 mm - Estriado
TI040.0018.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 325 mm - Estriado
TI040.0018.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 350 mm - Estriado
TI040.0018.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 375 mm - Estriado
TI040.0018.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 400 mm - Estriado
TI040.0018.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 425 mm - Estriado
TI040.0018.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 450 mm - Estriado
TI040.0020.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 100 mm - Estriado
TI040.0020.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 125 mm - Estriado
TI040.0020.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 150 mm - Estriado
TI040.0020.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 175 mm - Estriado
TI040.0020.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 200 mm - Estriado
TI040.0020.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 225 mm - Estriado
TI040.0020.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 250 mm - Estriado
TI040.0020.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 275 mm - Estriado
TI040.0020.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 300 mm - Estriado
TI040.0020.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 325 mm - Estriado
TI040.0020.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 350 mm - Estriado
TI040.0020.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 375 mm - Estriado
TI040.0020.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 400 mm - Estriado
TI040.0020.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 425 mm - Estriado
TI040.0020.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 450 mm - Estriado

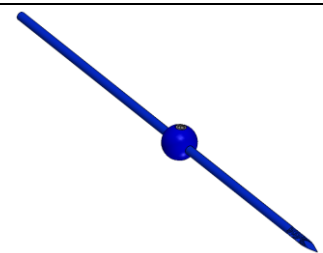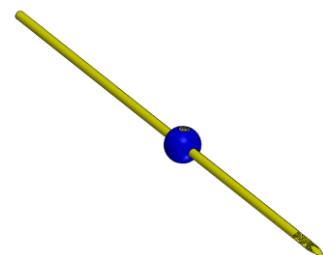



Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0025.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 100 mm - Estriado
TI040.0025.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 125 mm - Estriado
TI040.0025.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 150 mm - Estriado
TI040.0025.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 175 mm - Estriado
TI040.0025.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 200 mm - Estriado
TI040.0025.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 225 mm - Estriado
TI040.0025.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 250 mm - Estriado
TI040.0025.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 275 mm - Estriado
TI040.0025.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 300 mm - Estriado
TI040.0025.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 325 mm - Estriado
TI040.0025.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 350 mm - Estriado
TI040.0025.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 375 mm - Estriado
TI040.0025.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 400 mm - Estriado
TI040.0025.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 425 mm - Estriado
TI040.0025.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 450 mm - Estriado
TI040.0030.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 100 mm - Estriado
TI040.0030.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 125 mm - Estriado
TI040.0030.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 150 mm - Estriado
TI040.0030.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 175 mm - Estriado
TI040.0030.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 200 mm - Estriado
TI040.0030.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 225 mm - Estriado
TI040.0030.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 250 mm - Estriado
TI040.0030.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 275 mm - Estriado
TI040.0030.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 300 mm - Estriado
TI040.0030.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 325 mm - Estriado
TI040.0030.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 350 mm - Estriado
TI040.0030.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 375 mm - Estriado
TI040.0030.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 400 mm - Estriado
TI040.0030.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 425 mm - Estriado
TI040.0030.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 450 mm - Estriado

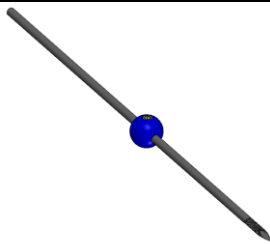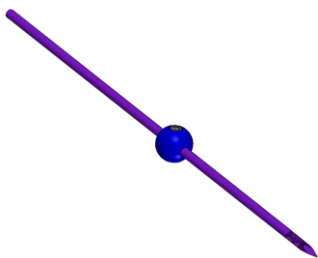



Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0035.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 100 mm - Estriado
TI040.0035.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 125 mm - Estriado
TI040.0035.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 150 mm - Estriado
TI040.0035.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 175 mm - Estriado
TI040.0035.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 200 mm - Estriado
TI040.0035.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 225 mm - Estriado
TI040.0035.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 250 mm - Estriado
TI040.0035.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 275 mm - Estriado
TI040.0035.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 300 mm - Estriado
TI040.0035.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 325 mm - Estriado
TI040.0035.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 350 mm - Estriado
TI040.0035.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 375 mm - Estriado
TI040.0035.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 400 mm - Estriado
TI040.0035.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 425 mm - Estriado
TI040.0035.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 450 mm - Estriado
TI040.0040.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 100 mm - Estriado
TI040.0040.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 125 mm - Estriado
TI040.0040.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 150 mm - Estriado
TI040.0040.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 175 mm - Estriado
TI040.0040.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 200 mm - Estriado
TI040.0040.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 225 mm - Estriado
TI040.0040.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 250 mm - Estriado
TI040.0040.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 275 mm - Estriado
TI040.0040.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 300 mm - Estriado
TI040.0040.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 325 mm - Estriado
TI040.0040.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 350 mm - Estriado
TI040.0040.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 375 mm - Estriado
TI040.0040.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 400 mm - Estriado
TI040.0040.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 425 mm - Estriado
TI040.0040.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 450 mm - Estriado

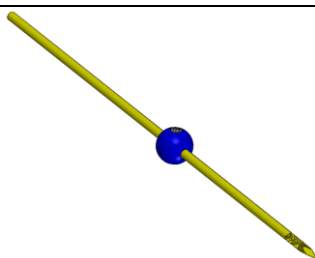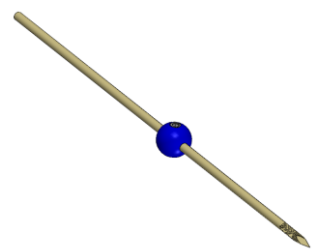



Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0045.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 100 mm - Estriado
TI040.0045.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 125 mm - Estriado
TI040.0045.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 150 mm - Estriado
TI040.0045.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 175 mm - Estriado
TI040.0045.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 200 mm - Estriado
TI040.0045.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 225 mm - Estriado
TI040.0045.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 250 mm - Estriado
TI040.0045.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 275 mm - Estriado
TI040.0045.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 300 mm - Estriado
TI040.0045.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 325 mm - Estriado
TI040.0045.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 350 mm - Estriado
TI040.0045.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 375 mm - Estriado
TI040.0045.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 400 mm - Estriado
TI040.0045.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 425 mm - Estriado
TI040.0045.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 450 mm - Estriado
TI040.0050.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 100 mm - Estriado
TI040.0050.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 125 mm - Estriado
TI040.0050.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 150 mm - Estriado
TI040.0050.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 175 mm - Estriado
TI040.0050.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 200 mm - Estriado
TI040.0050.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 225 mm - Estriado
TI040.0050.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 250 mm - Estriado
TI040.0050.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 275 mm - Estriado
TI040.0050.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 300 mm - Estriado
TI040.0050.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 325 mm - Estriado
TI040.0050.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 350 mm - Estriado
TI040.0050.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 375 mm - Estriado
TI040.0050.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 400 mm - Estriado
TI040.0050.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 425 mm - Estriado
TI040.0050.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 450 mm - Estriado

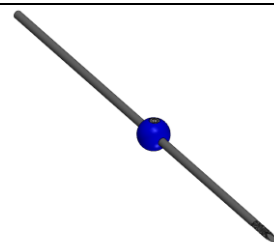
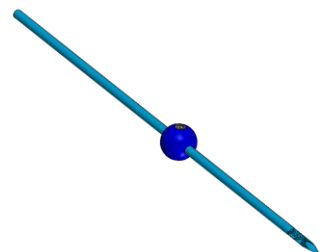


Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1010.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 100 mm - Liso
TI040.1010.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 125 mm - Liso
TI040.1010.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 150 mm - Liso
TI040.1010.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 175 mm - Liso
TI040.1010.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 200 mm - Liso
TI040.1010.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 225 mm - Liso
TI040.1010.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 250 mm - Liso
TI040.1010.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 275 mm - Liso
TI040.1010.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 300 mm - Liso
TI040.1010.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 325 mm - Liso
TI040.1010.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 350 mm - Liso
TI040.1010.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 375 mm - Liso
TI040.1010.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 400 mm - Liso
TI040.1010.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 425 mm - Liso
TI040.1010.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 450 mm - Liso
TI040.1012.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 100 mm - Liso
TI040.1012.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 125 mm - Liso
TI040.1012.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 150 mm - Liso
TI040.1012.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 175 mm - Liso
TI040.1012.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 200 mm - Liso
TI040.1012.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 225 mm - Liso
TI040.1012.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 250 mm - Liso
TI040.1012.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 275 mm - Liso
TI040.1012.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 300 mm - Liso
TI040.1012.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 325 mm - Liso
TI040.1012.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 350 mm - Liso
TI040.1012.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 375 mm - Liso
TI040.1012.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 400 mm - Liso
TI040.1012.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 425 mm - Liso
TI040.1012.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 450 mm - Liso

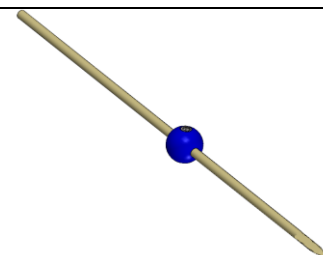
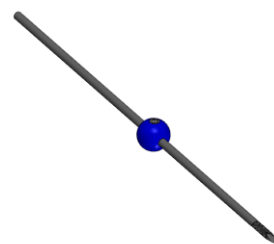


Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

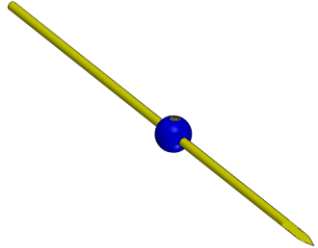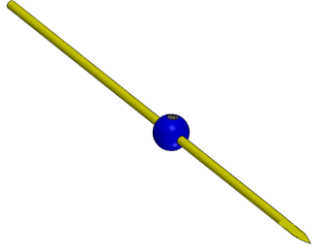TI040.1015.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 100 mm - Liso	
TI040.1015.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 125 mm - Liso	
TI040.1015.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 150 mm - Liso	
TI040.1015.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 175 mm - Liso	
TI040.1015.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 200 mm - Liso	
TI040.1015.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 225 mm - Liso	
TI040.1015.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 250 mm - Liso	
TI040.1015.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 275 mm - Liso	
TI040.1015.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 300 mm - Liso	
TI040.1015.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 325 mm - Liso	
TI040.1015.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 350 mm - Liso	
TI040.1015.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 375 mm - Liso	
TI040.1015.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 400 mm - Liso	
TI040.1015.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 425 mm - Liso	
TI040.1015.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 450 mm - Liso	
TI040.1018.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 100 mm - Liso	
TI040.1018.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 125 mm - Liso	
TI040.1018.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 150 mm - Liso	
TI040.1018.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 175 mm - Liso	
TI040.1018.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 200 mm - Liso	
TI040.1018.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 225 mm - Liso	
TI040.1018.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 250 mm - Liso	
TI040.1018.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 275 mm - Liso	
TI040.1018.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 300 mm - Liso	
TI040.1018.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 325 mm - Liso	
TI040.1018.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 350 mm - Liso	
TI040.1018.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 375 mm - Liso	
TI040.1018.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 400 mm - Liso	
TI040.1018.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 425 mm - Liso	
TI040.1018.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 450 mm - Liso	



Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1020.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 100 mm - Liso
TI040.1020.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 125 mm - Liso
TI040.1020.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 150 mm - Liso
TI040.1020.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 175 mm - Liso
TI040.1020.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 200 mm - Liso
TI040.1020.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 225 mm - Liso
TI040.1020.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 250 mm - Liso
TI040.1020.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 275 mm - Liso
TI040.1020.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 300 mm - Liso
TI040.1020.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 325 mm - Liso
TI040.1020.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 350 mm - Liso
TI040.1020.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 375 mm - Liso
TI040.1020.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 400 mm - Liso
TI040.1020.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 425 mm - Liso
TI040.1020.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 450 mm - Liso
TI040.1025.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 100 mm - Liso
TI040.1025.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 125 mm - Liso
TI040.1025.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 150 mm - Liso
TI040.1025.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 175 mm - Liso
TI040.1025.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 200 mm - Liso
TI040.1025.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 225 mm - Liso
TI040.1025.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 250 mm - Liso
TI040.1025.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 275 mm - Liso
TI040.1025.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 300 mm - Liso
TI040.1025.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 325 mm - Liso
TI040.1025.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 350 mm - Liso
TI040.1025.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 375 mm - Liso
TI040.1025.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 400 mm - Liso
TI040.1025.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 425 mm - Liso
TI040.1025.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 450 mm - Liso

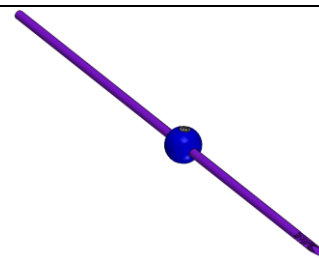
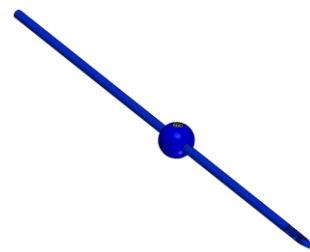


Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech


TI040.1030.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 100 mm - Liso
TI040.1030.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 125 mm - Liso
TI040.1030.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 150 mm - Liso
TI040.1030.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 175 mm - Liso
TI040.1030.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 200 mm - Liso
TI040.1030.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 225 mm - Liso
TI040.1030.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 250 mm - Liso
TI040.1030.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 275 mm - Liso
TI040.1030.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 300 mm - Liso
TI040.1030.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 325 mm - Liso
TI040.1030.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 350 mm - Liso
TI040.1030.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 375 mm - Liso
TI040.1030.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 400 mm - Liso
TI040.1030.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 425 mm - Liso
TI040.1030.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 450 mm - Liso
TI040.1035.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 100 mm - Liso
TI040.1035.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 125 mm - Liso
TI040.1035.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 150 mm - Liso
TI040.1035.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 175 mm - Liso
TI040.1035.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 200 mm - Liso
TI040.1035.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 225 mm - Liso
TI040.1035.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 250 mm - Liso
TI040.1035.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 275 mm - Liso
TI040.1035.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 300 mm - Liso
TI040.1035.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 325 mm - Liso
TI040.1035.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 350 mm - Liso
TI040.1035.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 375 mm - Liso
TI040.1035.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 400 mm - Liso
TI040.1035.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 425 mm - Liso
TI040.1035.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 450 mm - Liso

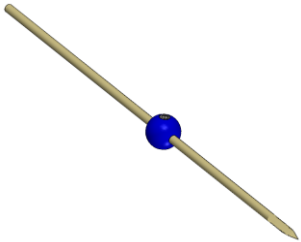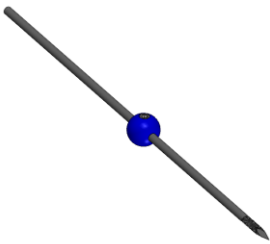

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

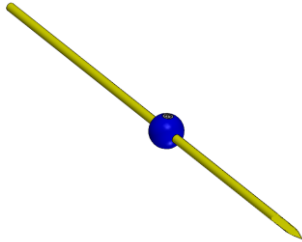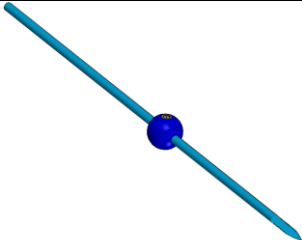TI040.1040.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 100 mm - Liso	
TI040.1040.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 125 mm - Liso	
TI040.1040.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 150 mm - Liso	
TI040.1040.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 175 mm - Liso	
TI040.1040.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 200 mm - Liso	
TI040.1040.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 225 mm - Liso	
TI040.1040.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 250 mm - Liso	
TI040.1040.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 275 mm - Liso	
TI040.1040.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 300 mm - Liso	
TI040.1040.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 325 mm - Liso	
TI040.1040.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 350 mm - Liso	
TI040.1040.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 375 mm - Liso	
TI040.1040.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 400 mm - Liso	
TI040.1040.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 425 mm - Liso	
TI040.1040.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 450 mm - Liso	
TI040.1045.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 100 mm - Liso	
TI040.1045.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 125 mm - Liso	
TI040.1045.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 150 mm - Liso	
TI040.1045.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 175 mm - Liso	
TI040.1045.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 200 mm - Liso	
TI040.1045.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 225 mm - Liso	
TI040.1045.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 250 mm - Liso	
TI040.1045.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 275 mm - Liso	
TI040.1045.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 300 mm - Liso	
TI040.1045.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 325 mm - Liso	
TI040.1045.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 350 mm - Liso	
TI040.1045.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 375 mm - Liso	
TI040.1045.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 400 mm - Liso	
TI040.1045.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 425 mm - Liso	
TI040.1045.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 450 mm - Liso	

TI040.1050.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 100 mm - Liso
TI040.1050.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 125 mm - Liso
TI040.1050.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 150 mm - Liso
TI040.1050.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 175 mm - Liso
TI040.1050.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 200 mm - Liso
TI040.1050.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 225 mm - Liso
TI040.1050.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 250 mm - Liso
TI040.1050.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 275 mm - Liso
TI040.1050.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 300 mm - Liso
TI040.1050.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 325 mm - Liso
TI040.1050.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 350 mm - Liso
TI040.1050.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 375 mm - Liso
TI040.1050.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 400 mm - Liso
TI040.1050.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 425 mm - Liso
TI040.1050.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 450 mm - Liso

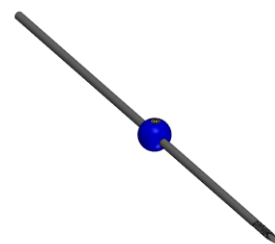

Composição

Os materiais selecionados para a composição do Fixador Ósseo Stability apresentam as propriedades requeridas para atingir o desempenho pretendido para o produto. Essa seleção considerou fatores como a biocompatibilidade e propriedades físicas, químicas e mecânicas requeridas para o produto.


A liga titânio (Ti-6Al-4V) utilizada para a fabricação dos fios cumpre os requisitos especificados pela norma ASTM F-136 – Standard Specification for Wrought Titanium—Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy For Surgical Implant Application (UNS R56401), é o material que terá contato direto com o paciente, contato intra-osseo.

A esfera fabricada em Poliacetal com propriedades que possibilitam alta resistência mecânica.

O parafuso fabricado em Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304, cumpre os requisitos especificados pela Normas ASTM F899 - Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments.

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

Segue abaixo configuração da forma de apresentação de todos os componentes que compõe o produto:

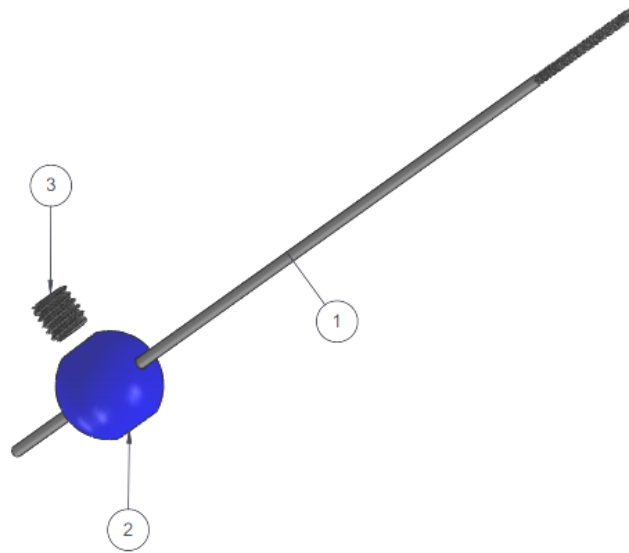

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

Tabela 2 – Composição e Formação dos Modelos Comerciais				
Item	Código	Descrição	Material de Fabricação	Quantidade
TI040.0010.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 100 mm - Estriado				
01	TI040.0010.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 100mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0010.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 125mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0010.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 150mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 175 mm - Estriado				
01	TI040.0010.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 175mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0010.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 200mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0010.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 225mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 250 mm - Estriado				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.0010.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 250mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0010.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 275mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0010.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 300mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 325 mm - Estriado				
01	TI040.0010.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 325mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0010.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 350mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0010.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 375mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 400 mm - Estriado				
01	TI040.0010.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 400mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0010.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0010.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 425mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0010.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0010.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 450mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 100 mm - Estriado				
01	TI040.0012.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 100mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0012.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 125mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0012.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 150mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 175 mm - Estriado				
01	TI040.0012.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 175mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0012.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 200mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0012.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 225mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 250 mm - Estriado				
01	TI040.0012.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 250mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0012.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 275mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0012.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 300mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 325 mm - Estriado				
01	TI040.0012.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 325mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0012.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 350mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0012.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 375mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 400 mm - Estriado				
01	TI040.0012.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 400mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0012.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 425mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0012.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0012.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 450mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 100 mm - Estriado				
01	TI040.0015.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 100mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0015.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 125mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0015.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 150mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 175 mm - Estriado				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.0015.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 175mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0015.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 200mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0015.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 225mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 250 mm - Estriado				
01	TI040.0015.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 250mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0015.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 275mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0015.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 300mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 325 mm - Estriado				
01	TI040.0015.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 325mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0015.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0015.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 350mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0015.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 375mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 400 mm - Estriado				
01	TI040.0015.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 400mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0015.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 425mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0015.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0015.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 450mm Estriado	Titânio Liga Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 100 mm - Estriado				
01	TI040.0018.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 100mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0018.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 125mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0018.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 150mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 175 mm - Estriado				
01	TI040.0018.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 175mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0018.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 200mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0018.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 225mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 250 mm - Estriado				
01	TI040.0018.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 250mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0018.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 275mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0018.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 300mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 325 mm - Estriado				
01	TI040.0018.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 325mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0018.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 350mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0018.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 375mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 400 mm - Estriado				
01	TI040.0018.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 400mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0018.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 425mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0018.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0018.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 450mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 100 mm - Estriado				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.0020.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 100mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0020.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 125mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0020.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 150mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 175 mm - Estriado				
01	TI040.0020.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 175mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0020.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 200mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0020.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 225mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 250 mm - Estriado				
01	TI040.0020.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 250mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0020.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0020.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 275mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0020.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 300mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 325 mm - Estriado				
01	TI040.0020.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 325mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0020.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 350mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0020.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 375mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 400 mm - Estriado				
01	TI040.0020.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 400mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0020.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 425mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0020.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0020.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 450mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 100 mm - Estriado				
01	TI040.0025.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 100mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0025.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 125mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0025.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 150mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 175 mm - Estriado				
01	TI040.0025.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 175mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0025.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 200mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0025.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 225mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 250 mm - Estriado				
01	TI040.0025.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 250mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0025.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 275mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0025.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 300mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 325 mm - Estriado				
01	TI040.0025.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 325mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0025.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 350mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0025.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 375mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 400 mm - Estriado				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.0025.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 400mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0025.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 425mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0025.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0025.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 450mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 100 mm - Estriado				
01	TI040.0030.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 100mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0030.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 125mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0030.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 150mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 175 mm - Estriado				
01	TI040.0030.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 175mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0030.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0030.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 200mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0030.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 225mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 250 mm - Estriado				
01	TI040.0030.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 250mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0030.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 275mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0030.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 300mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 325 mm - Estriado				
01	TI040.0030.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 325mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0030.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 350mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0030.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 375mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 400 mm - Estriado				
01	TI040.0030.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 400mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0030.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 425mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0030.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0030.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 450mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 100 mm - Estriado				
01	TI040.0035.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 100mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0035.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 125mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0035.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 150mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 175 mm - Estriado				
01	TI040.0035.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 175mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0035.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 200mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0035.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 225mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 250 mm - Estriado				
01	TI040.0035.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 250mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0035.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 275mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0035.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 300mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 325 mm - Estriado				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.0035.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 325mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0035.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 350mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0035.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 375mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 400 mm - Estriado				
01	TI040.0035.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 400mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0035.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 425mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0035.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0035.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 450mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 100 mm - Estriado				
01	TI040.0040.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 100mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0040.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0040.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 125mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0040.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 150mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 175 mm - Estriado				
01	TI040.0040.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 175mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0040.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 200mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0040.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 225mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 250 mm - Estriado				
01	TI040.0040.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 250mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0040.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 275mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0040.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 300mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 325 mm - Estriado				
01	TI040.0040.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 325mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0040.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 350mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0040.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 375mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 400 mm - Estriado				
01	TI040.0040.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 400mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0040.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 425mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0040.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0040.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 450mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 100 mm - Estriado				
01	TI040.0045.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 100mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0045.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 125mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0045.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 150mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 175 mm - Estriado				
01	TI040.0045.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 175mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0045.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 200mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0045.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 225mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 250 mm - Estriado				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.0045.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 250mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0045.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 275mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0045.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 300mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 325 mm - Estriado				
01	TI040.0045.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 325mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0045.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 350mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0045.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 375mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 400 mm - Estriado				
01	TI040.0045.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 400mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0045.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0045.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 425mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0045.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0045.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 450mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 100 mm - Estriado				
01	TI040.0050.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 100mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 125 mm - Estriado				
01	TI040.0050.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 125mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 150 mm - Estriado				
01	TI040.0050.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 150mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 175 mm - Estriado				
01	TI040.0050.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 175mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 200 mm - Estriado				
01	TI040.0050.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 200mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 225 mm - Estriado				
01	TI040.0050.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 225mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 250 mm - Estriado				
01	TI040.0050.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 250mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 275 mm - Estriado				
01	TI040.0050.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 275mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 300 mm - Estriado				
01	TI040.0050.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 300mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 325 mm - Estriado				
01	TI040.0050.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 325mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 350 mm - Estriado				
01	TI040.0050.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 350mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 375 mm - Estriado				
01	TI040.0050.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 375mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 400 mm - Estriado				
01	TI040.0050.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 400mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 425 mm - Estriado				
01	TI040.0050.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 425mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.0050.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 450 mm - Estriado				
01	TI040.0050.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 450mm Estriado	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 100 mm - Liso				
01	TI040.1010.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1010.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1010.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 175 mm - Liso				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.1010.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1010.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1010.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 250 mm - Liso				
01	TI040.1010.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1010.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1010.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 325 mm - Liso				
01	TI040.1010.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1010.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1010.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1010.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 400 mm - Liso				
01	TI040.1010.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1010.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1010.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1010.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0010.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 100 mm - Liso				
01	TI040.1012.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1012.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1012.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 175 mm - Liso				
01	TI040.1012.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1012.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1012.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 250 mm - Liso				
01	TI040.1012.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1012.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1012.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 325 mm - Liso				
01	TI040.1012.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1012.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1012.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 400 mm - Liso				
01	TI040.1012.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1012.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1012.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1012.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0012.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 100 mm - Liso				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.1015.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1015.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1015.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 175 mm - Liso				
01	TI040.1015.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1015.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1015.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 250 mm - Liso				
01	TI040.1015.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1015.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1015.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1015.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 325 mm - Liso				
01	TI040.1015.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1015.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1015.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 400 mm - Liso				
01	TI040.1015.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1015.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1015.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1015.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0015.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 100 mm - Liso				
01	TI040.1018.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1018.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1018.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 175 mm - Liso				
01	TI040.1018.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1018.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1018.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 250 mm - Liso				
01	TI040.1018.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1018.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1018.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 325 mm - Liso				
01	TI040.1018.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1018.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1018.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 400 mm - Liso				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.1018.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1018.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1018.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1018.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0018.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 100 mm - Liso				
01	TI040.1020.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1020.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1020.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 175 mm - Liso				
01	TI040.1020.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1020.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1020.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1020.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 250 mm - Liso				
01	TI040.1020.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1020.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1020.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 325 mm - Liso				
01	TI040.1020.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1020.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1020.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 400 mm - Liso				
01	TI040.1020.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1020.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1020.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1020.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0020.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 100 mm - Liso				
01	TI040.1025.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1025.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1025.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 175 mm - Liso				
01	TI040.1025.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1025.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1025.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 250 mm - Liso				
01	TI040.1025.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1025.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1025.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 325 mm - Liso				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.1025.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1025.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1025.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 400 mm - Liso				
01	TI040.1025.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1025.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1025.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1025.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0025.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 100 mm - Liso				
01	TI040.1030.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1030.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1030.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1030.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 175 mm - Liso				
01	TI040.1030.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1030.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1030.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 250 mm - Liso				
01	TI040.1030.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1030.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1030.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 325 mm - Liso				
01	TI040.1030.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1030.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1030.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 400 mm - Liso				
01	TI040.1030.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1030.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1030.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1030.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0030.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 100 mm - Liso				
01	TI040.1035.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1035.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1035.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 175 mm - Liso				
01	TI040.1035.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1035.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1035.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 250 mm - Liso				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.1035.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1035.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1035.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 325 mm - Liso				
01	TI040.1035.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1035.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1035.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 400 mm - Liso				
01	TI040.1035.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1035.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1035.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1035.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1035.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0035.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 100 mm - Liso				
01	TI040.1040.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1040.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1040.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 175 mm - Liso				
01	TI040.1040.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1040.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1040.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 250 mm - Liso				
01	TI040.1040.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1040.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1040.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 325 mm - Liso				
01	TI040.1040.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1040.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1040.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 400 mm - Liso				
01	TI040.1040.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1040.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1040.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1040.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0040.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 100 mm - Liso				
01	TI040.1045.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1045.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1045.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 175 mm - Liso				

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

01	TI040.1045.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1045.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1045.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 250 mm - Liso				
01	TI040.1045.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1045.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1045.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 325 mm - Liso				
01	TI040.1045.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1045.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1045.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1045.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 400 mm - Liso				
01	TI040.1045.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1045.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1045.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1045.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0045.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.100 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 100 mm - Liso				
01	TI040.1050.100A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 100mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.125 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 125 mm - Liso				
01	TI040.1050.125A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 125mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.150 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 150 mm - Liso				
01	TI040.1050.150A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 150mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.175 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 175 mm - Liso				
01	TI040.1050.175A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 175mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.200 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 200 mm - Liso				
01	TI040.1050.200A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 200mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.225 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 225 mm - Liso				
01	TI040.1050.225A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 225mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.250 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 250 mm - Liso				
01	TI040.1050.250A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 250mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.275 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 275 mm - Liso				
01	TI040.1050.275A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 275mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.300 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 300 mm - Liso				
01	TI040.1050.300A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 300mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.325 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 325 mm - Liso				
01	TI040.1050.325A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 325mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.350 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 350 mm - Liso				
01	TI040.1050.350A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 350mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.375 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 375 mm - Liso				
01	TI040.1050.375A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 375mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.400 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 400 mm - Liso				
01	TI040.1050.400A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 400mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.425 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 425 mm - Liso				
01	TI040.1050.425A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 425mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01
TI040.1050.450 - Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 450 mm - Liso				
01	TI040.1050.450A	Fio para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 450mm Liso	Ti-6Al-4V (ASTM F136)	01
02	TI040.0050.000A	Esfera para Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0	Poliacetal	01
03	TI040.0000.000A	Parafuso para Fixador Ósseo Stability-Tech	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899): 304	01

Material de Apoio

Os materiais de apoio são os instrumentos designados unicamente para implantação e explantação dos componentes que integram os Fixadores Ósseos Stability-Tech.

O Instrumental para os Fixadores Ósseos Stability-Tech está registrado na ANVISA sob o nº XXXXXXXXXX, não fazendo parte deste processo de registro e não sendo parte integrante do Produto.

Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico, segundo indicado pelo fabricante


Indicação e Finalidade


Os modelos comerciais que integram o **Fixador Ósseo Stability – Tech** são implantes indicados para procedimentos que objetivam a correção de fraturas e de deformidades pediátricas nas extremidades superiores e inferiores. Em adultos tem como finalidade agir como estabilizador em fraturas na falange e metacarpo (mão), metatarso, tarso e falange (pé). Os fios (implantável) são utilizados para estabilização da fixação óssea, e as esferas juntamente com o parafuso servem para proteger as extremidades no caso de batidas ou contato humano, visando também em grande parte a migração interna ou o desaparecimento não planejado das extremidades dos fios.

O produto aqui descrito foi desenvolvido para utilização nas circunstancias acima descritas, de modo que, quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico.

Código	Descrição
TI040.0010.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x (100 a 450) mm – Estriado
TI040.0012.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x (100 a 450) mm – Estriado
TI040.0015.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x (100 a 450) mm – Estriado
TI040.0018.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x (100 a 450) mm – Estriado
TI040.0020.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x (100 a 450) mm – Estriado
TI040.0025.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x (100 a 450) mm – Estriado
TI040.0030.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x (100 a 450) mm – Estriado
TI040.0035.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x (100 a 450) mm – Estriado
TI040.0040.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x (100 a 450) mm – Estriado
TI040.0045.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x (100 a 450) mm – Estriado
TI040.0050.XXX	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x (100 a 450) mm – Estriado
Indicação de Uso	
Imagem Ilustrativa	

Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech
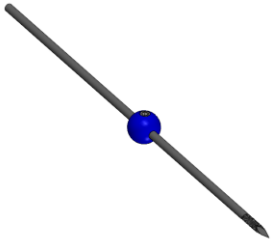
<p>O Fixador Ósseo Stability-Tech é indicado para procedimento que objetivam a correção gradual de deformidades pediátricas nas extremidades superiores e inferiores. Em adultos tem como finalidade agir como estabilizador em fraturas na falange e metacarpo (mão), metatarso, tarso e falange (pé). As esferas protegem a extremidade do fio e previnem a migração do fio.</p>	
--	--
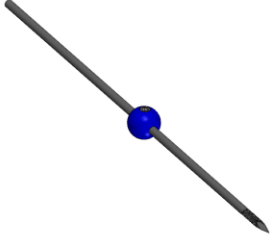
<p>Código</p>	<p>TI040.1010.XXX TI040.1012.XXX TI040.1015.XXX TI040.1018.XXX TI040.1020.XXX TI040.1025.XXX TI040.1030.XXX TI040.1035.XXX TI040.1040.XXX TI040.1045.XXX TI040.1050.XXX</p>	<p>Descrição</p>	<p>Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x (100 a 450) mm – Liso Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x (100 a 450) mm – Liso Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x (100 a 450) mm – Liso Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x (100 a 450) mm – Liso Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x (100 a 450) mm – Liso Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x (100 a 450) mm – Liso Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x (100 a 450) mm – Liso Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x (100 a 450) mm – Liso Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x (100 a 450) mm – Liso Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x (100 a 450) mm – Liso Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x (100 a 450) mm – Liso</p>
<p>Indicação de Uso</p>		<p>Imagem Ilustrativa</p>	
<p>O Fixador Ósseo Stability-Tech é indicado para procedimento que objetivam a correção gradual de deformidades pediátricas nas extremidades superiores e inferiores. Em adultos tem como finalidade agir como estabilizador em fraturas na falange e metacarpo (mão), metatarso, tarso e falange (pé). As esferas protegem a extremidade do fio e previnem a migração do fio.</p>			

Contraindicação

O Fixador Ósseo Stability – Tech é contraindicado nas seguintes situações:

As contraindicações incluem, mas não estão limitadas à:

- Doenças mentais profundas ou pacientes não obedeçam às instruções pós-operatórias;
- Infecção localizada na zona operatória ou infecção sistêmica que possa comprometer o sucesso do procedimento;
- Histórico de infecção recente;
- Todos os pacientes que tenham uma cobertura tissular pobre na zona operada;
- Pacientes com maturidade esquelética completa;
- Febre;
- Fenômenos Inflamatórios locais importantes;

- Doenças osteometabólicas que causem destruição óssea;
- Pacientes sem condições de seguir as recomendações pós-operatórias;
- Alergia ou intolerância suspeita ou conhecida aos metais que compõem o sistema;
- Todas as outras condições médicas ou cirúrgicas que comprometam o processo de uma cirurgia de implante (presença de tumores malignos, metástase ou presença de anomalias congênitas graves).

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte

Advertências e Precauções

PRODUTO DE USO ÚNICO E ESTERIL. DESTRUIR APÓS EXPLANTADO. NÃO REUTILIZAR O PRODUTO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Para a utilização do produto a equipe responsável deve considerar as seguintes advertências e precauções:

- O produto somente deve ser utilizado após uma análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado e da leitura desta instrução de uso;
- O produto somente deve ser utilizado por equipes cirúrgicas especializadas, com conhecimento e capacitação específica sobre as técnicas de estabilização das indicações de uso do produto;
- Somente fio somente será implantado, a esfera juntamente com o parafuso não deve ser implantada, devem ser rosqueados na parte externa do fio e não devem ser inseridos no paciente;
- É necessário o acompanhamento médico periódico a fim de se observar possíveis alterações do estado do implante e do osso. Só o acompanhamento médico pode detectar a possível soltura dos componentes;
- O produto não deve ser utilizado com componentes de outros fabricantes ou finalidade. A combinação de implantes de fabricantes ou finalidades distintas podem resultar em incongruência entre os componentes;
- O ambiente de ressonância magnética não é considerado seguro, devido um dos componentes pertencentes a esse produto ser fabricado em ASTM F899, apesar de

ficar posicionado do lado externo do paciente pode ocasionar complicações como aquecimento;

- Os cuidados com este material são de responsabilidade de pessoal habilitado, os quais devem seguir as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis;
- Cuidados devem ser tomados para evitar a colocação de um peso excessivo no implante, uma vez que isto pode aumentar os riscos de encurvamento, rachaduras e/ou fraturas do implante devido à fadiga do metal que eventualmente levará ao afrouxamento antes da união ser atingida. Isto por sua vez pode causar danos ou necessidade de uma remoção prematura do implante.
- Quedas ou esmagamentos sobre superfícies duras, podem causar danos ao produto. Dessa forma, faz-se necessária que o operador realize uma inspeção do produto, quanto a sua integridade, quando da abertura da embalagem e, se for observada alguma anormalidade, o produto não deverá ser utilizado;
- A abertura da embalagem do produto, somente deverá ser realizada por pessoal habilitado em local apropriado por se tratar de um produto estéril;
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada;
- Manipule com cuidado;
- Produto de uso único – Não reutilizar;
- **PROIBIDO REPROCESSAR;**
- Os implantes NUNCA devem ser reutilizados. Embora possam parecer não estarem danificados, as tensões prévias a que os mesmos foram submetidos podem originar imperfeições que reduzam o tempo de vida útil do produto num reimplante.
- **PRODUTO ESTÉRIL**

PRECAUÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS:

- O critério usado para a seleção de paciente deve ser aquele descrito na seção acima “INDICAÇÕES”.
- Pacientes em condições e/ ou predisposições, tais como os listados na seção “CONTRA-INDICAÇÕES” acima, devem ser evitados;
- O cirurgião deve estar perfeitamente familiarizado com os implantes e técnicas cirúrgicas e com a montagem dos componentes.

PRECAUÇÕES OPERATÓRIAS:

- A correta seleção dos instrumentais é crítica para o sucesso da operação, portanto, a técnica cirúrgica deve ser seguida corretamente.
- Siga estritamente os protocolos cirúrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio dos implantes e / ou instrumentos para evitar ferimentos no paciente e ou no pessoal do centro cirúrgico.
- Alguns problemas podem surgir enquanto implantes e instrumentos são manuseados. Cheque cuidadosamente a integridade do implante: a superfície dos componentes não deve estar manchada, arranhada ou defeituosa.

PRECAUÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS:

Orientações pós-operatórias e advertências aos pacientes pelos médicos e a colaboração do paciente para seguir as instruções são extremamente importantes:

- Paciente deve informar, quando da realização de exames de ressonância magnética (RM), sobre o fato de ser portador de implante
- O paciente deve ser instruído sobre as suas limitações e ser orientado para dirigir suas atividades de acordo.
- O paciente deve estar ciente que o excesso de força durante o período de reabilitação pós-operatória pode resultar em encurvamento, afrouxamento ou ruptura do implante.
- Uma ausência de consolidação óssea persistente resultará em uma carga excessiva que repetidamente se aplicará ao implante, eventualmente conduzindo ao encurvamento, afrouxamento ou até mesmo fratura do dispositivo. No caso de uma ausência de consolidação persistente, ou se os componentes começarem a afrouxar, encurvar, e/ou quebrarem, o dispositivo deve ser revisado e/ou removido sem demora, antes que sérios danos ocorram.
- Todos os materiais de síntese são implantados para dar uma fixação temporária nas fraturas. A finalidade dos implantes é manter a fratura estável por um período de tempo para que ocorra a consolidação óssea.

- Esta consolidação óssea demora em média de 4 a 6 semanas dependendo da fratura, do local e do membro fraturado. Portanto, é fundamental que o paciente siga as orientações do médico tomando os devidos cuidados com a carga suportada na região durante os primeiros meses. Os médicos também devem acompanhar a região fraturada através de Raio-X e exames clínicos para avaliar a formação de calo ósseo. Caso esse não tenha se formado durante o período de 4 a 6 semanas, o médico deve intervir na região, colocando outro implante ou mesmo enxerto ósseo. Se o médico não proceder dessa forma, pode ocorrer uma quebra por fadiga do implante, pois materiais implantados após a consolidação óssea podem sofrer esforço mecânico e conseqüentemente podem vir a quebrar.

Efeitos Adversos

Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos e possibilidade de complicações, sendo que alguns riscos comuns são as infecções, sangramentos, reações alérgicas medicamentosas e riscos anestésicos, entre outros, podendo ser ainda associadas a implantação do produto, as seguintes complicações e efeitos adversos:

Afrouxamento mecânico pode ser o resultado de fixação defeituosa ou infecção oculta. Reações de sensibilidade a metal em pacientes raramente foram informadas.

Implantação de material estranho em tecidos resulta em reações histológicas que envolvem vários tamanhos de macrófagos e fibroblastos. A importância química deste efeito é incerta, como também mudanças semelhantes podem ocorrer como um precursor, ou durante o processo curativo.

Outros possíveis efeitos adversos que podem ocorrer quando se implanta um pino rígido são: infecção pós-operatória superficial ou profunda; distúrbios vasculares, incluindo trombose e embolia pulmonar; hemorragia dos vasos sanguíneos e/ou hematomas; dor, desconforto ou sensações anormais em função da presença ou migração do produto médico, e também em função do procedimento cirúrgico; migração.

Instrução de Uso


Para a correta utilização do produto, as seguintes instruções devem ser adotadas:

- Os cuidados com este material são de responsabilidade do pessoal habilitado, aos quais devem seguir as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis;


- O produto deve ser manipulado com os devidos cuidados em locais adequados (centro de materiais e salas cirúrgicas);
- O produto somente deve ser utilizado por equipe cirúrgicas especializadas com conhecimento e capacitação específica sobre a técnica a que esse produto se destina (ver Modo de Uso do Produto), sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha e o domínio da técnica cirúrgica a ser realizada;
- Para a aplicação do produto é necessário o uso de instrumental específico, indicado no “Material de Apoio”, não devendo, devido a possibilidade de incompatibilidade dimensional e/ou funcional, ser utilizado com outros instrumentos que não são os indicados pelo fabricante.

Modo de Uso do Produto


- 1) Ajuste inicial: Soltar parafuso da esfera para correr livre no fio, com o auxílio da chave.

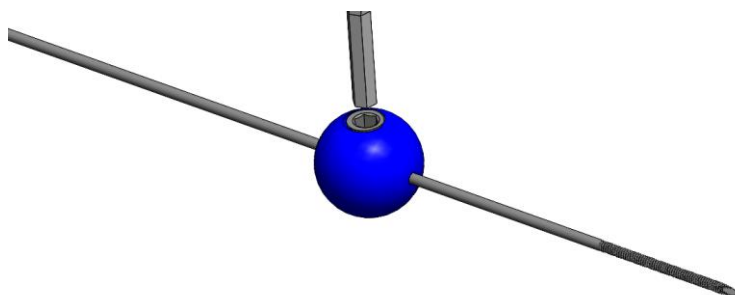

- 2) Inserção do fio: utilizar chave para a inserção do fio e estabilização da fratura e/ou deformidade.

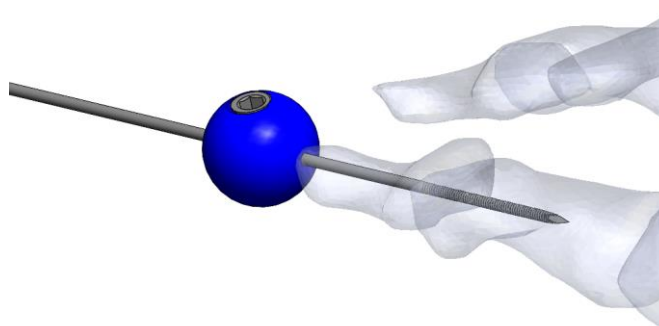

- 3) Cortar o excesso do fio e posicionar a esfera próxima a pele e apertar novamente o parafuso, com o auxílio da chave.

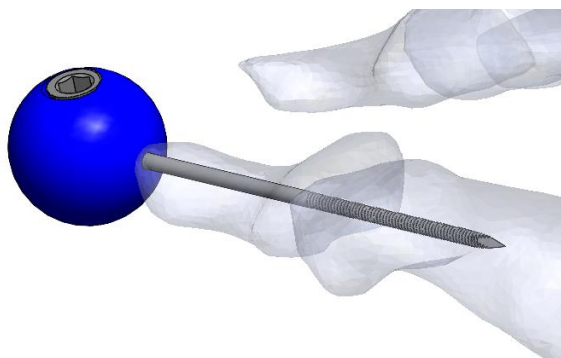

Obs.: (a chave ou qualquer outro instrumento não pertence a registro e por isso deve ser adquirida separadamente).

Orientações ao Paciente e/ou Representante Legal

A equipe cirúrgica responsável deve orientar o paciente e/ou representa legal sobre:

- Os cuidados adequados e as restrições durante o período pós-operatório. A capacidade e a vontade do paciente em seguir essas orientações constituem um dos aspectos importantes em um procedimento cirúrgico;
- O fato de que os riscos são maiores quando da utilização em pacientes com predisposição a desobedecer às orientações médicas, cuidados e restrições pós-operatórias, como crianças, idosos, indivíduos alterações neurológicas ou dependentes químicos;
- A necessidade de restrição da realização de atividades de esforço ou práticas esportivas durante o período pós-operatório, cuja extensão é definida pelo cirurgião responsável;
- A necessidade de acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante, osso e dos tecidos adjacentes;
- A necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de soltura dos componentes;
- O fato de que os implantes podem interferir nos resultados dos exames por imagens. Principalmente, pode haver interação do implante metálico com o campo magnético gerado durante o exame de ressonância magnética, causando desconforto ao paciente. Desta forma, portadores de implantes devem informar ao

médico/técnico responsável a existência de implantes metálicos antes da realização de tais exames;

Esterilização

O produto é fornecido na condição Estéril, como método de esterilização em gás de Óxido de Etileno, com prazo de validade de 3 anos a partir da data de esterilização.

Riscos de Contaminação

Por tratar se de um produto implantável, após a explantação, existem riscos de contaminação biológica e transmissão de doenças virais.

De modo a minimizar esses riscos, o produto explantado deve ser tratado como material potencialmente contaminante, devendo se adotar as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis. No Brasil, os serviços de Saúde devem adotar a Resolução RDC N° 222/2018, que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

Descarte do Dispositivo

Os Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com dispositivos explantados. Estes dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.


Produto de uso único – Não Reutilizar

PROIBIDO REPROCESSAR

DISPOSITIVOS EXPLANTADOS SÃO CONSIDERADOS LIXO HOSPITALAR

Marcação

A identificação do produto é feita através de gravação laser. **Fixador Ósseo Stability – Tech** contém as seguintes informações gravadas a laser para permitir a rastreabilidade e acompanhamento do paciente no pós-operatório:

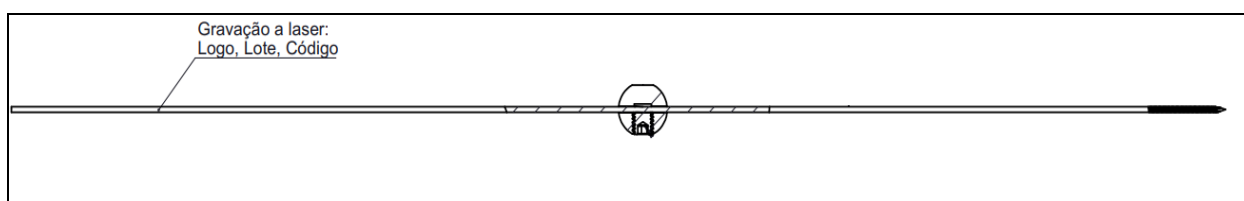

Rastreabilidade

Para garantir a rastreabilidade do produto implantado, e cumprir com os requisitos de vigilância sanitária, o cirurgião ou sua equipe deve inserir no prontuário do paciente as informações acerca do produto implantado, utilizando-se das Etiquetas de Rastreabilidade fornecidas na embalagem do produto.

Nas Etiquetas de Rastreabilidade constam as informações estabelecidas pela RDC nº 594, de 28/12/2021 que incluem dados do produto relativos: Dados do Fabricante e/ou Importador, Código, Lote, Nome ou Modelo Comercial, Registro ANVISA, entre outras informações.


Uma via da Etiqueta de Rastreabilidade também deve ser fornecida ao distribuidor do produto, modo a completar o ciclo de rastreabilidade do produto implantado, bem como ao paciente para que obtenha informações a respeito do produto implantado em seu procedimento cirúrgico.

As informações necessárias para rastreabilidade são as relativas ao produto utilizado, cirurgia e paciente, conforme informações relacionadas abaixo:

- Nome do paciente que recebeu o implante;
- Nome do Cirurgião;
- Nome do Hospital;
- Nome do Fabricante;

- Nome do Fornecedor;
- Data da Cirurgia;
- Código do Produto;
- Número de lote do produto;
- Quantidades Utilizadas;
- N° do Registro do Produto na ANVISA.

As informações de rastreabilidade são necessárias para notificação pelo serviço de saúde pelo próprio paciente ao sistema de Tecnovigilância (Sistema NOTIVISA) da ANVISA e ao fabricante/importador do produto, quando da ocorrência de queixa técnica e eventos adversos e/ou eventos adversos graves envolvendo o uso do produto, para a condução das investigações cabíveis. A empresa Techimport fornece 6 etiquetas de rastreabilidade junto com o produto.

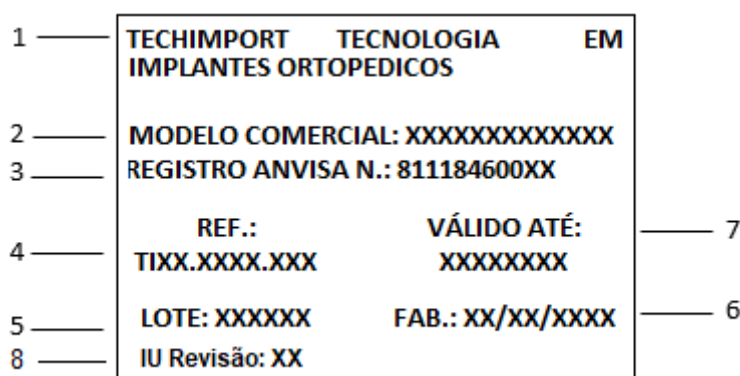

- 1: Nome da empresa;
- 2: Modelo Comercial;
- 3: Número do registro na ANVISA;
- 4: Código do produto;
- 5: Código de lote;
- 6: Data de fabricação;
- 7: Válido até: 3 anos apartir da data de esterilização
- 8: Indicação da Revisao da Instrução de Uso

Armazenamento e Transporte

- Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura ambiente (Máx. 25°C) e umidade relativa de 30% a 75% e ao abrigo da luz solar direta.
- Os implantes devem ser armazenados na embalagem original, em local fresco e seco e protegidos da poeira e da luz solar direta.
- Proteger os implantes de arranhões e amassamentos
- Tenha extremo cuidado no manuseio e armazenagem dos implantes.
- Não permita o contato com metal e outros objetos que possam comprometer o uso apropriado final.
- Implantes e instrumentos devem ser protegidos durante a armazenagem de ambientes corrosivos tais como: ar salgado, umidade etc.
- Uma vez removido do paciente, o implante não deve ser reusado. Descarte todos os implantes danificados. A TECHIMPORT não aceita devolução deste tipo de material.
- O implante deve ser usado somente em suas condições originais. Qualquer mudança feita pelo usuário pode levar à falha do implante.
- Tenha extremo cuidado ao manusear os implantes. Riscos na superfície dos componentes podem causar rachaduras que podem significativamente reduzir as características de uso do implante e particularmente resistência à corrosão.
- No caso de ocorrer algum dano no implante antes de ser utilizado (seja por quedas ou riscos), este deve ser devolvido a TECHIMPORT, que estabeleceu um procedimento específico para o recebimento de devolução deste material.
- É essencial para a durabilidade do implante que as superfícies dos ossos estejam perfeitamente limpas e não estejam danificadas.
- Advertimos para que não sejam utilizados implantes de outras marcas com os implantes TECHIMPORT.
- Siga as regras específicas de compatibilidade dos componentes definidas na literatura e técnicas cirúrgicas.
- O planejamento pré-operatório usando radiografias permite a determinação dos tamanhos dos componentes.
- Os Fixadores Ósseos Stability-Tech são fornecidos individualmente em sua embalagem original e estéreis.

As etiquetas de rastreabilidade devem seguir o produto em todas as fases cirúrgicas. Caso o produto não tenha sido utilizado durante a cirurgia e estando fora de sua embalagem o mesmo deverá ser descartado e de forma alguma ser utilizado. Maiores detalhes ver item **“DESCARTE DO DISPOSITIVO”**.

Transporte:

O material implantável deverá ser transportado em embalagem adequada que o proteja de choques mecânicos e exposição a intemperes. A embalagem de transporte deve ser protegida para que as embalagens estéreis do material implantável não sofram danos e comprometa sua esterilidade.

Os blisters deverão ser mantidos em suas caixas originais até o momento de utilização. Deverão ser armazenados em local protegido de luz e umidade.

Caso seja detectada a violação da embalagem estéril, o material implantável deverá ser descartado conforme orientações do item **“DESCARTE DO DISPOSITIVO”**.

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA:

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP através do e-mail**

qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500.

Formas de Apresentação do Produto Médico

Forma de Embalagem

Os **Fixadores Ósseos Stability-Tech** são embalados individualmente em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. A figura 1 mostra de forma detalhada a embalagem deste produto.

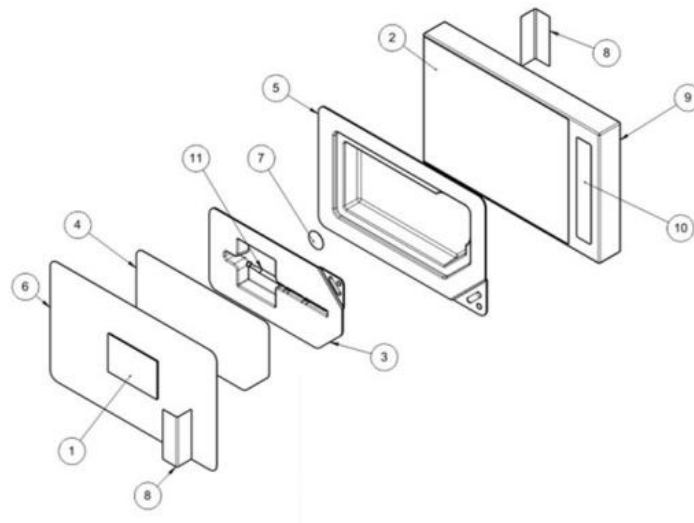


Figura 1 - Detalhamento da embalagem do produto

- 1: Etiqueta Papel Couche Adesiva (Rastreabilidade);
- 2: Etiqueta Adesiva RFID UHF, Branca.
- 3: Blister Interno
- 4: Papel TYVEK Interno.
- 5: Blister Externo
- 6: Papel TYVEK Externo.
- 7: Etiqueta Indicador Químico de Esterilização – E.T.O
- 8: Etiqueta Lacre
- 9: Caixa
- 10: Etiqueta Auxiliar para Estéreis
- 11: Fixador Ósseo Stability-Tech



Figura 2 - Caixa para produto final estéril (Embalagem Terciária)



Figura 3 – Simbologia representada na caixa

- 1 – Não reutilizar produto único
- 2 – Não reesterilizar
- 3 – Consultar instruções de operação
- 4 – Atenção – consultar instrução de uso para informações adicionais
- 5 – Não utilizar se a embalagem estiver danificada
- 6 – Proteger contra umidade
- 7 – Manter ao abrigo do sol
- 8 – Limites de temperatura
- 9 – Produto estéril por Óxido de Etileno

Forma de Apresentação

Os **Fixadores Ósseos Stability-Tech** é composto pelos seguintes componentes (para configuração dos produtos que compõe cada produto, verificar item - Composição):

Tabela 03 – Forma de Apresentação		
Código	Descrição	Quantidade Embalada
TI040.0010.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 100 mm - Estriado	01
TI040.0010.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0010.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 150 mm - Estriado	01
TI040.0010.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0010.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0010.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0010.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0010.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0010.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0010.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 325 mm - Estriado	01
TI040.0010.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0010.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 375 mm - Estriado	01
TI040.0010.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0010.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 425 mm - Estriado	01
TI040.0010.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 450 mm - Estriado	01
TI040.0012.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 100 mm - Estriado	01
TI040.0012.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0012.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 150 mm - Estriado	01
TI040.0012.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0012.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0012.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0012.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0012.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0012.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0012.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 325 mm - Estriado	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0012.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0012.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 375 mm - Estriado	01
TI040.0012.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0012.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 425 mm - Estriado	01
TI040.0012.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 450 mm - Estriado	01
TI040.0015.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 100 mm - Estriado	01
TI040.0015.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0015.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 150 mm - Estriado	01
TI040.0015.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0015.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0015.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0015.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0015.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0015.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0015.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 325 mm - Estriado	01
TI040.0015.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0015.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 375 mm - Estriado	01
TI040.0015.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0015.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 425 mm - Estriado	01
TI040.0015.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 450 mm - Estriado	01
TI040.0018.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 100 mm - Estriado	01
TI040.0018.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0018.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 150 mm - Estriado	01
TI040.0018.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0018.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0018.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0018.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0018.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0018.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0018.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 325 mm - Estriado	01
TI040.0018.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0018.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 375 mm - Estriado	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0018.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0018.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 425 mm - Estriado	01
TI040.0018.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 450 mm - Estriado	01
TI040.0020.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 100 mm - Estriado	01
TI040.0020.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0020.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 150 mm - Estriado	01
TI040.0020.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0020.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0020.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0020.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0020.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0020.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0020.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 325 mm - Estriado	01
TI040.0020.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0020.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 375 mm - Estriado	01
TI040.0020.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0020.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 425 mm - Estriado	01
TI040.0020.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 450 mm - Estriado	01
TI040.0025.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 100 mm - Estriado	01
TI040.0025.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0025.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 150 mm - Estriado	01
TI040.0025.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0025.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0025.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0025.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0025.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0025.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0025.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 325 mm - Estriado	01
TI040.0025.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0025.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 375 mm - Estriado	01
TI040.0025.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0025.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 425 mm - Estriado	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0025.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 450 mm - Estriado	01
TI040.0030.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 100 mm - Estriado	01
TI040.0030.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0030.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 150 mm - Estriado	01
TI040.0030.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0030.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0030.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0030.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0030.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0030.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0030.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 325 mm - Estriado	01
TI040.0030.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0030.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 375 mm - Estriado	01
TI040.0030.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0030.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 425 mm - Estriado	01
TI040.0030.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 450 mm - Estriado	01
TI040.0035.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 100 mm - Estriado	01
TI040.0035.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0035.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 150 mm - Estriado	01
TI040.0035.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0035.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0035.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0035.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0035.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0035.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0035.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 325 mm - Estriado	01
TI040.0035.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0035.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 375 mm - Estriado	01
TI040.0035.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0035.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 425 mm - Estriado	01
TI040.0035.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 450 mm - Estriado	01
TI040.0040.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 100 mm - Estriado	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0040.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0040.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 150 mm - Estriado	01
TI040.0040.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0040.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0040.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0040.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0040.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0040.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0040.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 325 mm - Estriado	01
TI040.0040.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0040.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 375 mm - Estriado	01
TI040.0040.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0040.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 425 mm - Estriado	01
TI040.0040.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 450 mm - Estriado	01
TI040.0045.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 100 mm - Estriado	01
TI040.0045.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0045.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 150 mm - Estriado	01
TI040.0045.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0045.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0045.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0045.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0045.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0045.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0045.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 325 mm - Estriado	01
TI040.0045.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0045.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 375 mm - Estriado	01
TI040.0045.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0045.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 425 mm - Estriado	01
TI040.0045.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 450 mm - Estriado	01
TI040.0050.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 100 mm - Estriado	01
TI040.0050.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 125 mm - Estriado	01
TI040.0050.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 150 mm - Estriado	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.0050.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 175 mm - Estriado	01
TI040.0050.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 200 mm - Estriado	01
TI040.0050.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 225 mm - Estriado	01
TI040.0050.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 250 mm - Estriado	01
TI040.0050.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 275 mm - Estriado	01
TI040.0050.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 300 mm - Estriado	01
TI040.0050.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 325 mm - Estriado	01
TI040.0050.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 350 mm - Estriado	01
TI040.0050.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 375 mm - Estriado	01
TI040.0050.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 400 mm - Estriado	01
TI040.0050.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 425 mm - Estriado	01
TI040.0050.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 450 mm - Estriado	01
TI040.1010.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 100 mm - Liso	01
TI040.1010.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 125 mm - Liso	01
TI040.1010.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 150 mm - Liso	01
TI040.1010.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 175 mm - Liso	01
TI040.1010.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 200 mm - Liso	01
TI040.1010.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 225 mm - Liso	01
TI040.1010.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 250 mm - Liso	01
TI040.1010.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 275 mm - Liso	01
TI040.1010.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 300 mm - Liso	01
TI040.1010.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 325 mm - Liso	01
TI040.1010.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 350 mm - Liso	01
TI040.1010.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 375 mm - Liso	01
TI040.1010.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 400 mm - Liso	01
TI040.1010.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 425 mm - Liso	01
TI040.1010.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,0 x 450 mm - Liso	01
TI040.1012.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 100 mm - Liso	01
TI040.1012.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 125 mm - Liso	01
TI040.1012.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 150 mm - Liso	01
TI040.1012.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 175 mm - Liso	01
TI040.1012.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 200 mm - Liso	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1012.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 225 mm - Liso	01
TI040.1012.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 250 mm - Liso	01
TI040.1012.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 275 mm - Liso	01
TI040.1012.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 300 mm - Liso	01
TI040.1012.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 325 mm - Liso	01
TI040.1012.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 350 mm - Liso	01
TI040.1012.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 375 mm - Liso	01
TI040.1012.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 400 mm - Liso	01
TI040.1012.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 425 mm - Liso	01
TI040.1012.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,2 x 450 mm - Liso	01
TI040.1015.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 100 mm - Liso	01
TI040.1015.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 125 mm - Liso	01
TI040.1015.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 150 mm - Liso	01
TI040.1015.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 175 mm - Liso	01
TI040.1015.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 200 mm - Liso	01
TI040.1015.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 225 mm - Liso	01
TI040.1015.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 250 mm - Liso	01
TI040.1015.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 275 mm - Liso	01
TI040.1015.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 300 mm - Liso	01
TI040.1015.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 325 mm - Liso	01
TI040.1015.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 350 mm - Liso	01
TI040.1015.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 375 mm - Liso	01
TI040.1015.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 400 mm - Liso	01
TI040.1015.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 425 mm - Liso	01
TI040.1015.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,5 x 450 mm - Liso	01
TI040.1018.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 100 mm - Liso	01
TI040.1018.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 125 mm - Liso	01
TI040.1018.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 150 mm - Liso	01
TI040.1018.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 175 mm - Liso	01
TI040.1018.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 200 mm - Liso	01
TI040.1018.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 225 mm - Liso	01
TI040.1018.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 250 mm - Liso	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1018.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 275 mm - Liso	01
TI040.1018.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 300 mm - Liso	01
TI040.1018.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 325 mm - Liso	01
TI040.1018.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 350 mm - Liso	01
TI040.1018.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 375 mm - Liso	01
TI040.1018.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 400 mm - Liso	01
TI040.1018.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 425 mm - Liso	01
TI040.1018.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø1,8 x 450 mm - Liso	01
TI040.1020.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 100 mm - Liso	01
TI040.1020.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 125 mm - Liso	01
TI040.1020.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 150 mm - Liso	01
TI040.1020.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 175 mm - Liso	01
TI040.1020.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 200 mm - Liso	01
TI040.1020.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 225 mm - Liso	01
TI040.1020.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 250 mm - Liso	01
TI040.1020.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 275 mm - Liso	01
TI040.1020.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 300 mm - Liso	01
TI040.1020.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 325 mm - Liso	01
TI040.1020.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 350 mm - Liso	01
TI040.1020.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 375 mm - Liso	01
TI040.1020.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 400 mm - Liso	01
TI040.1020.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 425 mm - Liso	01
TI040.1020.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,0 x 450 mm - Liso	01
TI040.1025.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 100 mm - Liso	01
TI040.1025.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 125 mm - Liso	01
TI040.1025.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 150 mm - Liso	01
TI040.1025.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 175 mm - Liso	01
TI040.1025.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 200 mm - Liso	01
TI040.1025.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 225 mm - Liso	01
TI040.1025.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 250 mm - Liso	01
TI040.1025.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 275 mm - Liso	01
TI040.1025.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 300 mm - Liso	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1025.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 325 mm - Liso	01
TI040.1025.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 350 mm - Liso	01
TI040.1025.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 375 mm - Liso	01
TI040.1025.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 400 mm - Liso	01
TI040.1025.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 425 mm - Liso	01
TI040.1025.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø2,5 x 450 mm - Liso	01
TI040.1030.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 100 mm - Liso	01
TI040.1030.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 125 mm - Liso	01
TI040.1030.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 150 mm - Liso	01
TI040.1030.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 175 mm - Liso	01
TI040.1030.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 200 mm - Liso	01
TI040.1030.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 225 mm - Liso	01
TI040.1030.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 250 mm - Liso	01
TI040.1030.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 275 mm - Liso	01
TI040.1030.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 300 mm - Liso	01
TI040.1030.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 325 mm - Liso	01
TI040.1030.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 350 mm - Liso	01
TI040.1030.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 375 mm - Liso	01
TI040.1030.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 400 mm - Liso	01
TI040.1030.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 425 mm - Liso	01
TI040.1030.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,0 x 450 mm - Liso	01
TI040.1035.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 100 mm - Liso	01
TI040.1035.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 125 mm - Liso	01
TI040.1035.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 150 mm - Liso	01
TI040.1035.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 175 mm - Liso	01
TI040.1035.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 200 mm - Liso	01
TI040.1035.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 225 mm - Liso	01
TI040.1035.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 250 mm - Liso	01
TI040.1035.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 275 mm - Liso	01
TI040.1035.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 300 mm - Liso	01
TI040.1035.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 325 mm - Liso	01
TI040.1035.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 350 mm - Liso	01

Instrução de Uso
 Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1035.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 375 mm - Liso	01
TI040.1035.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 400 mm - Liso	01
TI040.1035.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 425 mm - Liso	01
TI040.1035.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø3,5 x 450 mm - Liso	01
TI040.1040.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 100 mm - Liso	01
TI040.1040.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 125 mm - Liso	01
TI040.1040.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 150 mm - Liso	01
TI040.1040.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 175 mm - Liso	01
TI040.1040.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 200 mm - Liso	01
TI040.1040.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 225 mm - Liso	01
TI040.1040.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 250 mm - Liso	01
TI040.1040.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 275 mm - Liso	01
TI040.1040.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 300 mm - Liso	01
TI040.1040.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 325 mm - Liso	01
TI040.1040.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 350 mm - Liso	01
TI040.1040.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 375 mm - Liso	01
TI040.1040.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 400 mm - Liso	01
TI040.1040.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 425 mm - Liso	01
TI040.1040.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,0 x 450 mm - Liso	01
TI040.1045.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 100 mm - Liso	01
TI040.1045.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 125 mm - Liso	01
TI040.1045.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 150 mm - Liso	01
TI040.1045.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 175 mm - Liso	01
TI040.1045.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 200 mm - Liso	01
TI040.1045.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 225 mm - Liso	01
TI040.1045.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 250 mm - Liso	01
TI040.1045.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 275 mm - Liso	01
TI040.1045.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 300 mm - Liso	01
TI040.1045.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 325 mm - Liso	01
TI040.1045.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 350 mm - Liso	01
TI040.1045.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 375 mm - Liso	01
TI040.1045.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 400 mm - Liso	01


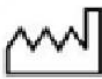










Instrução de Uso
Fixadores Ósseos Stability - Tech

TI040.1045.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 425 mm - Liso	01
TI040.1045.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø4,5 x 450 mm - Liso	01
TI040.1050.100	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 100 mm - Liso	01
TI040.1050.125	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 125 mm - Liso	01
TI040.1050.150	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 150 mm - Liso	01
TI040.1050.175	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 175 mm - Liso	01
TI040.1050.200	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 200 mm - Liso	01
TI040.1050.225	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 225 mm - Liso	01
TI040.1050.250	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 250 mm - Liso	01
TI040.1050.275	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 275 mm - Liso	01
TI040.1050.300	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 300 mm - Liso	01
TI040.1050.325	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 325 mm - Liso	01
TI040.1050.350	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 350 mm - Liso	01
TI040.1050.375	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 375 mm - Liso	01
TI040.1050.400	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 400 mm - Liso	01
TI040.1050.425	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 425 mm - Liso	01
TI040.1050.450	Fixador Ósseo Stability-Tech Ø5,0 x 450 mm - Liso	01


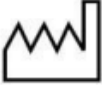







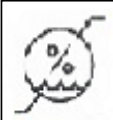


Rotulagem

ETIQUETA RFID

É utilizada a Etiqueta Adesiva RFID UHF com as seguintes informações descritivas e gráficas.

Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP		STERILE EO	
ROD WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) - LOTE B-8 - JD ANHANQUERA - RIO CLARO - SP			
CNPJ: 15524734000147 - Fone: +55 (19)3622-9600 - SAC: +55 (19)3622-9600			
R.T.:		- CREA - Instrução de Uso pelo Site http://www.techimportimplantes.com.br	
Nome Técnico:			
Nome Comercial:			
Modelo Comercial:			
Registro ANVISA n.	Qtde.:	un.	Proibido Reprocessar / Uso Unico
Material:			
Ref:			
Lote:	SN:		
Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instruções de Uso - Revisão XX - Consulta pelo Site			
PRODUTO ESTERIL - GAS OXIDO DE ETILENO			
			
			
			

Legenda da Simbologia

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 - 9500

Responsável Técnico: Leonardo Carreira Batista – CREA: 5069143390

Registro ANVISA nº: 81118460082

Versão/ Revisão: 00

Emissão: 27/03/2023

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Em atendimento a Instrução Normativa IN nº04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para:
qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:
www.techimportimplantes.com.br

Revisão: 01
Emissão: 2022