

Instrução de Uso
Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis



Nome Técnico: Brocas de Perfuração Ossea

Nome Comercial: Brocas e Fresas D-Coating com DLC Estéreis

Registro ANVISA: 81118469015

Fabricante:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500

**PRODUTO ESTÉRIL
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Brocas de Perfuração Ossea

Nome Comercial: Brocas e Fresas D-Coating com DLC Estéreis

Composto por: Instrumentais

Registro ANVISA: 81118469015

Modelos comerciais: Ver Tabela 1

Metodo de Esterilização: ETO

Validade: 3 anos apartir da data de Esterilização

DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

Os instrumentais pertencentes a esse registro são utilizados para auxiliar a cirurgia durante os procedimentos cirurgicos.

Tabela 1 – Modelos Comerciais

Código	Descrição	Dimensão	Indicação de uso	Matéria prima
T1134.8006.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm	Ø0,6 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm	Ø0,6 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm	Ø0,6 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm	Ø0,6 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm	Ø0,6 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm	Ø0,6 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm	Ø0,6 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

TI134.8006.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm	Ø0,6 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8007.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm	Ø0,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8007.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm	Ø0,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8007.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm	Ø0,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8007.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm	Ø0,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8007.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm	Ø0,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8007.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm	Ø0,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8007.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm	Ø0,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8007.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm	Ø0,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm	Ø0,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm	Ø0,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm	Ø0,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm	Ø0,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.095	Fresa esférica D-Coating	Ø0,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø0,8 X 95mm			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8008.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm	Ø0,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8008.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm	Ø0,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8008.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm	Ø0,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm	Ø1,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm	Ø1,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm	Ø1,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm	Ø1,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm	Ø1,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm	Ø1,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm	Ø1,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm	Ø1,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8014.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm	Ø1,4 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8014.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm	Ø1,4 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8014.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm	Ø1,4 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8014.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm	Ø1,4 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8014.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm	Ø1,4 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8014.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm	Ø1,4 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8014.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm	Ø1,4 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8014.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm	Ø1,4 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm	Ø1,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm	Ø1,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm	Ø1,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm	Ø1,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm	Ø1,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm	Ø1,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm	Ø1,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm	Ø1,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm	Ø2,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm	Ø2,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm	Ø2,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm	Ø2,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm	Ø2,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm	Ø2,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm	Ø2,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm	Ø2,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8023.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm	Ø2,3 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8023.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm	Ø2,3 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8023.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm	Ø2,3 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8023.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm	Ø2,3 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm	Ø2,3 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm	Ø2,3 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm	Ø2,3 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm	Ø2,3 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm	Ø2,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm	Ø2,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm	Ø2,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm	Ø2,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm	Ø2,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm	Ø2,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm	Ø2,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm	Ø2,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8030.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm	Ø3,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

TI134.8030.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm	Ø3,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8030.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm	Ø3,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8030.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm	Ø3,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8030.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm	Ø3,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8030.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm	Ø3,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8030.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm	Ø3,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8030.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm	Ø3,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm	Ø3,1 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm	Ø3,1 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm	Ø3,1 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm	Ø3,1 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm	Ø3,1 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm	Ø3,1 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.115	Fresa esférica D-Coating	Ø3,1 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

	Ø3,1 X 115mm			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8031.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm	Ø3,1 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8035.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm	Ø3,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8035.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm	Ø3,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8035.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm	Ø3,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8035.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm	Ø3,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8035.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm	Ø3,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8035.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm	Ø3,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8035.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm	Ø3,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8035.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm	Ø3,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm	Ø4,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm	Ø4,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm	Ø4,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm	Ø4,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm	Ø4,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm	Ø4,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm	Ø4,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm	Ø4,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm	Ø4,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm	Ø4,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm	Ø4,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm	Ø4,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm	Ø4,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm	Ø4,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm	Ø4,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm	Ø4,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8050.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm	Ø5,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8050.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm	Ø5,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8050.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm	Ø5,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8050.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm	Ø5,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8050.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm	Ø5,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8050.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm	Ø5,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8050.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm	Ø5,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8050.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm	Ø5,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm	Ø5,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm	Ø5,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm	Ø5,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm	Ø5,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm	Ø5,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm	Ø5,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm	Ø5,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm	Ø5,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm	Ø6,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm	Ø6,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm	Ø6,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm	Ø6,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm	Ø6,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm	Ø6,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm	Ø6,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm	Ø6,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8106.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm ES	Ø0,6 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8106.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm ES	Ø0,6 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8106.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm ES	Ø0,6 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

TI134.8106.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm ES	Ø0,6 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8106.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm ES	Ø0,6 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8106.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm ES	Ø0,6 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8106.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm ES	Ø0,6 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8106.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm ES	Ø0,6 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm ES	Ø0,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm ES	Ø0,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm ES	Ø0,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm ES	Ø0,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm ES	Ø0,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm ES	Ø0,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm ES	Ø0,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm ES	Ø0,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8108.045	Fresa esférica D-Coating	Ø0,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø0,8 X 45mm ES			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8108.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm ES	Ø0,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8108.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm ES	Ø0,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8108.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm ES	Ø0,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8108.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm ES	Ø0,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8108.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm ES	Ø0,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8108.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm ES	Ø0,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8108.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm ES	Ø0,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm ES	Ø1,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm ES	Ø1,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm ES	Ø1,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm ES	Ø1,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm ES	Ø1,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm ES	Ø1,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8110.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm ES	Ø1,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8110.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm ES	Ø1,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8114.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm ES	Ø1,4 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8114.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm ES	Ø1,4 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8114.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm ES	Ø1,4 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8114.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm ES	Ø1,4 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8114.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm ES	Ø1,4 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8114.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm ES	Ø1,4 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8114.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm ES	Ø1,4 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8114.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm ES	Ø1,4 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm ES	Ø1,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm ES	Ø1,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm ES	Ø1,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm ES	Ø1,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm ES	Ø1,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm ES	Ø1,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm ES	Ø1,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm ES	Ø1,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm ES	Ø2,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm ES	Ø2,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm ES	Ø2,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm ES	Ø2,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm ES	Ø2,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm ES	Ø2,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm ES	Ø2,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm ES	Ø2,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8123.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm ES	Ø2,3 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8123.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm ES	Ø2,3 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8123.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm ES	Ø2,3 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8123.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm ES	Ø2,3 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8123.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm ES	Ø2,3 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8123.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm ES	Ø2,3 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8123.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm ES	Ø2,3 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8123.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm ES	Ø2,3 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8127.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm ES	Ø2,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8127.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm ES	Ø2,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8127.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm ES	Ø2,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8127.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm ES	Ø2,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8127.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm ES	Ø2,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

T1134.8127.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm ES	Ø2,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8127.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm ES	Ø2,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8127.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm ES	Ø2,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8130.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm ES	Ø3,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8130.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm ES	Ø3,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8130.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm ES	Ø3,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8130.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm ES	Ø3,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8130.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm ES	Ø3,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8130.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm ES	Ø3,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8130.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm ES	Ø3,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8130.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm ES	Ø3,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8131.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm ES	Ø3,1 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8131.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm ES	Ø3,1 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8131.070	Fresa esférica D-Coating	Ø3,1 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

	Ø3,1 X 70mm ES			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8131.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm ES	Ø3,1 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8131.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm ES	Ø3,1 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8131.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm ES	Ø3,1 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8131.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm ES	Ø3,1 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8131.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm ES	Ø3,1 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm ES	Ø3,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm ES	Ø3,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm ES	Ø3,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm ES	Ø3,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm ES	Ø3,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm ES	Ø3,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm ES	Ø3,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm ES	Ø3,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8140.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm ES	Ø4,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8140.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm ES	Ø4,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8140.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm ES	Ø4,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8140.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm ES	Ø4,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8140.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm ES	Ø4,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8140.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm ES	Ø4,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8140.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm ES	Ø4,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8140.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm ES	Ø4,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8145.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm ES	Ø4,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8145.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm ES	Ø4,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8145.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm ES	Ø4,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8145.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm ES	Ø4,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8145.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm ES	Ø4,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8145.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm ES	Ø4,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8145.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm ES	Ø4,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8145.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm ES	Ø4,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm ES	Ø5,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm ES	Ø5,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm ES	Ø5,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm ES	Ø5,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm ES	Ø5,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm ES	Ø5,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm ES	Ø5,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm ES	Ø5,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8155.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm ES	Ø5,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8155.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm ES	Ø5,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8155.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm ES	Ø5,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8155.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm ES	Ø5,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8155.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm ES	Ø5,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8155.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm ES	Ø5,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8155.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm ES	Ø5,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8155.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm ES	Ø5,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm ES	Ø6,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm ES	Ø6,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm ES	Ø6,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm ES	Ø6,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm ES	Ø6,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm ES	Ø6,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm ES	Ø6,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

T1134.8160.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm ES	Ø6,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm NPR2	Ø0,6 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm NPR2	Ø0,6 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm NPR2	Ø0,6 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm NPR2	Ø0,6 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm NPR2	Ø0,6 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm NPR2	Ø0,6 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm NPR2	Ø0,6 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm NPR2	Ø0,6 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8207.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm NPR2	Ø0,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8207.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm NPR2	Ø0,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8207.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm NPR2	Ø0,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8207.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm NPR2	Ø0,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8207.095	Fresa esférica D-Coating	Ø0,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø0,7 X 95mm NPR2			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8207.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm NPR2	Ø0,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8207.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm NPR2	Ø0,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8207.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm NPR2	Ø0,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm NPR2	Ø0,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm NPR2	Ø0,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm NPR2	Ø0,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm NPR2	Ø0,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm NPR2	Ø0,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm NPR2	Ø0,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm NPR2	Ø0,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm NPR2	Ø0,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8210.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm NPR2	Ø1,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8210.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm NPR2	Ø1,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8210.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm NPR2	Ø1,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8210.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm NPR2	Ø1,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8210.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm NPR2	Ø1,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8210.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm NPR2	Ø1,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8210.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm NPR2	Ø1,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8210.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm NPR2	Ø1,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8214.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm NPR2	Ø1,4 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8214.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm NPR2	Ø1,4 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8214.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm NPR2	Ø1,4 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8214.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm NPR2	Ø1,4 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8214.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm NPR2	Ø1,4 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8214.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm NPR2	Ø1,4 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8214.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm NPR2	Ø1,4 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8214.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm NPR2	Ø1,4 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm NPR2	Ø1,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm NPR2	Ø1,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm NPR2	Ø1,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm NPR2	Ø1,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm NPR2	Ø1,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm NPR2	Ø1,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm NPR2	Ø1,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm NPR2	Ø1,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8220.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm NPR2	Ø2,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8220.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm NPR2	Ø2,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8220.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm NPR2	Ø2,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8220.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm NPR2	Ø2,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm NPR2	Ø2,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm NPR2	Ø2,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm NPR2	Ø2,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm NPR2	Ø2,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm NPR2	Ø2,3 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm NPR2	Ø2,3 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm NPR2	Ø2,3 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm NPR2	Ø2,3 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm NPR2	Ø2,3 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm NPR2	Ø2,3 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm NPR2	Ø2,3 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm NPR2	Ø2,3 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm NPR2	Ø2,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

T1134.8227.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm NPR2	Ø2,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm NPR2	Ø2,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm NPR2	Ø2,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm NPR2	Ø2,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm NPR2	Ø2,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm NPR2	Ø2,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm NPR2	Ø2,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8230.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm NPR2	Ø3,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8230.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm NPR2	Ø3,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8230.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm NPR2	Ø3,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8230.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm NPR2	Ø3,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8230.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm NPR2	Ø3,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8230.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm NPR2	Ø3,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8230.115	Fresa esférica D-Coating	Ø3,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

	Ø3,0 X 115mm NPR2			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8230.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm NPR2	Ø3,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8231.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm NPR2	Ø3,1 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8231.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm NPR2	Ø3,1 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8231.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm NPR2	Ø3,1 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8231.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm NPR2	Ø3,1 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8231.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm NPR2	Ø3,1 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8231.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm NPR2	Ø3,1 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8231.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm NPR2	Ø3,1 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8231.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm NPR2	Ø3,1 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm NPR2	Ø3,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm NPR2	Ø3,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm NPR2	Ø3,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm NPR2	Ø3,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm NPR2	Ø3,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm NPR2	Ø3,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm NPR2	Ø3,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm NPR2	Ø3,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm NPR2	Ø4,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm NPR2	Ø4,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm NPR2	Ø4,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm NPR2	Ø4,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm NPR2	Ø4,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm NPR2	Ø4,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm NPR2	Ø4,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm NPR2	Ø4,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8245.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm NPR2	Ø4,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8245.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm NPR2	Ø4,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8245.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm NPR2	Ø4,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8245.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm NPR2	Ø4,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8245.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm NPR2	Ø4,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8245.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm NPR2	Ø4,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8245.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm NPR2	Ø4,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8245.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm NPR2	Ø4,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm NPR2	Ø5,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm NPR2	Ø5,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm NPR2	Ø5,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm NPR2	Ø5,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm NPR2	Ø5,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm NPR2	Ø5,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm NPR2	Ø5,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm NPR2	Ø5,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm NPR2	Ø5,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm NPR2	Ø5,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm NPR2	Ø5,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm NPR2	Ø5,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm NPR2	Ø5,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm NPR2	Ø5,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm NPR2	Ø5,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm NPR2	Ø5,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm NPR2	Ø6,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm NPR2	Ø6,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm NPR2	Ø6,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

T1134.8260.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm NPR2	Ø6,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm NPR2	Ø6,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm NPR2	Ø6,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm NPR2	Ø6,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm NPR2	Ø6,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm CTES	Ø0,6 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm CTES	Ø0,6 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm CTES	Ø0,6 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm CTES	Ø0,6 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm CTES	Ø0,6 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm CTES	Ø0,6 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm CTES	Ø0,6 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm CTES	Ø0,6 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8307.045	Fresa esférica D-Coating	Ø0,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

	Ø0,7 X 45mm CTES			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8307.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm CTES	Ø0,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8307.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm CTES	Ø0,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8307.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm CTES	Ø0,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8307.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm CTES	Ø0,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8307.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm CTES	Ø0,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8307.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm CTES	Ø0,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8307.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm CTES	Ø0,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm CTES	Ø0,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm CTES	Ø0,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm CTES	Ø0,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm CTES	Ø0,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm CTES	Ø0,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm CTES	Ø0,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8308.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm CTES	Ø0,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8308.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm CTES	Ø0,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8310.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm CTES	Ø1,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8310.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm CTES	Ø1,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8310.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm CTES	Ø1,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8310.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm CTES	Ø1,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8310.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm CTES	Ø1,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8310.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm CTES	Ø1,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8310.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm CTES	Ø1,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8310.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm CTES	Ø1,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm CTES	Ø1,4 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm CTES	Ø1,4 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm CTES	Ø1,4 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm CTES	Ø1,4 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm CTES	Ø1,4 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm CTES	Ø1,4 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm CTES	Ø1,4 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm CTES	Ø1,4 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm CTES	Ø1,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm CTES	Ø1,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm CTES	Ø1,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm CTES	Ø1,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm CTES	Ø1,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm CTES	Ø1,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm CTES	Ø1,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm CTES	Ø1,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm CTES	Ø2,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm CTES	Ø2,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm CTES	Ø2,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm CTES	Ø2,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm CTES	Ø2,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm CTES	Ø2,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm CTES	Ø2,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm CTES	Ø2,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm CTES	Ø2,3 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm CTES	Ø2,3 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm CTES	Ø2,3 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm CTES	Ø2,3 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm CTES	Ø2,3 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

TI134.8323.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm CTES	Ø2,3 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8323.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm CTES	Ø2,3 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8323.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm CTES	Ø2,3 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8327.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm CTES	Ø2,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8327.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm CTES	Ø2,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8327.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm CTES	Ø2,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8327.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm CTES	Ø2,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8327.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm CTES	Ø2,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8327.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm CTES	Ø2,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8327.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm CTES	Ø2,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8327.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm CTES	Ø2,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm CTES	Ø3,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm CTES	Ø3,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.070	Fresa esférica D-Coating	Ø3,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø3,0 X 70mm CTES			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8330.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm CTES	Ø3,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8330.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm CTES	Ø3,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8330.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm CTES	Ø3,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8330.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm CTES	Ø3,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8330.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm CTES	Ø3,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm CTES	Ø3,1 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm CTES	Ø3,1 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm CTES	Ø3,1 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm CTES	Ø3,1 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm CTES	Ø3,1 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm CTES	Ø3,1 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm CTES	Ø3,1 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm CTES	Ø3,1 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm CTES	Ø3,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm CTES	Ø3,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm CTES	Ø3,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm CTES	Ø3,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm CTES	Ø3,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm CTES	Ø3,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm CTES	Ø3,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm CTES	Ø3,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8340.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm CTES	Ø4,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8340.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm CTES	Ø4,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8340.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm CTES	Ø4,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8340.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm CTES	Ø4,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8340.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm CTES	Ø4,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8340.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm CTES	Ø4,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8340.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm CTES	Ø4,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8340.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm CTES	Ø4,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm CTES	Ø4,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm CTES	Ø4,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm CTES	Ø4,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm CTES	Ø4,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm CTES	Ø4,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm CTES	Ø4,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm CTES	Ø4,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm CTES	Ø4,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8350.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm CTES	Ø5,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8350.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm CTES	Ø5,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm CTES	Ø5,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm CTES	Ø5,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm CTES	Ø5,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm CTES	Ø5,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm CTES	Ø5,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm CTES	Ø5,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm CTES	Ø5,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm CTES	Ø5,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm CTES	Ø5,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm CTES	Ø5,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm CTES	Ø5,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm CTES	Ø5,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm CTES	Ø5,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

T1134.8355.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm CTES	Ø5,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm CTES	Ø6,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm CTES	Ø6,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm CTES	Ø6,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm CTES	Ø6,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm CTES	Ø6,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm CTES	Ø6,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm CTES	Ø6,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm CTES	Ø6,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

COMPOSIÇÃO

O materiais selecionados para composição se encontram listados abaixo:

Código	Descrição	Dimensão	Indicação de uso	Matéria prima
T1134.8006.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm	Ø0,6 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm	Ø0,6 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm	Ø0,6 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm	Ø0,6 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm	Ø0,6 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm	Ø0,6 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm	Ø0,6 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8006.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm	Ø0,6 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8007.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm	Ø0,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8007.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm	Ø0,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8007.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm	Ø0,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8007.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm	Ø0,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8007.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm	Ø0,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8007.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm	Ø0,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8007.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm	Ø0,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8007.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm	Ø0,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm	Ø0,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm	Ø0,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm	Ø0,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm	Ø0,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm	Ø0,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm	Ø0,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm	Ø0,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8008.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm	Ø0,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8010.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm	Ø1,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8010.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm	Ø1,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8010.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm	Ø1,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8010.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm	Ø1,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8010.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm	Ø1,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm	Ø1,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm	Ø1,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8010.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm	Ø1,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8014.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm	Ø1,4 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8014.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm	Ø1,4 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8014.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm	Ø1,4 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8014.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm	Ø1,4 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8014.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm	Ø1,4 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8014.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm	Ø1,4 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8014.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm	Ø1,4 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8014.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm	Ø1,4 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8018.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm	Ø1,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8018.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm	Ø1,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

TI134.8018.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm	Ø1,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm	Ø1,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm	Ø1,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm	Ø1,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm	Ø1,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8018.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm	Ø1,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm	Ø2,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm	Ø2,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm	Ø2,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm	Ø2,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm	Ø2,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm	Ø2,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm	Ø2,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8020.130	Fresa esférica D-Coating	Ø2,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø2,0 X 130mm			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm	Ø2,3 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm	Ø2,3 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm	Ø2,3 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm	Ø2,3 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm	Ø2,3 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm	Ø2,3 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm	Ø2,3 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8023.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm	Ø2,3 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm	Ø2,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm	Ø2,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm	Ø2,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm	Ø2,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm	Ø2,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm	Ø2,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm	Ø2,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8027.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm	Ø2,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8030.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm	Ø3,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8030.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm	Ø3,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8030.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm	Ø3,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8030.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm	Ø3,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8030.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm	Ø3,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8030.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm	Ø3,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8030.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm	Ø3,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8030.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm	Ø3,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8031.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm	Ø3,1 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8031.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm	Ø3,1 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm	Ø3,1 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm	Ø3,1 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm	Ø3,1 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm	Ø3,1 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm	Ø3,1 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8031.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm	Ø3,1 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8035.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm	Ø3,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8035.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm	Ø3,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8035.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm	Ø3,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8035.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm	Ø3,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8035.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm	Ø3,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8035.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm	Ø3,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8035.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm	Ø3,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8035.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm	Ø3,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm	Ø4,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm	Ø4,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm	Ø4,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm	Ø4,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm	Ø4,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm	Ø4,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm	Ø4,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8040.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm	Ø4,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm	Ø4,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm	Ø4,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm	Ø4,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8045.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm	Ø4,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

TI134.8045.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm	Ø4,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8045.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm	Ø4,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8045.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm	Ø4,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8045.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm	Ø4,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8050.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm	Ø5,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8050.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm	Ø5,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8050.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm	Ø5,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8050.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm	Ø5,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8050.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm	Ø5,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8050.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm	Ø5,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8050.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm	Ø5,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8050.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm	Ø5,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8055.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm	Ø5,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8055.055	Fresa esférica D-Coating	Ø5,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø5,5 X 55mm			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm	Ø5,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm	Ø5,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm	Ø5,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm	Ø5,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm	Ø5,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8055.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm	Ø5,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm	Ø6,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm	Ø6,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm	Ø6,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm	Ø6,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm	Ø6,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm	Ø6,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8060.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm	Ø6,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8060.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm	Ø6,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8106.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm ES	Ø0,6 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8106.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm ES	Ø0,6 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8106.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm ES	Ø0,6 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8106.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm ES	Ø0,6 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8106.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm ES	Ø0,6 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8106.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm ES	Ø0,6 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8106.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm ES	Ø0,6 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8106.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm ES	Ø0,6 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8107.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm ES	Ø0,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8107.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm ES	Ø0,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8107.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm ES	Ø0,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8107.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm ES	Ø0,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm ES	Ø0,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm ES	Ø0,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm ES	Ø0,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8107.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm ES	Ø0,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8108.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm ES	Ø0,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8108.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm ES	Ø0,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8108.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm ES	Ø0,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8108.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm ES	Ø0,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8108.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm ES	Ø0,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8108.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm ES	Ø0,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8108.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm ES	Ø0,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8108.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm ES	Ø0,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8110.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm ES	Ø1,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm ES	Ø1,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm ES	Ø1,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm ES	Ø1,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm ES	Ø1,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm ES	Ø1,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm ES	Ø1,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8110.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm ES	Ø1,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8114.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm ES	Ø1,4 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8114.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm ES	Ø1,4 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8114.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm ES	Ø1,4 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8114.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm ES	Ø1,4 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8114.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm ES	Ø1,4 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8114.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm ES	Ø1,4 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

TI134.8114.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm ES	Ø1,4 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8114.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm ES	Ø1,4 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm ES	Ø1,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm ES	Ø1,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm ES	Ø1,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm ES	Ø1,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm ES	Ø1,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm ES	Ø1,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm ES	Ø1,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8118.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm ES	Ø1,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm ES	Ø2,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm ES	Ø2,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm ES	Ø2,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.080	Fresa esférica D-Coating	Ø2,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø2,0 X 80mm ES			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm ES	Ø2,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm ES	Ø2,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm ES	Ø2,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8120.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm ES	Ø2,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8123.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm ES	Ø2,3 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8123.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm ES	Ø2,3 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8123.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm ES	Ø2,3 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8123.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm ES	Ø2,3 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8123.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm ES	Ø2,3 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8123.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm ES	Ø2,3 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8123.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm ES	Ø2,3 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8123.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm ES	Ø2,3 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8127.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm ES	Ø2,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8127.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm ES	Ø2,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8127.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm ES	Ø2,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8127.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm ES	Ø2,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8127.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm ES	Ø2,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8127.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm ES	Ø2,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8127.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm ES	Ø2,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8127.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm ES	Ø2,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8130.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm ES	Ø3,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8130.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm ES	Ø3,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8130.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm ES	Ø3,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8130.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm ES	Ø3,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8130.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm ES	Ø3,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
Tl134.8130.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm ES	Ø3,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8130.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm ES	Ø3,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8130.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm ES	Ø3,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8131.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm ES	Ø3,1 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8131.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm ES	Ø3,1 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8131.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm ES	Ø3,1 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8131.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm ES	Ø3,1 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8131.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm ES	Ø3,1 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8131.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm ES	Ø3,1 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8131.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm ES	Ø3,1 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8131.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm ES	Ø3,1 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8135.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm ES	Ø3,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8135.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm ES	Ø3,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8135.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm ES	Ø3,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm ES	Ø3,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm ES	Ø3,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm ES	Ø3,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm ES	Ø3,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8135.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm ES	Ø3,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8140.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm ES	Ø4,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8140.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm ES	Ø4,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8140.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm ES	Ø4,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8140.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm ES	Ø4,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8140.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm ES	Ø4,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8140.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm ES	Ø4,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8140.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm ES	Ø4,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8140.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm ES	Ø4,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

TI134.8145.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm ES	Ø4,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8145.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm ES	Ø4,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8145.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm ES	Ø4,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8145.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm ES	Ø4,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8145.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm ES	Ø4,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8145.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm ES	Ø4,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8145.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm ES	Ø4,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8145.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm ES	Ø4,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm ES	Ø5,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm ES	Ø5,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm ES	Ø5,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm ES	Ø5,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm ES	Ø5,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.100	Fresa esférica D-Coating	Ø5,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø5,0 X 100mm ES			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm ES	Ø5,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8150.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm ES	Ø5,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8155.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm ES	Ø5,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8155.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm ES	Ø5,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8155.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm ES	Ø5,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8155.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm ES	Ø5,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8155.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm ES	Ø5,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8155.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm ES	Ø5,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8155.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm ES	Ø5,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8155.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm ES	Ø5,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8160.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm ES	Ø6,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8160.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm ES	Ø6,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8160.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm ES	Ø6,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm ES	Ø6,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm ES	Ø6,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm ES	Ø6,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm ES	Ø6,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8160.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm ES	Ø6,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm NPR2	Ø0,6 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm NPR2	Ø0,6 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm NPR2	Ø0,6 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm NPR2	Ø0,6 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm NPR2	Ø0,6 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm NPR2	Ø0,6 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm NPR2	Ø0,6 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8206.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm NPR2	Ø0,6 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8207.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm NPR2	Ø0,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8207.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm NPR2	Ø0,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8207.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm NPR2	Ø0,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8207.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm NPR2	Ø0,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8207.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm NPR2	Ø0,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8207.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm NPR2	Ø0,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8207.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm NPR2	Ø0,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8207.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm NPR2	Ø0,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8208.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm NPR2	Ø0,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8208.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm NPR2	Ø0,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8208.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm NPR2	Ø0,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8208.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm NPR2	Ø0,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8208.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm NPR2	Ø0,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm NPR2	Ø0,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm NPR2	Ø0,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8208.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm NPR2	Ø0,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8210.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm NPR2	Ø1,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8210.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm NPR2	Ø1,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8210.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm NPR2	Ø1,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8210.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm NPR2	Ø1,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8210.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm NPR2	Ø1,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8210.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm NPR2	Ø1,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8210.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm NPR2	Ø1,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8210.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm NPR2	Ø1,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8214.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm NPR2	Ø1,4 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8214.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm NPR2	Ø1,4 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

TI134.8214.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm NPR2	Ø1,4 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8214.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm NPR2	Ø1,4 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8214.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm NPR2	Ø1,4 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8214.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm NPR2	Ø1,4 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8214.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm NPR2	Ø1,4 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8214.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm NPR2	Ø1,4 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm NPR2	Ø1,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm NPR2	Ø1,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm NPR2	Ø1,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm NPR2	Ø1,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm NPR2	Ø1,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm NPR2	Ø1,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm NPR2	Ø1,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8218.130	Fresa esférica D-Coating	Ø1,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø1,8 X 130mm NPR2			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm NPR2	Ø2,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm NPR2	Ø2,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm NPR2	Ø2,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm NPR2	Ø2,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm NPR2	Ø2,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm NPR2	Ø2,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm NPR2	Ø2,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8220.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm NPR2	Ø2,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm NPR2	Ø2,3 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm NPR2	Ø2,3 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm NPR2	Ø2,3 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm NPR2	Ø2,3 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm NPR2	Ø2,3 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm NPR2	Ø2,3 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm NPR2	Ø2,3 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8223.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm NPR2	Ø2,3 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm NPR2	Ø2,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm NPR2	Ø2,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm NPR2	Ø2,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm NPR2	Ø2,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm NPR2	Ø2,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm NPR2	Ø2,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm NPR2	Ø2,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8227.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm NPR2	Ø2,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8230.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm NPR2	Ø3,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8230.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm NPR2	Ø3,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8230.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm NPR2	Ø3,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8230.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm NPR2	Ø3,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8230.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm NPR2	Ø3,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8230.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm NPR2	Ø3,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8230.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm NPR2	Ø3,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8230.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm NPR2	Ø3,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8231.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm NPR2	Ø3,1 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8231.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm NPR2	Ø3,1 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8231.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm NPR2	Ø3,1 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8231.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm NPR2	Ø3,1 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8231.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm NPR2	Ø3,1 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8231.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm NPR2	Ø3,1 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8231.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm NPR2	Ø3,1 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8231.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm NPR2	Ø3,1 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm NPR2	Ø3,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm NPR2	Ø3,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm NPR2	Ø3,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm NPR2	Ø3,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm NPR2	Ø3,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm NPR2	Ø3,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm NPR2	Ø3,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8235.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm NPR2	Ø3,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm NPR2	Ø4,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm NPR2	Ø4,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm NPR2	Ø4,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8240.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm NPR2	Ø4,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

TI134.8240.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm NPR2	Ø4,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8240.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm NPR2	Ø4,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8240.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm NPR2	Ø4,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8240.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm NPR2	Ø4,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8245.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm NPR2	Ø4,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8245.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm NPR2	Ø4,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8245.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm NPR2	Ø4,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8245.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm NPR2	Ø4,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8245.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm NPR2	Ø4,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8245.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm NPR2	Ø4,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8245.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm NPR2	Ø4,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8245.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm NPR2	Ø4,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8250.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm NPR2	Ø5,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8250.055	Fresa esférica D-Coating	Ø5,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø5,0 X 55mm NPR2			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm NPR2	Ø5,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm NPR2	Ø5,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm NPR2	Ø5,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm NPR2	Ø5,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm NPR2	Ø5,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8250.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm NPR2	Ø5,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm NPR2	Ø5,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm NPR2	Ø5,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm NPR2	Ø5,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm NPR2	Ø5,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm NPR2	Ø5,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm NPR2	Ø5,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm NPR2	Ø5,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8255.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm NPR2	Ø5,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm NPR2	Ø6,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm NPR2	Ø6,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm NPR2	Ø6,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm NPR2	Ø6,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm NPR2	Ø6,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm NPR2	Ø6,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm NPR2	Ø6,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8260.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm NPR2	Ø6,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm CTES	Ø0,6 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm CTES	Ø0,6 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm CTES	Ø0,6 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8306.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm CTES	Ø0,6 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8306.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm CTES	Ø0,6 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8306.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm CTES	Ø0,6 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8306.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm CTES	Ø0,6 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8306.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm CTES	Ø0,6 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8307.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm CTES	Ø0,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8307.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm CTES	Ø0,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8307.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm CTES	Ø0,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8307.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm CTES	Ø0,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8307.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm CTES	Ø0,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8307.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm CTES	Ø0,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8307.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm CTES	Ø0,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8307.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm CTES	Ø0,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8308.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm CTES	Ø0,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm CTES	Ø0,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm CTES	Ø0,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm CTES	Ø0,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm CTES	Ø0,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm CTES	Ø0,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm CTES	Ø0,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8308.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm CTES	Ø0,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8310.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm CTES	Ø1,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8310.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm CTES	Ø1,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8310.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm CTES	Ø1,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8310.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm CTES	Ø1,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8310.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm CTES	Ø1,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8310.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm CTES	Ø1,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

TI134.8310.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm CTES	Ø1,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8310.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm CTES	Ø1,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm CTES	Ø1,4 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm CTES	Ø1,4 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm CTES	Ø1,4 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm CTES	Ø1,4 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm CTES	Ø1,4 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm CTES	Ø1,4 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm CTES	Ø1,4 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8314.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm CTES	Ø1,4 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm CTES	Ø1,8 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm CTES	Ø1,8 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm CTES	Ø1,8 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8318.080	Fresa esférica D-Coating	Ø1,8 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø1,8 X 80mm CTES			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8318.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm CTES	Ø1,8 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8318.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm CTES	Ø1,8 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8318.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm CTES	Ø1,8 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8318.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm CTES	Ø1,8 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm CTES	Ø2,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm CTES	Ø2,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm CTES	Ø2,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm CTES	Ø2,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm CTES	Ø2,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm CTES	Ø2,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm CTES	Ø2,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8320.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm CTES	Ø2,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm CTES	Ø2,3 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm CTES	Ø2,3 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm CTES	Ø2,3 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm CTES	Ø2,3 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm CTES	Ø2,3 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm CTES	Ø2,3 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm CTES	Ø2,3 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8323.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm CTES	Ø2,3 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8327.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm CTES	Ø2,7 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8327.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm CTES	Ø2,7 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8327.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm CTES	Ø2,7 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8327.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm CTES	Ø2,7 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8327.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm CTES	Ø2,7 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8327.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm CTES	Ø2,7 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

				REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8327.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm CTES	Ø2,7 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8327.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm CTES	Ø2,7 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm CTES	Ø3,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm CTES	Ø3,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm CTES	Ø3,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm CTES	Ø3,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm CTES	Ø3,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm CTES	Ø3,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm CTES	Ø3,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8330.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm CTES	Ø3,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8331.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm CTES	Ø3,1 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8331.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm CTES	Ø3,1 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8331.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm CTES	Ø3,1 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE

				DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm CTES	Ø3,1 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm CTES	Ø3,1 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm CTES	Ø3,1 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm CTES	Ø3,1 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8331.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm CTES	Ø3,1 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm CTES	Ø3,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm CTES	Ø3,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm CTES	Ø3,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm CTES	Ø3,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm CTES	Ø3,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm CTES	Ø3,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm CTES	Ø3,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8335.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm CTES	Ø3,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

TI134.8340.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm CTES	Ø4,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8340.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm CTES	Ø4,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8340.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm CTES	Ø4,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8340.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm CTES	Ø4,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8340.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm CTES	Ø4,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8340.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm CTES	Ø4,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8340.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm CTES	Ø4,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8340.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm CTES	Ø4,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm CTES	Ø4,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm CTES	Ø4,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm CTES	Ø4,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm CTES	Ø4,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm CTES	Ø4,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
TI134.8345.100	Fresa esférica D-Coating	Ø4,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Ø4,5 X 100mm CTES			MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8345.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm CTES	Ø4,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8345.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm CTES	Ø4,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm CTES	Ø5,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm CTES	Ø5,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm CTES	Ø5,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm CTES	Ø5,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm CTES	Ø5,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm CTES	Ø5,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm CTES	Ø5,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8350.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm CTES	Ø5,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm CTES	Ø5,5 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm CTES	Ø5,5 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm CTES	Ø5,5 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM

				F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm CTES	Ø5,5 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm CTES	Ø5,5 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm CTES	Ø5,5 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm CTES	Ø5,5 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8355.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm CTES	Ø5,5 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm CTES	Ø6,0 X 45mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm CTES	Ø6,0 X 55mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm CTES	Ø6,0 X 70mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm CTES	Ø6,0 X 80mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm CTES	Ø6,0 X 95mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm CTES	Ø6,0 X 100mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm CTES	Ø6,0 X 115mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK
T1134.8360.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm CTES	Ø6,0 X 130mm	Perfuração óssea	AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM

INDICAÇÃO E FINALIDADE

O **Brocas e Fresas D-Coating com DLC Estéreis** é indicado para auxiliar o cirurgião nos procedimentos de perfuração óssea.

CONTRAINDICAÇÃO

Não se Aplica.

ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

Os instrumentais aqui descritos devem ser utilizados apenas com produtos Techimport.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido na condição Estéril, em Óxido de Etileno.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura Máx. de 25°C e umidade relativa de 75% e ao abrigo da luz solar direta.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-665

PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO

Prazo de validade é de 3 anos a partir da data de esterilização, após aberto o mesmo deve ser descartado caso não seja utilizado imediatamente.
















DESCARTE DO DISPOSITIVO

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>










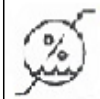


FORMA DE APRESENTAÇÃO

Brocas e Fresas D-Coating com DLC Estéreis é fornecido na condição esteril, comercializado em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. As embalagens são identificadas com uma etiqueta RFID conforme indicação abaixo:

Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP R.D. WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) – LOTE B-8 – JD ANHANGUERA – RIO CLARO – SP CNPJ: 16524734000147 – Fone: +55 (19)3622-9600 – SAC: +55 (19)3622-9600 R.T.: Eduardo Henrique Silva Wolf – CREA 6070068408 – Instrução de Uso pelo Site http://www.techimportimplantes.com.br			STERILE
Nome Técnico:			
Nome Comercial:			
Modelo Comercial:			
Registro ANVISA n. Material:	Qtde.: un.	Proibido Reprocessar / Uso Único	
Ref:			
Lote:	SN:		
Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instruções de Uso – Revisão – Consulta pelo Site			
PRODUTO ESTERIL - GAS OXIDO DE ETILENO			
			
			
			

Legenda da Simbologia

Instrução de Uso
Brocas e Fresas D-coating com DLC Estéreis

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



TECHIMPORT
TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para: qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19)3522-9500

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:
www.techimportimplantes.com.br

Revisão: 01
Emissão: 2022

EFEITOS ADVERSOS

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500