

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo DLC



**Nome Técnico:** Brocas Cirurgicas

**Nome Comercial:** Fresas para Debridamento Osseo DLC

**Registro ANVISA:** 81118469018

**Fabricante:**

**TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP**

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

[www.techimportimplantes.com.br](http://www.techimportimplantes.com.br)

Telefone: +55 19 3522 – 9500

**PRODUTO ESTÉRIL  
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

**Nome Técnico:** Brocas Cirurgicas

**Nome Comercial:** Fresas para Debridamento Osseo DLC

**Composto por:** Instrumentais

**Registro ANVISA:** 81118469018

**Modelos comerciais:** Ver Tabela 1

**Metodo de Esterilização:** ETO

**Validade:** 3 anos apartir da data de Esterilização

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

Os instrumentais pertencentes a esse registro são utilizados para auxiliar a cirurgia durante os procedimentos cirurgicos.

**Tabela 1 – Modelos Comerciais**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TI134.8535.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250MM DLC
TI134.8535.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255MM DLC
TI134.8535.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260MM DLC
TI134.8535.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265MM DLC
TI134.8535.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270MM DLC
TI134.8535.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275MM DLC
TI134.8535.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280MM DLC
TI134.8535.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285MM DLC
TI134.8535.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290MM DLC
TI134.8535.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295MM DLC
TI134.8535.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300MM DLC
TI134.8535.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305MM DLC
TI134.8535.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310MM DLC
TI134.8535.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315MM DLC
TI134.8535.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320MM DLC
TI134.8535.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325MM DLC
TI134.8535.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330MM DLC
TI134.8535.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335MM DLC
TI134.8535.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340MM DLC
TI134.8535.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345MM DLC
TI134.8535.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350MM DLC
TI134.8535.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355MM DLC
TI134.8535.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360MM DLC

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo DLC

TI134.8540.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250MM DLC
TI134.8540.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255MM DLC
TI134.8540.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260MM DLC
TI134.8540.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265MM DLC
TI134.8540.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270MM DLC
TI134.8540.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275MM DLC
TI134.8540.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280MM DLC
TI134.8540.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285MM DLC
TI134.8540.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290MM DLC
TI134.8540.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295MM DLC
TI134.8540.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300MM DLC
TI134.8540.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305MM DLC
TI134.8540.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310MM DLC
TI134.8540.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315MM DLC
TI134.8540.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320MM DLC
TI134.8540.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325MM DLC
TI134.8540.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330MM DLC
TI134.8540.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335MM DLC
TI134.8540.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340MM DLC
TI134.8540.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345MM DLC
TI134.8540.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350MM DLC
TI134.8540.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355MM DLC
TI134.8540.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360MM DLC
TI134.8545.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 250MM DLC
TI134.8545.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 255MM DLC
TI134.8545.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 260MM DLC
TI134.8545.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 265MM DLC
TI134.8545.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 270MM DLC
TI134.8545.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 275MM DLC
TI134.8545.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 280MM DLC
TI134.8545.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 285MM DLC
TI134.8545.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 290MM DLC
TI134.8545.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 295MM DLC
TI134.8545.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 300MM DLC
TI134.8545.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 305MM DLC
TI134.8545.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 310MM DLC
TI134.8545.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 315MM DLC
TI134.8545.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 320MM DLC
TI134.8545.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 325MM DLC
TI134.8545.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 330MM DLC
TI134.8545.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 335MM DLC
TI134.8545.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 340MM DLC
TI134.8545.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 345MM DLC
TI134.8545.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 350MM DLC
TI134.8545.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 355MM DLC

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo DLC

TI134.8545.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 360MM DLC
TI134.8550.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250MM DLC
TI134.8550.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255MM DLC
TI134.8550.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260MM DLC
TI134.8550.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265MM DLC
TI134.8550.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270MM DLC
TI134.8550.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275MM DLC
TI134.8550.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280MM DLC
TI134.8550.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285MM DLC
TI134.8550.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290MM DLC
TI134.8550.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295MM DLC
TI134.8550.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300MM DLC
TI134.8550.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305MM DLC
TI134.8550.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310MM DLC
TI134.8550.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315MM DLC
TI134.8550.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320MM DLC
TI134.8550.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325MM DLC
TI134.8550.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330MM DLC
TI134.8550.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335MM DLC
TI134.8550.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340MM DLC
TI134.8550.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345MM DLC
TI134.8550.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350MM DLC
TI134.8550.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355MM DLC
TI134.8550.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360MM DLC
TI134.8555.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 250MM DLC
TI134.8555.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 255MM DLC
TI134.8555.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 260MM DLC
TI134.8555.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 265MM DLC
TI134.8555.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 270MM DLC
TI134.8555.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 275MM DLC
TI134.8555.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 280MM DLC
TI134.8555.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 285MM DLC
TI134.8555.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 290MM DLC
TI134.8555.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 295MM DLC
TI134.8555.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 300MM DLC
TI134.8555.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 305MM DLC
TI134.8555.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 310MM DLC
TI134.8555.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 315MM DLC
TI134.8555.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 320MM DLC
TI134.8555.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 325MM DLC
TI134.8555.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 330MM DLC
TI134.8555.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 335MM DLC
TI134.8555.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 340MM DLC
TI134.8555.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 345MM DLC
TI134.8555.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 350MM DLC

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo DLC

TI134.8555.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 355MM DLC
TI134.8555.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 360MM DLC
TI134.8560.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250MM DLC
TI134.8560.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255MM DLC
TI134.8560.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260MM DLC
TI134.8560.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265MM DLC
TI134.8560.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270MM DLC
TI134.8560.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275MM DLC
TI134.8560.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280MM DLC
TI134.8560.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285MM DLC
TI134.8560.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290MM DLC
TI134.8560.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295MM DLC
TI134.8560.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300MM DLC
TI134.8560.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305MM DLC
TI134.8560.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310MM DLC
TI134.8560.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315MM DLC
TI134.8560.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320MM DLC
TI134.8560.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325MM DLC
TI134.8560.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330MM DLC
TI134.8560.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335MM DLC
TI134.8560.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340MM DLC
TI134.8560.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345MM DLC
TI134.8560.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350MM DLC
TI134.8560.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355MM DLC
TI134.8560.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360MM DLC

## COMPOSIÇÃO

O materiais selecionados para composição se encontram listados abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIA-PRIMA
TI134.8535.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8535.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8535.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8535.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8535.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8535.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8535.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8535.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8535.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8535.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899

		COM DLC
Ti134.8535.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8535.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Ti134.8540.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC

Tl134.8540.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8540.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8540.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8540.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8540.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8540.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 250MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 255MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 260MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 265MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 270MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 275MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 280MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 285MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 290MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 295MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 300MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 305MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 310MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 315MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 320MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 325MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 330MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 335MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 340MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 345MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 350MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 355MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8545.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 360MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8550.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
Tl134.8550.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC

## Instrução de Uso

## Fresas para Debridamento Osseo DLC

T1134.8550.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8550.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 250MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 255MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 260MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 265MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 270MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 275MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 280MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 285MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 290MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 295MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC



T1134.8555.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 300MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 305MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 310MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 315MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 320MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 325MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 330MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 335MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 340MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 345MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 350MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 355MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8555.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 360MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
T1134.8560.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC

TI134.8560.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8560.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8560.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8560.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC
TI134.8560.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360MM DLC	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM DLC

## INDICAÇÃO E FINALIDADE

O **Fresas para Debridamento Osseo DLC** é indicado para auxiliar o cirurgião nos procedimentos cirurgicos, conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	FUNÇÃO
TI134.8535.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250MM DLC	Ø3,5 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255MM DLC	Ø3,5 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260MM DLC	Ø3,5 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265MM DLC	Ø3,5 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270MM DLC	Ø3,5 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275MM DLC	Ø3,5 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280MM DLC	Ø3,5 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285MM DLC	Ø3,5 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290MM DLC	Ø3,5 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295MM DLC	Ø3,5 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300MM DLC	Ø3,5 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305MM DLC	Ø3,5 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310MM DLC	Ø3,5 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315MM DLC	Ø3,5 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320MM DLC	Ø3,5 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325MM DLC	Ø3,5 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330MM DLC	Ø3,5 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335MM DLC	Ø3,5 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340MM DLC	Ø3,5 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345MM DLC	Ø3,5 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350MM DLC	Ø3,5 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355MM DLC	Ø3,5 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8535.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360MM DLC	Ø3,5 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250MM DLC	Ø4,0 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255MM DLC	Ø4,0 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260MM DLC	Ø4,0 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265MM DLC	Ø4,0 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270MM DLC	Ø4,0 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275MM DLC	Ø4,0 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280MM DLC	Ø4,0 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285MM DLC	Ø4,0 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA

TI134.8540.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290MM DLC	Ø4,0 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295MM DLC	Ø4,0 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300MM DLC	Ø4,0 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305MM DLC	Ø4,0 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310MM DLC	Ø4,0 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315MM DLC	Ø4,0 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320MM DLC	Ø4,0 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325MM DLC	Ø4,0 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330MM DLC	Ø4,0 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335MM DLC	Ø4,0 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340MM DLC	Ø4,0 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345MM DLC	Ø4,0 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350MM DLC	Ø4,0 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355MM DLC	Ø4,0 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8540.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360MM DLC	Ø4,0 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 250MM DLC	Ø4,5 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 255MM DLC	Ø4,5 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 260MM DLC	Ø4,5 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 265MM DLC	Ø4,5 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 270MM DLC	Ø4,5 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 275MM DLC	Ø4,5 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 280MM DLC	Ø4,5 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 285MM DLC	Ø4,5 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 290MM DLC	Ø4,5 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 295MM DLC	Ø4,5 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 300MM DLC	Ø4,5 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 305MM DLC	Ø4,5 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 310MM DLC	Ø4,5 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 315MM DLC	Ø4,5 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 320MM DLC	Ø4,5 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 325MM DLC	Ø4,5 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 330MM DLC	Ø4,5 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 335MM DLC	Ø4,5 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 340MM DLC	Ø4,5 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 345MM DLC	Ø4,5 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 350MM DLC	Ø4,5 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 355MM DLC	Ø4,5 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8545.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 360MM DLC	Ø4,5 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250MM DLC	Ø5,0 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255MM DLC	Ø5,0 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260MM DLC	Ø5,0 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265MM DLC	Ø5,0 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270MM DLC	Ø5,0 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275MM DLC	Ø5,0 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280MM DLC	Ø5,0 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA

TI134.8550.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285MM DLC	Ø5,0 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290MM DLC	Ø5,0 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295MM DLC	Ø5,0 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300MM DLC	Ø5,0 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305MM DLC	Ø5,0 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310MM DLC	Ø5,0 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315MM DLC	Ø5,0 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320MM DLC	Ø5,0 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325MM DLC	Ø5,0 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330MM DLC	Ø5,0 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335MM DLC	Ø5,0 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340MM DLC	Ø5,0 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345MM DLC	Ø5,0 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350MM DLC	Ø5,0 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355MM DLC	Ø5,0 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8550.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360MM DLC	Ø5,0 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 250MM DLC	Ø5,5 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 255MM DLC	Ø5,5 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 260MM DLC	Ø5,5 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 265MM DLC	Ø5,5 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 270MM DLC	Ø5,5 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 275MM DLC	Ø5,5 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 280MM DLC	Ø5,5 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 285MM DLC	Ø5,5 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 290MM DLC	Ø5,5 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 295MM DLC	Ø5,5 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 300MM DLC	Ø5,5 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 305MM DLC	Ø5,5 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 310MM DLC	Ø5,5 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 315MM DLC	Ø5,5 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 320MM DLC	Ø5,5 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 325MM DLC	Ø5,5 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 330MM DLC	Ø5,5 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 335MM DLC	Ø5,5 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 340MM DLC	Ø5,5 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 345MM DLC	Ø5,5 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 350MM DLC	Ø5,5 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8555.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 355MM DLC	Ø5,5 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250MM DLC	Ø6,0 x 250 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255MM DLC	Ø6,0 x 255 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260MM DLC	Ø6,0 x 260 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265MM DLC	Ø6,0 x 265 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270MM DLC	Ø6,0 x 270 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275MM DLC	Ø6,0 x 275 mm	RESSECÇÃO OSSEA

## Instrução de Uso

### Fresas para Debridamento Osseo DLC

TI134.8560.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280MM DLC	Ø6,0 x 280 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285MM DLC	Ø6,0 x 285 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290MM DLC	Ø6,0 x 290 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295MM DLC	Ø6,0 x 295 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300MM DLC	Ø6,0 x 300 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305MM DLC	Ø6,0 x 305 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.385	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310MM DLC	Ø6,0 x 310 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315MM DLC	Ø6,0 x 315 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320MM DLC	Ø6,0 x 320 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325MM DLC	Ø6,0 x 325 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330MM DLC	Ø6,0 x 330 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335MM DLC	Ø6,0 x 335 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340MM DLC	Ø6,0 x 340 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345MM DLC	Ø6,0 x 345 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350MM DLC	Ø6,0 x 350 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355MM DLC	Ø6,0 x 355 mm	RESSECÇÃO OSSEA
TI134.8560.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360MM DLC	Ø6,0 x 360 mm	RESSECÇÃO OSSEA

## CONTRAINDICAÇÃO

Não se Aplica.

## ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

Os instrumentais aqui descritos devem ser utilizados apenas com produtos Techimport.

## ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido na condição Estéril, em Óxido de Etileno.

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura Máx. de 25°C e umidade relativa de 75% e ao abrigo da luz solar direta.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-665

## PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO

Prazo de validade é de 3 anos a partir da data de esterilização, após aberto o mesmo deve

ser descartado caso não seja utilizado imediatamente.

## **DESCARTE DO DISPOSITIVO**

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

**RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE:** Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail [qualidade@techimportimplantes.com.br](mailto:qualidade@techimportimplantes.com.br) ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

## **FORMA DE APRESENTAÇÃO**

**Fresas para Debridamento Osseo DLC** é fornecido na condição esteril, comercializado em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. As embalagens são identificadas com uma etiqueta RFID conforme indicação abaixo:

Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP  
 R:OD WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) - LOTE B-8 - JD ANHANQUERA - RIO CLARO - SP  
 CNPJ:16524734000147 - Fone: +55 (19)3622-9600 - SAC: +55 (19)3622-9600  
 E.T.: Eduarcio Henrique Silva Wolf - CREA 6070058408 - Instrucao de Uso pelo Site <http://www.techimportimplanta.com.br>


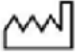

**STERILE EO**

Nome Técnico:

Nome Comercial:










Modelo Comercial:

Registro ANVISA n. \_\_\_\_\_ Qtd.: un. Proibido Reprocessar / Uso Unico  
 Material:






Ref:   

Lote: SN: \_\_\_\_\_

Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instruções de Uso - Revisão - Consulte pelo Site  
 PRODUTO ESTERIL - GAS OXIDO DE ETILENO

Legenda da Simbologia

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

## ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



**ALERTA INSTRUÇÃO DE USO**

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para: **qualidade@techimportimplantes.com.br** ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:  
**www.techimportimplantes.com.br**

Revisão: 01  
Emissão: 2022

## EFEITOS ADVERSOS

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

**TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP**

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

[comercial@techimportimplantes.com.br](mailto:comercial@techimportimplantes.com.br)

[www.techimportimplantes.com.br](http://www.techimportimplantes.com.br)

Telefone: +55 19 3522 – 9500