

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante



**Nome Técnico:** Brocas Cirurgicas

**Nome Comercial:** Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

**Registro ANVISA:** 81118469021

**Fabricante:**

**TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP**

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

[www.techimportimplantes.com.br](http://www.techimportimplantes.com.br)

Telefone: +55 19 3522 – 9500

**PRODUTO ESTÉRIL  
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

## **CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO**

**Nome Técnico:** Brocas Cirurgicas

**Nome Comercial:** Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

**Composto por:** Instrumentais

**Registro ANVISA:** 81118469021

**Modelos comerciais:** Ver Tabela 1

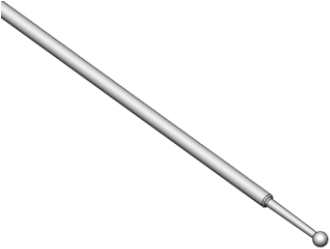


**Metodo de Esterilização:** ETO

**Validade:** 3 anos apartir da data de Esterilização

## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO**

Os instrumentais pertencentes a esse registro são utilizados para auxiliar a cirurgia durante os procedimentos cirurgicos.

**Tabela 1 – Modelos Comerciais**

Código	Descrição	Imagem Ilustrativa
TI134.8735.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250MM DIAMANTADA	
TI134.8735.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255MM DIAMANTADA	
TI134.8735.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8735.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265MM DIAMANTADA	
TI134.8735.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270MM DIAMANTADA	
TI134.8735.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275MM DIAMANTADA	
TI134.8735.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8735.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285MM DIAMANTADA	
TI134.8735.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290MM DIAMANTADA	
TI134.8735.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295MM DIAMANTADA	
TI134.8735.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8735.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305MM DIAMANTADA	
TI134.8735.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310MM DIAMANTADA	
TI134.8735.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315MM DIAMANTADA	
TI134.8735.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8735.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325MM DIAMANTADA	
TI134.8735.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330MM DIAMANTADA	
TI134.8735.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335MM DIAMANTADA	
TI134.8735.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

T1134.8735.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345MM DIAMANTADA	
T1134.8735.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350MM DIAMANTADA	
T1134.8735.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355MM DIAMANTADA	
T1134.8735.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360MM DIAMANTADA	



Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250MM DIAMANTADA	
TI134.8740.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255MM DIAMANTADA	
TI134.8740.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260MM DIAMANTADA	
TI134.8740.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

T1134.8740.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270MM DIAMANTADA	
T1134.8740.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275MM DIAMANTADA	
T1134.8740.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280MM DIAMANTADA	
T1134.8740.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290MM DIAMANTADA	
TI134.8740.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295MM DIAMANTADA	
TI134.8740.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300MM DIAMANTADA	
TI134.8740.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310MM DIAMANTADA	
TI134.8740.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315MM DIAMANTADA	
TI134.8740.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320MM DIAMANTADA	
TI134.8740.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330MM DIAMANTADA	
TI134.8740.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335MM DIAMANTADA	
TI134.8740.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340MM DIAMANTADA	
TI134.8740.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350MM DIAMANTADA	
TI134.8740.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355MM DIAMANTADA	
TI134.8740.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360MM DIAMANTADA	
TI134.8745.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 250MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 255MM DIAMANTADA	
TI134.8745.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 260MM DIAMANTADA	
TI134.8745.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 265MM DIAMANTADA	
TI134.8745.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 270MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

T1134.8745.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 275MM DIAMANTADA	
T1134.8745.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 280MM DIAMANTADA	
T1134.8745.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 285MM DIAMANTADA	
T1134.8745.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 290MM DIAMANTADA	



Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 295MM DIAMANTADA	
TI134.8745.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 300MM DIAMANTADA	
TI134.8745.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 305MM DIAMANTADA	
TI134.8745.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 310MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 315MM DIAMANTADA	
TI134.8745.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 320MM DIAMANTADA	
TI134.8745.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 325MM DIAMANTADA	
TI134.8745.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 330MM DIAMANTADA	




Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 335MM DIAMANTADA	
TI134.8745.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 340MM DIAMANTADA	
TI134.8745.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 345MM DIAMANTADA	
TI134.8745.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 350MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 355MM DIAMANTADA	
TI134.8745.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 360MM DIAMANTADA	
TI134.8750.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250MM DIAMANTADA	
TI134.8750.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

T1134.8750.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260MM DIAMANTADA	
T1134.8750.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265MM DIAMANTADA	
T1134.8750.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270MM DIAMANTADA	
T1134.8750.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

T1134.8750.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280MM DIAMANTADA	
T1134.8750.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285MM DIAMANTADA	
T1134.8750.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290MM DIAMANTADA	
T1134.8750.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

T1134.8750.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300MM DIAMANTADA	
T1134.8750.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305MM DIAMANTADA	
T1134.8750.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310MM DIAMANTADA	
T1134.8750.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8750.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320MM DIAMANTADA	
TI134.8750.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325MM DIAMANTADA	
TI134.8750.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330MM DIAMANTADA	
TI134.8750.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335MM DIAMANTADA	



Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

T1134.8750.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340MM DIAMANTADA	
T1134.8750.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345MM DIAMANTADA	
T1134.8750.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350MM DIAMANTADA	
T1134.8750.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8750.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360MM DIAMANTADA	
TI134.8755.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 250MM DIAMANTADA	
TI134.8755.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 255MM DIAMANTADA	
TI134.8755.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 260MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

T1134.8755.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 265MM DIAMANTADA	
T1134.8755.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 270MM DIAMANTADA	
T1134.8755.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 275MM DIAMANTADA	
T1134.8755.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 280MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8755.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 285MM DIAMANTADA	
TI134.8755.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 290MM DIAMANTADA	
TI134.8755.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 295MM DIAMANTADA	
TI134.8755.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 300MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8755.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 305MM DIAMANTADA	
TI134.8755.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 310MM DIAMANTADA	
TI134.8755.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 315MM DIAMANTADA	
TI134.8755.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 320MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8755.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 325MM DIAMANTADA	
TI134.8755.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 330MM DIAMANTADA	
TI134.8755.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 335MM DIAMANTADA	
TI134.8755.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 340MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante


T1134.8755.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 345MM DIAMANTADA	
T1134.8755.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 350MM DIAMANTADA	
T1134.8755.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 355MM DIAMANTADA	
T1134.8755.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 360MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

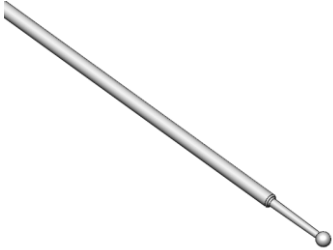

TI134.8760.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250MM DIAMANTADA	
TI134.8760.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255MM DIAMANTADA	
TI134.8760.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260MM DIAMANTADA	
TI134.8760.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265MM DIAMANTADA	



Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8760.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270MM DIAMANTADA	
TI134.8760.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275MM DIAMANTADA	
TI134.8760.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280MM DIAMANTADA	
TI134.8760.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285MM DIAMANTADA	


Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8760.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290MM DIAMANTADA	
TI134.8760.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295MM DIAMANTADA	
TI134.8760.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300MM DIAMANTADA	
TI134.8760.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305MM DIAMANTADA	

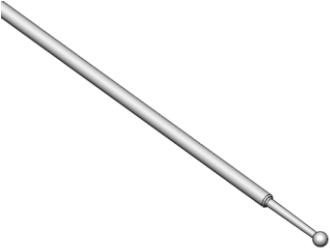
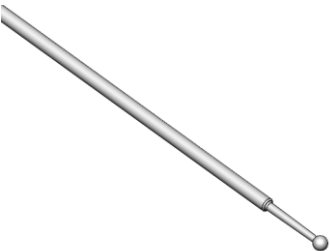
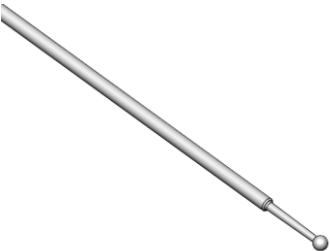
Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8760.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310MM DIAMANTADA	
TI134.8760.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315MM DIAMANTADA	
TI134.8760.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320MM DIAMANTADA	
TI134.8760.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

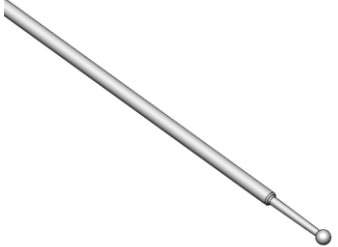

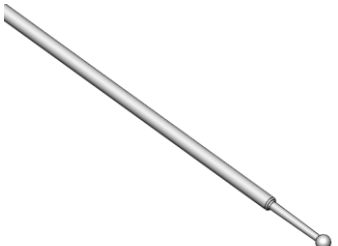
T1134.8760.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330MM DIAMANTADA	
T1134.8760.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335MM DIAMANTADA	
T1134.8760.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340MM DIAMANTADA	
T1134.8760.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345MM DIAMANTADA	

Instrução de Uso  
Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8760.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350MM DIAMANTADA	
TI134.8760.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355MM DIAMANTADA	
TI134.8760.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360MM DIAMANTADA	





## COMPOSIÇÃO

O materiais selecionados para composição se encontram listados abaixo:

Código	Descrição	Matéria-prima	Imagem Ilustrativa
TI134.8735.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8735.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	

Instrução de Uso

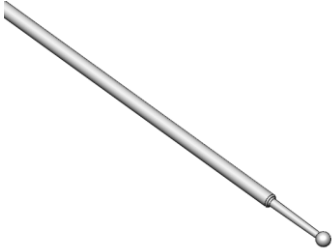



Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8735.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	







Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8735.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8735.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8735.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8735.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	

Instrução de Uso





Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	







Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8740.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8740.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 250MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 255MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 260MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 265MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 270MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 275MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 280MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 285MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 290MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 295MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 300MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 305MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 310MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 315MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 320MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 325MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 330MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 335MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 340MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 345MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 350MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8745.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 355MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8745.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 360MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	

Instrução de Uso





Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8750.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	



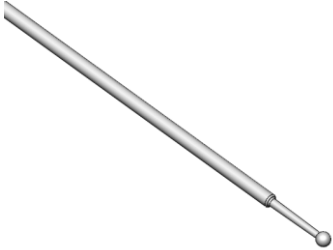



Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8750.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8750.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8750.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8750.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8750.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8750.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 250MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 255MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 260MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8755.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 265MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 270MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 275MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 280MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8755.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 285MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 290MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 295MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 300MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	

Instrução de Uso





Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8755.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 305MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 310MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 315MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 320MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	







Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8755.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 325MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 330MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 335MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 340MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8755.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 345MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 350MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 355MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8755.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 360MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8760.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8760.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8760.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	





Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8760.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	




Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8760.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

TI134.8760.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	
TI134.8760.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360MM DIAMANTADA	Aço Inox Austenítico (ASTM F899) com Revestimento em Diamante	



## **INDICAÇÃO E FINALIDADE**

As **Fresas para Debridamento Osseo em Diamante** são indicadas para procedimentos de ressecção óssea.

## **CONTRAINDICAÇÃO**

Não é indicado o uso em produtos de outros fabricantes.

## **ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES**

Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.

A Techimport recomenda o uso único desse produto.

A reutilização pode causar danos aos pacientes.

A utilização das Fresas deve ser feita apenas por médicos cirurgiões aptos.

Nunca misturar produtos diferentes ou de outro fabricante, pois pode se ocasionar incompatibilidade entre os materiais.

Toda manipulação deve estar acompanhada de cuidados: na manipulação durante armazenamento, bem como seu transporte.

As Fresas devem ser utilizadas somente para a finalidade específica que foi projetado.

Antes da cirurgia, o cirurgião deve realizar um rigoroso planejamento pré-operatório.

Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, deve se verificar a integridade da embalagem, produtos com embalagem danificada devem ser descartados.

## **ESTERILIZAÇÃO**

O produto é fornecido na condição Estéril, em Óxido de Etileno.

## **MARCAÇÃO**

A identificação do produto é feita através de gravação a laser que deve ser gravado conforme orientação de gravação contida no desenho técnico do produto.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura Máx. de 25°C e umidade relativa de 75% e ao abrigo da luz solar direta.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-665

## **PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO**

Prazo de validade é de 3 anos a partir da data de esterilização, após aberto o mesmo deve ser descartado caso não seja utilizado imediatamente.

## **DESCARTE DO DISPOSITIVO**

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

**RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE:** Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail [qualidade@techimportimplantes.com.br](mailto:qualidade@techimportimplantes.com.br) ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

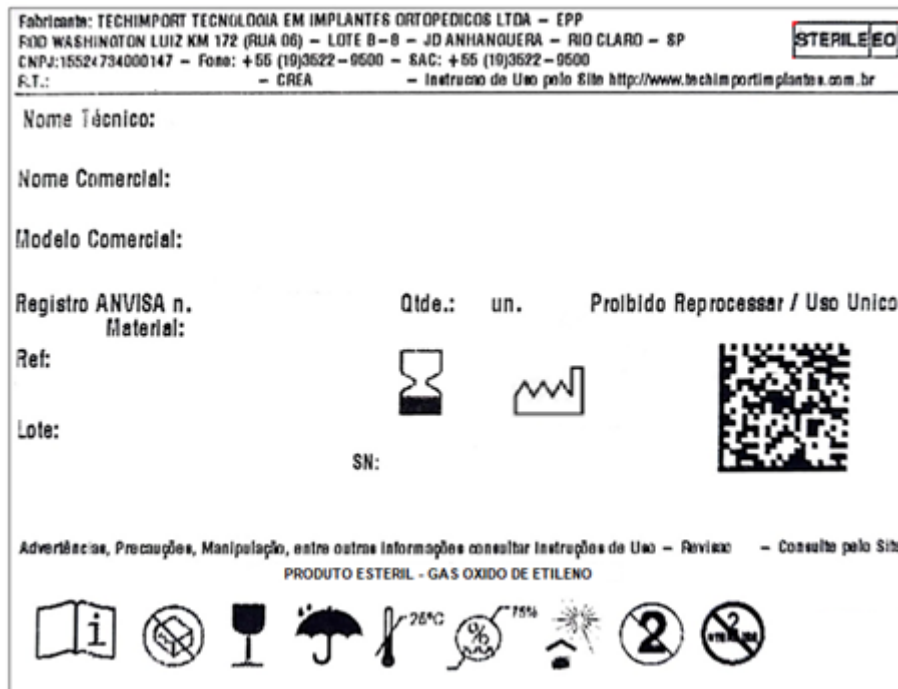
## **FORMA DE APRESENTAÇÃO**

As Fresas são fornecidas na condição esteril, comercializadas em blister primário e

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo em Diamante

secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. As embalagens são identificadas com uma etiqueta RFID conforme indicação abaixo:



Legenda da Simbologia

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

## ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE Nº 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



**ALERTA INSTRUÇÃO DE USO**

Em atendimento a Instrução Normativa IN nº04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para:  
**qualidade@techimportimplantes.com.br** ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:  
**www.techimportimplantes.com.br**

Revisão: 01  
Emissão: 2022

## EFEITOS ADVERSOS

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

**TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP**

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

[comercial@techimportimplantes.com.br](mailto:comercial@techimportimplantes.com.br)

[www.techimportimplantes.com.br](http://www.techimportimplantes.com.br)

Telefone: +55 19 3522 – 9500